



BRUKERMANUAL

NORSK



OPX001



UNIDENT AB | Västerhavsvägen 2, 311 42 Falkenberg, Sweden
Webb: unident.se | **Phone:** +46 346 73 24 00

Feb 2018

Onepix2.1_IFU_NO_010

INNHALDSFORTEGNELSE

Innledning.....	3
<i>CE-merking.....</i>	<i>3</i>
<i>Lisensiering.....</i>	<i>3</i>
<i>Hjelp-ressurser for Onepix.....</i>	<i>4</i>
<i>Programgruppeikoner.....</i>	<i>5</i>
Gjør deg kjent med Onepix.....	6
<i>Introduksjon.....</i>	<i>6</i>
<i>Undersøkelsesvinduet.....</i>	<i>7</i>
<i>Zoom-vindu.....</i>	<i>9</i>
Undersøkelsesvinduet.....	11
<i>Pasienthåndtering.....</i>	<i>11</i>
<i>Undersøkelser og Serier.....</i>	<i>12</i>
<i>Bildebehandling.....</i>	<i>17</i>
<i>Bildeinnlesing.....</i>	<i>28</i>
<i>Bildebehandling etter innlesing.....</i>	<i>31</i>
<i>Tastaturnarveier i Undersøkelsesvinduet.....</i>	<i>32</i>
Zoom-vinduet.....	34
<i>Verktøy.....</i>	<i>34</i>
<i>Sidepanel.....</i>	<i>46</i>
<i>Kortkommandoer i Zoom-vinduet.....</i>	<i>52</i>
Onepix-innstillinger.....	54
<i>Deaktivere Lisens.....</i>	<i>54</i>
<i>Språk.....</i>	<i>56</i>
<i>Sjekk oppdateringer.....</i>	<i>56</i>
<i>Undersøkelsesvinduet.....</i>	<i>56</i>
<i>Tannstatus.....</i>	<i>56</i>
<i>Seriemaler.....</i>	<i>56</i>
<i>Zoom-vinduet.....</i>	<i>56</i>
<i>Innlesing.....</i>	<i>57</i>
<i>Filter.....</i>	<i>59</i>
<i>Innstillinger for maskinvare.....</i>	<i>59</i>
Onepix Admin.....	60
<i>Menyen Arkiv.....</i>	<i>61</i>
<i>Rediger-menyen.....</i>	<i>65</i>
<i>Menyen Verktøy.....</i>	<i>72</i>
<i>Menyen Alternativer.....</i>	<i>75</i>
Installasjon.....	78
<i>Systemkrav.....</i>	<i>78</i>
<i>Server-installasjon.....</i>	<i>82</i>
<i>Klientinstallasjon.....</i>	<i>85</i>
<i>Databasetilkobling.....</i>	<i>89</i>
<i>Kobling fra journalsystem – Onepix integrasjon.....</i>	<i>91</i>

INNLEDNING

Programvaren Onepix er beregnet for å brukes av kvalifisert personell, enten utdannet tannhelsepersonell eller deres assistenter, for å vise, gi tilgang til, lagre og hente røntgenbilder og videomateriale. Onepix kan konfigureres for bruk lokalt eller via nettverk på Windows-datamaskiner og servere i tannlegepraksiser, og i tilsvarende kliniske settinger.



Merk!

Tilkoblede enheter må være koblet sammen, installert og testet at de fungerer som de skal for at Onepix sine funksjoner skal kunne utnyttes på best mulig måte. Onepix er del av en kjede med produkter (eksterne enheter) som er avhengig av hverandre for at de skal fungere sammen. Det finnes en risiko at dine røntgenbilder ikke blir de beste om du ikke har riktige innstillinger!

CE-MERKING

Onepix® er en frittstående programvare utviklet av Unident AB basert på CDR DICOM 5 fra Schick Technologies Inc. Som frittstående programvare klassifiseres Onepix og etterfølgende oppdateringer som medisinsk utstyr i henhold til direktivet om medisinsk utstyr MDD 93/42/EØF og de svenske forskriftene fra Läkemedelsverket - MPA: LVFS 2003: 11. Onepix er et CE-merket produkt. Unident er sertifisert av Intertek Certification AB i henhold til NS-EN ISO 13485: 2012 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring, NS-EN ISO 9001: 2008 Systemer for kvalitetsstyring - Krav og NS-EN ISO 14001: 2012 Miljøstyringssystemer.

Onepix er en programvare utviklet av Unident AB for å innhente, vise og manuelt behandle digitale dentale røntgen- og videobilder. Programmet er et brukergrensesnitt der brukeren kan se bilder fra digitale røntgensensorer og intraorale videokameraer. Datamaskinen som behandler Onepix-programvaren fungerer som et verktøy der pasientinformasjon legges inn i undersøkelsesopplysningene, der bildene blir lagret og der de kan vises, behandles manuelt, lagres og hentes.

Onepix-programvaren oppfyller DICOM-standard, som vedlikeholdes av en internasjonal komité for å oppnå kompatibilitet og å forbedre arbeidsflyten og effektiviteten mellom bildebehandlingssystemer og andre informasjonssystemer i helsevesenet.

Onepix programvare er utviklet og testet for bruk med kompatible maskinvareenheter som er angitt i listen over kompatibel maskinvare i avsnittet Installasjon av Onepix.

LISENSIERING

Onepix er et åpent system, noe som betyr at programmet kontinuerlig integreres med ny røntgen-, foto- og video-maskinvare, men krever registrering og aktivering av en

lisens for å kunne brukes. Med en lisensnøkkel får du tilgang til respektive abonnementsalternativer:

- Onepix Demo - du kan teste alle funksjoner i en begrenset periode uten lisensnøkkel. Demo gir deg full funksjonalitet i 30 dager, deretter stopper all funksjon, og du vil ikke kunne åpne programmet. Etter den tiden må du ha ett av de følgende abonnementene for å få tilgang til bilder som er tatt i Demo.
- Onepix Viewer - Du kan bare åpne undersøkelser, men ikke opprette nye. Den er egnet for bruk på et kontordatamaskin, resepsjonsdatamaskin eller lignende.
- Onepix Standard - Dette abonnementet har full funksjonalitet og tillater innlesning fra alle kompatible produkter.
- Onepix Remote - Dette abonnementet har full funksjonalitet og tillater innlesning i Terminal server/Citrix miljø.



Merk!

Ta ikke odontologiske bilder i Demomodus om du ikke er sikker på at du har en programvare som kan vise DICOM bilder etter at funksjonen er opphørt!

HJELP-RESSURSER FOR ONEPIX

HJELP-funksjonen og bruksanvisningen, finner du øverst til høyre i programmet.

For telefonsupport for Onepix, kontakt Unident Norge på tlf. 33030585 (svensk telefonsupport 0046 34 673 24 50) eller send e-post til support@unident.se, evt. Info@unident.no

PROGRAMGRUPPEIKONER

Følgende ikoner representerer de ulike programvarekomponentene som installeres sammen med Onepix-programvaren. Flere elementer kan bli lagt til når nye Onepix-programmer og drivere blir installert.


Ikon	Beskrivelse
	Onepix – programvare for nettverksklienter eller frittstående arbeidsstasjoner
	OnepixAutomation – Start av OnepixClient med parametere
	Onepix Admin – bidrar til å håndtere informasjonen i din Onepix-database
	Hjelp for Onepix – åpner HTML-hjelp for Onepix
	Onepix Innstillinger
	Referansenummer (Artikkelnummer)
	Se bruksanvisningen
	Produsent, kontaktinformasjon

GJØR DEG KJENT MED ONEPIX

Dette avsnittet inneholder en kort gjennomgang av Onepix' brukergrensesnitt. Du kan lese mer om de ulike delene og funksjonene i avsnittet om Undersøkelsesvinduet, Zoom-vinduet og Onepix-innstillinger.

INTRODUKSJON

Når du begynner å arbeide med Onepix, lærer du å bruke to visninger, undersøkelsesvinduet og Zoom-vinduet. Undersøkelsesvinduet og Zoom-vinduet har noen elementer felles. Alt som gjøres i Onepix lagres automatisk, dvs. at du ikke trenger å lagre eventuelle endringer, og du blir ikke bedt å lagre noe, men du kan alltid angre endringer, som du vil se når du leser mer om funksjonene i Onepix. Tanken bak dette er å skape en mer brukervennlig arbeidsflyt. Nedenfor vises de delene som er felles for både undersøkelsesvinduet og Zoom-vinduet.

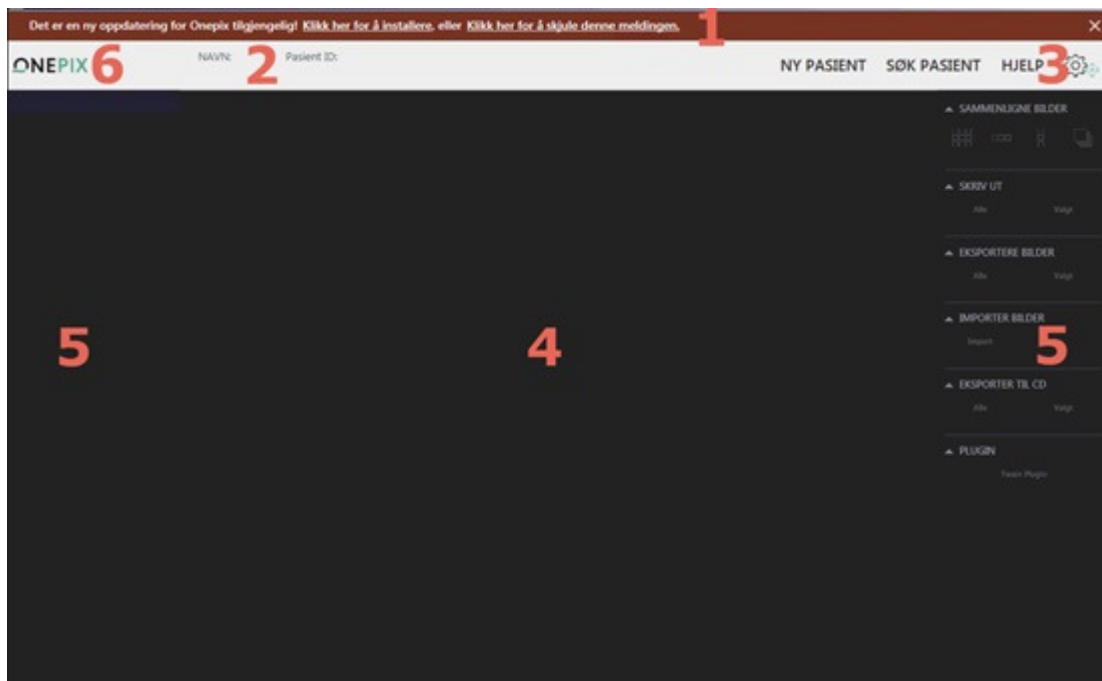


1. **OPPDATERINGSFELT:** En linje øverst i vinduet som vises når en oppdatering er tilgjengelig. Kan enkelt lukkes ved å klikke på teksten eller via krysset helt til høyre, men kommer tilbake etter omstart av programmet. Det er mulig å slå av spørsmål om automatiske oppdateringer, les avsnittet om Onepix-innstillinger for mer informasjon.
2. **PASIENTINFORMASJON:** Øverst i det lysegrå feltet vises pasientens informasjon, som personnummer og navn. Denne informasjonen er synlig i både undersøkelses- og Zoom-vinduet.
3. **INNSTILLINGER:** Lengst til høyre i samme felt som pasientens opplysninger er det et ikon med tannhjul som fører til Onepix-innstillingene. Du kan lese mer om innstillingene som er tilgjengelige i avsnittet Onepix-innstillinger.
4. **BILDEPRESENTASJON:** I det store feltet i midten vises undersøkelser, serier og bilder, avhengig av om man er i undersøkelsesvinduet eller i Zoom-vinduet.

5. VERKTØY OG FUNKSJONER: Alle funksjoner og verktøy som brukes i Onepix er plassert i feltene til høyre og venstre for undersøkelsene/ bildene.
6. INFORMASJON: Klikk på Onepix-ikonet øverst til venstre for å finne ut hvilken versjon av Onepix du har.




UNDERSØKELSESVINDUET

Når Onepix startes, vises undersøkelsesvinduet først. Til å begynne med er det bare det lysegrå pasientinformasjonsfeltet øverst som er aktivt. Her kan du velge å opprette en ny pasient eller gjøre et søk på en eksisterende pasient.

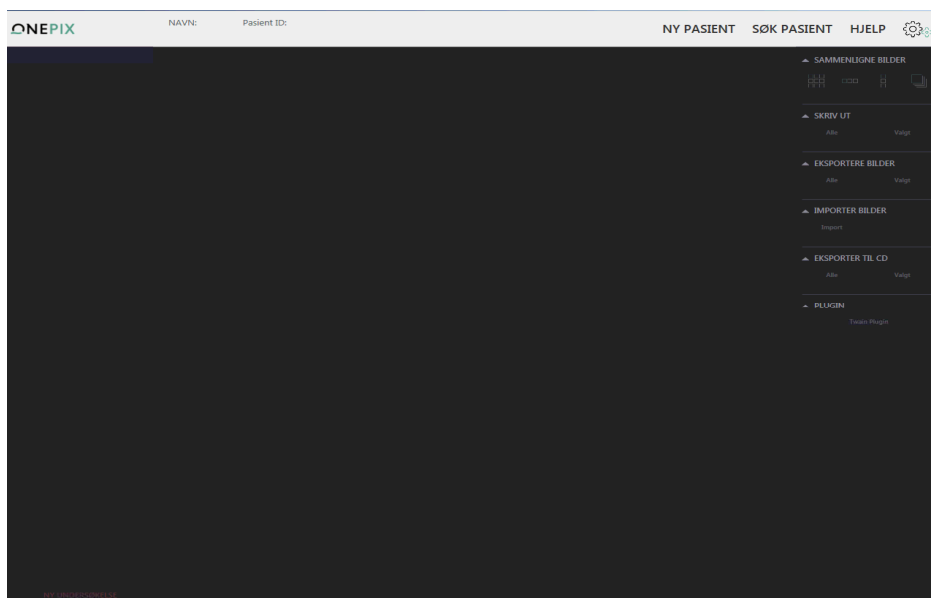

Siden Onepix hovedsakelig åpnes fra et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ), åpnes den valgte pasientens siste bilder direkte i stedet, som vist nedenfor.

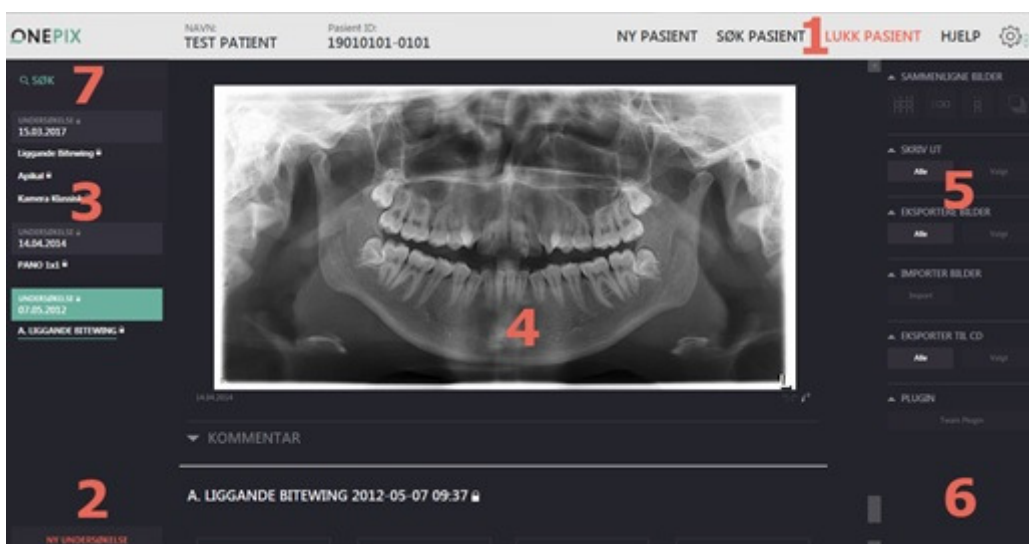

1. NY / SØK PASIENT: Åpnes ikke Onepix via et journalsystem, kan du opprette eller søke pasienter gjennom disse funksjonene. Det anbefales å gå via journalsystemet for å få med korrekt pasientinformasjon.
2. NY UNDERSØKELSE En ny undersøkelse opprettes ved å klikke på knappen med samme navn, nederst til venstre.
3. UNDERSØKELSER OG SERIER: En liste med faner vises lengst til venstre i undersøkelsesvinduet i Onepix. Hvert grått felt med dato tilsvarer en undersøkelse for den aktuelle pasienten, med den siste undersøkelsen øverst og den eldste nederst i feltet. Den grønne fargen markerer hvilken undersøkelse som vises i bildefremvisningsområdet i midten. Under hver undersøkelse kan det være én eller flere serier, man kan for eksempel ha en bitewing og en eller flere apikalserier i løpet av den samme undersøkelsen. Hvis det er flere undersøkelser enn det er plass til på skjermen, kan du bla mellom fanene til ønsket undersøkelse. Du kan også bla i bildefremvisningsfeltet. En ny undersøkelse er aktiv for bildeinnlesing bare den dagen undersøkelsen er opprettet. Når dagen er over, låses undersøkelsen med alle dens undersøkelser og bilder for redigering og innlesing. Er undersøkelsen/serien er låst, vises et ikon med en hengelås etter seriedatoen.


BITEWING 2016-02-10 08:41 🔒

4. BILDEPRESENTASJON OG BILDEINNLESING: Dette feltet viser alle serier og undersøkelser i datorekkefølge. Dette feltet blir også brukt ved bildeinnlesing fra maskinvare, for eksempel en røntgensensor eller et systemkamera. I dette feltet kan du direkte rotere, fjerne bildet eller lese kommentarer om bildet. Du kan også hurtigzoome inn på en del av bildet ved å høyreklikke og holde museknappen på bildet mens du flytter zoomen til området du er interessert i.
5. BILDEBEHANDLING: I dette feltet vises tilgjengelige funksjoner for behandling av bilder i Onepix. For å velge de bildene i undersøkelsen som skal behandles holder du nede Ctrl-tasten og klikker på bildene. Deretter velger du en av de

- tilgjengelige funksjonene i feltet til høyre, for eksempel Sammenlign bilder, Skriv ut, Eksporter/importer bilder osv.
6. **PLUGIN:** Her vises hvilke plugins som er installert. Noen eksempler på disse er Kort-import, TWAIN m.fl.
 7. **SØK:** Her kan du utføre et raskt søk hvis du er ute etter en bestemt type bilder.

ZOOM-VINDU

Dobbeltklikker på et bilde i undersøkelsesvinduet, åpnes bildet i Zoom-vinduet, der du kan granske og arbeide med bildet. Eventuelle endringer blir automatisk lagret og ligger under HISTORIKK i høyre felt, hvor de lett kan fjernes ved å dobbeltklikke på Slett til høyre for eventuelle endringer.

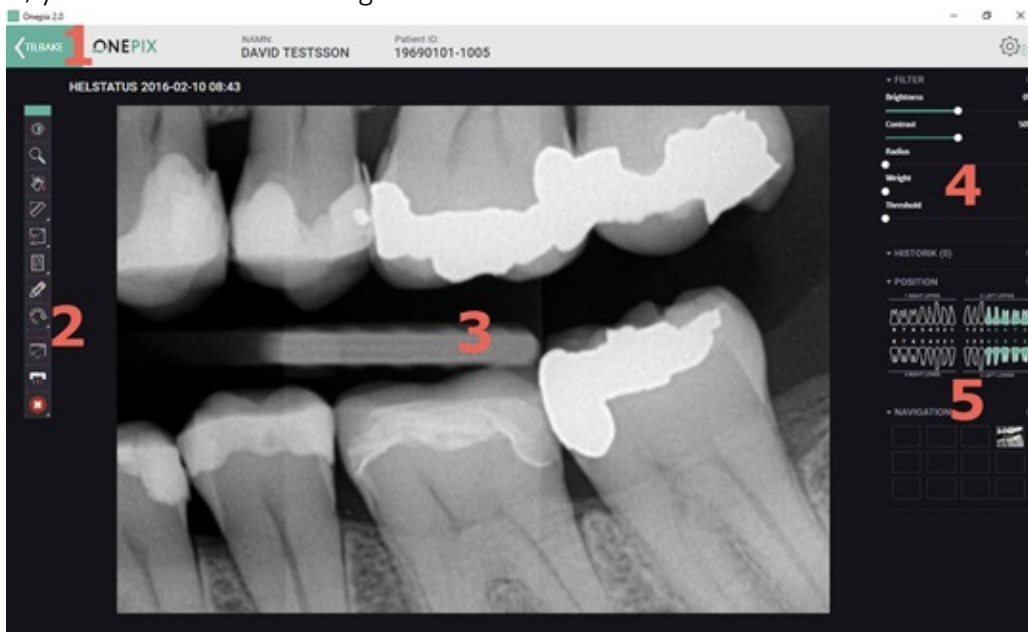

1. **TILBAKE:** Tilbake-knappen brukes for å gå tilbake til undersøkelsesvinduet. Alle endringer som er gjort i bildet lagres uten at du blir spurt.
2. **VERKTØY:** Bildeverktøy finnes venstre for bildet. Verktøyene inneholder grafiske funksjoner som lysstyrke, kontrast, plassering og forstørrelse. Her finnes også diagnostiske hjelpemidler som pikselverdier, målinger og notater.
3. **BILDEPRESENTASJON:** Her vises bildet i den tilstanden og de innstillingene du velger ved hjelp av verktøyene.
4. **JUSTERINGSREGULERING:** Ved hjelp av disse kontrollene kan du justere bildepresentasjonen, for eksempel øke skarphet, lysstyrke og kontrast osv.
5. **HISTORIKK / POSISJON / NAVIGASJON:** Alle endringer i bildet vises under HISTORIKK og kan enkelt fjernes ved å dobbeltklikke på teksten Slett. Under NAVIGASJON vises hvor i serien bildet befinner seg, og under POSISJON vises tannstatus.

**Merk!**

Markerte tenner i tannstatusen er baseret på informasjon lagt til ved innlesning av bildet. Dette kan avvike fra virkeligheten dersom bildet leses inn på feil posisjon i serien, eller om nødvendig manuell korrigering av tannstatusen ikke er utført etter eksponeringen.

UNDERSØKELSESVINDUET

Dette avsnittet inneholder:

- Pasienthåndtering
- Start en ny undersøkelse/serie
- Opprett/Rediger maler
- Bildebehandling i undersøkelsesvinduet
- Sammenlign bilder
- Utskrift, Eksport og Import av bilder osv.

PASIENTHÅNDTERING

Hvis EPJ-programvare brukes, er den koblet sammen med Onepix, noe som betyr at alle pasientdata automatisk blir sendt over fra journalen. Mangler det journalsystem eller kan ikke pasienten opprettes fra pasientjournalsystemet av andre grunner, kan du bruke de innebygde Onepix-funksjonene for pasienthåndtering.

NY PASIENT **SØK PASIENT** **LUKK PASIENT**

NY PASIENT

Pasientens fornavn, etternavn og ID-informasjon skal alltid angis i dialogboksen for ny pasient.

NY PASIENT

FORNAVN:

ETTERNAVN:


PASIENT ID:

AVBRYT **START ➔**

SØK PASIENT

Finnes det tidligere undersøkelser, kan du hente pasientopplysninger ved å klikke på knappen **SØK PASIENT**. Dette åpner dialogboksen for pasientsøk,

der du kan søke på pasientens Fornavn, Etternavn og/eller PasientID. Bruk mellomromstasten hvis du for eksempel vil søke etter både fornavn og etternavn, slik som: *David Davidsson*

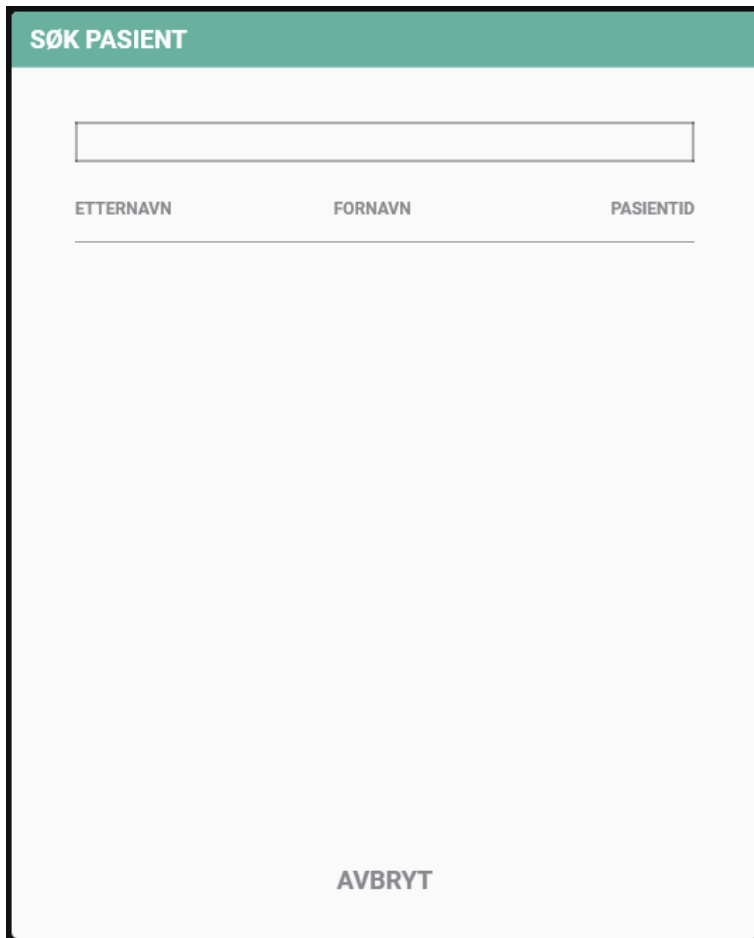

SØK PASIENT

ETTERNAVN FORNAVN PASIENTID

AVBRYT

LUKK PASIENT

Lukker den aktive pasienten og tilknyttede undersøkelser.

HJELP

Dette alternativet åpner avsnittet om hjelp for Onepix-programmet. Hjelpetilene er utformet for å gi enkel tilgang til informasjon om de ulike funksjonene og alternativene i Onepix-programmet.


Du åpner hjelpefilen ved å klikke på teksten HJELP øverst til høyre i Onepix klienten.

UNDERSØKELSER OG SERIER


Fra og med Onepix 2.0 håndteres undersøkelser og serier på en litt annen måte enn før. En undersøkelse står for én bestemt undersøkelse. En serie er en samling av bilder som er tatt i løpet av samme undersøkelse. Det kan være flere serier i én undersøkelse, for eksempel en serie med Panoramabilder og en med Liggende bitewing.

Undersøkelser og serier vises i det venstre feltet i undersøkelsesvinduet med den siste


undersøkelsen øverst på listen. En undersøkelse/serie er aktiv for redigering til samme dag, deretter låses undersøkelsen for all redigering. Dette vises i form av en hengelås til høyre for Undersøkelsen/Serien.

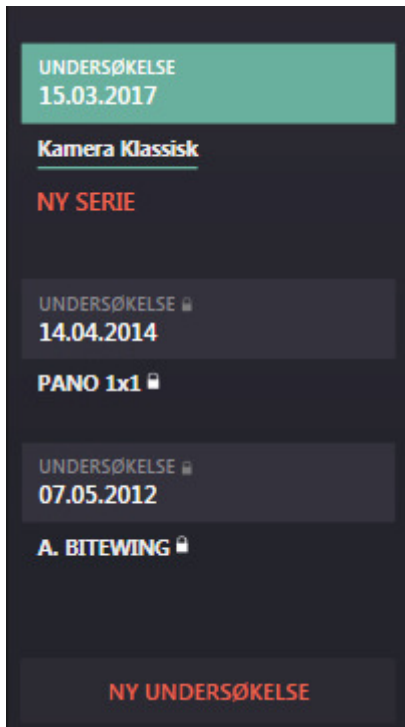

NY UNDERSØKELSE

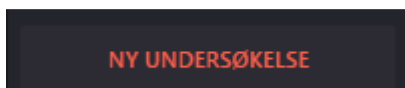

Knappen NY UNDERSØKELSE finnes nederst til venstre. Når du klikker på knappen får du opp en boks, som vist nedenfor.

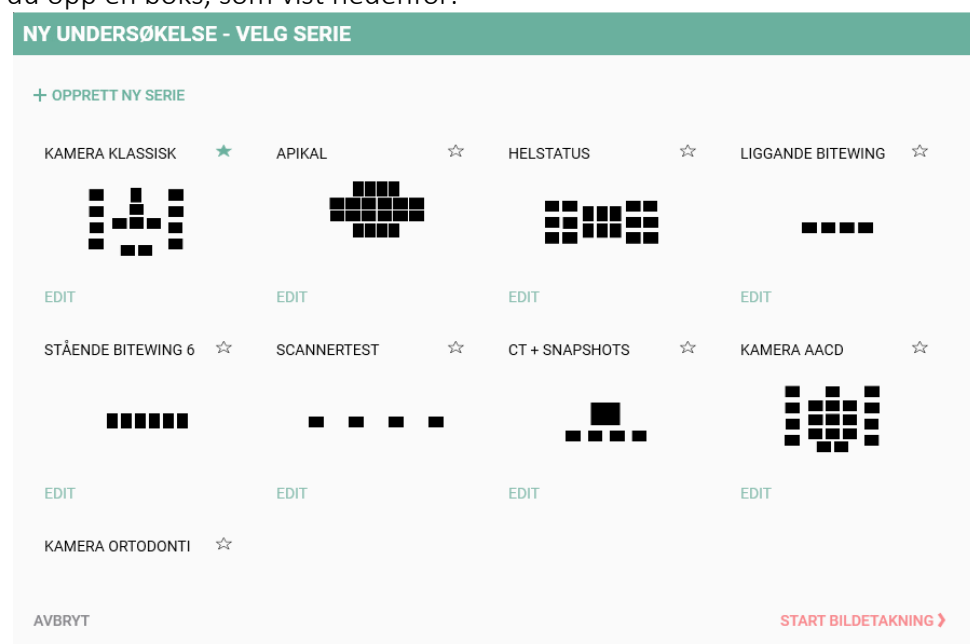


Velg en serie avhengig av hvilken type bilder som skal overføres, og klikk på START BILDEOPPTAK. I dette vinduet har du også muligheten til å opprette en ny mal, endre

og velge favoritserie. Mer om serier og administrering av dem finnes i avsnittet REDIGER ELLER OPPRETT SERIE i denne bruksanvisningen.

NY SERIE

Når du har opprettet den første undersøkelsen, vises teksten NY SERIE under den aktuelle undersøkelsen i listen til venstre. For å opprette flere serier, klikk på teksten NY SERIE, velg mal og klikk på START OPPTAK.

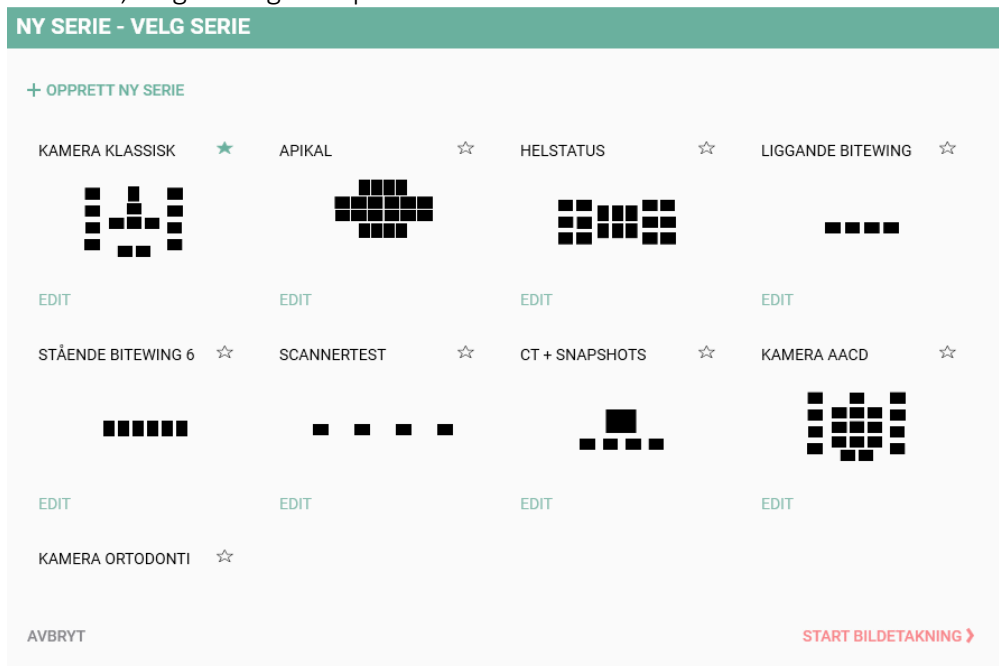


Dialogboksen for ny serie ser likedan ut som for ny undersøkelse. Den eneste forskjellen er at det opprettes en ny serie i den aktuelle undersøkelsen.

REDIGER ELLER OPPRETT SERIE

Onepix har flere forhåndsinnstilte serier som er ment å dekke de vanligste undersøkelsestypene. Seriene for intraoral røntgen heter i standardutførelse: Liggende bitewing, Stående bitewing, Apikalbilder og Helstatus. Det finnes også maler for foto, intraorale kamerabilder, panorama og twain. For å komme til valget mellom å redigere eller opprette en ny serie, kan du klikke på knappen NY UNDERSØKELSE eller NY SERIE i undersøkelseslisten.

Stjernesymbolet som vises øverst til høyre i malen brukes for å sortere serier etter favoritter. Klikk på stjernen for å plassere serien først i listen, øverst til venstre. Stjernen endrer også farge til grønt, som indikerer at den er valgt som en favorittserie. For å endre innstillingene for den bestemte serien, klikk på teksten EDIT under serien.

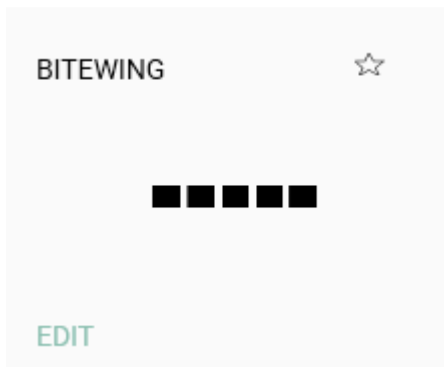

Klikk på knappen opprett ny serie for å opprette en ny serie

+ OPPRETT NY SERIE

En dialogboks med ulike innstillinger vises, som vist nedenfor.

Opprett ny serie

1 VIEWSET NAME

2 MODALITY

3 (Large black area for image preview)

4 (Dental arch diagram with tooth numbering)

5 (Properties table)

6 LADRE


7 AVBRYT

Egenskaper			
X	466	Ordning	1
Y	391	Orientering	Horisontal
Bredd	120	Rotering	0
Højd	90	Speglis horisontelt huj	
Beskrivning			

1. Begynn med å skrive inn et navn for serien.
2. Velg hvilken modalitet malen tilhører, for eksempel Foto.
3. Den store svarte feltet er der serien opprettes og vises. Bruk verktøyene til høyre for å opprette/slette bildeelementer, fordele eller sentrere horisontalt/vertikalt. Hvis du vil hva de ulike ikonene gjør, kan du plassere musepekeren over dem, så vises en tekst med forklaring.




Når du klikker på plusstegnet, opprettes en boks i det svarte feltet som ser slik ut:

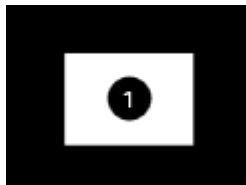

Hvis du ønsker å fjerne denne boksen, klikk på den én gang for å markere den, og klikk deretter på minustegnet. For å fordele eller sentrere bilder, kryss av i boksene som vil bli berørt og klikk på det tilsvarende ikonet.

4. I dette feltet kan du markere en bildeboks med tenner. Klikk på en bildeboks for å velge den, og klikk deretter på tennene den representerer.

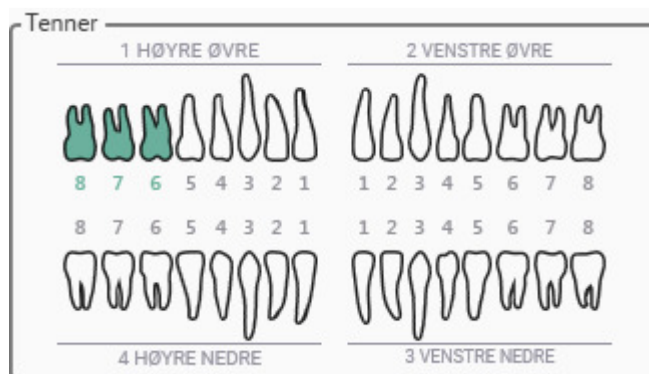


5. Under egenskapsfeltet vises egenskapene som er tilgjengelige for den valgte bildeboksen. Du kan endre innstillingene for den valgte bildeboksen, for eksempel Bredde, Høyde, Rotasjon eller Speilvend. Speilvend horisontalt brukes for eksempel hvis du bruker et speil ved fotograferingen.

Egenskaper	
X	Sortering
Y	Retning
Bredde	Rotering
Høyde	Speilvend horisontalt
Beskrivelse	

6. Klikk på LAGRE for å lagre malen med disse innstillingene. Du kan alltid endre malen senere hvis noe skulle bli feil.
7. Klikk på AVBRYT hvis du ombestemmer deg.

BILDEBEHANDLING

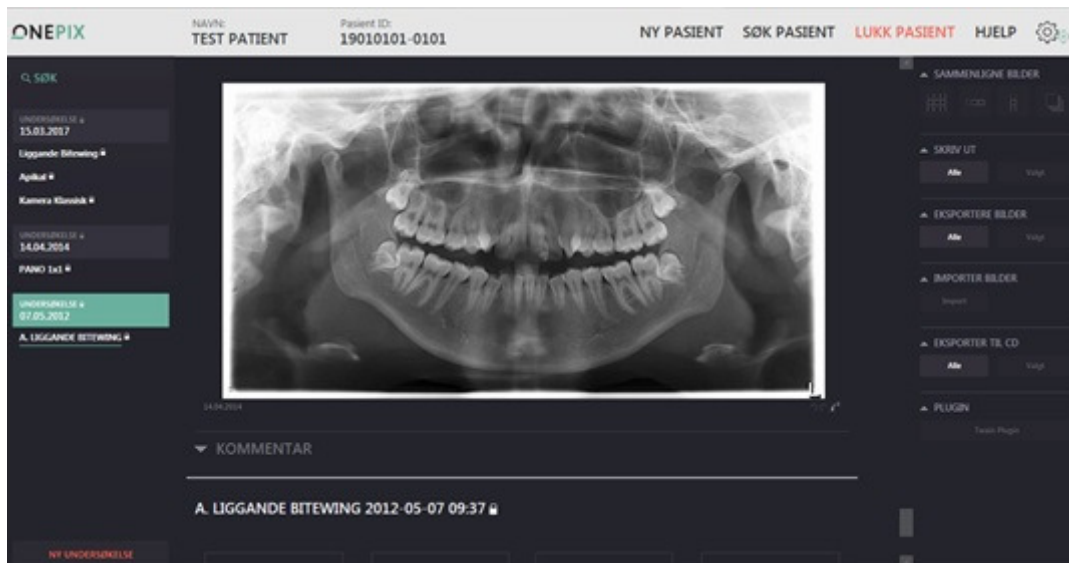

Alle bildene presenteres i midtseksjonen av undersøkelsesvinduet i Onepix. Den siste undersøkelsen presenteres først. Ønsker du raskt å komme til en bestemt undersøkelse eller serie, kan du gå gjennom undersøkelseslisten til venstre og klikke på datoen som er relevant. Du kan også bla direkte i midtseksjonen ved å rulle med musehjulet.

SØK ETTER BILDER



Øverst til venstre over undersøkelseslisten er det en søkefunksjon. Tanken bak den er raskt å finne fram bilder som er interessante. Nedenfor bildet under beskrives de ulike alternativene som er tilgjengelige for søkefunksjonen. Søkeresultatene presenteres i undersøkelsesvinduet med bildet som er tatt sist helt øverst.

SØK

3 SØKETYPE
Undersøkelse

4 REMITTERENDE TANNLEGE
[Empty text field]

5 DATO START [15] **AVBRYT** [15]

6 SERIENAVN [Empty text field] **MODALITET** [Empty dropdown]

7 VELG POSISJON

1 HØYRE ØVRE	2 VENSTRE ØVRE
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
4 HØYRE NEDRE	3 VENSTRE NEDRE

8 AVBRYT LAGRE SØK }

1 RASKT SØK
 Stående Bitewing 6 [IO])
 Helstatus [IO])
 Liggande Bitewing [IO])
 Apikal [IO])
 CT + snapshots [PX])
 Kamera AACD [XC])
 Kamera Klassisk [XC])
 Kamera Ortodonti [XC])
 scannertest [OT])

2 LAGREDE SØK Rediger [Toggle]

1. RASKT SØK – Her er noen av de vanligste søkene. Tanken er at du raskt skal kunne få opp bildene med bare ett klikk.
2. LAGREDE SØK – Du kan opprette dine egne søk som vist nedenfor.
3. SØKETYPE – Her velger du om det er en Undersøkelse, Serie eller Bilder du leter etter.
4. REMITTERENDE TANNLEGE – ligger informasjonen i bildene kan man søke etter en bestemt behandler.
5. DATO – Her kan du søke dersom søket skal gjøres innenfor visse datointervaller.
6. SERIENAVN – Her kan du søke etter et bestemt navn på en serie, eller velge modalitet fra listen.
7. POSISJON – Her velger du om det er en bestemt tann eller tannstilling ved å klikke på de tennene som søket gjelder.
8. Her velger du om du vil avbryte søket, lagre eller gjøre et søk basert på de valgte kriteriene.

Når du utfører et søk, vises bare de bildene som er valgt i undersøkelsesvinduet. For å gå tilbake til alle undersøkelser, klikker du på TILBAKE-knappen øverst til venstre.



QUICKZOOM

QuickZoom er en Onepix-funksjon som «zoomer» eller forstørrer bildene i en undersøkelse, og gjør at hvert bilde blir vist forstørret. QuickZoom kan spare verdifull tid ved at du ikke må åpne hvert bilde separat for å se det forstørret.




For å bruke QuickZoom trenger du bare høyreklikke med musepekeren på et bilde i undersøkelsesvinduet og holde museknappen nede, så vises bildet i en forstørret tilstand. Flytt musepekeren for å bevege deg rundt i bildet. Endring av størrelsen på QuickZoom-vinduet finner du i avsnittet om Onepix-innstillinger.

FLYTTE BILDE/BYTTE PLASS

Har et bilde havnet i en annen boks enn man trodde, kan man enkelt flytte bildet ved å klikke på bildet, holde museknappen nede og dra bildet til en annen bildeboks.



Før:

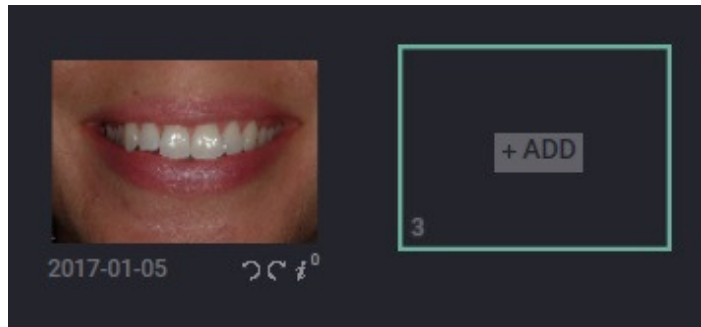


Etter:

Har du allerede et bilde i den boksen som du flytter til, bytter bildene plass.



Før:

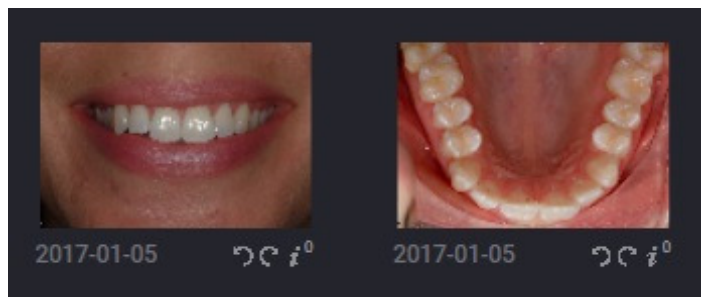


Etter:


Merk at du bare kan overføre bilder i en serie med dagens dato. Eldre serier er låst for redigering.

SAMMENLIGN BILDER

For å sammenligne to eller flere bilder, holder du nede Ctrl-tasten og klikker for å markere bildene som skal sammenlignes. Dette fungerer også mellom ulike undersøkelser og serier. De valgte bildene får en grønn ramme som indikasjon. Hvis du vil sammenligne alle bildene i en serie, kan du kan bruke Ctrl + A for å velge alle.

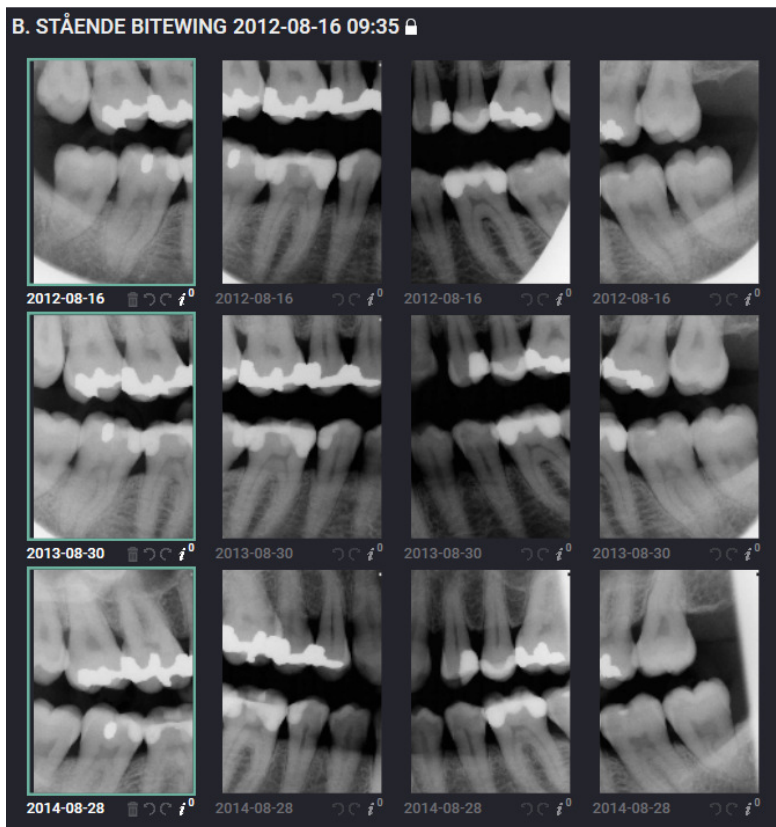

Deretter klikker du på et av ikonene som vises i høyre felt under SAMMENLIGN BILDER. De ulike sammenligningsalternativene som er tilgjengelige fra venstre er: Flere i boksene, Horisontalt, Vertikalt, Overlapping.

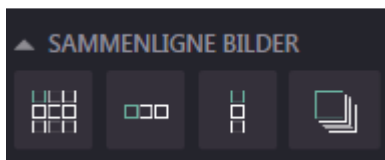

Slik kan det se ut hvis man velger å sammenligne bildene horisontalt. Egnet når man sammenligner f.eks stående bitewing-bilder.




For å sammenligne bilder fra ulike studier / serien, så kan du gjøre følgende:


For å slå av bildevisning kan du enten klikke på X på hvert bilde, eller du kan bruke hurtigtasten Ctrl + Q. Når du velger å sammenligne bilder med overlapping kan du enkelt bla mellom bildene ved å bruke tastaturet: Side opp / Side ned

SKRIV UT

Skriv ut-funksjonen kan brukes til å skrive ut alle bildene i den aktive undersøkelsen, eller du kan skrive ut bare utvalgte bilder. Velg bildene som skal skrives ut ved å holde nede Ctrl-tasten og klikk på bildene. De får en grønn ramme som markering.

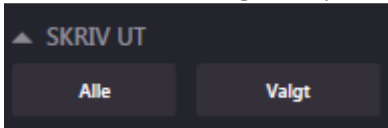


Velger du å skrive ut alle bildene, havner hele undersøkelsen på en side med tilhørende pasient og undersøkelsesinformasjon. Velger du å skrive ut de valgte bildene, havner hvert enkelt bilde på sin egen side.

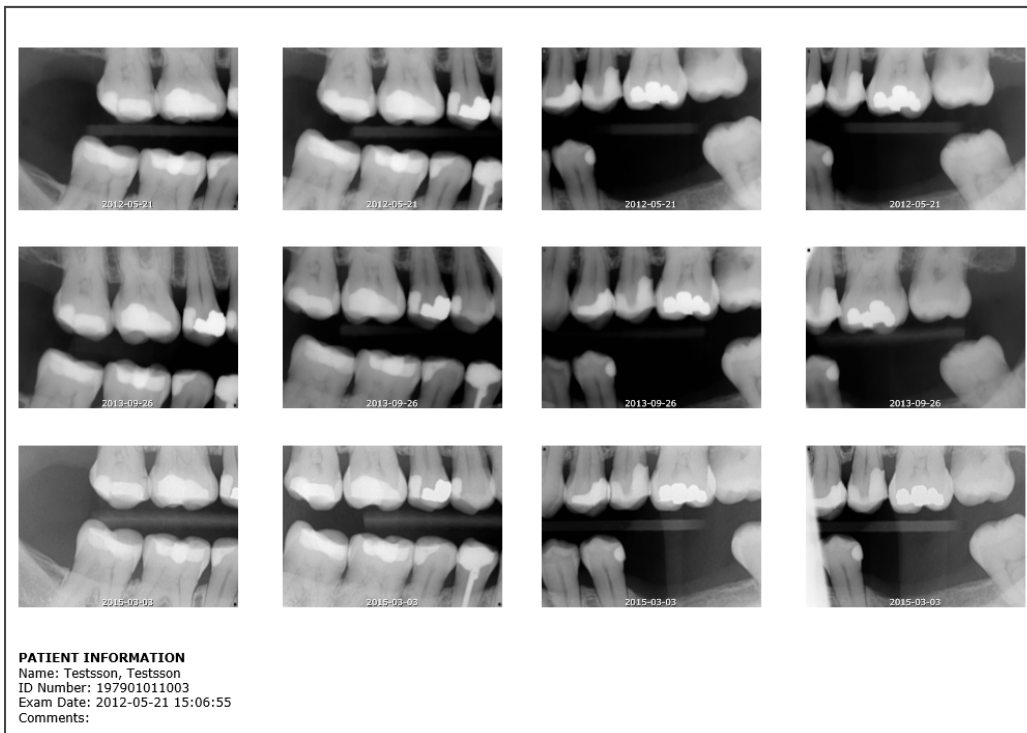

EKSPORTERE BILDER

Eksportfunksjonen kan eksportere enten alle bildene i en undersøkelse eller bare de som er valgt. For å markere bilder, hold nede Ctrl-tasten og klikk på bildene som skal eksporteres. De får en grønn ramme som markering.

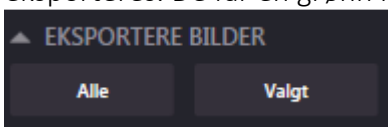

Enten du velger å eksportere alle bilder eller utvalgte bilder, vil du få opp følgende dialogboks. Under bildet beskrives de ulike valgene steg for steg.

Exportera bilder

1 **Format**

2 **Filsti**

3 **Alternativ för bildeeksport**

☐ Anonymisere

☐ Brenn pasientinformasjon

Avbryt **4 Eksportere**

1. Under *Format* finnes følgende valg å velge mellom. Eksport i DICOM-format foretrekkes, men dette krever at mottakeren av filene har en programvare som kan lese DICOM-filer.

Eksport DICOMDIR til en mappe
Eksporter bilder i DICOM-format til en mappe
Eksporter bilder i JPG-format til en mappe
Exportera bilder i TIFF-format till en mapp
Eksporter bilder i BMP-format til en mappe

2. Velg en filbane for eksport av bilder ved å klikke på knappen med punkter, eller angi en filbane, f.eks. *C:\Temp*
3. Under *Alternativ for bildeeksport* kan du velge om du vil Anonymisere bildene, og du kan også velge om pasientopplysninger skal være brent inn i bildet. Slik kan et bilde se ut hvis du velger både å anonymisere og brenne inn informasjonen i bildet.



4. Klikk på Eksporter, målmappen åpnes i Windows Utforsker og bildene som er lagret vises.




Merk!


For å sende bilder via e-post må e-posten være kryptert for å oppfylle pasientsikkerhetsloven. Det finnes sikre systemer for denne type kommunikasjon, som for eksempel C-takt Link.

IMPORTERE BILDER

Importere bilder fra filer. Onepix-programmet kan importere 8-bit og 12-bit svart/hvitt-bilder (gråtoner) og 24-bit fargebilder i flere formater, f.eks. TIFF, BMP, PNG og JPG.

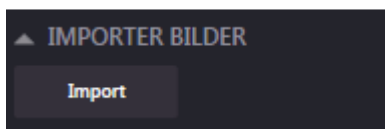

For å kunne importere bilder, må du befinne deg i en serie med dagens undersøkelsesdato. Du kan enten velge å importere bilder til en eksisterende serie eller opprette en ny serie. Leser du fra et minnekort i kortleseren, sett først i minnekortet, og klikk deretter på Importer.

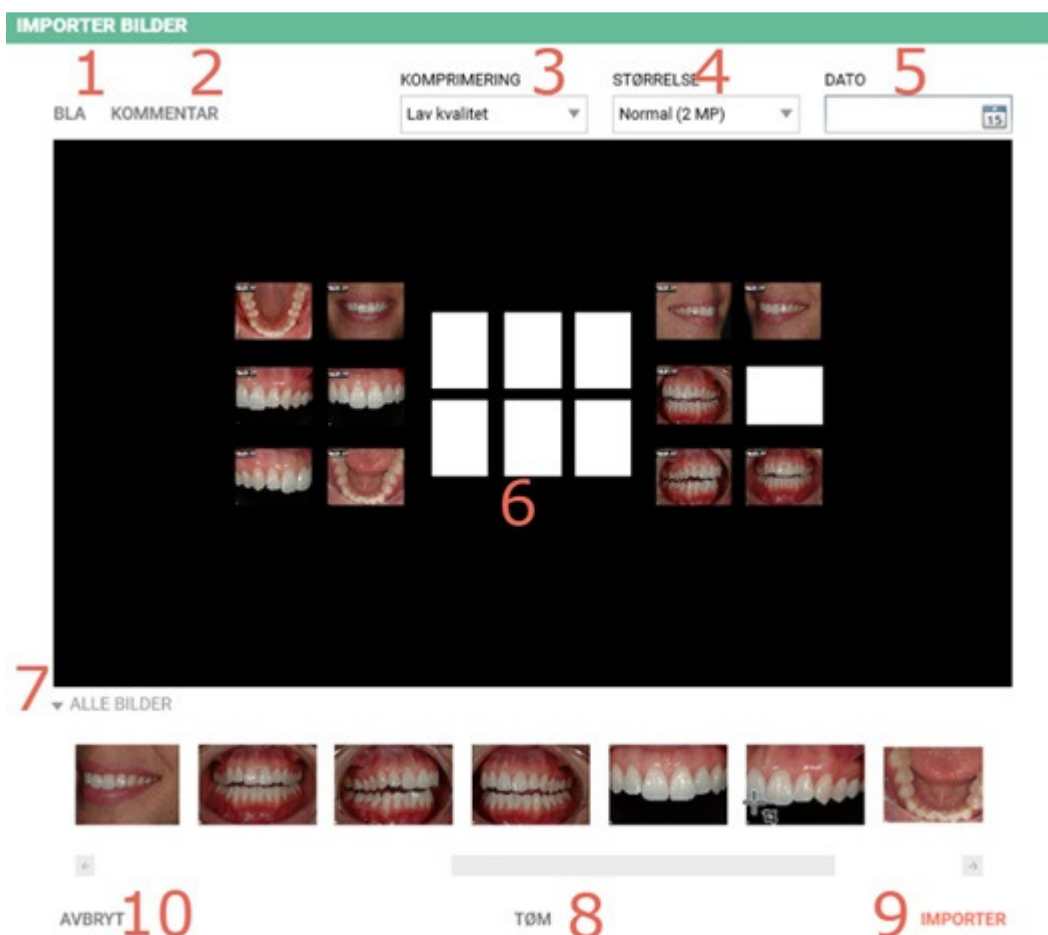

1. Bla gjennom etter bilder i en mappe på en harddisk. Hvis du leser fra et minnekort, presenteres bildene direkte uten at du må klikke på noe.
2. Ønsker du å merke disse bildene med en kommentar, kan du gjøre det her.
3. Velg komprimeringsgrad. Gjøres vanligvis bare den første gangen, det siste valget lagres på denne datamaskinen.
4. Velg størrelse. Gjøres vanligvis bare den første gangen, det siste valget lagres på denne datamaskinen.
5. Velg dato dersom det skal være en annen dato på bildene enn dagens dato.
6. Dette viser en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut når bildene er importert inn i serien. Forhåndsvises bilder som ikke ønskes, kan du bare klikke på et slikt bilde, hold museknappen nede og dra bildet fra malen og slipp.
7. Er det flere bilder på minnekortet eller i mappen du vil importere fra, klikker du på teksten ALLE BILDER for å vise de i en liste. Du kan klikke på et bilde i listen og dra og slippe det i den ønskede boksen i forhåndsvisningen ovenfor.
8. Ønsker du å fjerne forhåndsvisningen fra alle bildene, klikker du på TØM. Gjør deretter som i punkt 7.
9. Klikk på IMPORTER når du ønsker å starte importen.
10. AVBRYT lukker dialogboksen uten noen endringer.




Merk!

For å unngå blanding av pasientinformasjon, bør valget "Eksportere til DICOM" benyttes da dette innebærer at pasientinformasjonen lagres i den eksporterte filen. Dersom andre bildeformat velges, bør "brenn pasientinformasjon" aktiveres, slik at pasientinformasjonen skrives i klartekst i bildet.

EKSPORTER TIL CD

Eksporter til CD kan eksportere enten alle bildene i en undersøkelse eller bare de som er merket. For å markere bilder, hold nede Ctrl-tasten og klikk på bildene som skal eksporteres. De får en grønn ramme som markering.

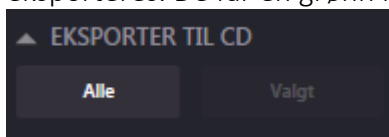

Enten du velger å eksportere alle bilder eller utvalgte bilder, vil du få opp følgende dialogboks. Under bildet beskrives de ulike valgene steg for steg.

BRENN TILL CD/DVD

1 Format

2 Alternativ för bildeeksport

☐ Anonymisere

☐ Brenn pasientinformasjon


Avbryt

3 Brenn till CD/DVD


1. Under *Format* finnes følgende valg å velge mellom. Eksport i DICOM-format foretrekkes, men dette krever at mottakeren av filene har en programvare som kan lese DICOM-filer.

- Eksport DICOMDIR til en mappe
- Eksporter bilder i DICOM-format til en mappe
- Eksporter bilder i JPG-format til en mappe
- Exportera bilder i TIFF-format till en mapp
- Eksporter bilder i BMP-format til en mappe

2. Under *Alternativ for bildeeksport* kan du velge om du vil Anonymisere bildene og du kan også velge om pasientopplysninger skal være brent inn i bildet. Dersom ingen avkryssning blir foretatt, vil bildet bli lagret med pasient- og bildeinformasjon som filnavn, f.eks: *19690101-1005_A. LIGGENDE BITEWING_2016-02-10_08-42-21.jpg*
3. Kontroller at du har satt inn en tom CD i CD/DVD-brenneren. Klikk på *Brenn til CD / DVD*.
4. Du vil se denne dialogboksen:

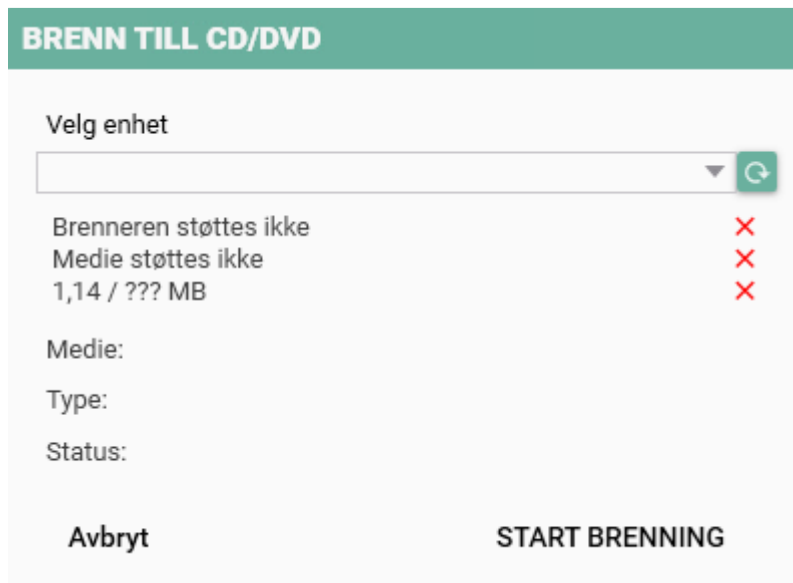

5. Velg enheten som skal brenne bildene og sjekk at alle kriteriene for brenning er oppfylt:

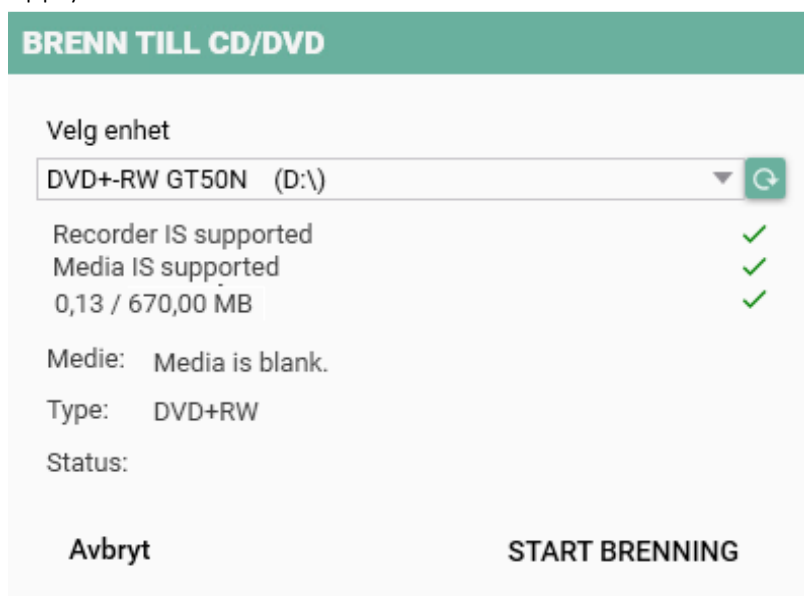

6. Klikk på *Start brenning* og vent til CD-en er ferdig.

**Merk!**

For å unngå blanding av pasientinformasjon, bør valget "Eksportere til DICOM" benyttes da dette innebærer at pasientinformasjonen lagres i den eksporterte filen. Dersom andre bildeformat velges, bør "brenn pasientinformasjon" aktiveres, slik at pasientinformasjonen skrives i klartekst i bildet.

PLUGIN

▼ PLUGIN

Under PLUGIN vises installerte Onepix plugins. Hvilke plugins som skal installeres, velger du under installasjonsprosessen. Her er noen av de plugins som er tilgjengelige i Onepix.

TWAIN IMPORT

Twain Plugin

Funksjonen er å lese bilder fra en TWAIN-kompatibel skannerkilde, for eksempel et bildeplateskanner eller panoramamaskin, til Onepix.


Se bruksanvisningen til den respektive skanningskilden.

BILDEINNLESING

Når en undersøkelse eller en serie opprettes, vises en tom serie med dagens dato som er klar for bildeinnlesing. Dette er vist ved at det finnes et symbol med +START i midten av bildeboksen, som på bildet nedenfor.



Øverst til høyre i serien er en liten boks med en pil og et navn på sensorprodusenten som brukes som standard. Hvis du ønsker å midlertidig bruke en annen type sensor, kan du klikke på pilen og velge den andre produsenten, som i bildet nedenfor. Under Onepix-innstillinger kan du konfigurere hvilken maskinvare som vil bli forhåndsvalgt her for alle nye Røntgenserier på denne bestemte datamaskinen.

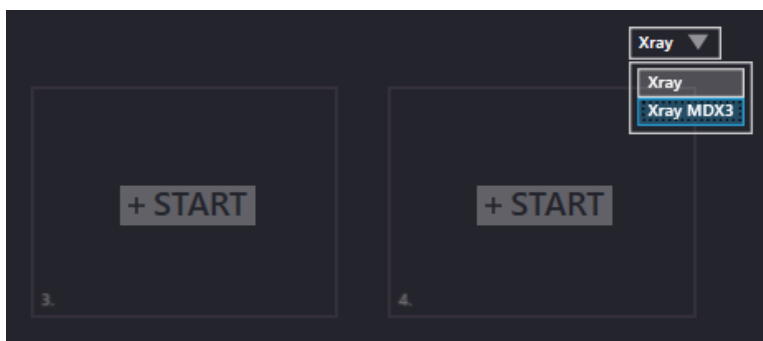


For å starte en bildeinnlesning, sørg for at maskinvaren er tilkoblet. Maskinvare betyr all innlesingsmaskinvare som f.eks. røntgensensor, fotokamera , skanner, panorama osv. Klikk deretter på knappen +START i boksen der bildeinnlesingen skal starte, og vent til det står venter på bilder i bildeboksen. Bildeboksen er aktivert og klar for bildeinnlesning.



Merk!

For at pasienten ikke skal utsettes for unødvendig røntgenstråling er det viktig at du venter visningsruten i Onepix' undersøkelsesvindu blinker/lyser grønt (standardfarge) i Autotake-funksjonen , eller til meldingen "venter på å ta røntgenbilde" vises, innen du aktiverer røntgenkilden.

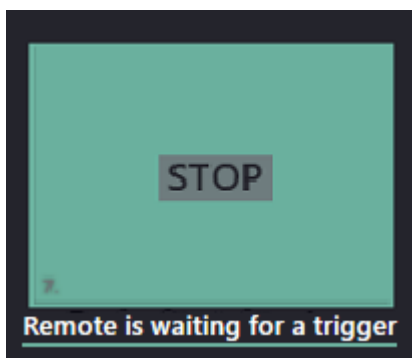

Når du tar bilder vises det siste bildet som ble tatt på full skjerm i 10 sekunder som standard, men du kan endre tiden i innstillingene. Når bildet lukkes igjen, går programmet tilbake til bildeinnlesingsmodus og aktiveringen flyttes til neste boks i angitt rekkefølge. Med andre ord, du trenger ikke aktivere hver boks, det er nok å aktivere den første bildeboksen. Rekkefølgen som bildene leses inn i vises i den tomme bildeboksen nederst til venstre.

Er ikke maskinvaren tilkoblet, eller du ikke får noen kontakt med maskinvaren av en eller annen grunn, ser du følgende informasjon under bildeboksen:



Ikke ta bilder dersom du får denne meldingen, men sikre at maskinvaren er tilkoblet, og at du får opp en boks med grønn markering som er klar for bildeopptak. Kontakt teknisk support om maskinvaren er koblet til og du fortsatt mottar denne meldingen.



Merk!

Om bildet ikke leses inn korrekt i Onepix skal feilsøking av maskinvare og programvare gjennomføres innen ny eksponering utføres på nytt. Med enkelte maskinvarekomponenter kan bildet sendes på nytt uten ny eksponering direkte til Onepix.

FLERE BILDER I SAMME BOKS

Det er mulig å lese inn mer enn ett bilde i samme boks. For å aktivere boksen for fotografering, klikker du på plusstegnet som vises i midten av bildeboksen. Pluss-symbolet vises bare hvis serien er opprettet i dag.



Om mer enn ett bilde er i en bildeboks ser det ut som på bildet nedenfor. Klikk på pilen høyre eller venstre for å velge bildet som skal vises på forsiden av serien.






Observera!

Når symbolet for flere bilder på samme posisjon vises, kan man veksle mellom disse ved å trykke på pilene når markøren er over bildet.


BILDEBEHANDLING ETTER INNLESING

Når innlesingen av et bilde er ferdig, har du samme dag på deg til å redigere undersøkelsen og bildene. Etter det låses undersøkelsen for alle endringer. Du kan fortsatt se og lese all informasjon, men ingen endringer lagres i de undersøkelsene som er eldre enn en dag. For å låse opp en undersøkelse kreves det å gå via Onepix Admin-programvaren.

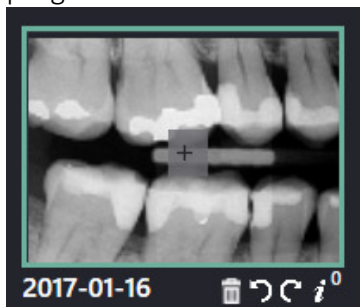


Allerede i undersøkelsesvinduet er det nå mulighet for å:

- Rotere et bilde 90 grader med/mot klokka med pilene under bildene.
- Du kan fjerne et bilde, om det ikke skal vises i serien, ved å klikke på ikonet til papirkurven. Dette sletter ikke bildet, det presenteres bare ikke som montert i serien. Bildet havner under en fane som heter UMONTERTE BILDER, direkte under serien, hvor du enkelt kan velge å montere det tilbake i serien.
- Symbolet (*i*) viser om det er noen kommentarer og hvor mange det er i bildet. Du kan lese kommentarene ved å klikke på symbolet. Her kan du også skrive/endre en Global kommentar for bildet.

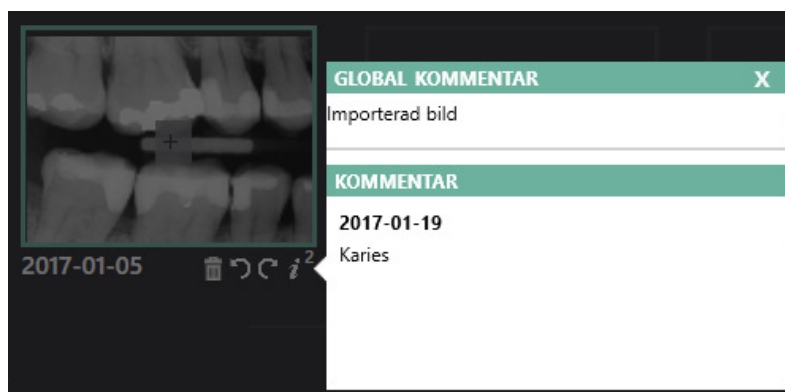

UMONTERTE BILDER

Er det noen umonterte fotografier i serien, vises en fane, som vist nedenfor under serien.

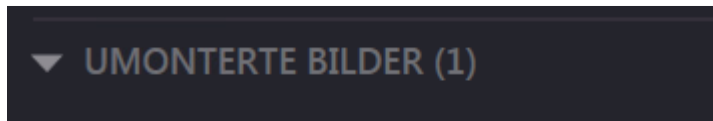


Klikk på pilen for å åpne listen over demonterte bilder. Alle demonterte bilder vises i en horisontal liste.



For å montere tilbake bildet kan du klikke på bildet i listen nedenfor under umonterte bilder, hold museknappen nede mens du flytter bildet til en tom bildeboks i serien. Merk at dette bare er mulig i løpet av dagen som undersøkelsen er opprettet. Å demontere og montere bildene i gamle undersøkelser kan gjøres via Onepix Admin-verktøyet, eller ved å låse opp undersøkelsen via Onepix Admin.

KOMMENTAR

Under hver undersøkelse er det et kommentarfelt hvor du kan lese/skrive kommentarer for den aktuelle undersøkelsen. Klikk på pilen til venstre for kommentarteksten, og klikk deretter på linjen under for å lese/skrive kommentarer. Trykk på Enter for å skrive på ny linje.

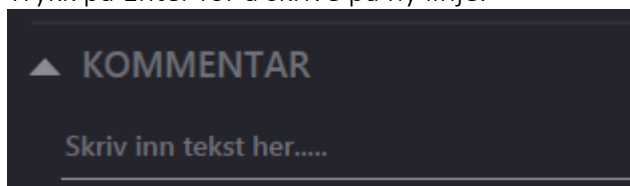

Undersøkelseskommentarer gir mulighet for å legge til generelle merknader til en undersøkelse (også kalt "studie"). Brukere som benytter seg av undersøkelseskommentarer pleier å legge til og endre dem ved avslutningen av undersøkelsen, som en enkel måte å legge til generelle observasjoner på. Undersøkelseskommentarer kan bare legges til i løpet av dagen hvor undersøkelsen er opprettet, de kan redigeres senere via Onepix Admin om nødvendig.

TASTATURSNARVEIER I UNDERSØKELSESVINDUET

Nedenfor ser du de tastatursnarveiene som er tilgjengelige i Undersøkelsesvinduet.

KOMMANDONAVN

Ny undersøkelse
Søk pasient
Lukk
Kopier bilde
Marker alle
Skriv ut
Bla i sammenligningsfunksjon ved overlapping


TASTATURSNARVEI

Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + W
Ctrl + C
Ctrl + A
Ctrl + P
Side opp / Side ned

ZOOM-VINDUET

Dette avsnittet inneholder blant annet:

- Behandle /Justere bilder
- Måling i bilder
- Vurdere eksponering
- Legg til notater osv.

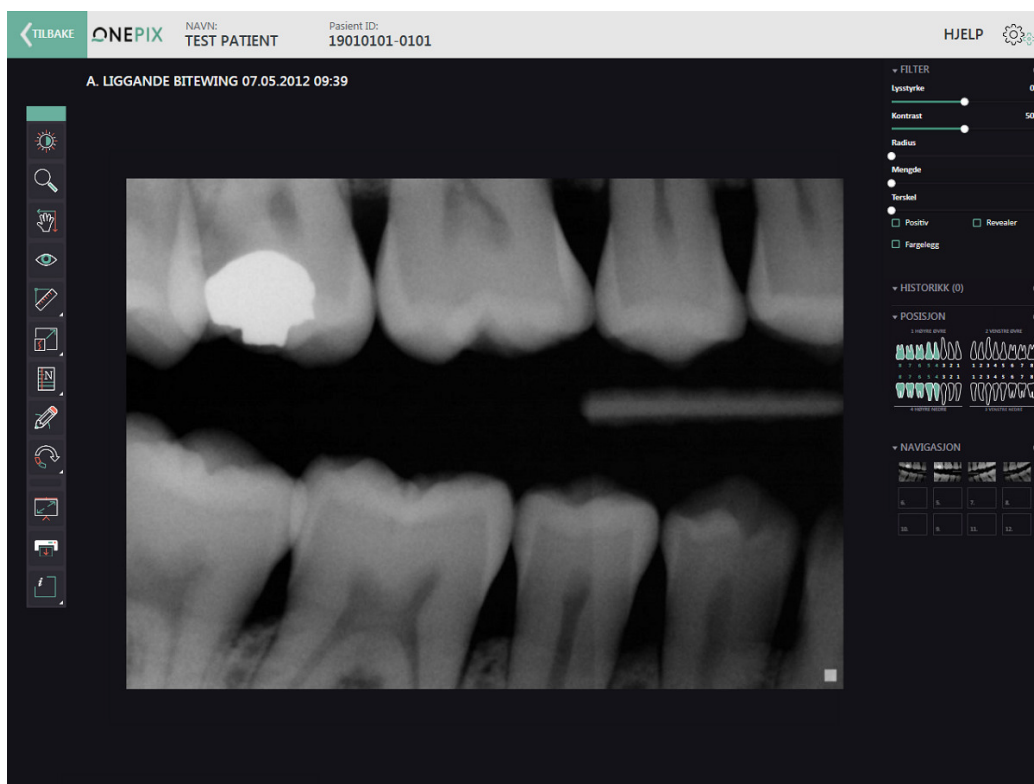

Når du dobbeltklikker på et bilde i undersøkelsesvinduet, åpnes bildet i det såkalte Zoom-vinduet. Til venstre for bildet finnes bildeverktøy og til høyre informasjon og bildeforbedringsverktøy. Eventuelle endringer som gjøres i Granskningvisning lagres automatisk dersom bildet ble tatt samme dag som endringene blir gjort. Du kan fortsatt gjøre endringer og justeringer i bilder som er eldre enn en dag, for granskning osv., men disse endringene vil ikke bli lagret i bildet. For å gå tilbake til undersøkelsesvinduet, bruk TILBAKE-knappen øverst til venstre. I dette avsnittet beskrives de ulike delene av Granskningvisning med tilhørende funksjoner.

VERKTØY

Til venstre for bildet i granskningvisning finnes en rekke verktøy som kan være nyttige å kjenne til. Nedenfor følger beskrivelse av disse og hvordan de er ment å bli brukt.

LYSSTYRKE OG KONTRAST




Lysstyrke og kontrast er blant de vanligste verktøyene som brukes i granskningvisning og er derfor forhåndsinnstilt som standard når du åpner et bilde i granskningvisning.

1. Klikk på knappen for å aktivere verktøyet hvis det er deaktivert.
2. Deretter klikker du på bildet og holder museknappen nede.
3. Flytt musepekeren Opp/Ned for lysstyrke.
4. Flytt musepekeren til Venstre/Høyre for kontrast.
5. For å gå tilbake til det opprinnelige bildet, dobbeltklikker du på bildet.

Endringer i lys og kontrast er også tilgjengelig på kontrollene under Filter på høyre side. Alle endringer lagres i Historikk.

FORSTØRRE

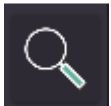

Forstørre-verktøyet brukes til å lage forstørrelse/forminskning av bildet, på følgende måte:

1. Klikk på knappen for å aktivere verktøyet.
2. For å forstørre et område raskt, kan du dobbeltklikke på bildet.
3. Det er også mulig å bruke musehjulet for å zoome inn eller ut.
4. Klikk på bildet og hold venstre museknapp nede.
5. Før musepekeren opp eller ned for å zoome inn eller ut.
6. For å gå tilbake til det opprinnelige bildet, dobbeltklikker du på bildet.

Forstørre-funksjonen forblir aktiv til du velger et annet verktøy eller lukker Zoom-vinduet.

PANORERE



Gir navigeringsmuligheter i et bilde. Panoreringsverktøyet brukes sammen med Forstørre og gjør det mulig å studere de tilstøtende områdene i et forstørret bilde i samme forstørrelse.

Gjør slik for å panorere i bildet:

1. Klikk på ikonet for panoring.

2. Bruk musehjulet til å zoome inn på bildet, eller dobbeltklikk på den delen du er interessert i.
3. Hold museknappen nede og panorer ved å flytte musepekeren enten opp/ned eller mot venstre/høyre.
4. Dersom du vil gjenopprette den opprinnelige tilstanden, kan du gjøre dette ved å dobbeltklikke i bildet, uansett hvilken modus du er i.


Panoreringen forblir aktiv til du velger et annet verktøy.

LOMMELYKT



Forbedrer eller "lyser opp" et bestemt område i et bilde.

Klikker du på knappen **Lommelykt** aktiveres funksjonen med maksimal kontrast som standard. Før musepekeren over bildet for å se resultater. Ved å høyreklikke på bildet, vil du se en meny der du kan velge ulike feltstørrelser og forbedringsfunksjoner.

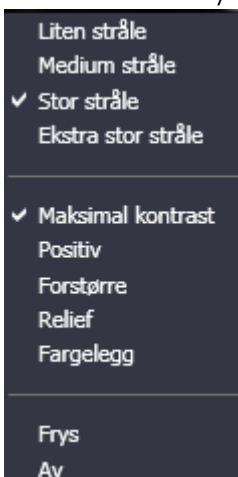


Følgende innstillinger er tilgjengelige for lommelykt:

- Velg fra liten til ekstra stor lysstråle
- Maksimer kontrast – Lyser opp feltet
- Positiv – Snur bildet i feltet
- Forstørre - forstørrer bildet i feltet
- Relieff- Bruker en relieffeffekt, som gir det et tredimensjonalt utseende.
- Fargelegg - fargelegger feltet
- Frys - får feltet til å forbli på samme sted, klikk på Frys igjen for å oppheve dette.
- Av - Slår lommelyktverktøyet av

Lommelykt forblir aktiv til du velger et annet verktøy eller høyreklikker og velger Av.

MÅLE

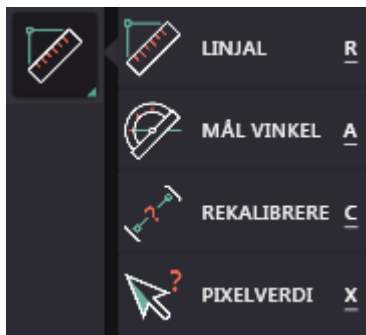

Når du klikker på måleverktøyet, har du tre valg: MÅL, MÅL VINKEL OG OMKALIBRER. Nedenfor vises hva du kan gjøre med de forskjellige verktøyene.



Merk!

Målingsresultatet er avhengig av bruk av kalibreringsobjekt og sensorplassering. Målingsfeil på grunn av forvrengning samt den begrensning som et todimensjonelt bilde innebærer kan lede til feildiagnose eller feilbehandling. Brukeren av målingsfunksjoner bør ha gode kunnskaper i projeksjonsteknikk for å få et fullgodt resultat.




Merk!

Diagnose eller behandling kan ikke baseres kun på målingsresultatet på grunn av risikoen for målingsfeil!

MÅL

Avstanden kan måles mellom to punkter. Resultatet av målingen vises på målelinjen og i statusfeltet.

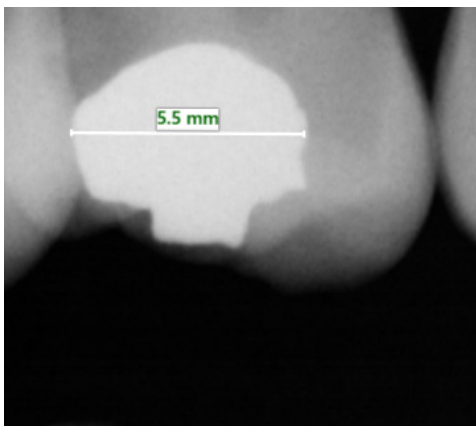

For å måle avstand med en rett linje, gjør du slik:


1. Angi et utgangspunkt ved å klikke og holde nede venstre museknapp.
2. Hold knappen nede til du har angitt avstanden du ønsker å måle.
3. Når du slipper knappen, vises lengden på linjen mellom de to punktene på bildet.
4. Når du starter en ny måling forsvinner den første linjen.

Måleresultatene blir vist i millimeter dersom bildet er kalibrert, ellers står det Px for antallet piksler. Denne funksjonen kan brukes til å vurdere rette linjer raskt. Du kan skrive ut et bilde med målinger ved å bruke Ctrl + P eller klikke på Skriv ut-knappen.

MÅL VINKEL

Måler avstanden mellom flere linjer og vinkelen mellom to rette linjer. Flere linjer og vinkler er to forskjellige funksjoner, men presenteres sammen i dette avsnittet.

1. Angi et startpunkt i bildet ved å klikke på venstre museknapp én gang og slippe.
2. Dra musepekeren og tegn neste linje ved å flytte musepekeren og venstreklikke igjen på slutten av linjen.
3. Fortsett på linjen eller stopp målingen ved å høyreklikke.

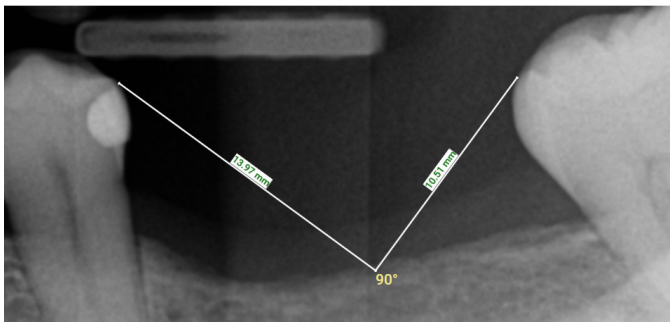

OMKALIBRERE

Angir avstandsinformasjonen i et bilde. Med kalibreringsfunksjonen kan du korrigere forvrengningsproblemer forårsaket av feil sensorposisjon, strålebunt som er rettet inn feil, eller andre faktorer. Du kan løse problemet ved å plassere et rett objekt med kjent lengde (f.eks. en fil) i området som du skal ta røntgenbilde av. Objektet fungerer som et referansepunkt for å måle når du har tatt bildet. Ta et røntgenbilde. (*I dette eksempelet representerer filen gjenstanden med kjent lengde.*)

1. Klikk på venstre museknapp for å angi et utgangspunkt som er parallelt med filen, og hold knappen nede til du kommer til den andre enden av filen.
2. Når du slipper knappen, vises dialogboksen Avstandskalibrering.


AVSTANDSKALIBRERING

OK

AVBRYT

HJELP


3. Skriv inn filens faktiske lengde målt i millimeter i tekstboksen og klikk OK.
4. Kalibreringen er fullført, når du måler i bildet vil du se at dette er et kalibrert mål ved at det står (cal) etter målingen.

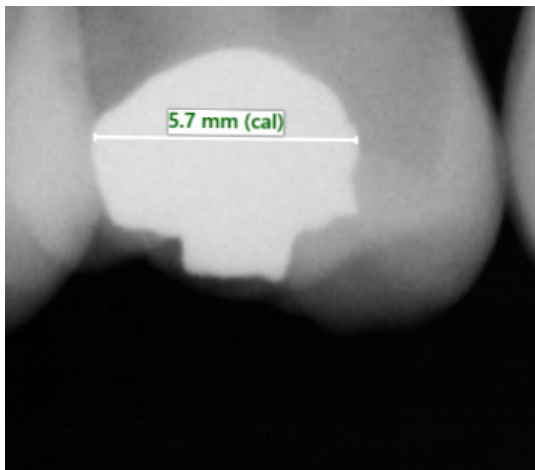

Når du lagrer bildet lagres den nye kalibrerte verdien, slik at bildet ikke må kalibreres på nytt. Når du åpner bildet på nytt brukes den lagrede verdien som grunnlag for alle målinger. Ordet **(cal)** er synlig etter måleverdien.

PIKSELVERDI


Viser pikselverdier for gråtoner i bildet. Velg Pikselverdi i Måleverktøyet og gå deretter til et område i bildet. Pikselverdien i det aktuelle området vises ved musepekeren.

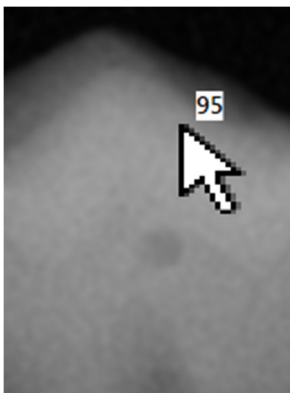

Pikselverdier er et mål på densitet, slik at om densiteten av det røntgenfotograferte arealet er forholdsvis høy (f. eks. ben), er pikselverdiene i gråtonene i området lave til medium. Når røntgenstråler passerer gjennom områder med lav densitet (f.eks. luft) blir pikselverdiene mye høyere.

Å kjenne til pikselverdier kan bidra i vurderingen av om eksponeringen er mørk nok til å evaluere den. De mørkeste pikslene bør være mellom 92 og 99 %. Faller de under grenseverdien kan du ta bildet på nytt med litt høyere eksponering, for å få en bedre bildekvalitet og gjøre det enklere å skille mellom kontrasterende områder.


DENSITETSPROFIL

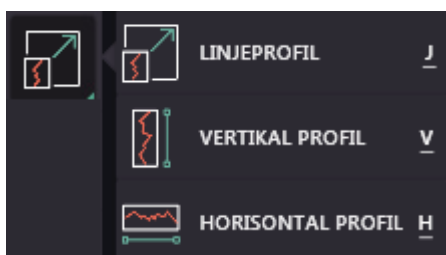

Viser gråtoneverdien av hver piksel langs en vertikal, horisontal eller brukerdefinert linje. Densitetsprofiler brukes til å finne områder med piksler som har lignende gråtoneprosent. Det kan brukes til å bestemme spredningen hos områder med patologi og for å finne andre områder i bildet med tilsvarende egenskaper. Akkurat som med de andre måleverktøyene i Onepix kan du skrive ut bildet med gjeldende densitetsprofil gjennom snarveien Ctrl + P eller klikk på utskriftsknappen i verktøymenyen i Zoom-vinduet.

LINJEPROFIL

For linjeprofiler klikker du én gang på bildet for å velge startpunktet for linjen, hold nede museknappen og dra linjen så lang som du ønsker det. Når du slipper knappen vises profilen.

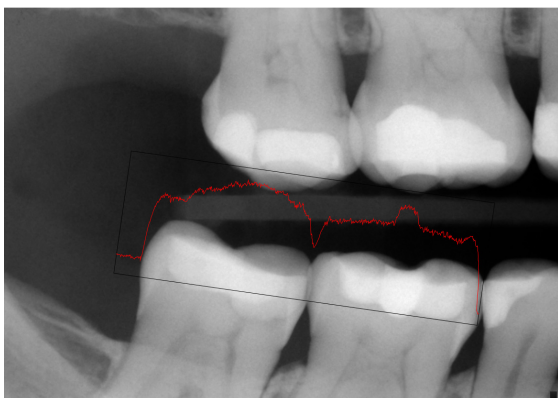


VERTIKAL PROFIL

For vertikal profil, klikk på en piksel hvor som helst i bildet for å skape en densitetsprofil på bildet som måler alle piksler i linjen.




HORISONTAL PROFIL

For horisontal profil, klikk på en piksel hvor som helst i bildet for å skape en densitetsprofil på bildet som måler alle piksler i linjen.

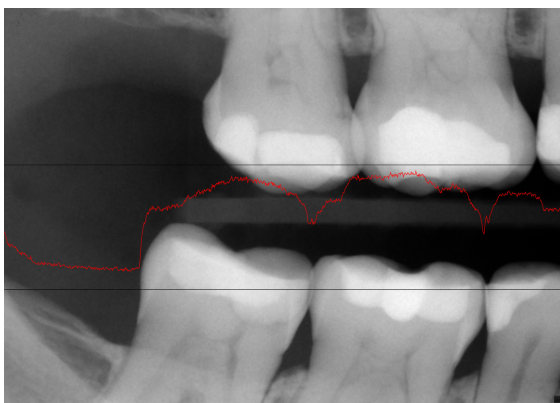

KOMMENTAR

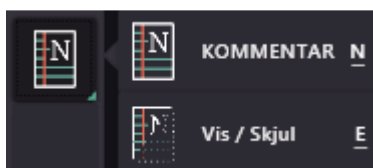

Legger til kommentarer med flagg i et bilde. Kommentarer med flagg kan legges til når som helst i et bilde som er åpnet i Zoom-vinduet. Musepekeren endres til en pil. Klikker du i bildet vises dialogboksen, som vist nedenfor.

LEGG TIL NY KOMMENTAR

OK

AVBRYT

HJELP

I dialogboksen Legg til ny kommentar kan du legge inn notatteksten. Her får du forslag med de mest vanlige kommentarene så snart du begynner å skrive. Bruk pil ned og trykk Enter eller klikk på noen av forslagene hvis du ønsker å bruke det. Ellers kan du bare fortsette å skrive det du ønsker å skrive i stedet.


LEGG TIL NY KOMMENTAR

Ke

Keram

OKAVBRYTHJELP

Når du er ferdig med kommentaren, klikker du på OK. Dette vil lukke dialogboksen, kommentaren er tildelt et nummer og teksten er lagret. At det er en kommentar i bildet vises som en liten pil og kommentarikonet. Kommentarteksten vises når du beveger musen over den.

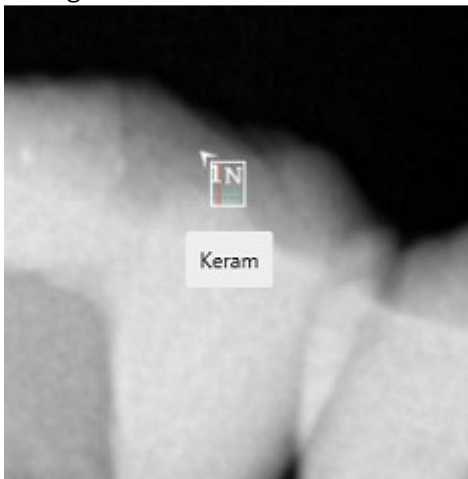

For å slette eller redigere en kommentar:

1. Pass på at du har klikket på og aktivert kommentarverktøyet.
2. Klikk deretter på kommentaren i bildet. Du vil da se denne dialogboksen.

REDIGERE MERKNAD

Keram

OKSLETTHJELP


3. Endre teksten og klikk på OK for å redigere.
4. Klikk på SLETT for å slette kommentaren.

Husk at du bare kan opprette, endre eller slette kommentarer på bilder som er tatt samme dag. Bilder som er eldre enn en dag er låst for redigering og kan bare låses opp via Onepix Admin-programvaren.


VIS/SKJUL

Med denne funksjonen kan du vise/skjule kommentarmarkører i bildet. Kommentarene er skjult bare mens du fortsatt er i bildet. Velger du å lukke bildet for så å åpne det i Zoom-vinduet igjen, vil kommentarene vises igjen.


TEGNE

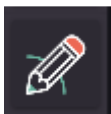

Tegneverktøyet er et verktøy for å legge til frihåndsnotater for eksempel i røntgenbilder.

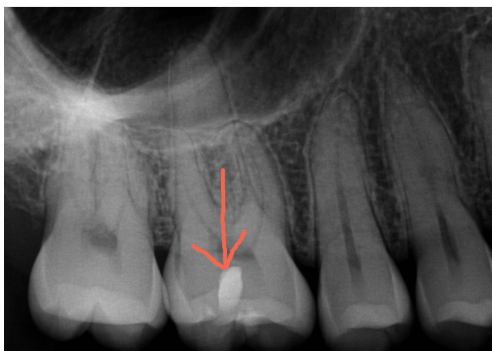

Når et tegneverktøy er forhåndsvalgt kan du høyreklikke i bildet for å få opp valgene som er tilgjengelige for verktøyet.

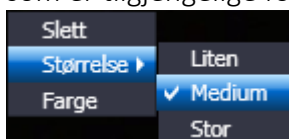

1. Velg Slett for å fjerne alt som er tegnet i bildet.
2. I Størrelse kan du velge bredden på tegneverktøyet, som standard er det Medium som er forhåndsvalgt.
3. Farge betyr at du kan endre fargen tegneverktøyet skal bruke. Du kan tegne med en hvilken som helst farge i Windows-paletten, fargen brukes på alle notatene i bildet.

FULLSKJERM



Ønsker du å skjule all informasjon i Zoom-vinduet unntatt bildet, klikker du på Fullskjerm. Fullskjermsmodus maksimerer bildet ved å forstørre det slik at det fyller hele skjermen. For å gå tilbake til Zoom-vinduet, klikker du på Lukk-knappen øverst til venstre eller trykk på Esc-tasten.

ROTERE



Med disse verktøyene kan du endre bilderetningen. I noen tilfeller kan funksjonen brukes for bilder som lastes ned til feil bildeboks. Normalt roteres bildene automatisk i Onepix til riktig retning basert på visningen, noe som vanligvis er nok. I andre tilfeller kreves ytterligere endringer i retning. Alle endringer vises som lagret i HISTORIKK til høyre for bildet.

Det er fire måter å endre retningen på et bilde:

- **ROTERE HØYRE**
Roterer bildet 90 grader med klokka.
- **ROTERE VENSTRE**
Roterer bildet 90 grader mot klokka.
- **SPEILVEND VERTIKALT**
Snur bildet slik at det blir speilvendt vertikalt.
- **SPEILVEND HORIZONTALT**
Snur bildet slik at det blir speilvendt horisontalt.



Merk!


Om innstillingen "Speilvend vertikalt" og "Speilvend horisontalt" brukes, kommer bildene til å bli vist speilvendt. Om bildet hentes opp- ned til en serie skal innstillingen "Rotere høyre" eller "Rotere Venstre" brukes.

SKRIV UT




Skriver ut det aktuelle bildet i Zoom-vinduet. Det utskrevne bildet inneholder de forbedringene og alternativene som er brukt (kontrast, fargevalg, osv.). Endringene vises på bildet i den utskrevne rapporten, selv om endringene ikke er lagret ennå. Du kan også velge å inkludere informasjon om pasienten, tannlege, undersøkelse og bilde i utskriften.

INFO

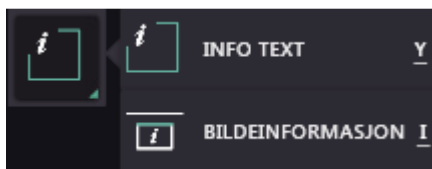

INFOTEKST

Klikk her for å vise eller skjule teksten i bildet som viser sammenfattende bildeinformasjon.

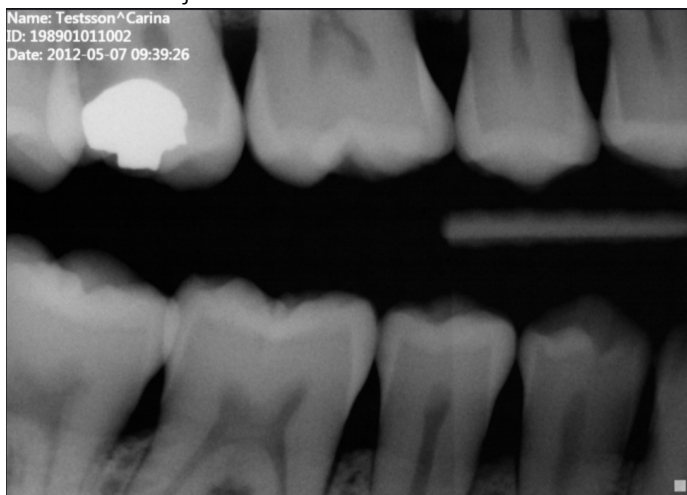

BILDEINFORMASJON

Med denne funksjonen kan du få frem alle DICOM-koder som er tilgjengelige for bildet. Dersom det er behov for det, kan du kopiere alle disse kodene til utklippstavlen i Windows. Videre kan du lagre eller sende denne informasjonen ved hjelp av Ctrl + V for å lime inn informasjonen i en tekstfil eller lignende.

INFORMASJON				
Tag	Attribute	Value	VR	Length
(0008,0008)	Image Type	ORIGINAL\PRIMARY	Code String	16
(0008,0016)	SOP Class UID	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4	Unique Identifier	30
(0008,0018)	SOP Instance UID	1.2.840.114244.400.5.1727866017.1263447658.3783	Unique Identifier	48
(0008,0020)	Study Date	20170315	Date	8
(0008,0021)	Series Date	20170315	Date	8
(0008,0022)	Acquisition Date	20170315	Date	8
(0008,0023)	Content Date	20170315	Date	8
(0008,0030)	Study Time	090543	Time	6
(0008,0031)	Series Time	091302	Time	6
(0008,0032)	Acquisition Time	082711	Time	6
(0008,0033)	Content Time	082711	Time	6
(0008,0050)	Accession Number		Short String	0
(0008,0060)	Modality	OT	Code String	2
(0008,0070)	Manufacturer	Sirona Dental, Inc.	Long String	20
(0008,0080)	Institution Name		Long String	0
(0008,0081)	Institution Address		Short Text	0
(0008,0090)	Referring Physician's Name		Person Name	0
(0008,1010)	Station Name	MIRNES	Short String	6
(0008,1030)	Study Description	Kamera Klassisk	Long String	16
(0008,103E)	Series Description		Long String	0
(0008,1040)	Institutional Department Name		Long String	0
(0008,1050)	Performing Physician's Name		Person Name	0
(0008,1070)	Operators' Name		Person Name	0
(0008,1090)	Manufacturer's Model Name	Onepix	Long String	6
(0010,0010)	Patient's Name	Patient^Test	Person Name	12
(0010,0020)	Patient ID	19840220-4708	Long String	14
(0010,0030)	Patient's Birth Date		Date	0
(0010,0040)	Patient's Sex		Code String	0
(0010,1000)	Other Patient IDs		Long String	0
(0010,4000)	Patient Comments		Long Text	0
(0018,0015)	Body Part Examined		Code String	0
(0018,1020)	Software Version(s)	5.4.2.0	Long String	8
(0018,1164)	Imager Pixel Spacing	0.000000\0.000000	Decimal String	18
(0018,7004)	Detector Type	SCINTILLATOR	Code String	12
(0018,7006)	Detector Description	Digital Camera	Long Text	14
(0018,7008)	Detector Model	Unident Kortimport	Long Text	18
(0018,700A)	Detector ID		Short String	0
(0018,700C)	Date of Last Detector Calibration		Date	0
(0018,700E)	Time of Last Detector Calibration		Time	0
(0018,7022)	Detector Element Spacing	0.000000\0.000000	Decimal String	18
(0018,702A)	Detector Manufacturer Name	Sirona Dental, Inc.	Long String	20
(0018,702B)	Detector Manufacturer's Model Name	Digital Camera	Long String	14
(0018,7030)	Field of View Origin	0\0	Decimal String	4
(0018,7032)	Field of View Rotation	0	Decimal String	2
(0018,7034)	Field of View Horizontal Flip	NO	Code String	2
(0020,000D)	Study Instance UID	1.2.840.114244.400.3.1727866017.1615785903.7597	Unique Identifier	48

AVBRYT

KOPIER TIL UTKLIPPSTAVLE

SIDEPANEL

Til høyre for bildet er det et panel der du kan foreta justeringer, se informasjon og status av bildet. I dette avsnittet beskriver vi ideen bak dem.

EKSPONERINGSKVALITET

Eksponeringskvalitet er der for å gi en vurdering av bildene på en visuell måte, ved å markere et område der bildeeksponeringen anses for å være optimal.

Eksponeringskvalitetsmåleren er tilgjengelig for røntgenbilder med 12-bits bitdybde eller høyere. Ønsker du å slå av eksponeringskvalitet, slik at informasjonen alltid er skjult, gå til Onepix innstillinger. Fjern merkingen i boksen for eksponeringskvalitet under Zoom-vinduet.




- Det grønne området i midten av måleren betyr at bildet ble optimalisert eksponert basert på teknikkfaktorene som ble brukt.

- Den lysegrå området til venstre betyr at bildet ble undereksponert, og at en endring av teknikkfaktorene vil forbedre bildekvaliteten.
- Det mørke området til høyre betyr det motsatte, at bildet ble overeksponert og at en endring av teknikkfaktorene vil redusere pasientdosen uten at bildekvaliteten blir verre.

FILTER

Er bildene tatt med en sensor som støtter filtre, vil disse være tilgjengelige i en nedtrekksmeny, som i bildeeksempelet nedenfor hvor Generell tannbehandling er forvalgt filter for Schick 33 / Fona sensorer fra Sirona. Hvordan man velger hvilket filter som skal vises som standard, kan du lese om i brukerhåndboken for den aktuelle sensoren.

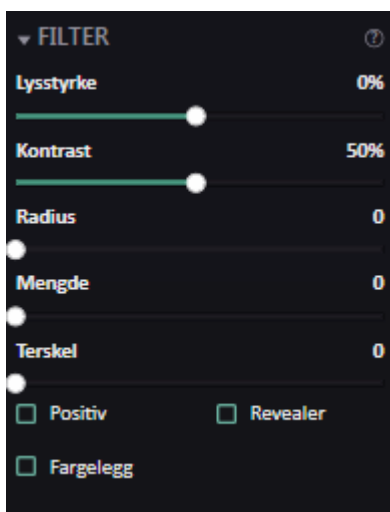

Merk!

Feilaktige innstillinger i Autofilter kan føre til et bilde som ikke er mulig å diagnostisere. Gå tilbake til originalbildet om du misstenker at et filter har forvrengt bildet.

SKARPHET

Skarphet er et bildeforbedringsfilter som er utviklet spesielt for Schick 33 og Fona-systemets bilder. I skarphet kombineres flere bildeoptimaliseringsfunksjoner, slik at kontrasten øker og detaljene vises bedre. Skarphet brukes automatisk på alle bilder som tas av Schick 33 eller Fona sensor. Hvilket skarphetsnivå som skal vises som standard kan du lese om i brukerhåndboken for den aktuelle sensoren. Merk at dersom du justerer bilde skarpheten med skarphetskontrollen lagres ikke endringene i bildet.



Før skarphet




Etter skarphet på 35 %

LYSSTYRKE/KONTRAST

Du kan enten bruke Lysstyrke-/Kontrastverktøyet til venstre for bildet, eller du kan bruke kontrollene på høyre side som er separate for Lysstyrke/Kontrast dersom du ønsker å finjustere. Uansett hvilket verktøy som brukes presenteres informasjonen i dette feltet.

USKARP MASKE

For bilder som ikke ble tatt med en sensor som har et skarphetsfilter kan du bruke filterkontrollene for Uskarp maske. Justering av kontrollene påvirker bildet umiddelbart, slik at du kan se resultatet. Det er ingen generell innstilling som kan brukes på alle bilder, men noe som du må justere for hver bildetype.

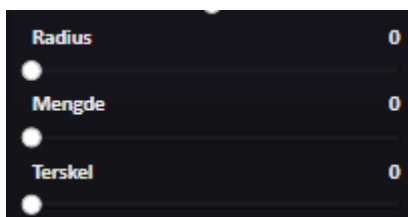


Uskarp maske består av tre kontroller som kalles for Radius, Mengde og Terskelverdi.

- Radius avgjør hvor stort område rundt konturene som skal påvirkes. Å øke verdien gjør at det mørkere eller lysere feltet sprer seg lenger bort fra konturen.

- Mengde styrer hvor mye konturkontrasten skal økes. Det vil si at jo høyere mengdeverdien er, jo mørkere respektive lysere blir konturens sider.
- Terskelverdi avgjør hvor stor forskjellen i toner må være for at programmet skal se noe som en kontur. Jo høyere verdien er, desto mer tydelige må konturene være for å bli gjort skarpere.
- Alle justeringer lagres under HISTORIKK med navnet Uskarp maske.

Nedenfor er eksempler på hvordan et bilde kan se etter justering av disse kontrollene.

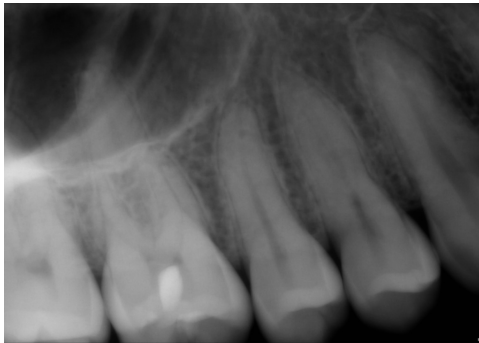

Før Uskarp maske



Etter Uskarp maske

REVEALER

Viser røntgenbilder med flere detaljer enn med lys/kontrast og bevarer tydeligheten med svært liten forekomst av forstyrrelser og gjenstander. I motsetning til andre bildekontrastverktøy som ikke bevarer mellomverdiene i et bilde, bruker Revealer hele røntgenbildets datavolum og forstørrer hver enkelt piksel. Ved at hver piksel behandles for seg, skaper Revealer tilgang til mer visuell informasjon og viser den på en måte som får små forskjeller i bildet til å fremstå tydeligere. Endringen blir brukt når du krysser av i Revealer-boksen. Fjern haken fra Revealer-boksen etter at du er ferdig med å gjennomgå bildet med mindre du ønsker det lagret.



Før Revealer



Etter Revealer


FARGELEGG

Påfører ett fargelag ved å kartlegge pikselverdiene fra 8-bits gråtoner til en 24-bits fargeskala.

Fargesetting er et ekstra verktøy for å identifisere potensielle problemområder i en undersøkelse, siden noen forskjeller er lettere å skille mellom i farger. Kryss av i boksen Fargesett. Juster fargen med kontrollene for kontrast og lysstyrke. Fjern merket i Fargesett-boksen etter at du er ferdig med å granske bildet dersom det ikke ønskes at bildet lagres.



Før fargesetting

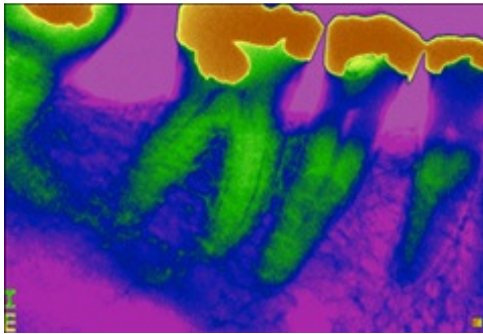

Etter fargesetting

POSITIV

Inverterer bildets gråtoner, slik at negative bilder vises som positive, og positive som negative. Kryss av i boksen Positiv for å bruke funksjonen. Fjern haken i Positiv-boksen etter at du er ferdig med å gjennomgå bildet, med mindre du ønsker det lagret.




Negativ



Positiv


HISTORIKK

Historikk holder styr på alle endringer i et bilde, og kan brukes til å fjerne disse ved å dobbeltklikke på Slett. Endringene vises en om gangen, og hver forbedring som brukes på et bilde kan fjernes, forutsatt at dette gjøres på samme dag som bildet er tatt eller lest inn. Bilder som er eldre enn en dag er låst for endringer, og kan bare låses opp via Onepix Admin hvis nødvendig.

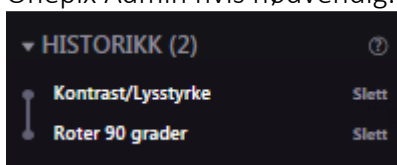

STILLINGER

Stillinger viser hvilke tenner det aktuelle bildet som vises i Zoom-vinduet forestiller. Er bildet tatt i riktig bildeboks i serien, vil denne informasjonen bli utfylt automatisk. Du kan klikke på hver tann for å legge til eller fjerne de tennene som ikke er vist på bildet. Endringer lagres i bildet bare hvis de er gjort på samme dag som bildet ble tatt. Alle bilder som er eldre enn en dag er låst og endringer i Zoom-vinduet blir ikke lagret.

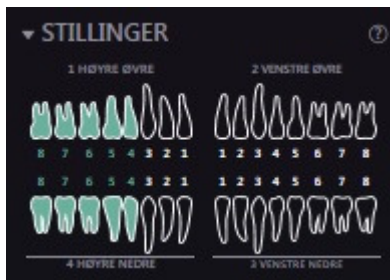


Merk!

Markerte tenner i tannstatusen er basert på informasjon lagt til ved innlesning av bildet. Dette kan avvike fra virkeligheten dersom bildet leses inn på feil posisjon i serien, eller om nødvendig manuell korrigering av tannstatusen ikke er utført etter eksponeringen.

NAVIGASJON

Under navigasjon vises undersøkelsesserien i miniformat. Tanken bak dette er at du enkelt skal kunne se hvilket bilde i serien du har i Zoom-vinduet og du kan enkelt velge et annet bilde i serien uten å måtte gå tilbake til undersøkelsesvinduet.

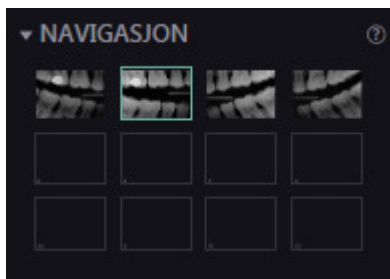

KORTKOMMANDOER I ZOOM-VINDUET

Kommandonavn

Lys/Kontrastverktøy
Forstørrelsesverktøy
Panoreringsverktøy

Tastatursnarvei

Ctrl + B
Ctrl + Z
Ctrl + M

Lommelykt	Ctrl + L
Måleverktøy	Ctrl + R
Mål Vinkel-verktøy	Ctrl + A
Omkalibrere verktøy	Ctrl + C
Linjeprofilverktøy	Ctrl + I
Vertikal profil-verktøy	Ctrl + V
Horisontal profil-verktøy	Ctrl + H
Kommentarverktøy	Ctrl + N
Vis / Skjul kommentar	Ctrl + E
Tegneverktøy	Ctrl + D
Rotere høyre	Ctrl + > (pil høyre)
Rotere venstre	Ctrl + < (pil venstre)
Speilvend vertikalt	Ctrl + K
Speilvend horisontalt	Ctrl + O
Fullskjerm	Ctrl + F
Skriv ut	Ctrl + P
Infotekst	Ctrl + Y
Bildeinformasjon	Ctrl + I


ONEPIX-INNSTILLINGER

Dette avsnittet gir informasjon om hvilke innstillinger du kan gjøre i Onepix-klienten. For å komme til innstillingene klikker du på ikonet som ser ut som et tannhjul øverst til høyre i programmet.



DEAKTIVERE LISENS

Øverst under innstillinger er lisens- og aktiveringsinformasjon.

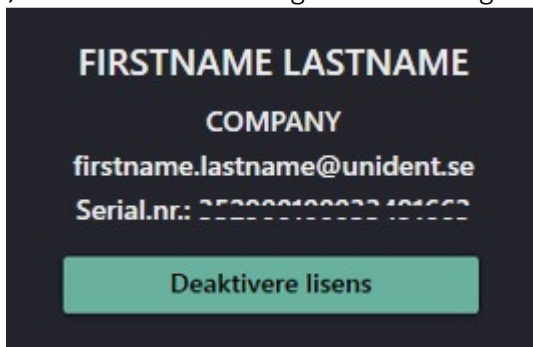

Ønsker du å skifte datamaskin kan du for eksempel deaktivere lisensen på den gamle datamaskinen og aktivere den samme lisensen på den nye datamaskinen etter installasjon av Onepix. Det er to måter å deaktivere lisensen på, avhengig av om datamaskinen er koblet til Internett eller ikke.

ONLINE DEAKTIVERING

Er datamaskinen tilkoblet Internett, dvs. er online, og du klikker på knappen Deaktiver Lisens, får du opp dialogboksen som vist nedenfor. Klikk på knappen for å deaktivere lisensen på denne datamaskinen.



OFFLINE DEAKTIVERING

Er datamaskinen ikke tilkoblet Internett, det vil si er frakoblet/offline, da får du følgende dialogboks i stedet. For å fortsette med deaktiveringen, klikk på teksten Offline Deaktivering.

OFFLINE DEAKTIVERING

Unable to find a network, please check your connection or use **OFFLINE DEACTIVATION**

Onepix deactivation.

Use this function to move license to another computer. When license is deactivated it can be activated on another computer. Please note that software will not return to trial mode when deactivating license.

Onepix will be closed after deactivation.

AVBRYT

DEAKTIVER LISENS >

Er du helt sikker på at det skal gjøres, klikk på Deaktiver Lisens i følgende boks, ellers klikk på Avbryt.

OFFLINE DEAKTIVERING

Onepix deactivation.

Use this function to move license to another computer. When license is deactivated it can be activated on another computer. Please note that software will not return to trial mode when deactivating license.

Onepix will be closed after deactivation.

AVBRYT

DEAKTIVER LISENS >

Kopier nøkkelen i neste vindu og gå til <http://onepixnorge.no/activate> på en datamaskin som er tilkoblet internett, og følg instruksjonene på siden. Ikke klikk på Avbryt i boksen under før du har fullført instruksjonene.

OFFLINE DEAKTIVERING

Onepix deactivation.

Use this function to move license to another computer. When license is deactivated it can be activated on another computer. Please note that software will not return to trial mode when deactivating license.

Onepix will be closed after deactivation.

Visit this URL

onepix.se/deactivate

DEACTIVATE BY USING THIS KEY

063417fdc40610da9d4f6a9c1c37d210e5c6ce6e25f878cbfe494eea876bf0 COPY

AVBRYT

DEAKTIVERA >

OBS: Det er viktig at du fullfører instruksjonene for å deaktivere lisensen. Du vil ikke være i stand til å aktivere lisensen på en annen datamaskin, hvis instruksjonene ikke blir fullført. Kontakt teknisk support ved spørsmål.

SPRÅK


Her kan du velge

- hvilket språk Onepix-klienten skal vises med.

SJEKK OPPDATERINGER

Onepix er i stand til å laste ned oppdateringer automatisk. Programmet varsler brukeren når oppdateringer er tilgjengelige. Her kan du stille inn:

- Om Onepix skal søke etter oppdateringer automatisk.
- Du kan også velge om du vil oppdatere litt tidligere enn normalt, det vil si så snart oppdateringen er kommet, ved å velge Velg i denne listen.

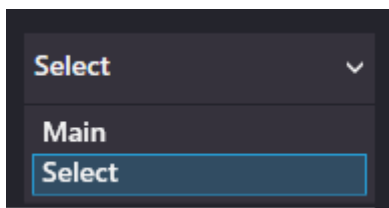

UNDERSØKELSESVINDUET

Her kan du velge bl.a.:

- Hvilken størrelse bildene skal ha i undersøkelsesvinduet (størrelsen er i piksler).
- QuickZooms vindusstørrelse kan også stilles inn her (størrelsen er i piksler).
- Valg om miniatyrbilder skal brukes i undersøkelsesvinduet eller ikke, og kvaliteten på disse i prosent.

TANNSTATUS

- Her kan du velge om tannnummeret skal vises eller ikke.

SERIEMALER

Her er innstillinger for maler, som f.eks.:

- Størrelse på maler, bredde og høyde (størrelse i piksler).
- Filbane till malfiler
- Kvaliteten på miniatyrbilder m.m.

ZOOM-VINDUET

I Zoom-vinduet finnes en del informasjon til høyre for bildet. Du kan selv bestemme hva som skal vises eller ikke vises. Det som skal vises skal du sette kryss ved, og fjerne kryss ved det som ikke skal vises. Noen valg som er tilgjengelige her er:


- Vis eksponeringsmåler
- Vis navigasjon
- Vis historikk osv.

INNLESING

Her finner du innstillinger for autotake, autofiltre osv.

- Autotake er funksjonen som aktiveres når du skal lese inn nye bilder i en serie. Her kan du stille inn hvilken farge autotake skal ha for start og stopp og hvor lenge det innleste bildet skal vises på skjermen før den går tilbake til serien/undersøkelsen for å ta et nytt bilde.
- Autofilter gir mulighet for å legge til bildejusteringer automatisk på bilder innlest med noen av Onepix' innlesingsmoduler. De bildejusteringene som kan gjøres er Histogramjustering, Medianfilter og Uskarp maske. Endringene som brukes på bildene lagres under HISTORIKK i Zoom-vinduet.

For å vise et eksempelbilde som forhåndsviser innstilte filtre, markerer du et bilde i undersøkelsesvinduet og går deretter til Onepix-Innstillinger og klikker på Rediger Autofilter.

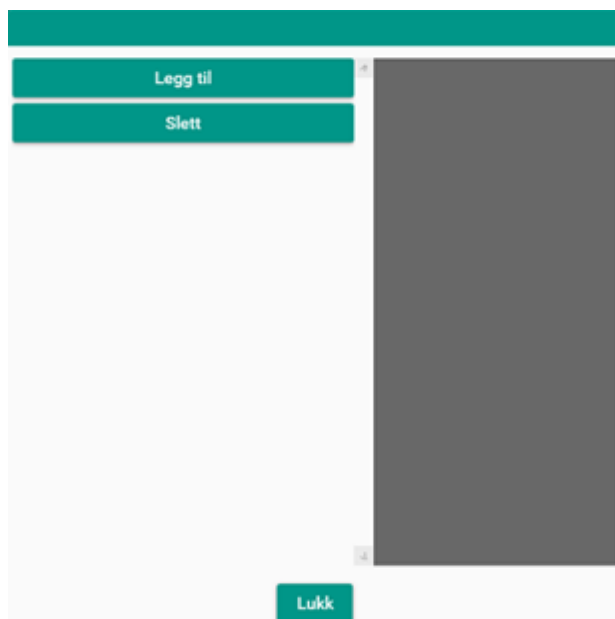

Opprett et filter ved å klikke på Legg til. Gi filteret et navn, TestFilter i eksemplet, og trykk deretter på OK.



1. Velg filteret som skal brukes eller stilles inn.
2. Histogrammet kan justeres automatisk ved hjelp av Autonivå. Klikk i avmerkingsboksen, og klikk deretter på pilen ved Histogram. Deretter krysser du av i avmerkingsboksen for Autonivå. For at automatikken skal virke må du noen ganger stille inn Lav terskelverdi eller Høy terskelverdi. Et slikt eksempel er om en sensor har klippet hjørner. Da må Lav terskelverdi settes til for eksempel 0,001 for å unnta disse svarte hjørnene fra beregningen. For å justere histogrammet manuelt, klikker du på pilen ved Histogram og krysser av i avmerkingsboksen for å aktivere filteret. Juster området ved å dra pilene til venstre og til høyre under histogrammet. For å justere Gamma, bruk pilen i midten.
3. For å legge til et Medianfilter, klikk på pilen ved Medianfilter og kryss av i avmerkingsboksen. Velg Radius ved å dra kontrollen til ønsket innstilling.
4. For å legge til et Uskarp maske-filter, klikk på pilen ved Uskarp maske-filter og kryss av i avmerkingsboksen. Velg Radius, Vekt og Grenseverdi ved å dra kontrollen til ønsket innstilling.
5. Filteret er nå opprettet og kan kobles til den valgte innlesingsmodulen i valget Bruk for.

Funksjonen Autofilter kan slås av og på under Onepix-innstillinger>Innlesing. Hvis du vil bruke Autofilter på et allerede innlest bilde som mangler disse filtrerene, klikker du på "Bruk på dagens bilde" i Autofiltervinduet.

**Merk!**

Feilaktige innstillinger i Autofilter kan føre til et bilde som ikke er mulig å diagnostisere. Gå tilbake til originalbildet om du misstenker at et filter har forvrengt bildet.

FILTER

Her kan du angi filbanen der filterinnstillingene vil bli lagret. Denne filbanen gjelder både Autofilter- og Søkefilterinnstillinger som er tilgjengelige i undersøkelsesvinduet.

INNSTILLINGER FOR MASKINVARE

Informasjon om installert maskinvare, for eksempel intraoral sensor, kamera, panorama. Innstillinger finner du ved å klikke på den grønne knappen for hver innlesingsmodus. Bruker du for eksempel intraoral sensor fra to forskjellige produsenter, kan dette sees her. Du kan også velge hvilken sensor som skal brukes som standard ved å klikke på stjernen i bildeeksempelet nedenfor.




Hvilke innstillinger som kan/skal gjøres, kan du lese om i brukerhåndboken for den aktuelle maskinvaren.

ONEPIX ADMIN

Dette avsnittet inneholder:

- Importer DICOM-undersøkelser og bilder
- Eksporter pasienter, DICOM-undersøkelser og bilder
- Separere, slette og rense bilder
- Vedlegge og gjeninnsette bilder
- Databasesøk, redigering og validering


Når du starter datahåndteringsverktøyet i Onepix Admin, enten via snarveien på skrivebordet eller via Onepix i Start-menyen, vises verktøyets tredelte skjerm i utgangspunktet uten innhold. For å se alle pasient-, undersøkelses- og bildeinformasjon som finnes i Onepix-bildedatabasen, klikker du Verktøy> Søk og deretter OK. Standardsøket gjøres per pasient, men hvis du først og fremst søker etter bilder eller undersøkelser, kan du velge noen av alternativene i menyen. Søker du etter en bestemt pasient, kan du også klikke på verktøyet "Kikkert".

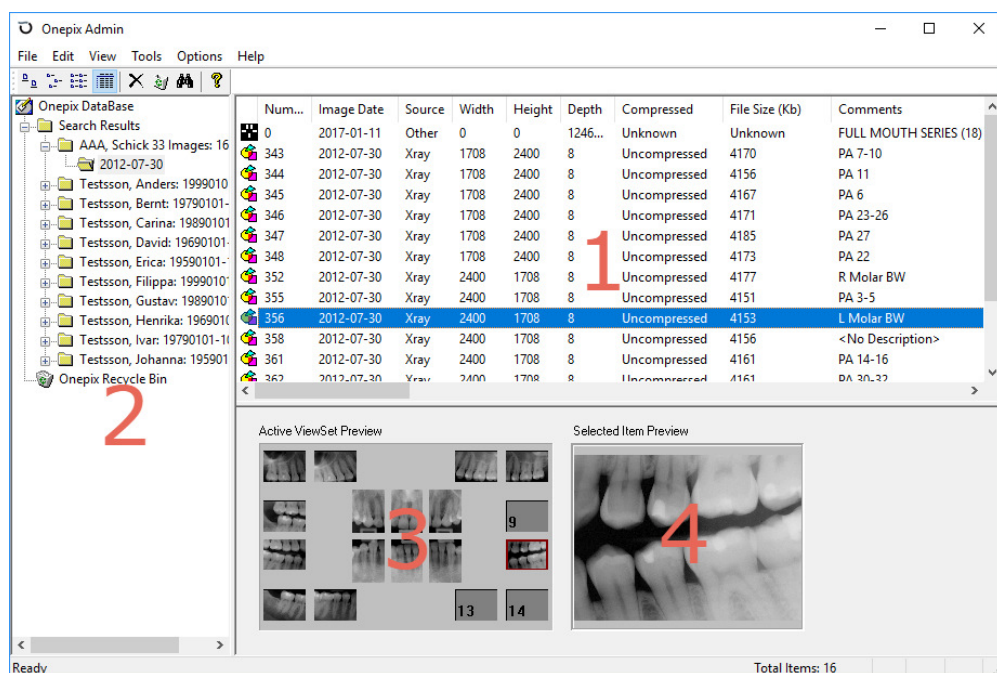

1. Område for pasient/undersøkelse/bilde
2. Søkeresultater og liste med pasient/undersøkelse
3. Område for undersøkelsesoversikt


4. Område for bildeoversikt

MENYEN ARKIV

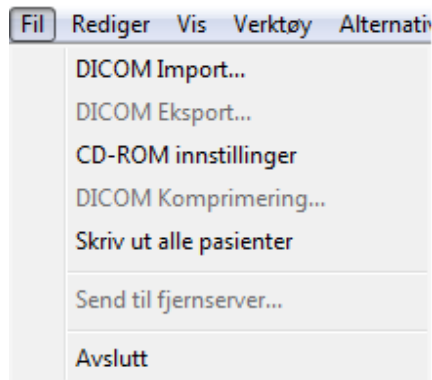


DICOM-IMPORT

Importer DICOM-undersøkelser og bilder til gjeldende database fra en annen enhet. Importkilden kan være en gyldig DICOM-fil eller et arkiv som er tilgjengelig via en filbane eller på en fysisk enhet. Onepix leser inn alle postene i et «DICOMDIR»-filoppsett i den gjeldende databasen.

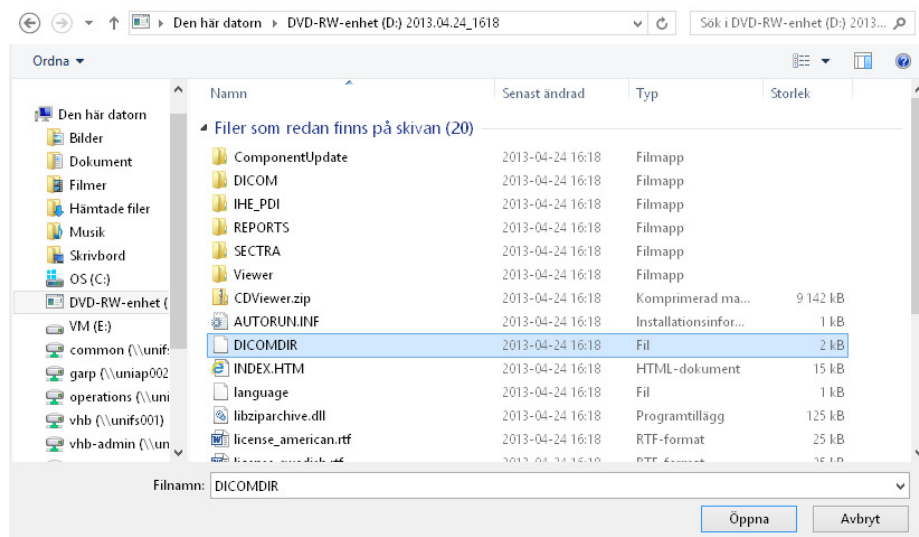


Hver post inneholder pasient-/undersøkelses-/bildeinformasjon, og tabellene i den tilsluttede databasen oppdateres på samme måte.

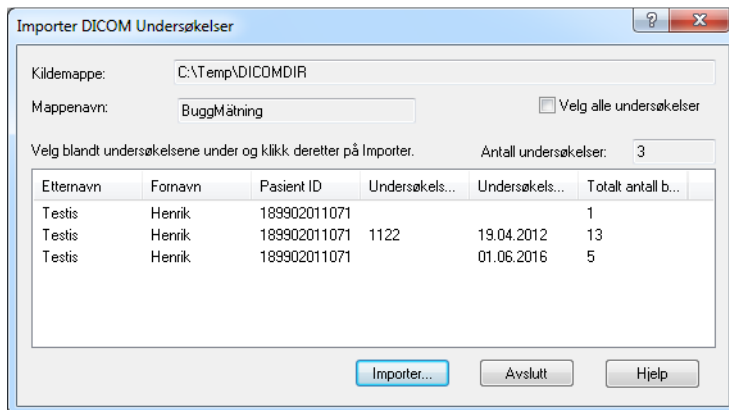

DICOM EKSPORT


Eksporterer pasientopplysninger, DICOM-undersøkelser og bilder til en annen enhet. Du har muligheten til å opprette et nytt lagringsarkiv for objektene på bestemmelsesstedet, eller bruke en mappe på et sted som allerede eksisterer. Du kan velge individuelle objekter, grupper av objekter (ved å velge mens du holder <SHIFT>-tasten nede) eller alle undersøkelser og bilder for en bestemt pasient (ved å velge Rediger> Velg alle eller med tastatursnarveien <CTRL><A>.

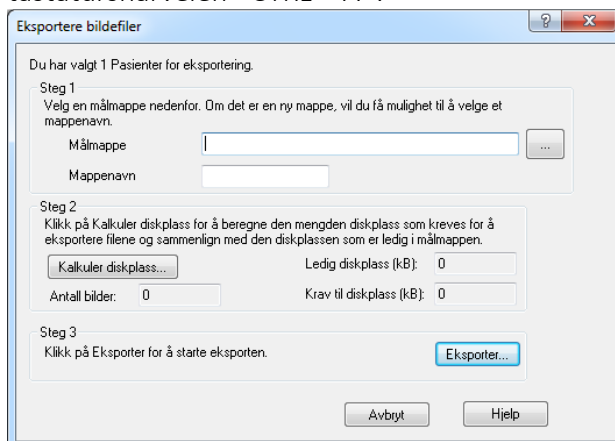

CD-ROM-INNSTILLINGER


Ønsker du å lese inn Onepix-undersøkelser fra en CD-ROM, bla gjennom bildemappen på platen, og klikk på knappen Installer. Husk at du bare kan lese inn undersøkelser som allerede har blitt konvertert til DICOM med denne handlingen.

Når Onepix-undersøkelser registreres i den gjeldende databasen oppdateres den med voluminformasjonen, slik at Onepix-systemet vet hvor undersøkelsene er.

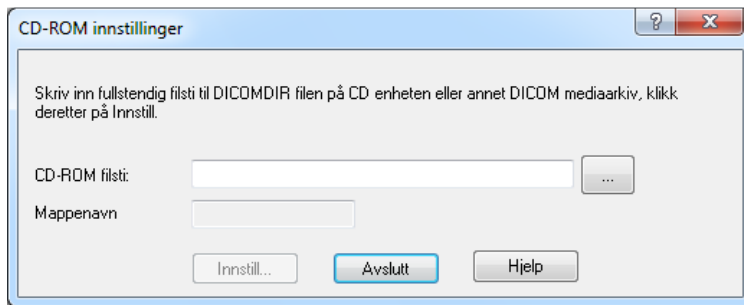

DICOM-KOMPRIMERING

Reduserer lagringsplassen for røntgenbilder, med eller uten tap under komprimeringen. Å komprimere røntgenbilder har mange fordeler, blant annet: økt effektivitet med henblikk på lagringsplassen for bilder, og bedre mulighet til å lagre på flyttbare medier.

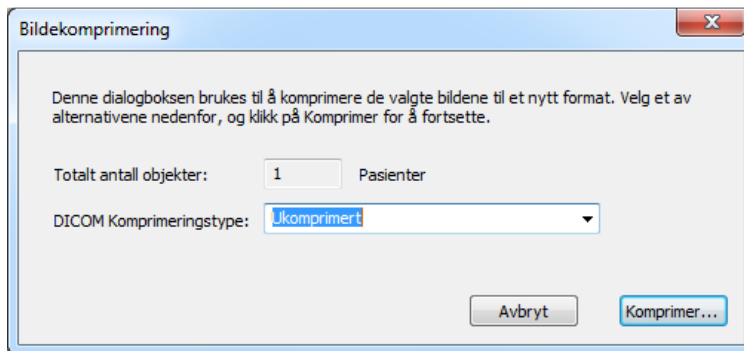

Følgende komprimeringsformater støttes:

- Lav komprimeringsgrad (høy kvalitet) med JPEG2000, som lagrer filer med en reduksjon i filstørrelsen på 2:1.
- Middels komprimeringsgrad (middels kvalitet) med JPEG2000, som lagrer bilder med en reduksjon i filstørrelsen på 5:1. Komprimeringsgraden tilsvarer Lead PQ1 i tidligere Onepix-versjoner.
- Høy komprimeringsgrad (lav kvalitet) med JPEG, som lagrer bilder med en reduksjon i filstørrelsen på 20:1.

SKRIV UT ALLE PASIENTER

Skriver ut en pasientliste.

Før du skriver ut en pasientliste, må du gjøre et søk. Åpne søkeboksen ved å klikke på Verktøy> Søk. Fordi pasientlisten er basert på søkeresultatene kan du eventuelt filtrere resultatene ved hjelp av alternativene i søkefeltet. Når du er ferdig, klikker du på OK. Når pasientlisten vises, klikker du på Arkiv> Skriv ut alle pasienter

SEND TIL EKSTERN SERVER

Viser en dialogboks der du kan lagre pasientdata på en ekstern plassering. Denne funksjonen er spesielt nyttig i en praksis med flere avdelinger hvor sikkerhetskopiering av pasientjournaler skjer til en sentral server, eller hvor journalene deles mellom flere forskjellige steder.

I praksiser med flere avdelinger kan mer enn én server brukes til journaler, en lokal server som arbeidsdatamaskinene er koblet til, og en ekstern server for arkivering og lagring. Du kan velge å sende alle undersøkelser for en bestemt pasient, eller bare undersøkelser og de bildene du ønsker.


Gjør slik hvis du vil sende alle undersøkelsene for en bestemt pasient:

1. Åpne mappen Alle pasienter i datahåndteringsverktøyet (Onepix Admin).
2. Velg den pasienten (pasienter) som filene du vil sende tilhører.
3. Klikk på Arkiv> Send til ekstern server. Velg en registrert ekstern server fra nedtrekksmenyen i dialogboksen, eller fyll ut tekstboksene hvis du ønsker å legge til en ny server.
4. Klikk på Bekreft for å bekrefte tilkoblingen til den eksterne serveren.
5. Når den eksterne serveren er klar, klikker du på Send.

Slik gjør du for å sende bildene for en bestemt undersøkelse:

1. Åpne mappen Alle pasienter, dobbeltklikk på pasientens navn i øvre høyre felt og dobbeltklikk på den undersøkelsen som inneholder bildene du vil sende.
2. Klikk på Arkiv> Send til ekstern server. Velg en registrert ekstern server fra nedtrekksmenyen i dialogboksen, eller fyll ut tekstboksene hvis du ønsker å legge til en ny server.
3. Klikk på Bekreft for å bekrefte tilkoblingen til den eksterne serveren.
4. Hvis den eksterne serveren er klar, klikker du på Send

REDIGER-MENYEN

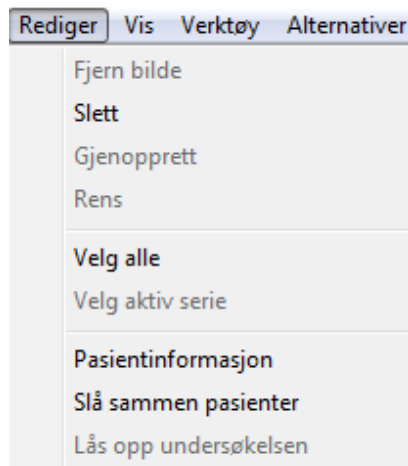


FJERNE BILDE

Separerer (fjerner) bilder fra sine opprinnelige visningsoppsett (eller serie). Velger du å separere et bilde, bevares det som en del av pasientundersøkelsen, men det vises ikke i serien. Separering gir større fleksibilitet i håndteringen av visningsoppsett, og gjør det mulig å beholde aktive og inaktive visningsoppsett og koblede og separerte bilder.

Bilder som du ikke vil vise, men ønsker å beholde, kan separeres fra sitt nåværende visningsoppsett. Et bilde som har blitt separert kan fjernes eller kobles tilbake til sitt opprinnelige eller et nytt visningsoppsett. I eksempelet på bildet i visningsruten er #5 separert fra visningsoppsettet. Dette ser man også gjennom at bildeobjektet har et svart kryss over bildeikonet.

Num...	Bilddatum	Källa	Bredd	Höjd
0	2009-05-28	Övrigt	0	1
1	2009-05-28	Rönt...	641	900
2	2009-05-28	Rönt...	641	900
3	2009-05-28	Rönt...	641	900
4	2009-05-28	Rönt...	641	900
5	2010-05-27	Rönt...	641	900
6	2010-05-27	Rönt...	641	900
7	2010-05-27	Rönt...	641	900

Aktiv karta förhandsgranskas

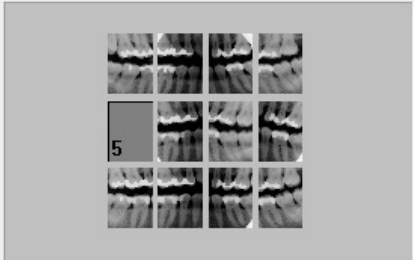

Ved separering av og sammenkobling av bilder kan du finpusse undersøkelsene så de inneholder relevante bilder i en passende serie. Det er vanlig at relevante bilder er spredt over flere undersøkelser, og dette gjør noen ganger sammenligninger vanskelige. Med Onepix Admin kan du kontrollere at det mest relevante visningsoppsettet er aktivt, og deretter dra og slippe bilder (fra øverst i høyre felt) til visningsoppsettet (nederst i høyre felt).


SLETT

Fjerner pasienter, undersøkelser eller bilder fra en bestemt enhet og flytter dem til papirkurven. Fjerning av pasientundersøkelser og bilder i Onepix håndteres med datahåndteringsverktøyet Onepix Admin i flere trinn, for å sikre at dine data ikke blir slettet ved et uhell.

Når en pasient slettes, tas alle undersøkelser, visningsoppsett og bilder av pasienten vekk (de flyttes til papirkurven i Onepix).

Når en undersøkelse er slettet, blir alle visningsoppsett og bilder fra undersøkelsen fjernet (flyttet til papirkurven i Onepix).

Fjernes et aktiv visningsoppsett, avregistreres alle bildene. Bildene kan registreres i et annet visningsoppsett eller slettes (flyttes til papirkurven i Onepix). Når et bilde slettes, avregistreres det og kan enten gjenregistreres til et annet visningsoppsett eller fjernes (flyttes til papirkurven i Onepix).

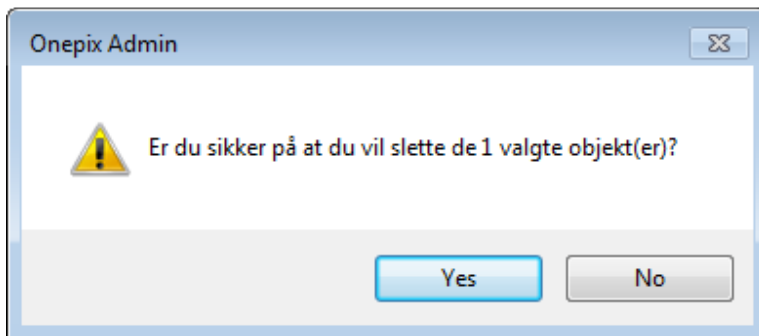

Fremgangsmåten for å fjerne pasienter, undersøkelser og bilder er den samme og beskrives nedenfor:

Start datahåndteringsverktøyet i Onepix (Onepix Admin).

Utfør følgende trinn i pasientlisten:

1. Velg en pasientmappe (i venstre felt) slik at listen over undersøkelser vises (i øvre høyre felt), eller velg en undersøkelsesmappe (i venstre felt) slik at listen over visningsoppsett og undersøkelser vises (i øvre høyre felt).
2. Velg pasienten, undersøkelsen, serien eller bildet du vil slette. (Pasienter kan bare slettes i øvre høyre felt, når mappen Alle pasienter er åpen.) Velger du å slette en pasient vil alle undersøkelser, serier og bilder som er knyttet til pasienten også bli slettet. Det samme gjelder for undersøkelser der visningsoppsett og bilder relatert til undersøkelsen skal slettes.
3. Klikk på Rediger> Slett. Dette flytter alle aktuelle elementer til papirkurven i Onepix (under mappen som inneholder pasientlisten i venstre felt).
4. Ønsker du å slette elementene helt, tømmer du papirkurven i Onepix Admin (Det anbefales ikke å tømme papirkurven med mindre du er helt sikker på at det er de rette elementene som slettes).

GJENOPPRETT

Gjenoppretter fjernede undersøkelser og bilder. Med datahåndteringsverktøyet er det mulig å gjenopprette slettede undersøkelser og bilder. Elementer som slettes med datahåndteringsverktøyet flyttes først til papirkurven i Onepix. (Papirkurven i Onepix er i det venstre feltet, etter listen over pasientmapper.)


Ønsker du å gjenopprette undersøkelser og bilder fra papirkurven i Onepix, åpner du papirkurven og velger de elementene du vil gjenopprette, eller klikk på Rediger> Marker alle hvis du vil gjenopprette alle. Deretter klikker du på Gjenopprett i Rediger-menyen.

Blir en pasient gjenopprettet, vil også alle undersøkelser, visningsoppsett og bilder av pasienten (fra papirkurven i Onepix) bli gjenopprettet. Dersom en undersøkelse gjenopprettes, blir også alle visningsoppsett og bilder i undersøkelsen gjenopprettet (fra papirkurven i Onepix). Dersom et aktivt visningsoppsett gjenopprettes (fra papirkurven i Onepix), blir alle bildene til visningsoppsettet registrert på ny. Dersom et bilde gjenopprettes (fra papirkurven i Onepix) blir det registrert på nytt i det aktive visningsoppsettet.

Har elementene blitt slettet fra papirkurven i Onepix kan det fortsatt være mulig å gjenopprette det fra Windows-papirkurven, forutsatt at dette utføres på datamaskinen der bildene er lagret lokalt. Å gjenopprette elementer herfra kreves noen ekstra trinn. En beskrivelse trinn for trinn av hvordan du gjenoppretter slettede elementer finnes under "Tøm".

RENS

Flytter slettede pasienter, undersøkelser og bilder fra papirkurven i Onepix til Windows-papirkurven. Når undersøkelser og bilder er tømt, slettes også databaseinformasjonen. Det bidrar til å sikre at bildefilene og databaseposterene stemmer overens.

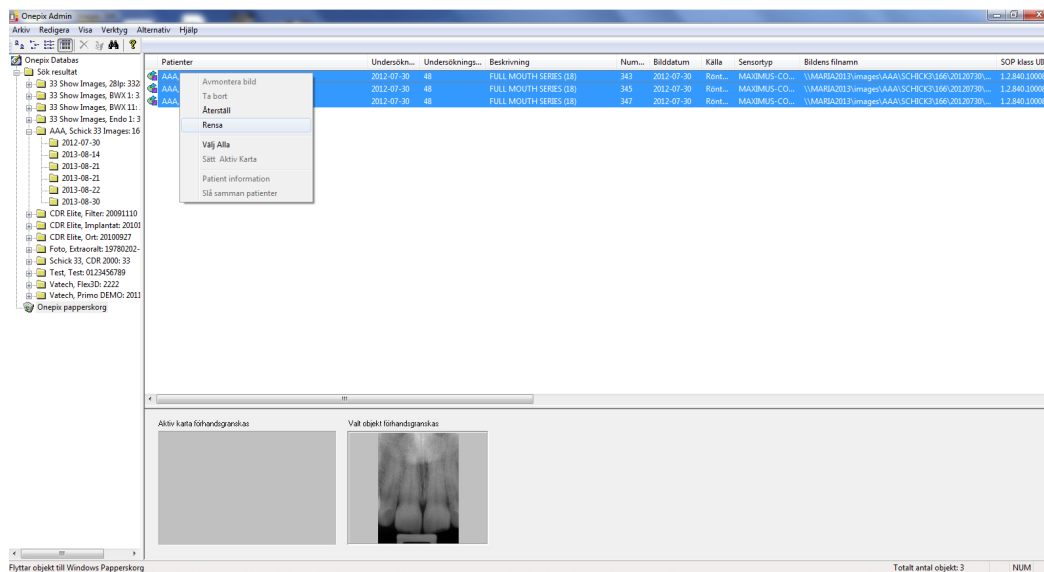

Gjør slik hvis du vil gjenopprette tømte bilder fra Windows-papirkurven.

1. Åpne papirkurven i Windows (vanligvis på Windows-skrivebordet).

2. Velg elementene du vil gjenopprette. I papirkurven i Windows er det ikke sikkert at undersøkelser og bildeobjekter er gruppert sammen, så du må velge alle elementene du vil gjenopprette.
3. Klikk på Gjenopprett for de valgte elementene.
4. Åpne datahåndteringsverktøyet i Onepix og klikk på Database valideringsveiviser i Verktøy-menyen. Når du aksepterer opprettes databaseindekser for de slettede elementene.
5. Følg instruksjonene i valideringsveiviseren for databaseintegritet (Database valideringsveiviser). I en av boksene i valideringsveiviseren viser bilder som mangler tilsvarende databaseposter. Her er bildene du vil gjenopprette.
6. Klikk på Legg til indekser og fortsett gjennom veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden.

SETT AKTIV MAL

Endrer en seriemal fra inaktiv til aktiv for undersøkelser med flere maler. Malen som er aktiv har et mørkt ikon. Den andre malen har et grått ikon. Når du veksler mellom maler, bør du ta hensyn til antall visningsruter i de ulike malene som er vist i følgende eksempel.

Undersøkelsen nedenfor har to maler. Den aktive malen har 15 bilder i 26 visningsruter; den andre malen (for tiden inaktiv) har 12 visningsruter. Velger du å endre status for malene og gjøre den inaktive til aktiv, vil det ikke være nok visningsruter i malen med 12 ruter.

Det ville medføre at tre av bildene ble separert, noe som betyr at de ville bli lagret i undersøkelsen, men ikke vist i den aktuelle malen. For å unngå problemet når du arbeider med flere maler, sørg for at den andre malen (den du vil gjøre aktiv) har nok visningsruter for antall bilder i den aktuelle malen (den som skal gjøres inaktiv).

Num...	Bilddatum	Källa	Bredd	Höjd	Djup	Komprimerad	Filstorlek (kb)
0	2015-09-11	Övrigt	0	1	1246...	Okänd	Okänd
0	2015-09-11	Övrigt	0	0	1246...	Okänd	Okänd
1	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
3	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
4	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
6	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
5	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
7	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
8	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
10	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
20	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
21	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
23	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
22	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	567
24	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
25	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
26	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566

Aktiv karta förhandsgranskas

Valt objekt förhandsgranskas

PASIENT-/UNDERSÖKELSEINFORMASJON

Gjør det mulig å endre pasient- og undersøkelsesopplysninger. Pasient- og undersøkelsesinformasjonen utgjør viktig informasjon i Onepix. Til tross for dette, kan det noen ganger være nødvendig å sjekke den for å sikre at databaseindeksene er i samsvar med pasient- og undersøkelsesinformasjonen. Å redigere pasientinformasjon i datahåndteringsvinduet gjør det enkelt å oppdatere og/eller klargjøre pasientinformasjonen i databasen.

Søk etter pasienten i Onepix' database via verktøyet "kikkert". Uthev pasienten i listen over søkeresultater> velg pasientinformasjon under menyen Rediger.

Endringer i pasientinformasjon spres automatisk gjennom alle undersøkelser og bilder for den aktuelle pasienten. Endringer i undersøkelsesinformasjonen spres på samme måte, og alle bildene i den endrede undersøkelsen oppdateres.

Pasientinformasjon

Etternavn:

Fornavn:

Pasient ID:

Alternativ ID:

Fødselsdato: Kjønn:

Kommentar:

? OK Avbryt Hjelp

SLÅ SAMMEN PASIENTER

Slå sammen undersøkelsene i to forskjellige pasientjournaler. Å slå sammen undersøkelsene kan være en enkel måte å holde databasen oppdatert på. Funksjonen kan brukes til å slå sammen studier, for eksempel hvis en pasient har giftet seg og skiftet etternavn, slik at eldre undersøkelser kombineres med de nyere. Du kan velge å slå sammen alle undersøkelser for en viss pasient, eller et utvalg av pasienter.

Slå sammen undersøkelser

Denne funksjonen brukes for å slå sammen undersøkelser fra valgte pasienter med en annen eksisterende pasient.

Testsson, Anders, ID: 199901011001, 07.11.2005, B. STÅENDE BITEw/ING.

Testsson, Anders, ID: 199901011001, 28.05.2009, B. STÅENDE BITEw/ING.

Testsson, Anders, ID: 199901011001, 16.08.2012, B. STÅENDE BITEw/ING.

Testsson, Anders, ID: 199901011001, 11.09.2015, B. STÅENDE BITEw/ING.

Etternavn:

Fornavn:

Pasient ID:

Søk

Velg målpasient og klikk på Slå sammen.

Etternavn	Fornavn	Pasient ID	Fødselsdato	Kommentar
-----------	---------	------------	-------------	-----------

Hjelp

Avbryt

Slå sammen

Gjør slik om du ønsker å slå sammen alle undersøkelser for en pasient:

1. Åpne mappen Alle pasienter i datahåndteringsverktøyet (Onepix Admin).
Alt. Velg verktøyet "Kikkerten" og søk fram pasienten der undersøkelsene skal flyttes fra.
2. Marker pasientens navn i det øverste høyre feltet. (Ved å markere pasienten, angir du hvilket sted du vil at undersøkelsene skal flyttes fra.)
3. Klikk på Rediger> Slå sammen pasienter. Velg målpasient i dialogboksen (det stedet du vil flytte undersøkelsene til).
4. Klikk på Slå sammen hvis du vil flytte undersøkelsene til målstedet.


Gjør slik om du vil slå sammen noen undersøkelser for en viss pasient:

1. Åpne mappen Alle pasienter i datahåndteringsverktøyet (Onepix Admin). Alt. Velg verktøyet "Kikkerten" og søk fram pasienten *der undersøkelsene skal flyttes fra*.
2. Dobbeltklikk på pasientens navn i feltet oppe til høyre. (Når du viser undersøkelsene for den markerte pasienten, kan du deretter velge hvilke undersøkelser du vil flytte derfra.)
3. Klikk på Rediger> Slå sammen pasienter. Velg målpasient i dialogboksen (det stedet du vil flytte undersøkelsene til).
4. Klikk på Slå sammen dersom du vil flytte undersøkelsene til målstedet.

LÅS OPP UNDERSØKELSE

En undersøkelse/serie som er eldre enn en dag vil være låst for all redigering i Onepix 2.0. Dersom du av en eller annen grunn må låse opp en undersøkelse, markerer du den undersøkelsen det gjelder og velger Lås opp undersøkelsen. Undersøkelsen vil automatisk gå tilbake til låst posisjon neste dag.

MENYEN VERKTØY

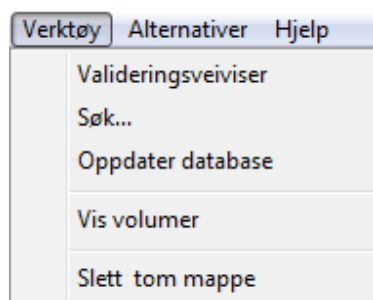


DATABASE VALIDERINGSVEIVISER

Kontrollerer dataintegriteten hos den pasienten og bildeinformasjonen som lagres i databasen. Veiviseren for databaseintegritet (Valideringsveiviseren) går gjennom følgende kontrolltrinn:

- Identifiserer plasseringen til lagrede bilder
- Identifiserer bildefiler uten tilsvarende databaseindeks
- Identifiserer databaseindekser uten tilsvarende bildefil
- Legger til databaseindekser for bildefiler som savnes.

Det kan finnes mer enn en filbane eller plass for bildelagring i systemet, men kun en filbane kan kontrolleres av gangen. Når den aktuelle filbanen er godkjent i veiviseren kan bilder som ikke er knyttet til en tilsvarende databaseindeks identifiseres. I så fall kan du velge å enten fjerne bildene eller legge til indekser for bildene automatisk. Veiviseren oppdager også om det savnes databaseindekser. Disse kan legges til i databasen, eller slettes.

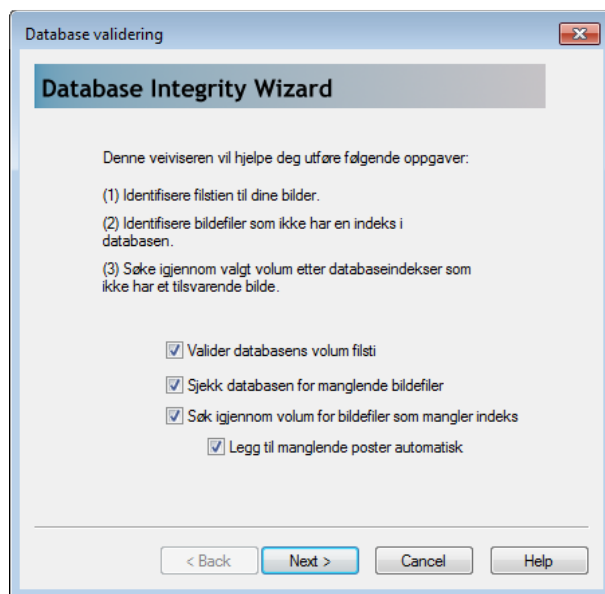

SØK

Utfør tilpassede søk på pasient- og undersøkelsesnivå. Dialogboksen Søk tilbyr tre ulike måter å hente informasjon i databasen på: per pasient, undersøkelse eller bilde, med hjelp av de tilpassede feltene i dialogboksen.

Velg enten Pasienter, Undersøkelse eller Bilder i nedtrekksmenyen og angi så mye eller lite informasjon i feltene som du trenger for å filtrere resultatet. Når du klikker på OK, hentes den informasjonen som tilsvarer de søkeparametrene du anga.


OPPDATERE DATABASEN

Sender en forespørsel til den aktuelle databasen om å hente den nyeste pasient- og bildeinformasjonen. I Onepix fungerer klienter og servere som ulike programmer. Onepix-servere tar imot forespørsler om bildelagring og svarer på spørsmål og forespørsler om henting fra en eller flere Onepix-klienter. Selv om Onepix-klienter og -servere samarbeider ved utveksling av pasient-, undersøkelses- og bildeinformasjon, vises ikke alltid oppdateringer av en Onepix-klient på andre klienter, til tross for at de er koblet til samme server.

Dersom du klikker på Verktøy> Oppdater database, henter klienten den nyeste informasjonen fra serverens database. Pasientundersøkelser oppdateres på serveren i slutten av Onepix-økten. Det er viktig å huske om den informasjonen du forsøker å hente er lagt til av en annen Onepix-klient. For å sikre at informasjonen som legges til på en viss klient lagres i databasen, må du lukke Onepix-økten på den aktuelle datamaskinen.

VIS VOLUMER


Voluminformasjon lagres i Onepix-databasen for å identifisere filbaner der bilder blir lagret i systemet. Trenger du å endre voluminformasjonen, for eksempel legge til, endre eller slette et bildearkiv, kan du gjøre det med hjelp av volumredigeringsverktøyet.

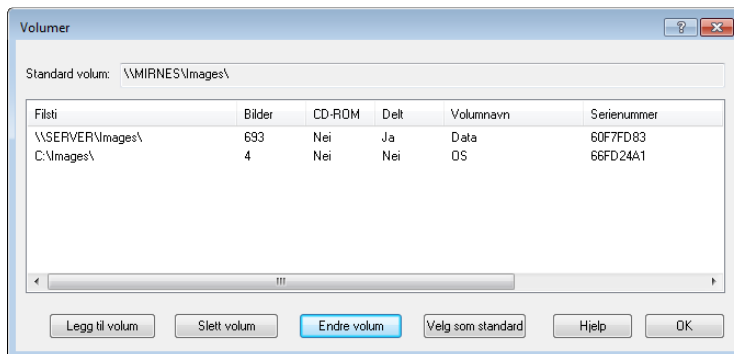

Husk at forandringer i filbanen for volumet kan påvirke lokalisering og henting av bilder i Onepix. Vi anbefaler at du ikke gjør noen volumendringer uten hjelp eller instruksjoner fra kvalifisert supportpersonell.

SLETT TOM MAPPE


Sletter automatisk tomme mapper i bildevolumet. Bare velg volumet som skal behandles, og klikk deretter på Slett tom mappe.

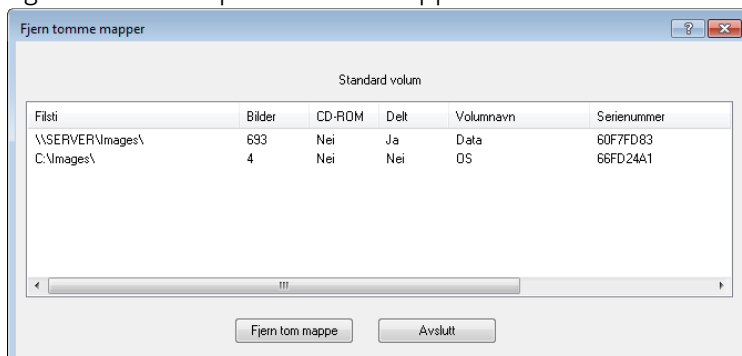

MENYEN ALTERNATIVER


EGENSKAPER

Velger du dette alternativet blir en kolonne lagt til pasient-/undersøkelses-/ bildeområdet med det sammenlagte antallet undersøkelser for hver undersøkelse, eller det totale antallet bilder for hvert visningsoppsett.

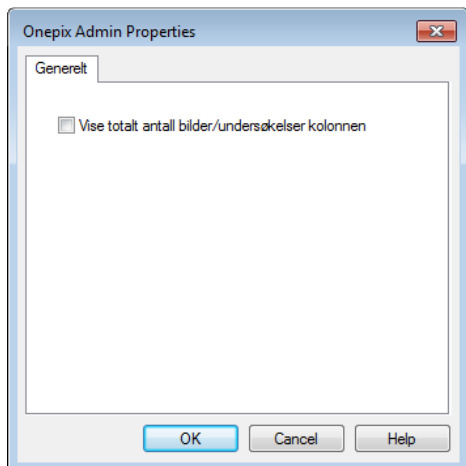

DATABASE

Denne kan brukes for å teste tilkoblingen til pasientdatabasen, for å vise aktuell filbane til bildemappen der røntgenbildene lagres og for å konfigurere databasen.

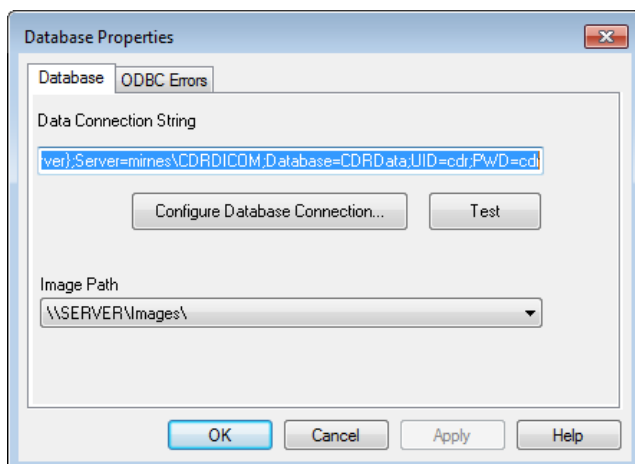

Konfigurasjon av databasetilkoblingen gjøres via knappen Konfigurer Databasetilkobling

Configure Database Connection

Enter the name of the Server:
(Click dropdown to search for servers.)

SERVER

☐ Connect with my Windows login credentials

Username: opx

Password: ●●●

☐ Show Advanced Options

Test Connection

OK Cancel

INSTALLASJON

SYSTEMKRAV

Systemkrav for Onepix finnes nedenfor. Onepix-programmet installeres med en av følgende konfigurasjoner: Frittstående arbeidsstasjon med Onepix for enkeltbrukere (Onepix frittstående) eller Nettverk med flere arbeidsstasjoner med Onepix for flerbrukere (Onepix klient/server). Vi anbefaler å bruke dedikerte servere for lagring og henting av bilder.

KLIENT

- Windows 10 x86, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x86, Windows 7 Pro x86 SP1 och Windows 7 Pro x64 SP1
- Intel Core 2-processor eller kraftigere
- 4 GB RAM
- 256 MB-grafikkort
- Intel USB-chipsett med minst to USB 2.0-porter (USB 1.1 støttes også).

SERVER

Finnes det allerede en eldre SQL-instans som heter CDRDICOM, oppgraderes bare databasen, slik at den eksisterende SQL-instansen kan bli der for å unngå nyinstallasjon. Ved nyinstallasjoner stilles følgende krav til datamaskinen:

- Windows Server 2012 x64, Windows 10 x64 og Windows 8 x64
- TCP/IP-nettverksprotokoll (for Onepix-servere)
- Intel Core 2-processor eller kraftigere
- 4 GB RAM (anbefales)
- 500 GB harddisk (anbefales).

KOMPATIBEL MASKINVARE

* Kontakt leverandøren for detaljerte opplysninger om hvilke modeller som er compatible med hvert operativsystem.

Schick by Sirona

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
Schick 33	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Schick Elite	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schick Wifi	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CDR Remote HS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CDR Wireless SDX	Ja					
CDR 2000	Ja					
CDR iPAN	Ja					
CDR PanElite	Ja					
USB Cam4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB Cam2	Ja					
USB Cam	Ja					

Vatech

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
PaXPrimo	Ja	Ja				
PaXDuo3D	Ja	Ja				
VcapSW	Ja	Ja				

Morita

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
IC-5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veraview Epocs	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

ImageLevel

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
MDX-3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Acteon

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
Sopro USB cameras	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

IC-Lercher

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
L-Cam USB – Empia Chipset	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
L-Cam USB – Syntek Chipset	Ja					

Kavo Kerr

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
SCANORA 3D, SCANORA 3DX	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CRANEX 3D, CRANEX 3DX	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OP300, OP300 MaXio	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KaVo Pan eXam Plus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DIGORA Optime (all models)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EXPRESS, EXPRESS Origo	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KaVo Scan eXam, KaVo Scan eXam Plus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CRANEXTM Novus, CRANEXTM Novuse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OP30	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KaVo Pan eXamTM	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OP200 D, OC200 D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DIGORA Toto	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SNAPSHOT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Extraorala kameror

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
Nikon D7500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D7200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D7100	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D7000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D700	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D610	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D5100	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D300s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D300	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D90	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nikon D80	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fuji FinepiX S5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Carestream/Kodak

	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
RVG 5100 / 6100 / 6500	Ja	Ja		Ja		Ja
RVG 5200 / 6200	Ja	Ja		Ja		Ja
CS 8100 Pan/3D/SC		Ja		Ja		Ja

CS 9000 Pan/Ceph/3D	Ja	Ja		Ja		Ja
CS 9300 Pan/Ceph/3D	Ja	Ja		Ja		Ja
CS 7200	Ja	Ja		Ja		Ja
CS 7400	Ja	Ja				Ja
CS 7600	Ja	Ja		Ja		Ja
Dürr VistaEasy						
	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
VistaScan phosphor plate scanners *	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VistaRay sensors *	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VistaCam cameras *	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Planmeca						
	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
DIDAPI & 2D Image Capture *	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dixi USB, PCI Devices *	Ja	Ja				
Twain						
	Win 7 32 bit	Win 7 64 bit	Win 8.1 32 bit	Win 8.1 64 bit	Win 10 32 bit	Win 10 64 bit
Twain	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja


SERVER-INSTALLASJON

Onepix Server-pakken installerer følgende:

- En SQL-server 2016 Express med instansnavnet ONEPIX
- En tom database opprettes med navnet OnepixDB
- Onepix Admin programvare
- Onepix Server programvare og tjeneste

Last ned Onepix Server og følg instruksjonene nedenfor. Åpne mappen der Onepix ble lagret etter nedlasting og kjør Onepix Server Setup.exe.


Klikk på NEXT

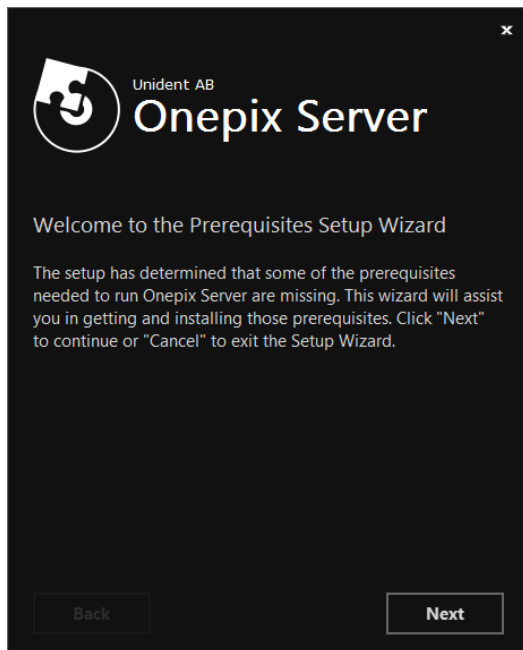


Programmet vil automatisk oppdage hvilke komponenter som må installeres. Men bare kryss av eller fjern merkingen fra de delene du er sikker på du trenger eller ikke trenger å installere. Klikk på NEXT.




Les og kryss av i Lisensvilkårene og klikk på NEXT.

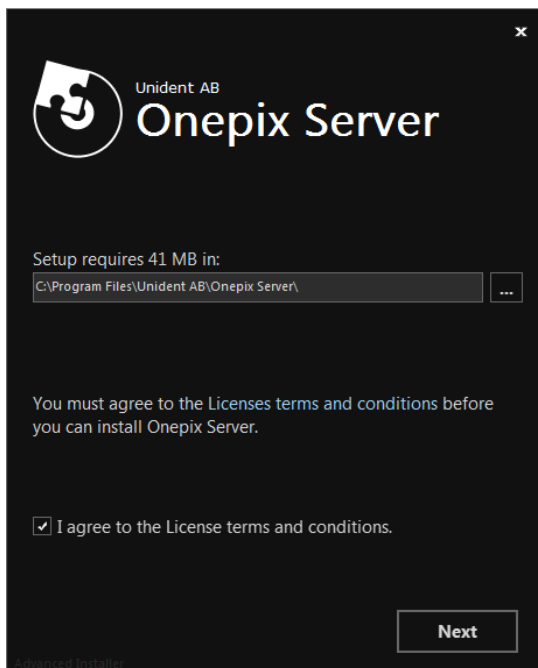

Har du allerede en database og en SQL-instans fra før, som for eksempel CDRDICOM, vil ikke installasjonspakken installere en ny instans, men du får i stedet opp en dialogboks der du kan fylle ut opplysninger, teste SQL-kommunikasjonen og klikke på Installer for å oppdatere den eksisterende databasen.

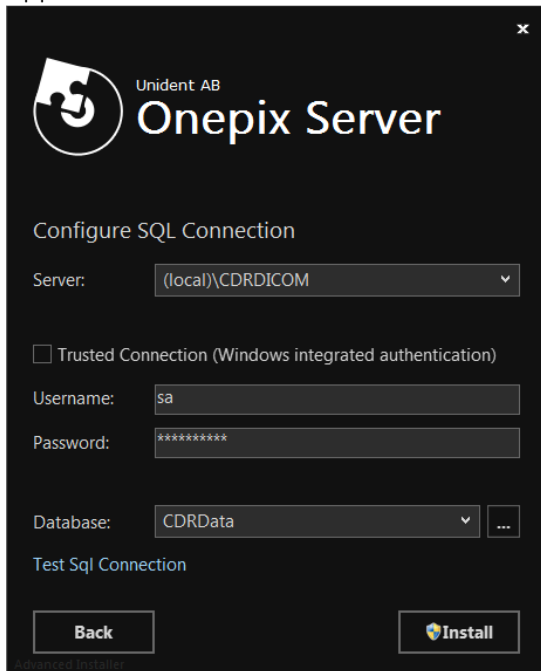

Vent til programmet er ferdiginstallert, og klikk deretter på Fullfør.

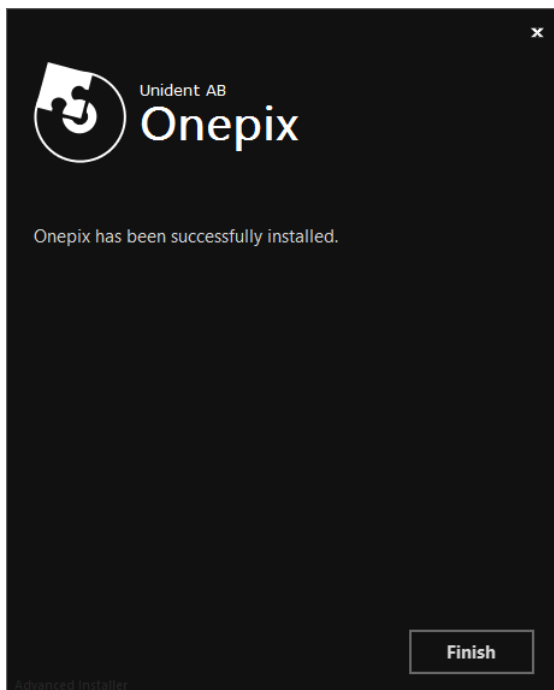

KLIENTINSTALLASJON


VIKTIG INFORMASJON

Installasjonspakken vil automatisk avinstallere tidligere CDRDicom og Onepix-programvare. Onepix Client pakken installerer følgende:

- Onepix Klientprogramvare
- Onepix Admin-programvare (valgfritt)
- Valgfrie plugins som TWAIN
- Valgfrie innlesingsmoduler som Schicksensor, Vatech panorama

Last ned Onepix Client og følg instruksjonene nedenfor. Åpne mappen hvor Onepix er lagret etter nedlasting og kjør Onepix Client setup.exe.


Les gjennom lisensavtalen, kryss av i boksen for lisensgodkjenning og klikk på INSTALL

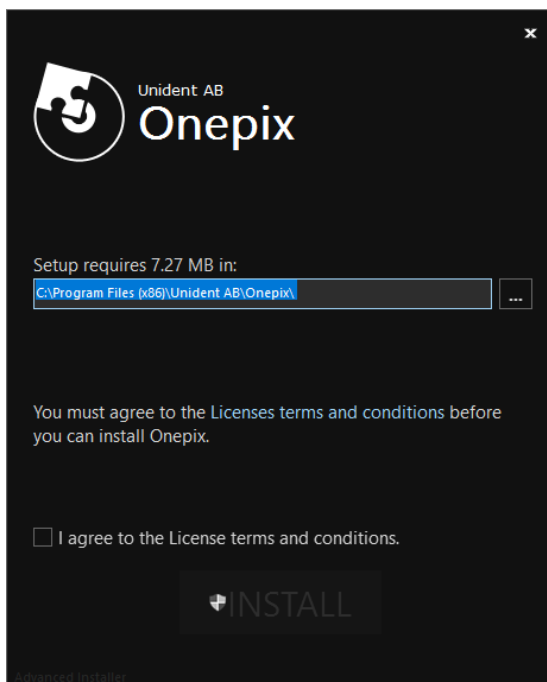

Kryss av for komponentene som skal installeres, og klikk på Install.



Vent til programmet er ferdiginstallert, og klikk deretter på Fullfør.

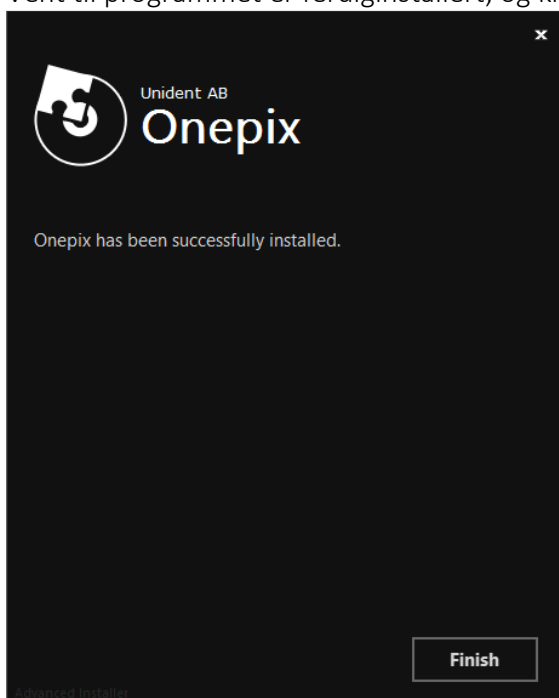

LISENSAKTIVERING

Første gang du starter Onepix kommer det opp en forespørsel om å aktivere Onepix. Fyll ut alle detaljene, og klikk deretter på Aktiver produkt. Du kan også aktivere en 30-dagers evalueringsperiode hvis du ikke har en lisenskode. Når evalueringsperioden er over, vil du ikke være i stand til å starte Onepix uten å registrere med en lisenskode.



Merk!

Ta ikke odontologiske bilder i evalueringsmodus hvis du ikke er sikker på at du har en programvare som kan vise DICOM-bilder etter at funksjonen har opphørt!

ONLINE AKTIVERING

Fyll ut alle detaljene, og klikk deretter på Aktiver produkt.

Offline Aktivering

LISENSNØKKEL

FORNAVN

ETTERNAVN

VIRKSOMHET

E-POST

AVBRYT **AKTIVER PRODUKT >**

ØNSKER DU Å STARTE EN PRØVEPERIODE MED ONEPIX?
AKTIVER 30-DAGERS PRØVEVERSJON

OFFLINE AKTIVERING

Dersom datamaskinen av en eller annen grunn ikke er tilkoblet internett og er offline: Vil du få opp følgende informasjon i dialogboksen for aktivering: Klikk på Offline Aktivering for å aktivere lisensen uansett. Legg merke til at for å kunne aktivere lisensen mens du er frakoblet internett, må du ha tilgang til internett på en annen datamaskin.

Unable to find a network, please check your connection or use **OFFLINE ACTIVATION**

Fyll ut alle detaljene, og klikk deretter på Aktiver produkt.

Offline Aktivering

LISENSNØKKE

FORNAVN

ETTERNAVN

VIRKSOMHET

E-POST

AVBRYT

AKTIVER PRODUKT ➤

ØNSKER DU Å STARTE EN PRØVEPERIODE MED ONEPIX?

AKTIVER 30-DAGERS PRØVEVERSJON

Du får denne informasjonen når du klikker på Aktiver produkt, følg instruksjonene under for å aktivere din lisens. Du må ha tilgang til en datamaskin med internetttilgang for å kunne gjøre dette.

VISIT THIS URL
onepix.se/activate

ACTIVATE BY USING THIS KEY

e1891f4ae51ecc2fc16bc005b6fb25712fe508 COPY


ENTER THE RETURNED VALUE

DATABASETILKOBLING

For å koble Onepix Client til en eksisterende database på datamaskinen eller nettverket, gjør du følgende. Dersom SQL-instansen/databasen er opprettet manuelt, det vil si ikke er installert via Onepix Server, kan du koble til den ved å krysse av i "Vis avanserte alternativer" i stedet, og fylle ut med de nødvendige opplysningene.


ALTERNATIV 1 - WINDOWS-PÅLOGGING

- Rett etter installasjonen starter du Onepix-klienten ved å dobbeltklikke på snarveien på skrivebordet. Klikk på SØK PASIENT, og dialogboksen Konfigurer databasetilkobling vises. Kommer ikke dialogboksen opp, kan du alltid gå inn i Onepix Admin, og gå via menyen Alternativ>Database
- Skal du koble til en ekstern server (for eksempel hvis bildene dine er lagret på en annen datamaskin enn den du sitter ved), klikker du på pil ned, og velger riktig server fra listen.
- Marker alternativet "Koble til med mine Windows-innloggingsopplysninger".
- Klikk på knappen *Test tilkobling*.
- Dersom tilkoblingen fungerer, klikk på *OK*. Installasjonen er nå fullført.
- Dersom tilkoblingen ikke virker, fortsetter du med alternativ 2.

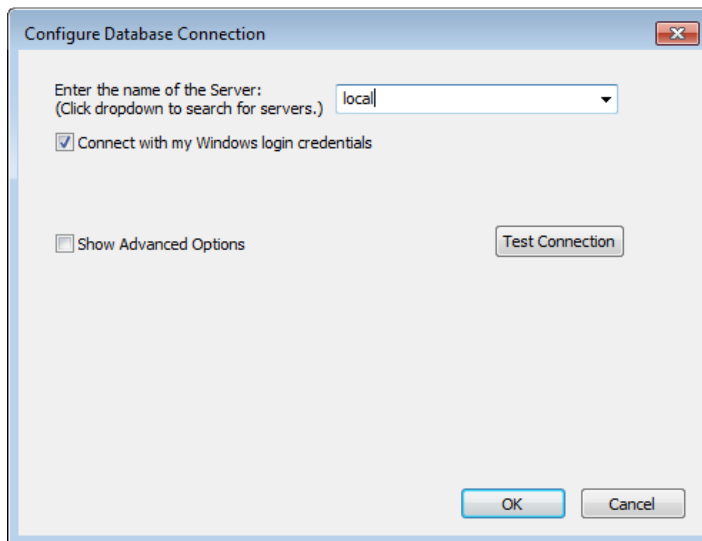

ALTERNATIV 2 – SQL-INNLOGGING

- Fjern merkingen i alternativet "Koble til med mine Windows-innloggingsopplysninger".
- Skriv inn "opx" (med små bokstaver og uten anførselstegn) som brukernavn og passord.
- Klikk på knappen *Test tilkobling*. Klikk på *OK* når tilkoblingen fungerer.

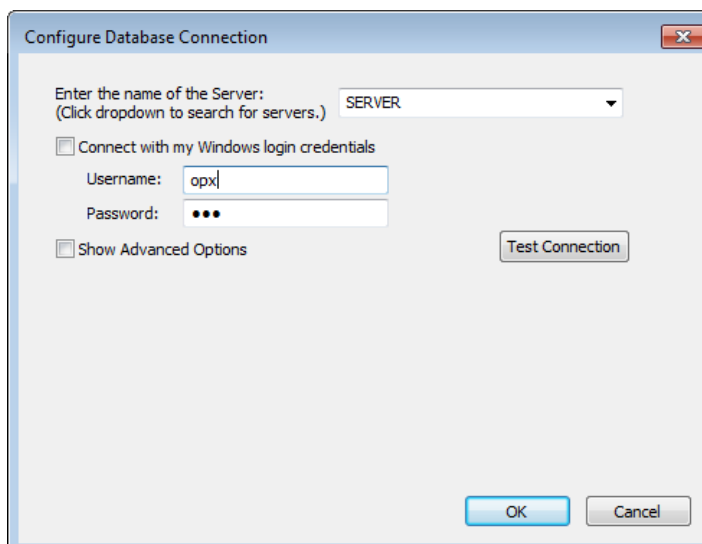

KOBLING FRA JOURNALSISTEM – ONEPIX INTEGRASJON

De fleste journalsystemer har direkte integrasjon med Onepix. For de journalsystemer som mangler integrasjon men som kun kan starta eksterne program gjennom sending av parameter, kan man bruke OnepixAutomation.exe.

OnepixAutomation.exe installeres automatisk og ligger i samme mappe som OnepixClient.exe, kommandoen skal se ut som dette eksempelet:

Eksempel: *OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname"*

Detta er bare et eksempel så PatientID, Lastname och Firstname skal endres til riktige parametere fra respektive journalsystemer. Hermetegn skal brukes for å få med all pasientinformasjon eksempelsvis om pasienten registreres med fler enn ett fornavn eller etternavn i journalen.

LÅSTE FUNKSJONER

Via Onepix Automation har man mulighet til å låse funksjoner i Onepix om man for eksempel ikke vil at vanlige brukere skal kunne søke etter eller opprette nye pasienter direkte i Onepix, eller om man vil låse instillinger for brukerne.

Alle funksjonslåsnings i Onepix har et flagg vist nedenfor med ett tilhørende verdi:

- SØK PASIENT - (DisableOpen) = 1
- NY MAL/SERIE - (DisableNewTemplate) = 2
- INSTILLINGER - (DisableSettings) = 4
- NY UNDERSØKNING - (DisableNewStudy) = 8
- NY SERIE - (DisableNewSeries) = 16
- NY PASIENT - (DisableNewPatient) = 32

For å kombinere sperr av to eller fler funksjoner, legg sammen tallene fra flaggene og skriv inn summen på slutten. Nedenfor kommer 3 eksempel på hvordan det fungerer:

1. Kjør OnepixAutomation med kommandoen nedenfor for å låse SØK PASIENT:
OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 1
2. Kjør OnepixAutomation med kommandoen nedenfor for å låse SØK PASIENT + NY MAL:
OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 3
3. Kjør OnepixAutomation med kommandoen nedenfor for å SØK PASIENT + NY MAL + INSTILLINGER + NY PASIENT:
OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 39