



BRUGERVEJLEDNING

DANSK

Onepix 2.5 / 2.6



onepix.se onepix.dk
onepix.no onepix.app



2026-07



OPX001



(01)07350118640012



UNIDENT AB | Västerhavsvägen 2, 311 77 Falkenberg Sweden
Web: unident.se | Phone: +46 346-73 24 00

Datum: 2026-07
Onepix IFU Dansk
Revision 021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugervejledning.....	1
Indledning.....	3
Lær Onepix at kende	8
<i>Undersøgelse View.....</i>	<i>10</i>
<i>Zoom Vindue.....</i>	<i>11</i>
Undersøgelse View.....	14
<i>Patienthåndtering.....</i>	<i>14</i>
<i>Undersøgelser og serier.....</i>	<i>15</i>
<i>Billedbehandling.....</i>	<i>22</i>
<i>Billedindlæsning</i>	<i>47</i>
<i>Billedbehandling efter indlæsning</i>	<i>50</i>
<i>Genveje i Undersøgelse View.....</i>	<i>51</i>
Zoom Vindue	53
<i>Værktøj.....</i>	<i>53</i>
<i>Sidepanel.....</i>	<i>71</i>
<i>Genveje i Zoom Vindue.....</i>	<i>78</i>
Onepix Indstillinger	80
<i>Deaktiver licens Onepix lokal.....</i>	<i>80</i>
<i>Programindstillinger.....</i>	<i>82</i>
<i>Indstillinger for hardware.....</i>	<i>85</i>
Onepix Cloud Admin	86
<i>Intro</i>	<i>86</i>
<i>Håndter patienter og undersøgelser.....</i>	<i>88</i>
<i>Håndter brugere, tilladelser og rolle.....</i>	<i>91</i>
<i>Import DICOM undersøgelser og billeder.....</i>	<i>94</i>
Onepix Lokal Admin	95
<i>Menuen Arkiv</i>	<i>96</i>
<i>Menuen Rediger</i>	<i>100</i>
<i>Menuen Værktøj.....</i>	<i>107</i>
<i>Menuen Funktioner</i>	<i>110</i>
Installationsvejledning	113
Installation af Onepix	114
<i>Systemkrav</i>	<i>114</i>
<i>Journalsystem kompatibelt med Onepix.....</i>	<i>120</i>
<i>Serverinstallation.....</i>	<i>121</i>
<i>Klientinstallation.....</i>	<i>125</i>
<i>Databasetilslutning Onepix lokal.....</i>	<i>133</i>
<i>Forbindelse fra journalsystem - Onepix Automation.....</i>	<i>135</i>
<i>Onepix Log Viewer</i>	<i>137</i>
<i>Onepix Lokal adgangskontrol.....</i>	<i>138</i>
Installation RSS Klient 5.4.1	142
<i>Lær Onepix RSS at kende</i>	<i>142</i>
<i>Installation</i>	<i>142</i>
<i>Konfiguration.....</i>	<i>147</i>
<i>Funktionskontrol.....</i>	<i>154</i>
<i>Fejlsøgning på klient og server</i>	<i>156</i>

INDLEDNING

VIGTIG

Produktet skal installeres korrekt, før det bruges i kliniske omgivelser. Følg instruktionerne i installationsvejledningen, der følger med produktet.

Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med enheden, skal dette rapporteres til Unident og den kompetente myndighed.

Produktet må kun bruges i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse.

TILSIGTET ANVENDELSE

Onepix® er en softwarepakke udviklet af Unident AB til brug i indsamling, visning og manuel håndtering af digitale dental røntgen- og videobilleder.

Det giver en brugergrænseflade, så operatøren kan tage billeder såsom digitale røntgensensorer og dentale videokameraer.

Computeren, der kører Onepix-softwaren®, fungerer som det værktøj, hvorigennem patientoplysninger indtastes, billedindsamling startes, og optagne billeder ses, administreres, gemmes og hentes.

Onepix er beregnet til brug af tandlæger. Dette omfatter tandlæger, tandsygeplejersker, tandplejere og/eller tandradiologer. Den tilsigtede patientpopulation interagerer ikke med enheden på noget tidspunkt.

AVSEDD PATIENTPOPULATION

Den tilsigtede patientpopulation er patienter i alle aldre, der har behov for oral røntgenundersøgelse eller dokumentation af orale tilstande.

BERETTIGELSE OG FACILITETER

Onepix er beregnet til brug af tandlæger. Dette omfatter tandlæger, tandsygeplejersker, tandplejere og/eller tandradiologer. Der kræves ingen specifik Onepix-træning til brug.

Onepix er beregnet til brug på tandlægeklinikker eller lignende kliniske omgivelser.

INDIKATION FOR BRUG

Indikationen for brug af Onepix er, når der er behov for at håndtere billeder til oral diagnostik, før man vælger afhjælpning og dokumentation af orale tilstande. Onepix-brugergrænsefladen gør det muligt for uddannede tandlæger at modtage, gemme, transmittere, udskrive og analysere billeder for at diagnosticere, planlægge behandlinger og følge op på orale tilstande.

Dette gøres normalt i følgende situationer:

- Når diagnosen ikke kan stilles ved klinisk undersøgelse alene, eller når den mistænkte diagnose kræver røntgenundersøgelse eller fotodokumentation.
- Til behandlingsplanlægning for at bestemme anatomi og passende procedure.

- Kontroller under behandlingen, såsom røntgenbilleder for at verificere dybden af rodkanalforberedelse eller implantatkomponentens pasform.
- Opfølgning efter behandling, såsom rodkanalanalyse.
- Når opfølgning af en fysiologisk eller patologisk proces, såsom healing eller sygdomsprogression, er nødvendig.

KLINISKE FORDELE

Følgende kliniske påstande og fordele er blevet identificeret for Onepix:

- Fordelen ved den digitale teknologi, der er muliggjort af Onepix, er, at røntgenstrålerne vises på skærmen umiddelbart efter opladning, inden for tre sekunder.
- I modsætning til manuel behandling er der ingen grund til at bruge kemikalier til at producere billederne.
- Med Onepix kan alle klinikkens billeder nemt samles i ét og samme system.
- Onepix er et åbent system, hvilket betyder, at det fungerer med alle forskellige sensorer med fuld integration til de fleste af det skandinaviske markedes røntgenprodukter og patientundersøgelsessystemer.
- Moderne brugergrænseflade med smarte menuer, der giver brugeren en mere effektiv måde at arbejde på og en forbedret brugeroplevelse.



NOTE!

Tilsluttede enheder skal være indbyrdes forbundet, indstillet og testet, så de fungerer efter hensigten for at Onepix funktioner kan udnyttes på den bedste måde. Onepix er en del af en kæde af produkter (eksterne enheder), der er afhængige af hinanden for at de kan arbejde sammen. Der er en risiko for, at dine røntgenbilleder ikke bliver de bedste, hvis du ikke har de rigtige indstillinger!

CE-MÆRKNING

Onepix® er en selvstændig software udviklet af Unident. Som selvstændig software klassificeres Onepix og efterfølgende opdateringer som medicinsk udstyr i henhold til direktivet om medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745. Onepix er et CE-mærket produkt. Unident er certificeret af Intertek Certification AB i henhold til EN-ISO 13485:2016 Quality Management Standard. Unident er ligeledes certificeret i henhold til SS-EN-ISO 9001:2015 Quality Management Standard och SS-EN-ISO 14001:2015 Environmental Management Systems.

Onepix er et computerprogram, der er udviklet af Unident AB, med henblik på at tilegne sig, se og manuelt behandle digitale dentale røntgen- og videobilleder. Programmet er en brugergrænseflade, hvor brugeren kan se billeder fra digitale røntgensenheder og dentale videokameraer. Computeren, der behandler Onepix-softwaren, fungerer som et værktøj, hvor patientoplysningerne registreres i undersøgelsesdataene, hvor billeder opbevares, og hvor de kan vurderes, behandles manuelt, lagres og hentes.

Onepix-softwaren opfylder DICOM-standarden, som opretholdes af en international komite, med henblik på at opnå kompatibilitet og forbedre arbejdsgangen og effektiviteten mellem billedbehandlingssystemer og andre informationssystemer inden for sundheds- og sygeplejen.

Onepix-softwaren er udformet og testet til brug med kompatible hardwareenheder, som fremgår af listen over kompatibel hardware under afsnittet Installation af Onepix.

LICENSERING ONEPIX

Onepix stilles til rådighed for brugeren gennem to forskellige abonnementer som forklaret nedenfor.

Onepix Cloud Organization - Dette abonnement kræves pr. Organisation og muliggør en unik Onepix-instans for organisationen, men tillader ikke brug.

Onepix Cloud User - Dette abonnement gør det muligt for en (1) bruger at bruge Onepix uden begrænsninger.

Onepix Local Viewer – Her kan du kun åbne undersøgelser; ikke oprette nye. Eget til brug på en kontorcomputer, receptionscomputer eller lignende.

Onepix Local Standard – Dette abonnement har fuld funktionalitet og tillader indlæsning fra alle kompatible produkter.



NOTE!

Du må ikke tage dental billeder i demo-tilstand, medmindre du har sikkerhedsindstillet, at du har en software, der kan vise DICOM billeder, når funktionen er ophørt!

HJÆLPERESSOURCER TIL ONEPIX

HJÆLP-funktionen og brugsanvisning, finder du længst oppe til højre i programmet.

For telefonisk support til Onepix bedes du kontakte Unident AB på tel 4366 2246 eller sende en e-mail til support@unidentdanmark.dk.

PROGRAMGRUPPEIKONER

Følgende ikoner repræsenterer forskellige programkomponenter, som installeres sammen med Onepix-softwaren. Yderligere objekter kan komme til, når nye Onepix-programmer og drivere installeres.


Ikon	Beskrivelse
	Onepix – program til netværksklienter eller fritstående arbejdsstationer
	OnepixAutomation - Gør det muligt at starte OnepixClient med parametre
	Onepix Admin – hjælper med at håndtere oplysningerne i din Onepix-database
	Hjælp til Onepix – åbner HTML-hjælpen til Onepix
	Onepix Indstillinger
	Referencenummer (varenummer)
	Se brugervejledning
	Udvikler, kontaktoplysninger

LÆR ONEPIX AT KENDE

Dette afsnit indeholder en kort gennemgang af Onepix Brugergrænsefladen. For at læse mere om de forskellige dele og funktioner henvises til afsnittet Undersøgelse View og Zoom Vindue samt Onepix Indstillinger.

START ONEPIX CLOUD


Første gang du starter Onepix Cloud for dagen, vil du se et loginfelt, hvor du kan indtaste dine loginoplysninger. Login gemmes hele dagen på den computer, du logger på. Hvis du starter Onepix på en anden computer, skal du logge ind igen.

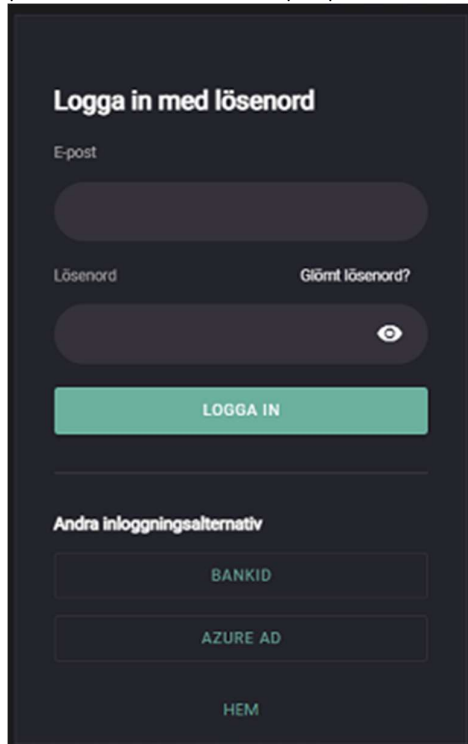

De tilgængelige loginmuligheder er E-mail, BankID og Azure AD. Dine loginoplysninger leveres af din klinikadministrator.

ARBEJDE I ONEPIX

Når du starter arbejdet med Onepix, skal du lære at bruge to vinduer: Undersøgelse View og Zoom Vindue. Undersøgelse View og Zoom Vindue har visse ting tilfælles. Alt det, der foretages i Onepix, gemmes automatisk. Dvs. du behøver ikke gemme ændringer, og du bliver ikke spurgt, om noget skal gemmes. Men du kan til enhver tid fortryde dine ændringer, som du vil få at se, når du læser mere om de funktioner, der er i Onepix. Tanken er, at det skal skabe mere brugervenlige arbejdsgange. Nedenfor kan du se, hvad Undersøgelse View og Zoom Vindue har tilfælles.

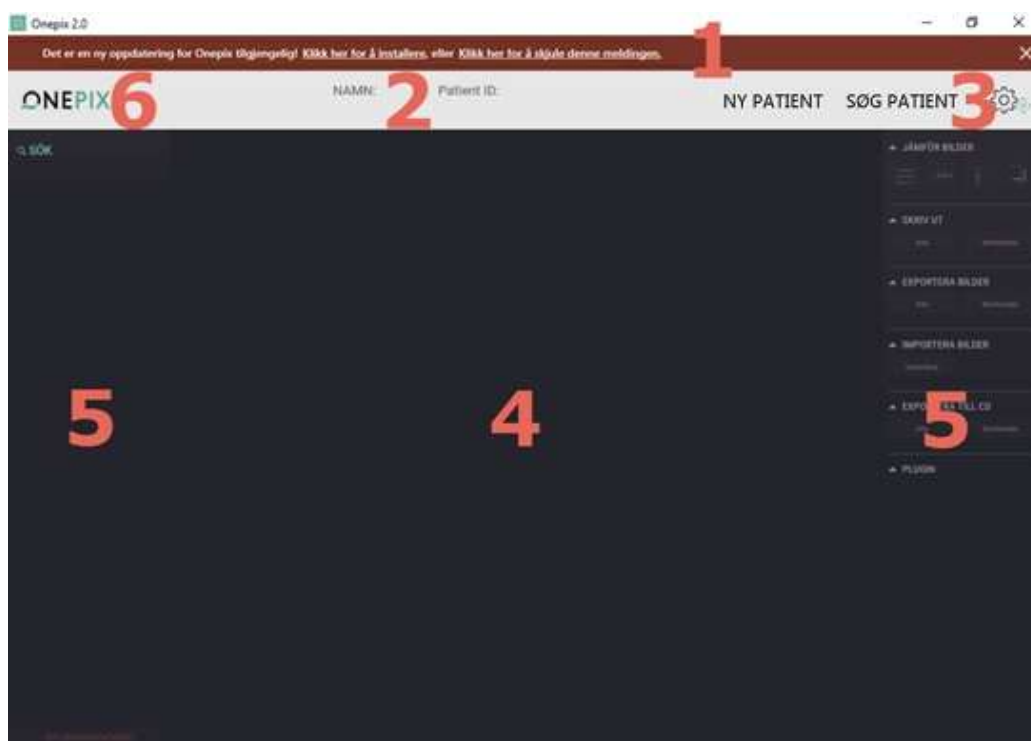


1. OPDATERINGSFELT: En linje øverst i vinduet, som vises, når der er en ny opdatering tilgængelig. Kan nemt lukkes ved at klikke på teksten eller på krydset længst til højre. Den viser sig dog igen, når programmet starter op på ny. Du kan lukke for anmodningen om automatiske opdateringer. Få mere at vide i afsnittet Onepix indstillinger.
2. PATIENTOPLYSNINGER: Længst oppe i det lysegrå felt vises patientoplysninger såsom personnummer og navn. Disse oplysninger er synlige i både Undersøgelse View og Zoom Vindue.
3. INDSTILLINGER: Længst til højre i samme felt som patientoplysningerne er der et ikon med et tandhjul, som fører dig til Onepix indstillinger. I afsnittet Onepix Indstillinger kan du læse mere om, hvilke indstillinger der findes.
4. BILLEDPRÆSENTATION: I det store felt i midten vises undersøgelser, serier og billeder, afhængigt af om du befinder dig i Undersøgelse View eller Zoom Vindue.
5. VÆRKTØJ OG FUNKTIONER: Alle de funktioner og det værktøj, som bruges i Onepix, finder du i feltet til højre og venstre for undersøgelserne/billederne.
6. INFORMATION: For at finde ud af hvilken version af Onepix du har, kan du klikke på Onepix-ikonet øverst til venstre.




UNDERSØGELSE VIEW

Når Onepix starter, vises Undersøgelse View som det første. I starten er det kun det lysegrå felt med patientoplysninger længst oppe, der er aktivt. Her kan du vælge at oprette en ny patient eller foretage en søgning på en eksisterende patient.

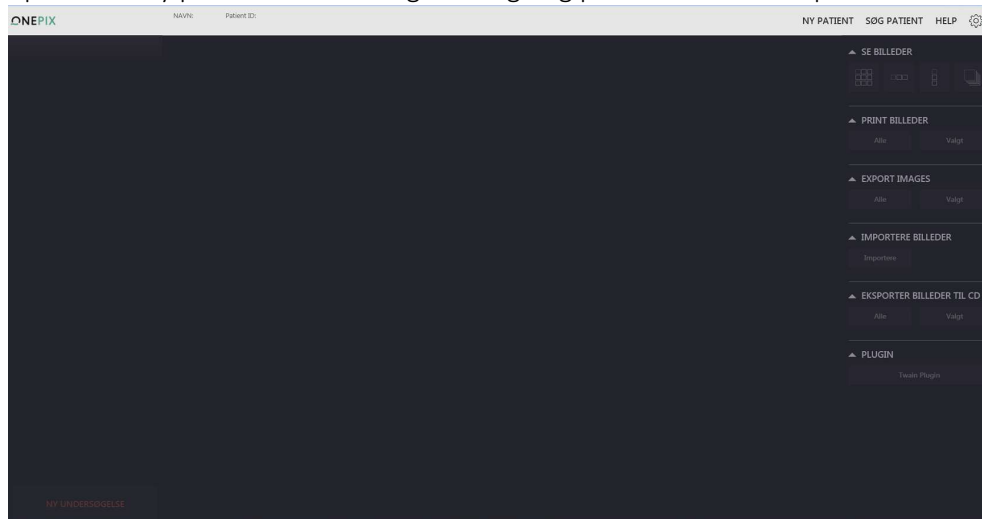

Eftersom Onepix hovedsageligt åbnes fra et journalsystem, åbnes den valgte patients seneste billeder direkte i stedet for som på billedet herunder.

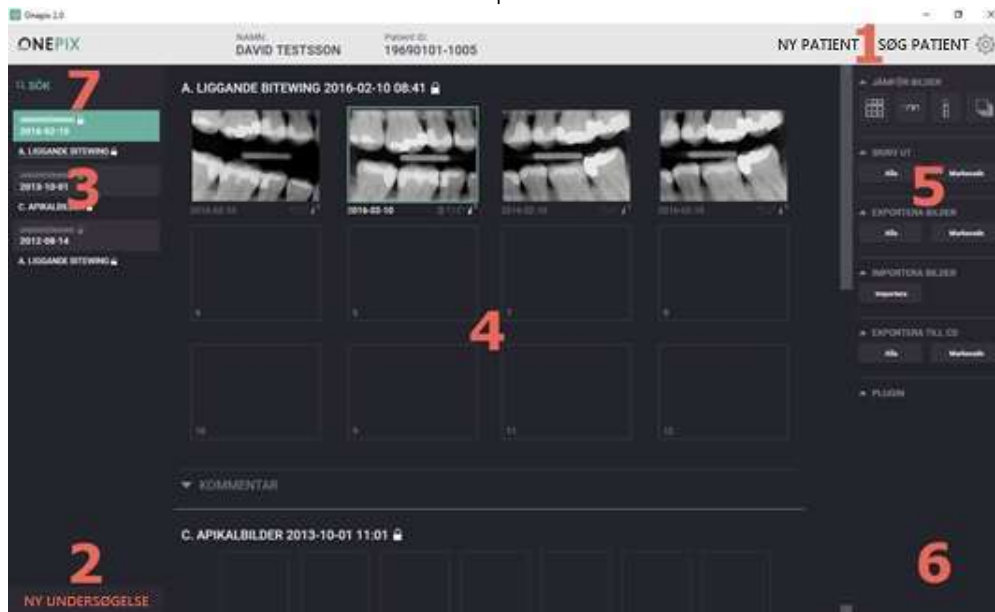

1. NY/SØG PATIENT: Hvis Onepix ikke åbnes via et journalsystem, kan du oprette eller søge efter patienter via disse funktioner. Det anbefales dog, at du går via journalsystemet, så du får de rigtige patientoplysninger.
2. NY UNDERSØGELSE: Ny Undersøgelse oprettes ved at klikke på knappen med samme navn længst nede til venstre.
3. UNDERSØGELSER OG SERIER: Ude til venstre i Undersøgelse View i Onepix vises en liste med faner. Hvert gråt felt med dato svarer til en undersøgelse for den


aktuelle patient, med den seneste undersøgelse længst oppe og den ældste længst nede i feltet. Den grønne farve markerer, hvilken undersøgelse der vises i billedpræsentationsfeltet midt på skærmen. Under hver undersøgelse kan der være en eller flere serier. Du kan f.eks. have en bitewing og en eller flere apikale serier i samme undersøgelsesanleitung. Hvis der er flere undersøgelser, end der er plads til på skærmen, kan du bladre mellem fanerne for at finde frem til den ønskede undersøgelse. Men du kan også bladre i billedpræsentationsfeltet. En ny undersøgelse er kun aktiv for billedindlæsning på den aktuelle dag, som undersøgelsen er oprettet. Når dagen er ovre, låses undersøgelsen, alle dens serier og billeder for redigering og indlæsning. Du kan se, om en undersøgelse/serie er låst, ved at der er et ikon med en hængelås efter seriedatoen.

BITEWING 2016-02-10 08:41 

4. **BILLEDPRÆSENTATION OG BILLEDINDLÆSNING:** I dette felt vises alle serier og undersøgelser efter dato. Feltet anvendes også til billedindlæsning fra en hardware såsom en røntgensensor eller et systemkamera. I dette felt kan du direkte rotere, afmontere eller læse kommentarer til billedet. Du kan også zoome hurtigt ind på en del af billedet ved at højreklikke og holde museknappen inde, samtidigt med at du flytter dig hen til det område, du er interesseret i.
5. **BILDEBEHANDLING:** I dette felt vises de funktioner, som er tilgængelige til behandling af billeder i Onepix. Du markerer de billeder i undersøgelsen, som skal behandles, ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på billederne. Derefter vælger du en af de funktioner, der findes i feltet til højre, f.eks. Se Billeder, Print Billeder, Export images/Importere billeder m.m.
6. **PLUGIN:** Her vises de plugins, der er installeret. Det kan eksempelvis være Kortimport, TWAIN osv.
7. **SØG:** Her kan du foretage en hurtig søgning, hvis du leder efter en bestemt slags billeder.

ZOOM VINDUE

Hvis du dobbeltklikker på et billede i Undersøgelse View, åbnes billedet i Zoom Vindue, hvorfra du kan undersøge og arbejde med billedet. Alle de ændringer, der foretages, gemmes automatisk og ligger under HISTORIE i feltet til højre. Her kan de nemt fjernes ved at dobbeltklikke på Slet, som du finder til højre for hver ændring.

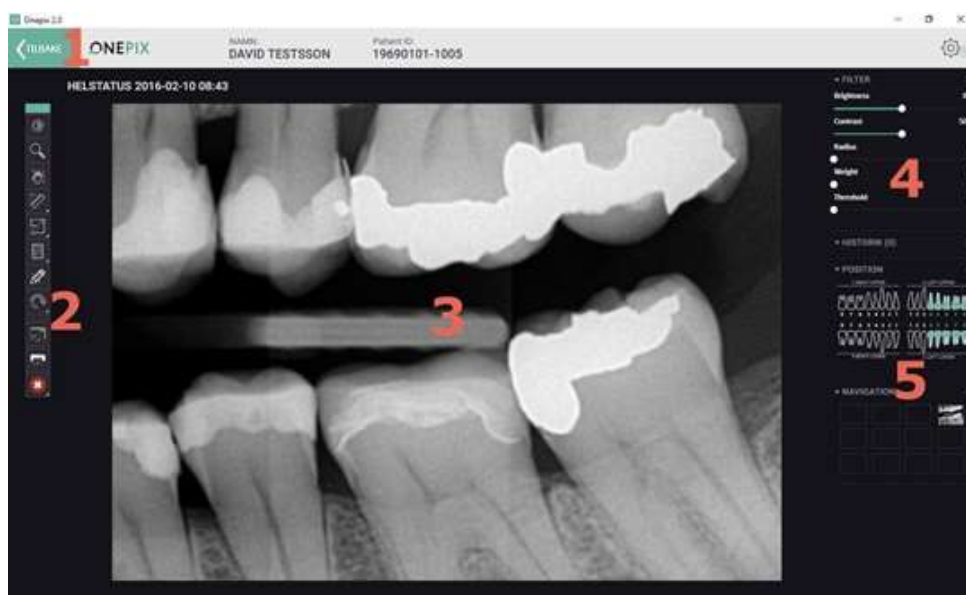

1. **TILBAGE:** Tilbage bruges til at komme tilbage til Undersøgelse View. Alle de ændringer, der er blevet foretaget på billedet, bliver gemt uden forudgående godkendelse.
2. **VÆRKTØJ:** Billedværktøj findes til venstre for billedet. Værktøjet indeholder grafiske funktioner såsom lysstyrke, kontrast, orientering og forstørrelse. Her finder du også diagnostiske hjælpemidler såsom pixelværdi, målinger og kommentarer.
3. **BILLEDPRÆSENTATION:** Her vises billedet i den tilstand og med de indstillinger, du vælger via værktøjet.
4. **TILPASNING:** Med disse tilpasninger kan du justere billedpræsentationen ved f.eks. at øge skarpheden, lysstyrken og kontrasten m.m.
5. **HISTORIE/POSITIONS/NAVIGATION:** Alle ændringer til billedet vises under HISTORIE og kan nemt fjernes ved at dobbeltklikke på teksten Slet. Under NAVIGATION kan du se, hvor i serien billedet befinder sig, og under POSITIONS kan du se tandstatus.



NOTE!

Udvalgte tænder i tandstatus er baseret på oplysninger fra indlæsning af billedet. Dette kan afvige fra virkeligheden, hvis billedet er læst ind i den forkerte position i serien, eller, hvis det er nødvendigt, manuel korrektion af tandstatus ikke udføres efter eksponeringen.

UNDERSØGELSE VIEW

Dette afsnit indeholder:

- Patienthåndtering
- Start en ny undersøgelse/serie
- Opret/rediger kort
- Billedbehandling i Undersøgelse View
- Se Billeder
- Print Billeder, Export Images og Importere billeder m.m.

PATIENTHÅNDTERING

Hvis der anvendes et journalprogram, kobles det sammen med Onepix. Dermed overføres alle patientoplysninger automatisk fra journalen. Hvis der ikke er et journalsystem, eller hvis der af en anden årsag ikke kan oprettes en patient fra journalsystemet, kan du anvende de integrerede Onepix-funktioner til patienthåndtering.

NY PATIENT **SØG PATIENT** **CLOSE PATIENT** **HELP**

NY PATIENT

Patientens fornavn, efternavn og ID-oplysninger skal altid oplyses i dialogboksen for en ny patient.

NY PATIENT

FORNAVN:

EFTERNAVN:

PATIENT ID:

AVBRYD **START >**

SØG PATIENT

Hvis der findes tidligere undersøgelser, kan du hente patientoplysningerne ved at klikke på SØG PATIENT. Det åbner dialogboksen for patientsøgning, hvor du kan søge på

patientens fornavn, efternavn og/eller personnummer. Brug kun mellemrumstasten, hvis du vil søge på eksempelvis både for- og efternavn: *David Davidsson*

The screenshot shows a search window titled 'SØG PATIENT' in a green header bar. Below the header is a large, empty rectangular input field. Underneath this field are three labels: 'EFTERNAVN', 'FORNAVN', and 'PATIENTID', each positioned above a horizontal line that serves as a separator. At the bottom center of the window is a button labeled 'AVBRYD'.

LUK PATIENT

Lukker den aktive patient og dennes undersøgelser.

HJÆLP

Dette alternativ åbner sektionen Hjælp til Onepix-programmet. Hjælp-filerne er udformet, så de giver nem adgang til oplysninger om de forskellige funktioner og alternativer i Onepix-programmet.

Du åbner hjælp-filen ved at klikke på teksten HJÆLP øverst til højre i programmet.


UNDERSØGELSER OG SERIER

Fra og med Onepix 2.0 håndteres undersøgelser og serier på en lidt anden måde end hidtil. En undersøgelse står for en undersøgelsesanledning. En serie er en samling af billeder, der er taget i samme anledning. Der kan være flere serier i en og samme undersøgelse såsom eksempelvis en serie med Panoramabilleder og en med Liggende Bitewing. Undersøgelser og serier vises i feltet til venstre i Undersøgelse View med den seneste undersøgelse længst oppe på listen. En undersøgelse/serie er aktiv for


redigering inden for samme dag; derefter låses undersøgelsen for al redigering. Det vises i form af en hængelås til højre for undersøgelsen/serien.



NY UNDERSØGELSE

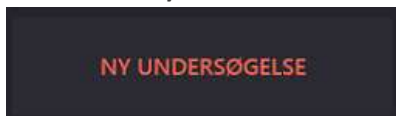


Knappen NY UNDERSØGELSE finder du nederst til venstre. Når du klikker på knappen, dukker der et vindue op som på billedet herunder.

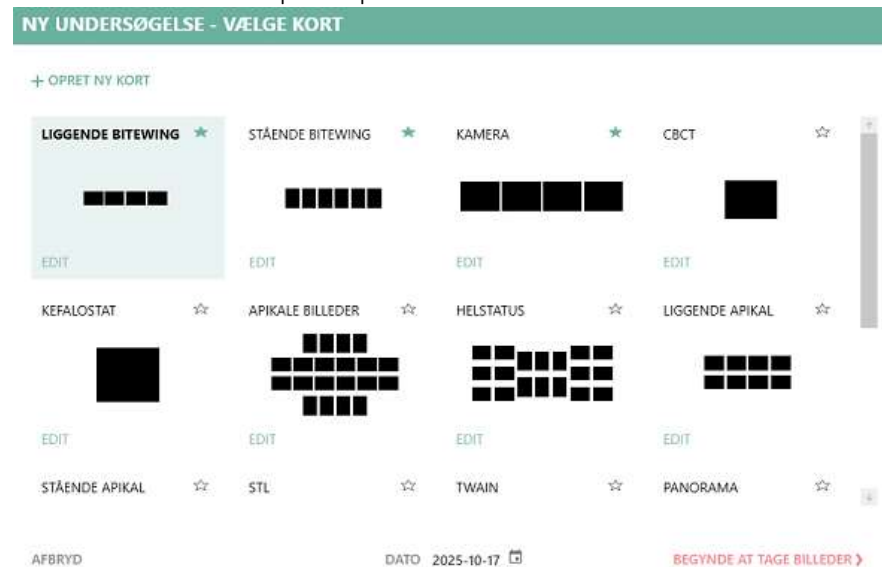

Vælg et kort, ud fra hvilken type billeder der skal indlæses, og klik på BEGYNDE AT TAGE BILLEDER. I dette vindue har du også mulighed for at oprette et nyt kort, ændre og vælge favoritkort. Du kan også vælge, om eksamen skal være på en anden dato. Indstillingen for at vælge en dato findes under Onepix-indstillinger eller via sikkerhedsmodulet. Du finder flere oplysninger om kort og håndtering af dem i afsnittet REDIGER ELLER OPRET KORT i denne vejledning.


NY SERIE

Når du har oprettet den første undersøgelse, vises teksten NY SERIE under den aktuelle undersøgelse i listen til venstre. For at oprette flere serier skal du klikke på teksten NY SERIE, vælge kort og klikke på BEGYNDE AT TAGE BILLEDER.

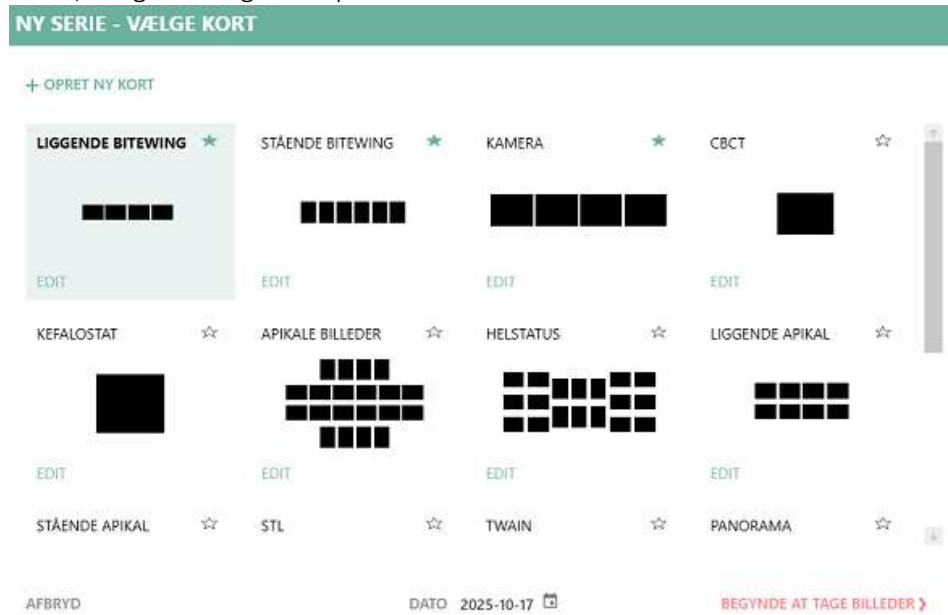

Dialogboksen for en ny serie ser ud som for en ny undersøgelse. Den eneste forskel er, at der oprettes en ny serie under den eksisterende undersøgelse.

FJERNE EN UNDERSØGELSE / SERIER

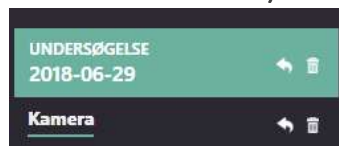

Du kan fjerne en serie / undersøgelse direkte i Onepix-klienten ved at klikke på Papirkurv-ikonet på højre side af undersøgelsesfanen.



Når du klikker på Papirkurv-ikonet, får du en dialogboks hvor du vælger at bekræfte fjernelsen eller afbryde.



NOTE!

Kun billeder uden diagnostisk værdi må efter gældende lovgivning slettes.
Undersøgelser slettet fra Onepixklienten kan gendannes i Onepix Admin.

FLYT EN UNDERSØGELSE / SERIER TIL EN ANDEN PATIENT



Du kan flytte en undersøgelse / serie fra en patient til en anden ved at klikke på pilen, der vises på højre side af undersøgelsesfanen.

FLYT TIL PATIENT

SØG

EFTERNAVN	FORNAVN	PATIENTID
Test	Patient	19111111-1111

AFBRYD **VÆLG >**

Søg efter patienten, hvis undersøgelsen / serien skal flyttes til. Vælg patienten og klik på VÆLG.

BEKRÆFT FLYT

Er du sikker på, at du vil flytte denne undersøgelse / disse billeder?

FRA PATIENT:
PATIENT ANONYMOUS
19121212-1212

TIL PATIENT:
PATIENT TEST
19111111-1111

AFBRYD

BEKRÆFT >

I denne dialog bekræfter du flytning af billeder. For at flytte enkeltbilleder fra en patient til en anden, se afsnittet "Flytende objekter" under Onepix Admin.

NOTE!

Vær forsigtig, når du flytter en hel undersøgelse eller serie til en anden patient. Kontrollér, at den korrekte målpatient er valgt, og kontroller også ved at åbne målpatienten i Onepix, at undersøgelsen eller serien blev flyttet.

REDIGER ELLER OPRET KORT

Onepix har flere forudindstillede serier/kort, som har til hensigt at dække de mest benyttede undersøgelsestyper. Kortene til intraoral røntgen hedder i standardudformning: Liggende bitewing, Stående bitewing, Apikalbilleder og Helstatus. Der findes også kort til foto, intraorale kamerabilleder, panorama og scanner. For at komme til valgmulighederne Rediger eller Opret ny Kort kan du klikke på NY UNDERSØGELSE eller NY SERIE i undersøgelseslisten.

Stjernesymbolet, som vises øverst til højre i kortet, bruges til at sortere kort efter favoritter. Hvis du klikker på stjernen, vil dette kort blive placeret først på listen længst oppe til venstre. Stjernen skifter da farve til grøn, hvilket indikerer, at kortet er valgt som favoritkort. For at ændre indstillingerne for det specifikke kort, skal du klikke på teksten REDIGER under kortet.

For at oprette et nyt kort skal du klikke på knappen Opret ny Kort.

19


+ OPRET NY KORT

En dialogboks med diverse indstillinger (se nedenfor) vil dukke op.

1. Start med at navngive kortet.
2. Vælg, hvilken modalitet kortet tilhører, f.eks. Foto.
3. Det store sorte felt er der, hvor kortet oprettes og vises. Brug værktøjet ude til højre for at oprette/slette billedobjekter, fordele eller centrere vandret/lodret. For at se hvad de forskellige ikoner gør, kan du placere markøren over dem, hvorefter der vises en tekst med forklaring.




Når du klikker på plustegnet, oprettes der en boks i det sorte felt, der ser sådan ud:

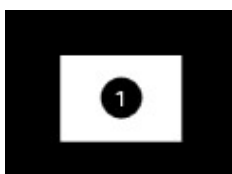

Hvis du vil slette boksen, skal du klikke en gang på den for at markere den og derefter klikke på minustegnet. For at fordele eller centrere rammer skal du markere de pågældende rammer og klikke på det respektive symbol.

4. I dette felt kan du markere en ramme med tænder. Klik på en ramme for at markere den, og klik derefter på de tænder, som den repræsenterer.

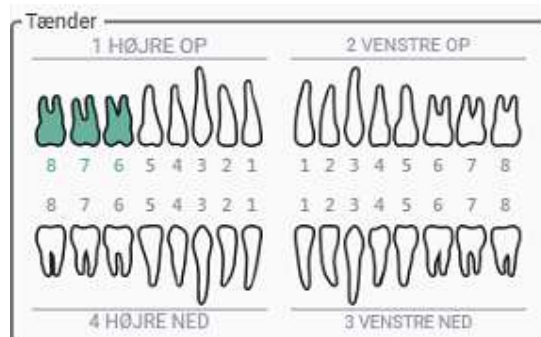


5. Under Egenskaber vises de egenskaber, der er tilgængelige for den valgte ramme. Her kan du ændre indstillinger for den valgte ramme såsom Bredde, Højde Rotation eller spejling. Vandret spejling bruges eksempelvis, hvis der anvendes et spejl ved fotografering.

Egenskaber	
X	Ordre
Y	Orientering
Bredde	Rotation
Højde	Vandret spejling
Beskrivelse	

6. Klik på GEM, hvis du vil gemme kortet med disse indstillinger. Du kan altid ændre kortet efterfølgende, hvis du finder en fejl.
7. Klik på AFBRYD, hvis du fortryder.

BILLEDBEHANDLING

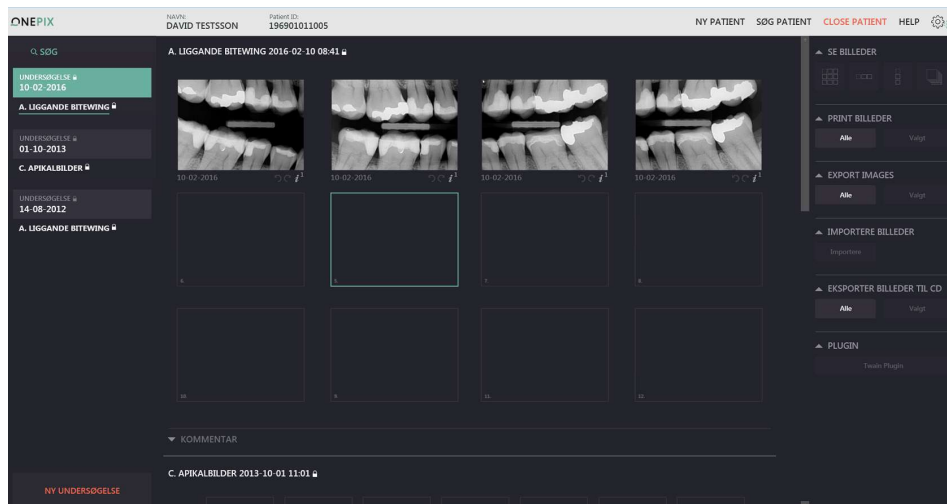

Alle billeder vises i midtersektionen af Onepix Undersøgelse View. Den seneste undersøgelse vises først. For at komme hurtigt til en bestemt undersøgelse eller serie kan du via undersøgelseslisten i venstre side klikke på den relevante dato. Du kan også bladre direkte i midtersektionen ved at scrolle med musehjulet.

SØG BILLEDER



Øverst til venstre over undersøgelseslisten er der en søgefunktion. Her kan du hurtigt finde frem til billeder, der har interesse. Under billedet nedenfor beskrives de forskellige muligheder, der findes for søgefunktionen. Søgeresultatet vises i Undersøgelse View med det seneste billede øverst.

SØG

3 SØGETYPE

Undersøgelse

4 REMITTERENDE TANDLÆGE

5 DATO START

15

AFBRYD

15

6 KORT TYPEN

MODALITET

7 VÆLGE POSITIONER

1 HØJRE OP

2 VENSTRE OP

3 VENSTRE NED

4 HØJRE NED

8

AVBRYD

GEM

SØG >

1 HURTIG SØGNING

Stående Bitewing 6 [IO]

Helstatus [IO]

Liggende Bitewing [IO]

Apikal [IO]

CT + snapshots [PX]

Kamera AACD [XC]

Kamera Klassisk [XC]

Kamera Ortodonti [XC]

scannertest [OT]

2 GEMT SØGNING

Rediger

1. HURTIG SØGNING – Her finder du nogle af de mest hyppige søgninger. Tanken er, at du hurtigt skal kunne finde frem til et billede med blot et enkelt klik.
2. GEMT SØGNING – Du kan oprette dine egne søgninger, som vises herunder.
3. SØGETYPE – Her vælger du, om det er en Undersøgelse, Serie eller Billeder, du leder efter.
4. REMITTERENDE TANDLÆGE – Såfremt disse oplysninger fremgår af billederne, kan du søge på en specifik behandler.
5. DATO – Her kan du bestemme, om søgningen skal være inden for et bestemt datointerval.
6. KORT TYPEN – Her kan du søge på et specifikt navn på et kort eller vælge modalitet på listen.
7. POSITIONS – Her vælger du, om det er en bestemt tand eller position ved blot at klikke på de tænder, søgningen drejer sig om.
8. Her vælger du, om du vil afbryde søgningen, gemme eller foretage en søgning ud fra de valgte kriterier.

Når du har foretaget en søgning, vises kun de billeder, som blev valgt i Undersøgelse View. For at gå tilbage til alle undersøgelser skal du klikke på TILBAGE øverst til venstre.



HURTIGZOOM


Hurtigzoom er en funktion i Onepix, som zoomer eller forstørrer billederne i en undersøgelse, og som gør, at hvert billede vises i forstørret udgave. Med Hurtigzoom kan du spare værdifuld tid, da du ikke behøver åbne hvert enkelt billede for at vise det i forstørret udgave.



For at bruge Hurtigzoom skal du blot højreklikke med musen på et billede i Undersøgelse View og holde museknappen inde. Derefter vises billedet i forstørret format. Flyt markøren for at flytte dig rundt i billedet. I afsnittet Onepix indstillinger kan du læse om, hvordan du ændrer størrelsen på Hurtigzoom-vinduet.

FLYT BILLEDE/BYT PLADS

Hvis et billede er havnet i en anden ramme end det, der var tiltænkt, er det nemt at flytte billedet. Det gør du ved at klikke på billedet, holde museknappen inde og trække billedet til en anden ramme.

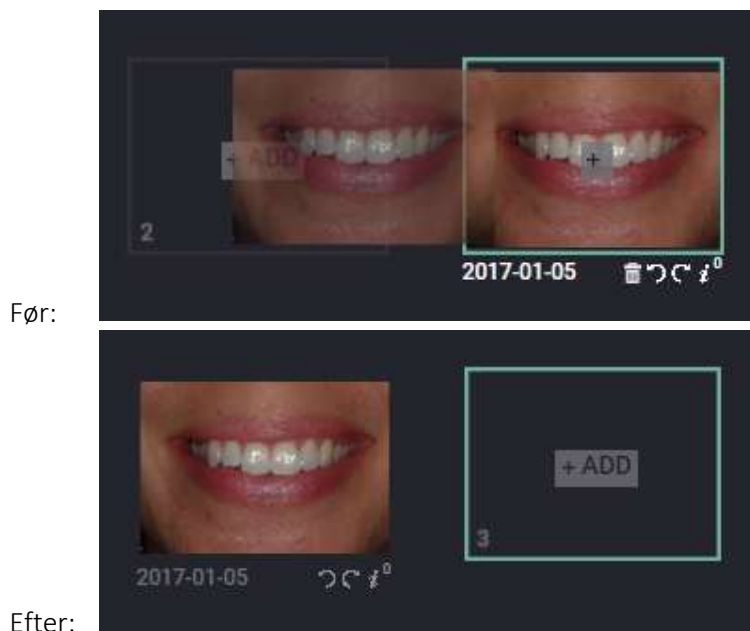


Hvis der allerede er et billede i den ramme, som du vil flytte billedet til, så vil de to billeder bytte plads.




Bemærk, at du kun kan flytte billeder i en serie med dags dato. Ældre serier er låst for redigering.

FLYT BILLEDER IMELLEM SERIER

Hvis du har skabt en serie af Liggende bitewing, men fortryder og vil have en stående bitewing i stedet. Så kan du oprette en ny serie ved at klikke på teksten NY SERIE

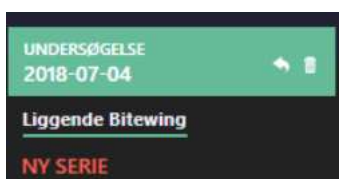

Hvis du allerede har taget billeder i serie Liggende bitewing, men vil flytte disse til serien Stående bitewing, så kan du nemt klikke på billedet med museknappen, trække og slip billedet til den rigtige position.

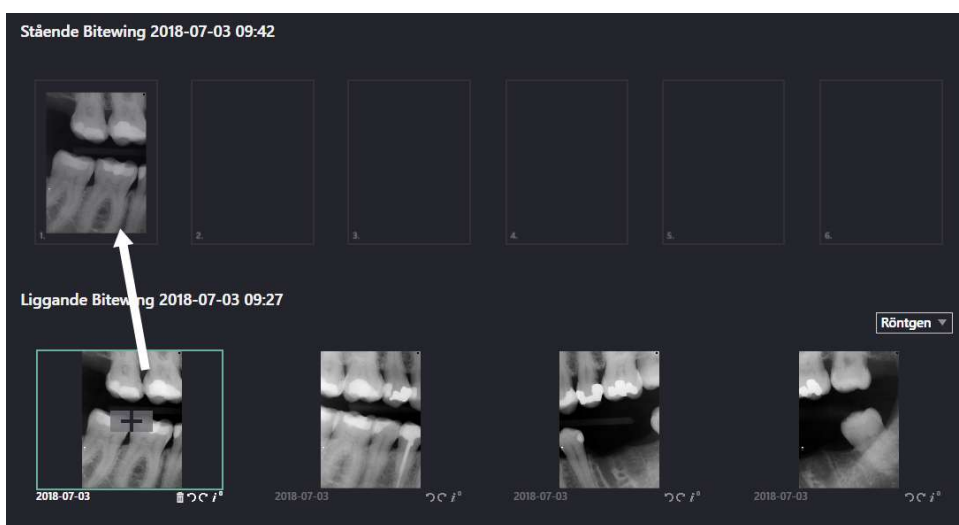

For at fjerne en tom serie skal du klikke på papirkurven ikonet til højre for serien.



Bekræft fjernelse, hvis du er sikker på at du har valgt den rigtige serie, der skal fjernes.




NOTE!


Kun billeder uden diagnostisk værdi må efter gældende lovgivning slettes.
Undersøgelser slettet fra Onepixklienten kan gendannes i Onepix Admin.

SE BILLEDER


For at se to eller flere billeder skal du holde Ctrl-tasten inde og klikke på de billeder, du ønsker at sammenligne. Det fungerer også mellem forskellige undersøgelser og serier. De valgte billeder får en grøn ramme som indikation. Hvis du ønsker at se alle billeder i en serie, kan du bruge Ctrl+A for at markere alle.

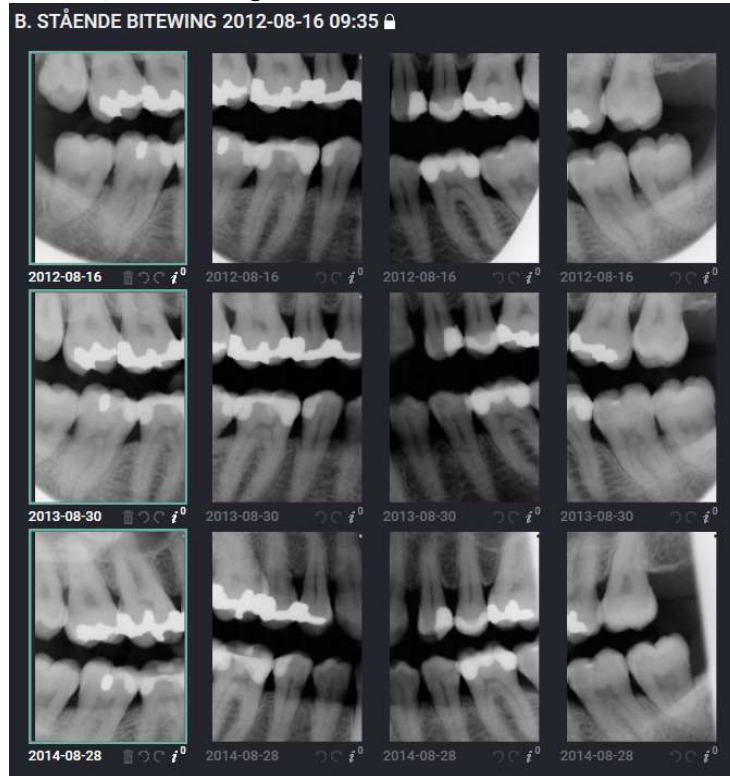

Klik derefter på et af de ikoner, der vises i feltet til højre under SE BILLEDER. De forskellige sammenligningsmuligheder er (fra venstre): Flere i rammer, Vandret, Vertikal, Overlapning.

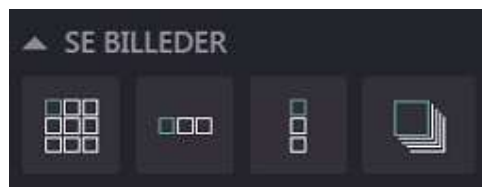


Sådan her kan det se ud, hvis du vælger at se billederne vandret. Velegnet til sammenligning af f.eks. stående bitewing-billeder.

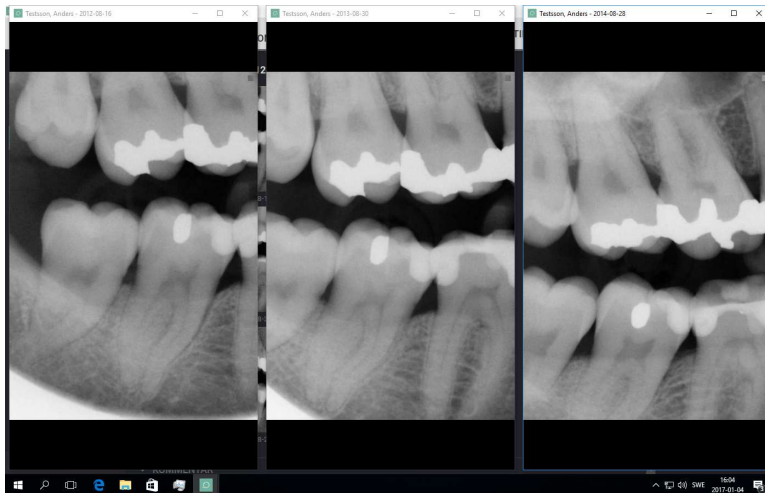


For at lukke billederne kan du enten klikke på krydset på hvert billede eller bruge genvejen Esc. Hvis du vælger at se billeder med overlappning, kan du nemt gennemse billederne ved at bruge tastene Page Up/Page Down.

PRINT BILLEDER

Funktionen Print Billeder kan anvendes til at printe Alle billeder i den aktive undersøgelse. Du kan også vælge kun at printe de valgte billeder. Markér de billeder, som skal printes, ved at holde Ctrl-tasten inde og klikke på billederne; billederne bliver markeret med en grøn ramme.

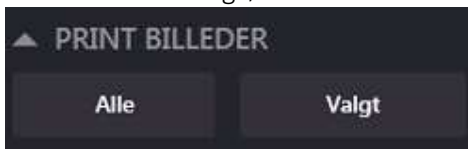


Vælger du at printe alle billeder, så vises hele undersøgelsen på én side med tilhørende patient- og undersøgelsesoplysninger. Vælger du kun at printe de valgte billeder, så vises hvert enkelt billede på sin egen side.

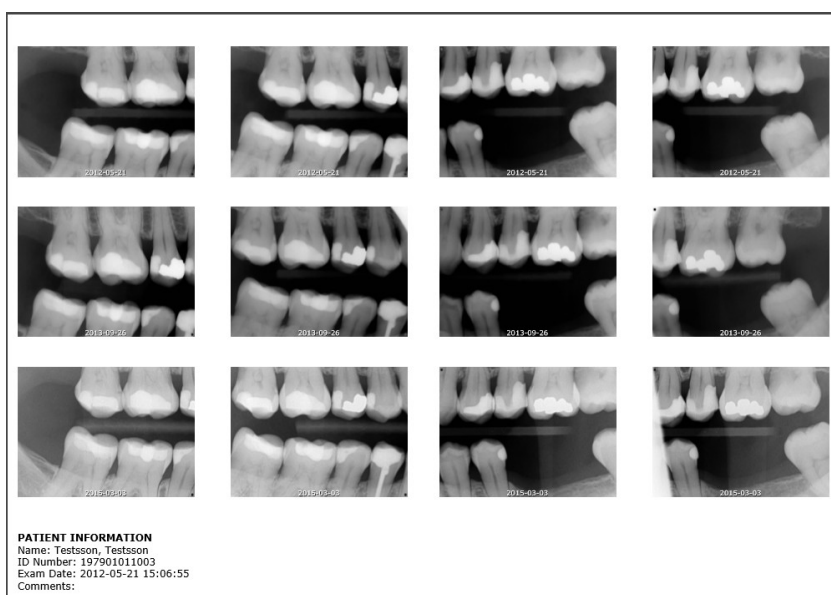

EXPORT IMAGES

Eksportfunktionen kan eksportere enten alle billeder i en undersøgelse eller kun de valgte billeder. Markér billederne ved at holde Ctrl-tasten inde og klikke på de billeder, der skal eksporteres; billederne bliver markeret med en grøn ramme.

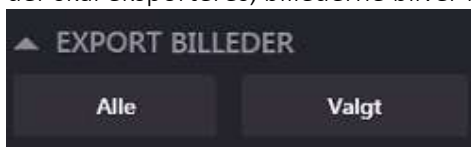


Uanset om du vælger at eksportere alle billeder eller kun de valgte, så dukker følgende dialogboks op. Under billedet beskrives de forskellige valg trin for trin.


ImageExport Plugin

- 1 Image format
- 2 Image export path
 ...
- 3 Export Options
☐ Anonymize
☐ Burn patient information
- 4 Annuller Export

1. Under *Format* har du følgende valgmuligheder. Eksport i DICOM-format er at foretrække, men det kræver, at modtageren af filerne har den software, der kræves, for at kunne læse DICOM-filer.

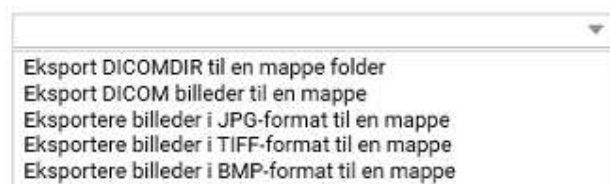

2. Vælg en sti til billedeksport ved at klikke på knappen med prikker eller indtaste en sti, f.eks. C:\Temp
3. Under *Alternativer til billedeksport* kan du vælge, om du vil anonymisere billederne, og du kan også vælge, om patientoplysningerne skal indprentes på billedet. Sådan her kan et billede se ud, hvis du vælger både at anonymisere og indprente oplysninger på billedet.

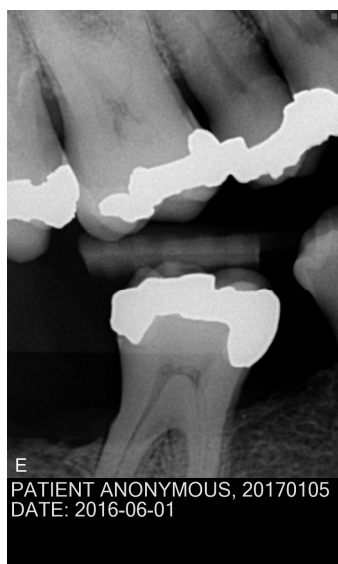

4. Klik på Eksporter. Destinationsmappen åbnes i Windows Stifinder, hvor de gemte billeder kan ses.




NOTE!


Hvis du vil sende billeder via e-mail, skal e-mailen krypteres for at overholde Patient data loven. Der findes sikre systemer for denne slags kommunikation såsom C-takt Link.

IMPORTERE BILLEDER

Importerer billeder fra filer. Onepix-programmet kan importere 8-bit og 12-bit sort-hvide (i gråskala) billeder og 24-bit farvebilleder i flere forskellige formater, f.eks. TIFF, BMP, PNG og JPG.

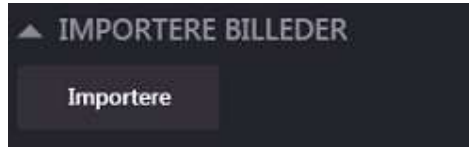

For at kunne importere billeder skal du befinde dig i en serie med dagsdato undersøgelsesdato. Du kan enten vælge at importere billeder til en eksisterende serie eller oprette en ny serie. Hvis du skal indlæse billeder fra et hukommelseskort i kortlæseren, skal du først indsætte hukommelseskortet og derefter klikke på Importere.

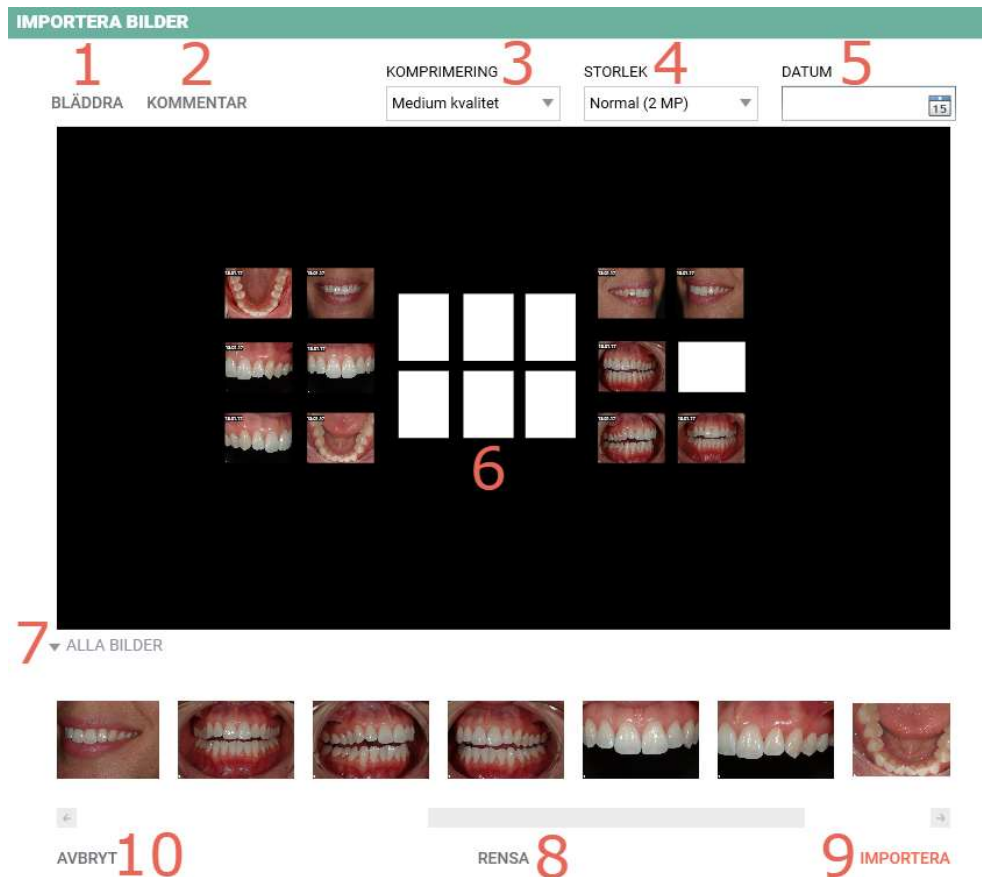

1. Gennemse billederne fra en mappe på harddisken. Hvis du indlæser billederne fra et hukommelseskort, vises billederne direkte på skærmen, uden at du behøver at klikke på noget.
2. Hvis du vil tilføje en kommentar til billederne, så gør du det her.

3. Vælg komprimeringsgrad. Skal som regel kun gøres den første gang. Det seneste valg vil blive gemt på computeren.
4. Vælg størrelse. Skal som regel kun gøres den første gang. Det seneste valg vil blive gemt på computeren.
5. Vælg dato, hvis du ønsker en anden dato på billederne end dags dato.
6. Her vises en forhåndsvisning af, hvordan det kommer til at se ud, når billederne importeres til serien. Hvis der vises billeder, som du ikke ønsker skal medtages, skal du blot klikke på disse billeder, holde museknappen inde og trække dem ud fra kortet og give slip.
7. Hvis der er flere billeder på hukommelseskortet eller i mappen, som du importerer fra, skal du klikke på teksten ALLE BILLEDER for at vise dem på en liste. Du kan nemt klikke på et billede på listen og trække og slippe det til den ønskede ramme i forhåndsvisningen ovenfor.
8. Hvis du vil tømme forhåndsvisningen fra alle billeder, skal du klikke på RYD. Jf. punkt 7.
9. Klik på IMPORTERE, når du er tilfreds med dit valg.
10. Hvis du klikker på AFBRYD, lukkes dialogboksen uden nogen ændringer.




NOTE!

For at undgå sammenblanding af patientdata, bør funktionen "Eksporter til Dicom" anvendes, da dette indebære at patientdata gemmes i filen. Hvis du vælger øvrige filformater bør "brænd patientdata" være aktiveret, således at patient data skrives ud i klartekst under billedet.

EKSPORTER BILLEDER TIL CD

Funktionen Eksporter billeder til CD kan eksportere enten alle billeder i en undersøgelse eller kun de valgte billeder. Markér billederne ved at holde Ctrl-tasten inde og klikke på de billeder, der skal eksporteres; billederne bliver markeret med en grøn ramme.

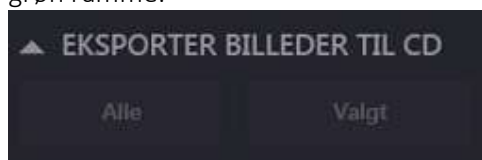

Uanset om du vælger at eksportere alle billeder eller kun de valgte, så dukker følgende dialogboks op. Under billedet beskrives de forskellige valg trin for trin.

Burn to CD Plugin

1 Image format

2 Export Options

☐ Anonymize

☐ Burn patient information

Annuller 3 Burn to CD

1. Under *Format* har du følgende valgmuligheder. Eksport i DICOM-format er at foretrække, men det kræver, at modtageren af filerne har den software, der kræves, for at kunne læse DICOM-filer.

Eksport DICOMDIR til en mappe folder
 Eksport DICOM billeder til en mappe
 Eksportere billeder i JPG-format til en mappe
 Eksportere billeder i TIFF-format til en mappe
 Eksportere billeder i BMP-format til en mappe

2. Under *Alternativer til billedeksport* kan du vælge, om du vil anonymisere billederne, og du kan også vælge, om patientoplysningerne skal indprentes på billedet. Hvis du ikke foretager dig noget her, gemmes billederne med patient- og billedoplysninger, f.eks.: 19690101-1005_A. LIGGENDE BITEWING_2016-02-10_08-42-21.jpg.
3. Sørg for, at du har isat en tom CD/DVD i brænderen. Klik på Brænd til CD/DVD.
4. Denne dialogboks vises:

Burn to CD Plugin


Select Device

Recorder IS NOT supported
 Media IS NOT supported
 3,93 / ??? MB

Current Media:
 Current Type:
 Status:

Annuller Burn

5. Vælg den enhed, som skal brænde billederne, og kontrollér, at alle kriterierne for brænding er opfyldt:

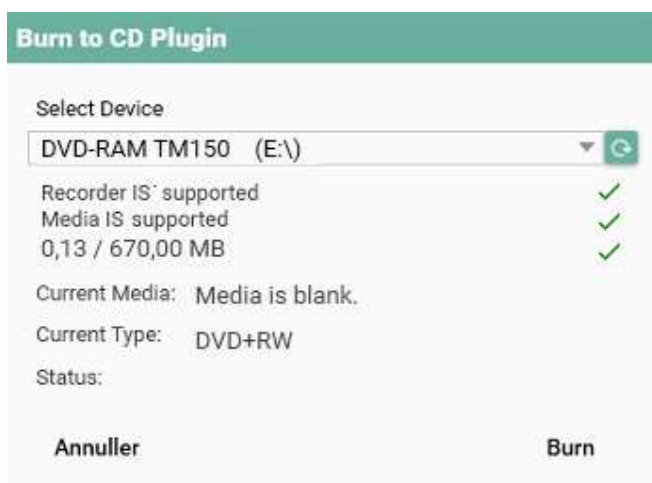

6. Klik på Start brænding, og vent til brændingen er færdig.




NOTE!


For at undgå sammenblanding af patientdata, bør funktionen "Exporter til Dicom" anvendes, da dette indebære at patientdata gemmes i filen. Hvis du vælger øvrige filformater bør "brænd patientdata" være aktiveret, således at patient data skrives ud i klartekst under billedet.

SKIFT BILLEDDATO

Skift af billeddato bruges til at ændre datoerne for billeder importeret med den forkerte dato. Bemærk, at du kun kan ændre billeddatoer på billeder, der ikke er låst. Hvis billederne / serierne er låst, deaktiveres knapperne.

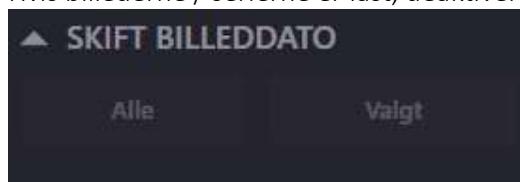

Skift billeddato funktion er deaktiveret som standard. For at aktivere skal du gå til Onepix-indstillinger og klikke i feltet Vis knapper til ændring af billeddatoer

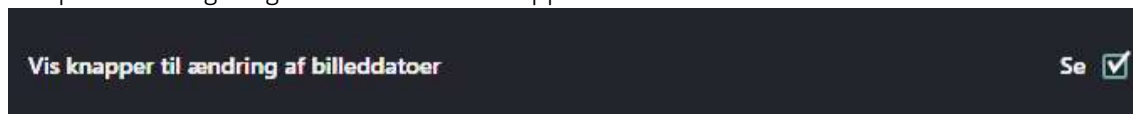

For at ændre billeddatoen på nogle billeder skal du vælge et eller flere billeder ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på billederne, så de fremhæves med en grøn ramme. Klik derefter på knappen Valgt under Skift billeddato.

For at skifte til samme dato for hele serien skal du vælge et billede i serien og klikke på knappen Alle under Skift billeddato.

Klik på kalenderikonet for at vælge den rigtige dato, og klik på Vælg

DATO

Vælg dato

2020-11-18



Afbryd


VÆLG >

Sørg for, at datoen under billedet i visningen opdateres for de valgte billeder.

PLUGIN




Under PLUGIN vises de installerede Onepix-plugins. Plugins kan vælges under installationsprocessen. Her er nogle eksempler på plugins, der er tilgængelige i Onepix.

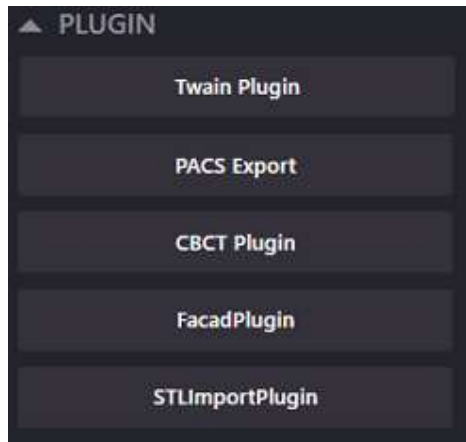


TWAIN PLUGIN

Twain-plugin bruges til at hente billeder fra en Twain-kompatibel kilde, såsom en billedpladescanner eller en panoramamaskine. For at vælge Twain-kilde, gå til Onepix-indstillinger og klik på knappen Rediger Twain-kilde.

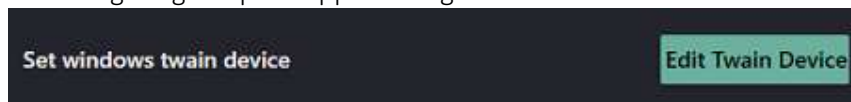

For at hente billeder fra en Twain-kilde: Opret en ny Twain-studie/-serie med modalitet OT (Other), vælg en billedposition og klik på Twain-plugin.

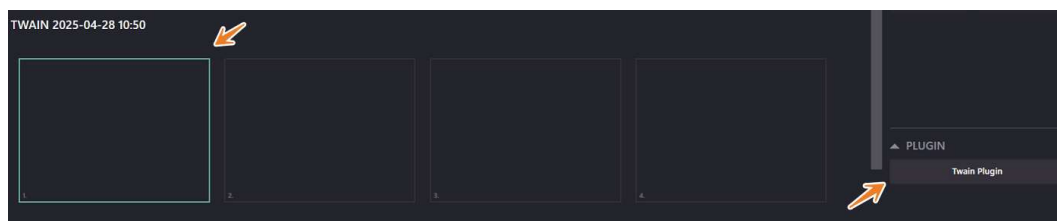


Bemærk, at Twain-kilder har deres eget design og dialogvinduer, så billedindhentningsprocessen kan variere mellem forskellige kilder. Se producentens brugervejledning for hver Twain-kilde. Når du har hentet billeder i Twain-dialogen og lukker vinduet/dialogen, bliver billederne sendt til Onepix. For at teste/fejlsøge Twain-kilden kan du bruge en open source-applikation som Twacker.


PACS EXPORT

Pacs Export-plugin bruges til at sende billeder fra Onepix til en Pacs-server.


Arbejdsforløbet er enkelt, du vælger en serie, du vil eksportere, og klikker på knappen Pacs Export. Det sender alle billeder i den valgte serie til Pacs.

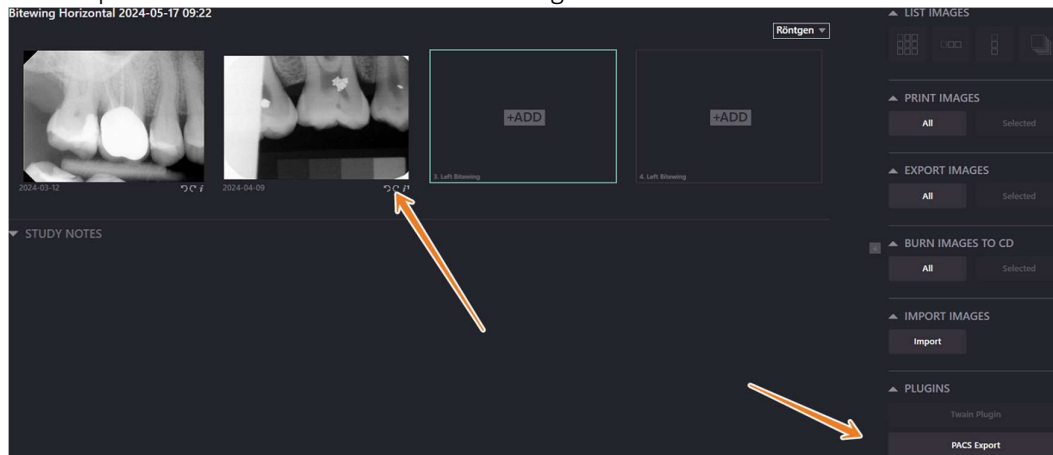

Du kan finde indstillingerne for Pacs Export i filen CDRPacs.ini i mappen
C:\Program Files (x86)\Unident AB\Onepix\Plugins\Study\Legacy\PacsPlugin\

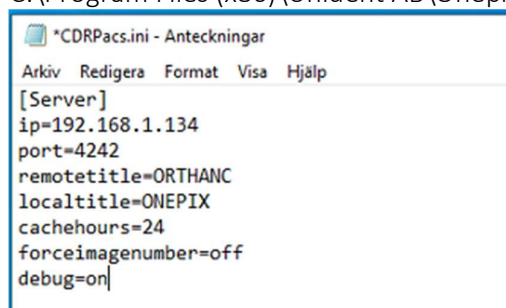

Når Pacs Export-plugin er installeret, vil du også se, at der kommer en ny knap kaldet WORKLIST i Onepix. Den kan bruges til at hente patienter fra et arbejdslistesystem som for eksempel RIS.

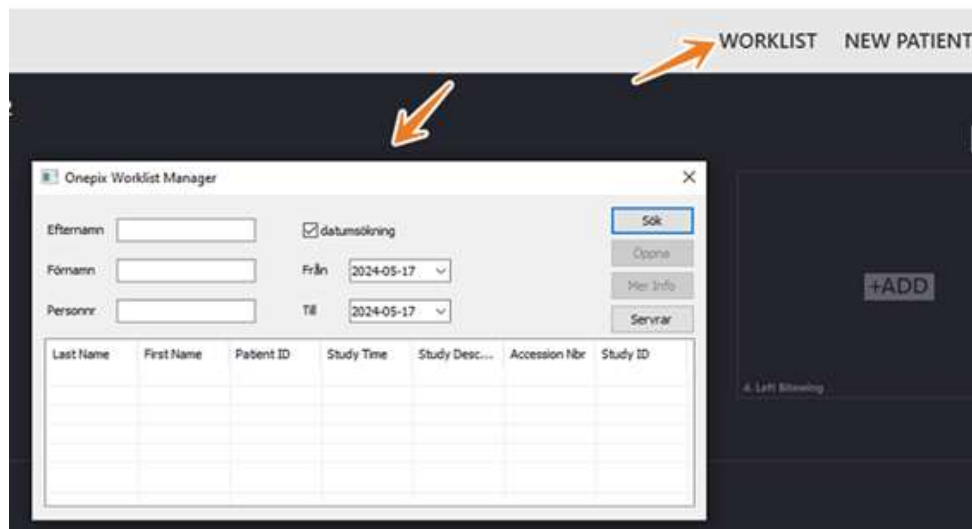


Indstillingerne for worklisten findes i filen uwm.ini i mappen
C:\Program Files (x86)\Unident AB\Onepix


```
uwm.ini - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
[[server1]
peerHOST=192.168.192.128
peerPORT=1004
peerAETitle=TESTAE
localAETitle=Testklient
dicomNameString=LastName^FirstName^MiddleName^NamePrefix^NameSuffix
modalities=IO,XC,PX
active=true
```

CBCT PLUGIN

CBCT-plugin bruges til at eksportere en CBCT-studie til en ekstern CBCT Viewer. Onepix kan gemme CBCT-studier, men kan kun vise ét billedsnit ad gangen. Vælg den CBCT-studie, du vil eksportere, og klik på CBCT-plugin.

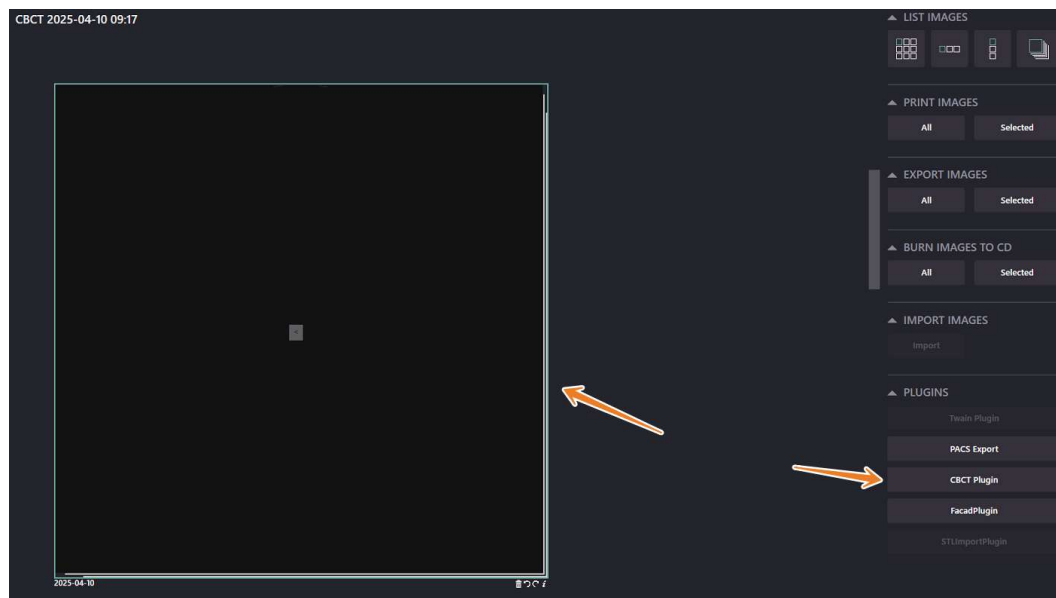

I Onepix-indstillingerne, når du klikker på knappen CBCT-plugin, kan du vælge, hvilken Viewer-type du bruger, og du kan også lave indstillinger for Snapshot, Output og Viewer-sti.

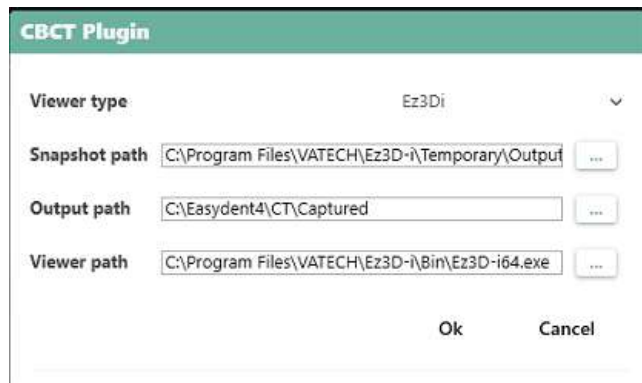

FACAD PLUGIN

Facad-plugin bruges til at eksportere billeder til en ekstern fremviser kaldet Facad. Du vælger det billede, du vil eksportere, og klikker på knappen Facad-plugin.




Indstillingerne for Facad-plugin findes i filen C:\Program Files (x86)\Unident AB\Onepix\Plugins\Study\FacadPlugin\FacadPlugin.dll.config


```
FacadPlugin.dll.config - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <runtime>
    <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
  </runtime>
  <appSettings>
    <add key="PluginPath" value="C:\Facad\Program\Facad\Facad.exe"/>
    <add key="PluginArg" value="{0}"/>
    <add key="Debug" value="false"/>
  </appSettings>
</configuration>
```

STL IMPORT PLUGIN

STL Import-plugin bruges til at importere STL-filer til Onepix. Opret en ny studie eller serie med modalitet STL (3D Manufacturing Model) og klik på STL Import-plugin.

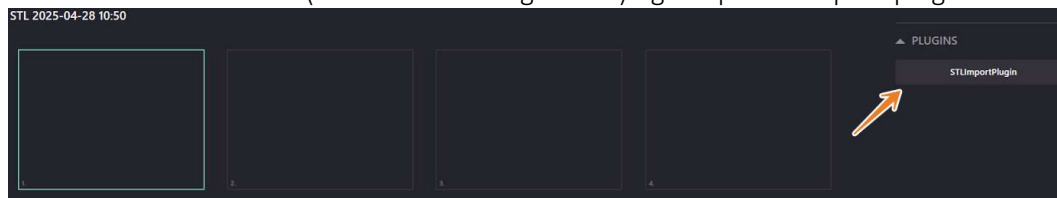

Klik på BROWSE og vælg en mappe, der indeholder STL-filer. Vælg hvilke filer, du vil importere, og klik på IMPORT-knappen.

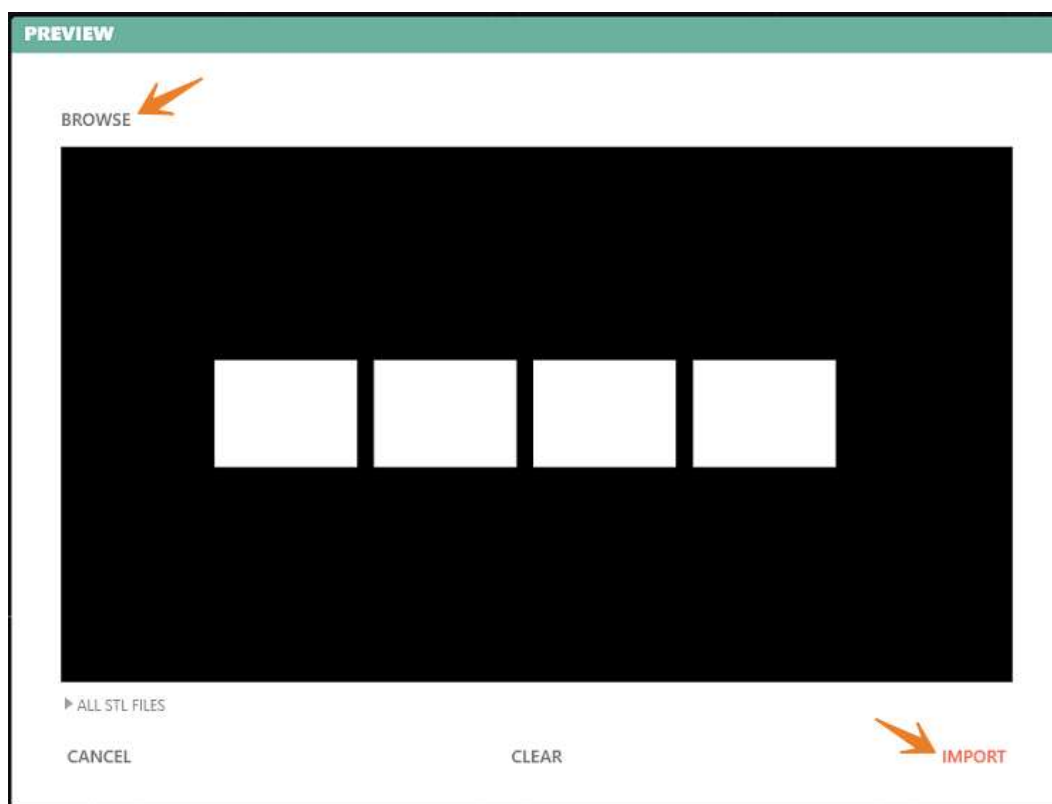


3SHAPE UNITE PLUGIN


3Shape Unite-plugin bruges til at importere 3D-modeller fra 3Shape Unite-softwaren til Onepix. Opret en ny studie eller serie med modalitet STL (3D Manufacturing Model) og klik på knappen 3Shape Unite-plugin.

3SHAPE UNITE SETTINGS



Gå til Onepix-indstillinger

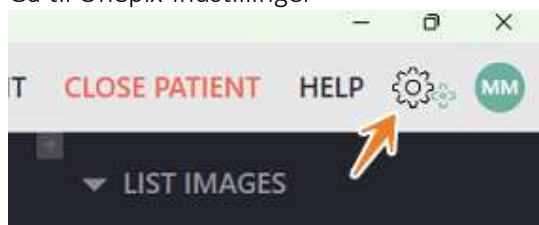


Klik på 3Shape Unite-plugin

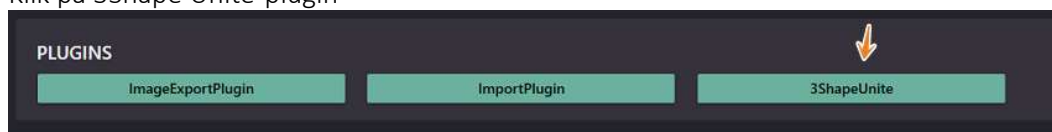


Klik på knappen ADD/TILFØJ

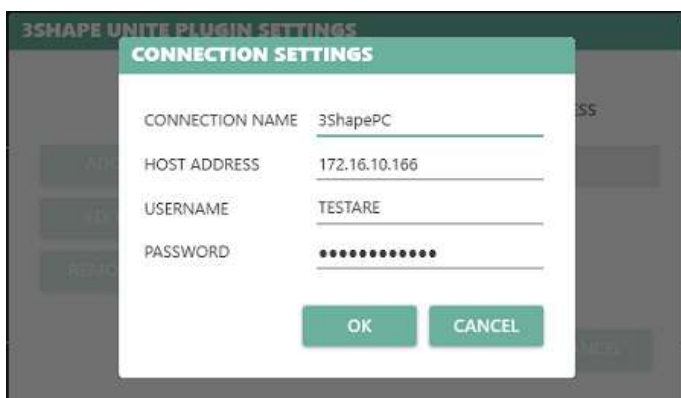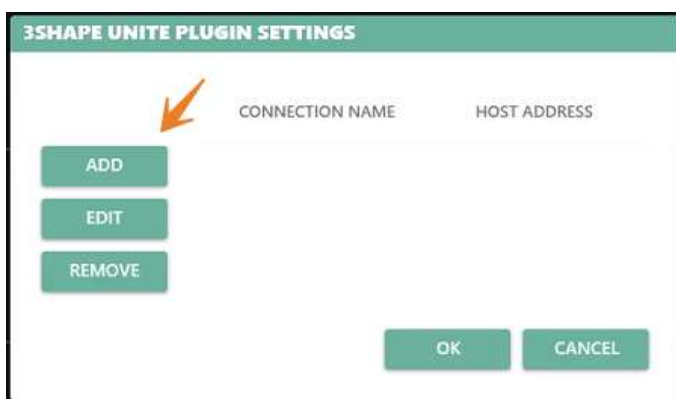


Indtast forbindelsesoplysningerne, som du finder i 3Shape Unite-softwaren, se nedenfor.

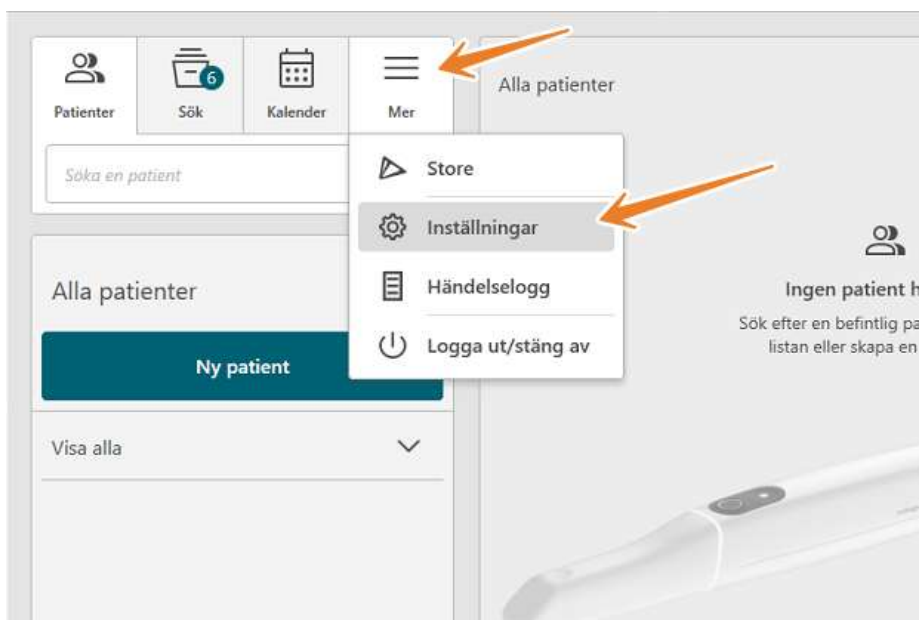

Vælg et brugernavn/adgangskode og klik på Anvend, og kopier derefter oplysningerne og indsæt dem i Onepix-indstillingerne.

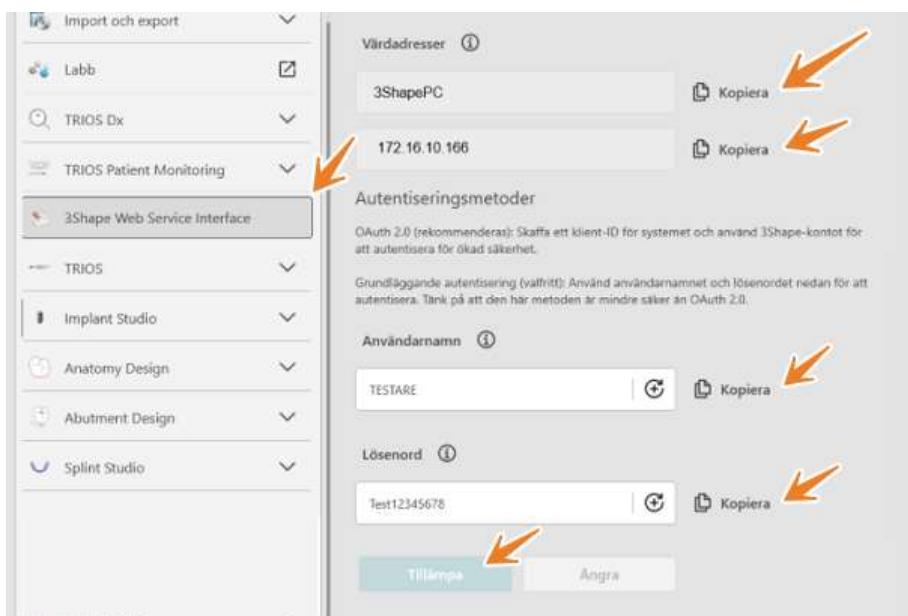


Du kan tilføje mere end én scanner. Klik på OK, når du er færdig.

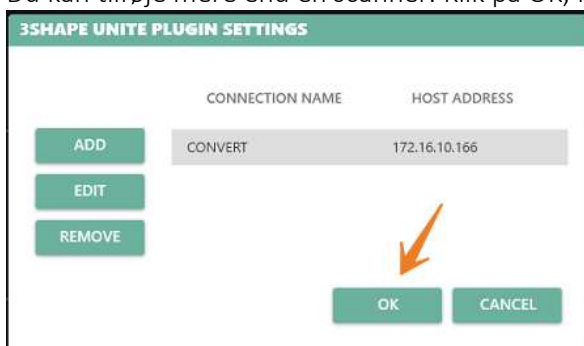


3SHAPE UNITE INTEGRATION WORKFLOW


Bemærk, at for at dette kan fungere, skal 3Shape Unident-softwaren være i gang. Opret en ny studie eller serie med modalitet STL (3D Manufacturing Model) og klik på knappen 3Shape Unite-plugin.

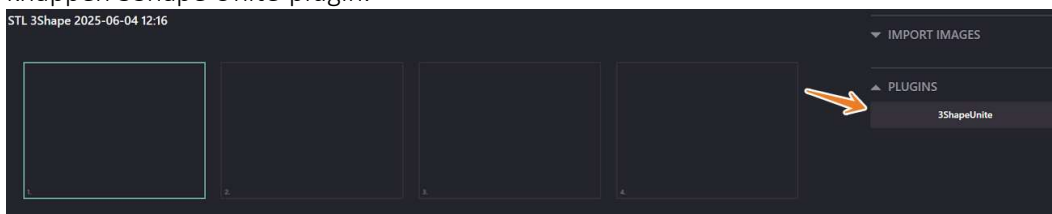

Dette åbner dialogboksen for 3Shape Unite-plugin.

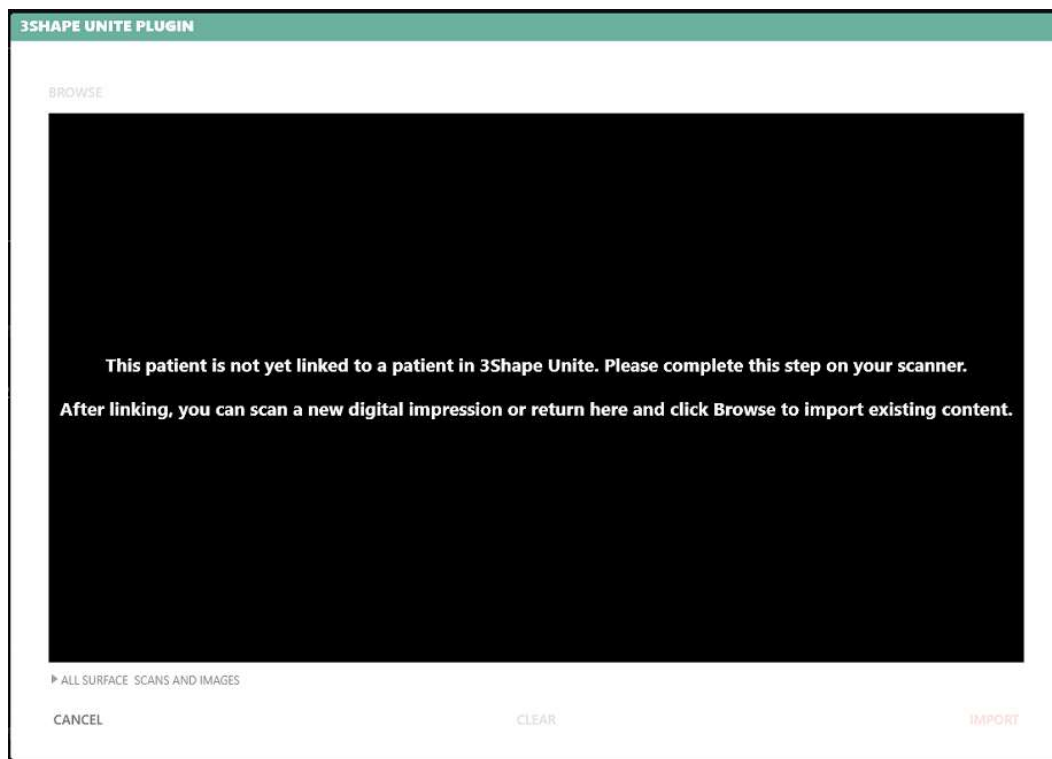

Hvis du skal lave en ny scanning, gå til 3Shape Unite-softwaren og klik på knappen nederst i venstre hjørne for at oprette eller åbne patienten og fortsæt med scanningen.

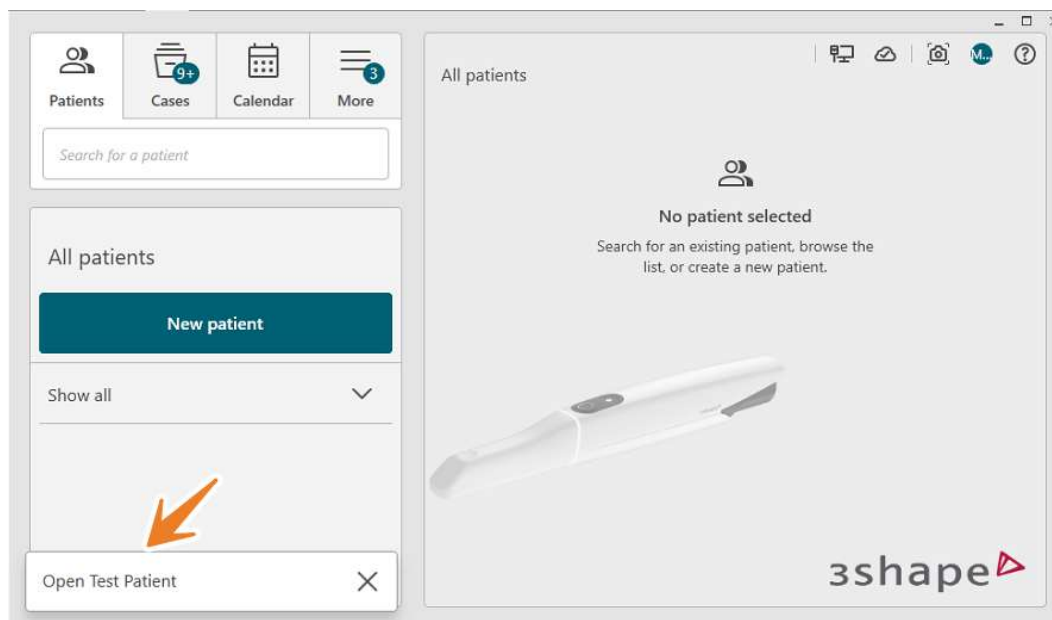

Hvis patienten allerede findes i 3Shape Unite, får du mulighed for at flette patienterne sammen. Sørg for at kontrollere, at patientoplysningerne er korrekte, før du fletter patienterne sammen.

×

Your patient may already exist

You can only merge your patient with this existing patient, because they have the exact same patient ID.

Merge with existing patient

19121212-1111

Testare Patient (Test-Patient)

☒

Add as new patient

19121212-1111

Testare Patient

☐

Merge with existing

Cancel

Hvis du ikke er sikker på, om det er den samme patient, så vælg i stedet at Tilføj som en ny patient.

×

Your patient may already exist

Do you want to merge with an existing patient or add as a new patient?

Add as new patient

19141414-1414

Test Patient

☒

Merge with existing patient

19121212-1111

Test Patient

☐

Merge with existing patient

19111111-1111

test patient


☐

Add as new


Cancel

Når scanningen er færdig, gå tilbage til Onepix for at importere 3D-modellen.


Klik på BROWSE

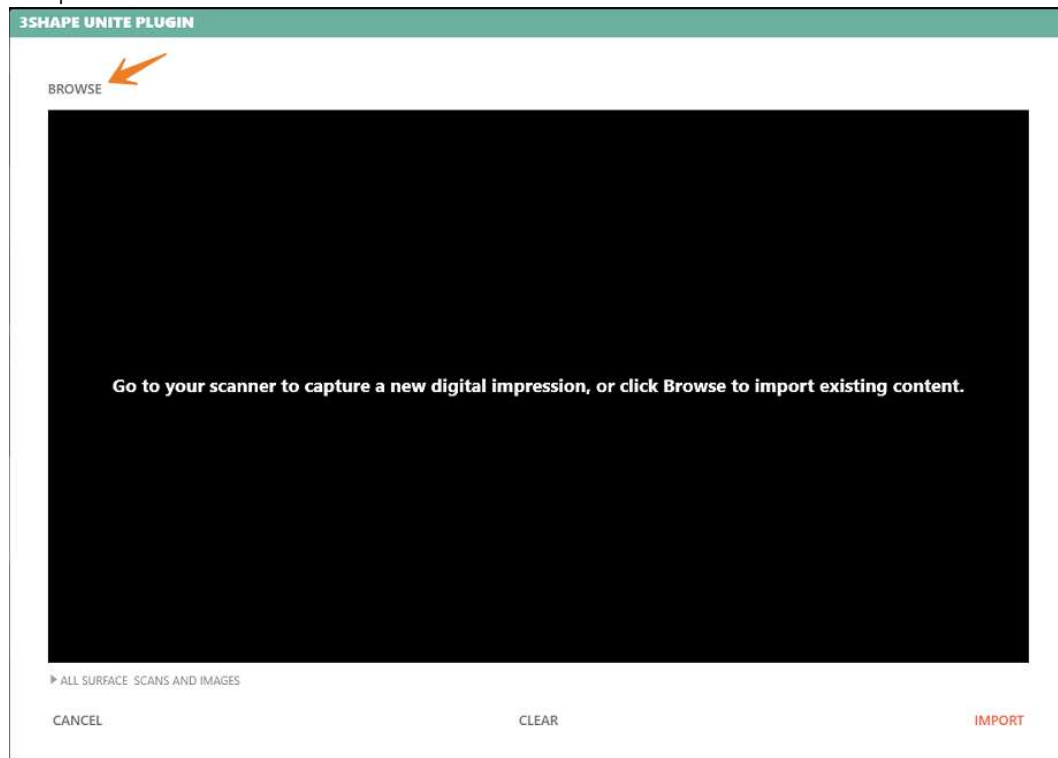


Vælg en 3Shape Unite-studie/indhold og klik på OK.

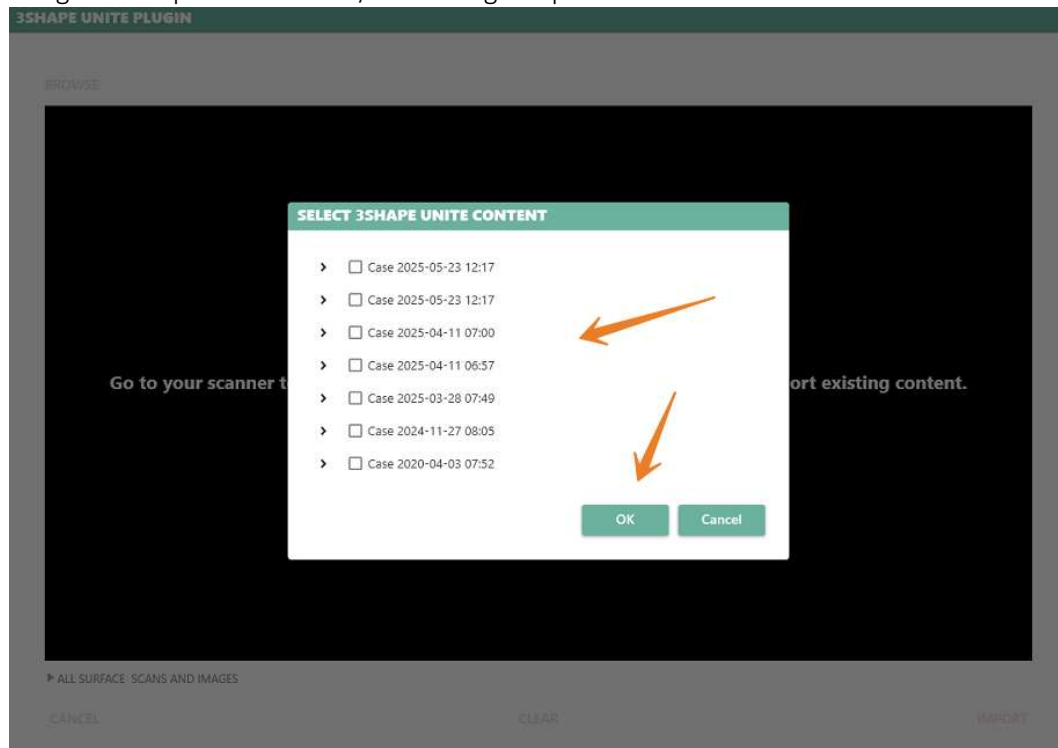


Vælg hvilken 3D-model du vil importere, og klik på IMPORT-knappen

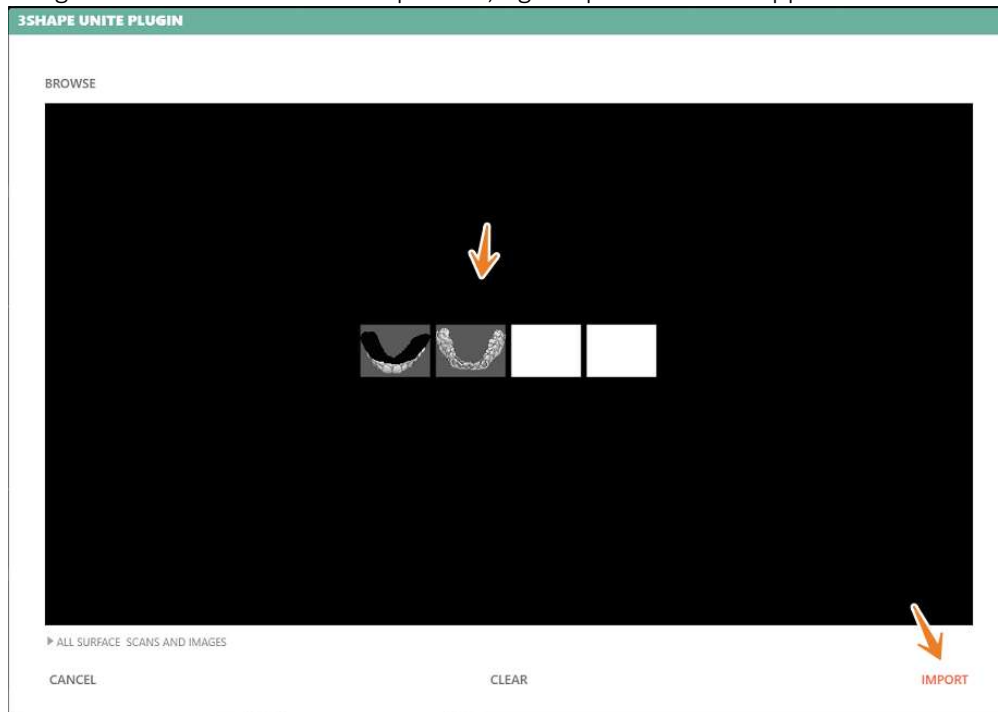

Dobbeltklik på en position for at se 3D-modellen i zoom-visning

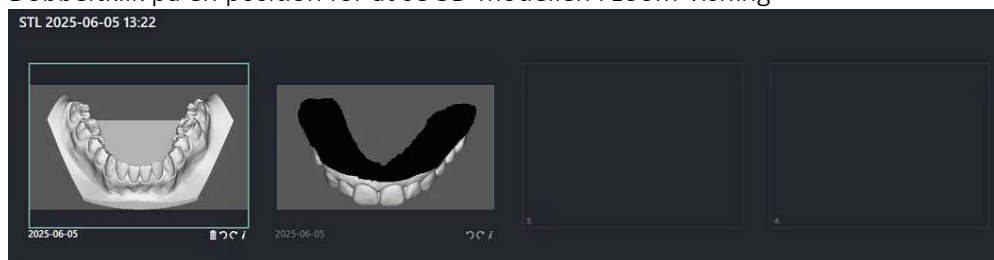

I zoom-visning kan du bruge værktøjerne i venstre side til at zoome, rotere og flytte 3D-modellen.

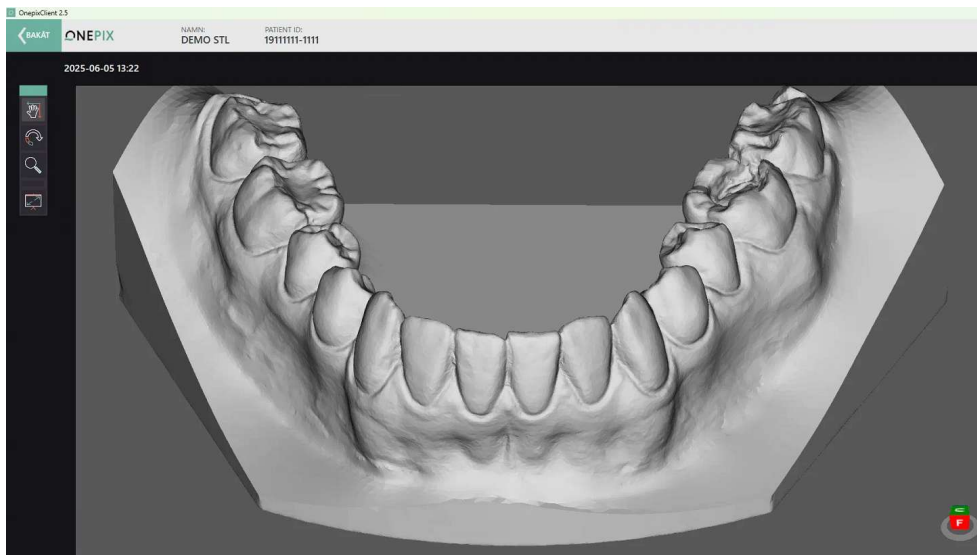

BILLEDINDLÆSNING

Når der er oprettet en undersøgelse eller en serie, vises et tomt kort med dags dato som er klar til billedindlæsning. Det ses ved symbolet +TILFØJ i midten af rammen som på billedet herunder.



Øverst til højre i serien er der en lille ramme med en pil og navn på den sensorproducent, der anvendes som standard. Hvis du ønsker at bruge en anden sensor, kan du klikke på pilen og vælge en anden producent som i billedeksemplet herunder. Under Onepix indstillinger kan du indstille, hvilken hardware der skal vælges på forhånd til alle nye Røntgenserier på denne computer.




For at starte billedindlæsning skal du kontrollere, at hardwaren er tilsluttet. Med hardware menes al indlæsningshardware såsom røntgensensor, fotokamera, scanner, panorama m.fl. Klik derefter på +START i den ramme, hvor billedindlæsningen skal

starte, og vent, til der står Venter på billedoptagelse under rammen. Rammen er aktiveret og klar til billedindlæsning.



NOTE!

Patienten bør ikke udsættes for unødvendige røntgenstråler, det er vigtigt, at vente, indtil displayboxen i Onepix undersøgelses vinduet blinker / lyser grønt (Standard farve) i automatisk optagefunktion, eller til meddelelsen "venter på at tage x-ray" vises inden du aktiverer røntgenkilden.

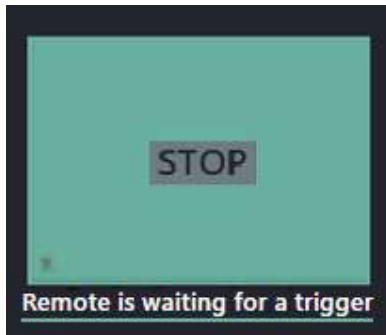

Når der tages billeder, vises det seneste billede i fuld skærm i 10 sekunder som standard. Tiden kan ændres under indstillinger. Når billedet efterfølgende lukkes, vender programmet tilbage til billedindlæsningstilstanden, og aktiveringen flyttes automatisk videre til næste ramme. Med andre ord: Du behøver ikke aktivere hver ramme; det er nok bare at aktivere den første. Den rækkefølge, som billederne indlæses i, er vist i den tomme ramme nederst til venstre.

Hvis hardwaren ikke er tilsluttet, eller hvis der af en eller anden grund ikke er kontakt med hardwaren, så vil følgende information blive vist under rammen:



Undlad at tage billeder, hvis du får denne meddelelse. Kontrollér, at hardwaren er korrekt tilsluttet, og at der vises en ramme med en grøn markering, som betyder, at den er klar til billedoptagelse. Kontakt teknisk support, hvis hardwaren er tilsluttet, og du fortsat får denne meddelelse.



NOTE!

Hvis billedet ikke indlæses korrekt i Onepix vil fejlfinding af hardware og software gennemføres inden ny eksponering udføres. Med udvalgt hardware kan billedet sendes påny uden re-eksponering direkte fra Onepix.

FLERE BILLEDER I SAMME RAMME

Du kan indlæse flere billeder i samme ramme. For at aktivere rammen til billedoptagelse skal du klikke på plussymbolet, som vises midt i rammen. Plussymbolet er kun synligt, hvis serien er oprettet samme dag.



Hvis der er mere end et billede i en ramme, er det vist som på billedet herunder. Klik på pilen til højre eller venstre for at vælge, hvilket billede der skal vises forrest i bunken.



NOTE!

Når en "Stack" symbol vises i billedet er der flere billeder på samme position til rådighed. Skift mellem billeder ved hjælp af pilene, der vises, når markøren er over billedet.


BILLEDBEHANDLING EFTER INDLÆSNING

Når billedindlæsningen er færdig, har du samme dag til at redigere undersøgelsen og billederne. Derefter låses undersøgelsen for alle ændringer. Du kan stadig se og læse alle oplysninger, men der gemmes ingen ændringer på undersøgelser, der er ældre end en dag. For at låse en undersøgelse op, kræver det, at du går via softwaren Onepix Admin.




Allerede i Undersøgelse View er det nu muligt at:

- Rotere et billede 90 grader med/mod uret med pilene, som du finder under billedet.
- Du kan afmontere et billede, hvis du ikke ønsker, at det skal vises i serien, ved at klikke på ikonet med papirkurven. Dette sletter ikke billedet; det vises bare ikke i serien. Billedet havner under en fane med navnet UMONTERET BILLEDER lige under serien, hvor du nemt kan vælge at hente det tilbage i serien, hvis du ønsker det.
- Symbolet (*i*) viser, om der er kommentarer, samt hvor mange der er til billedet. Du kan læse kommentarerne ved at klikke på symbolet. Her kan du også skrive/ændre en global kommentar til billedet.

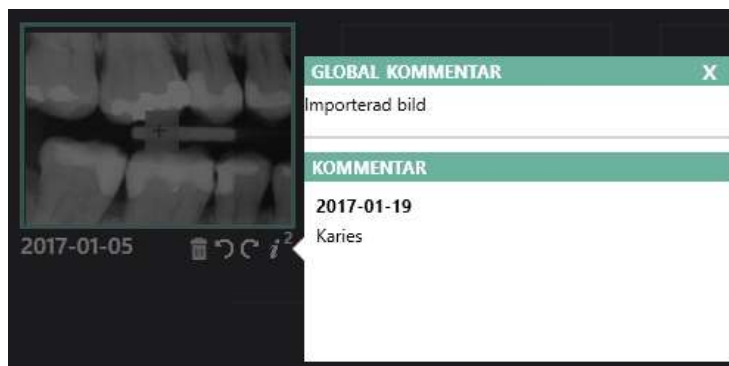


UMONTERET BILLEDER

Hvis der er umonterede billeder i serien, vises en fane jf. billedet herunder neden under serien.

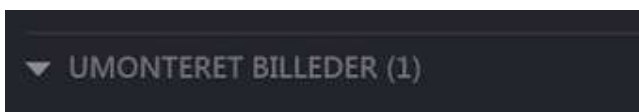


Klik på pilen for at åbne listen med de umonterede billeder. Alle umonterede billeder vises i en vandret liste.

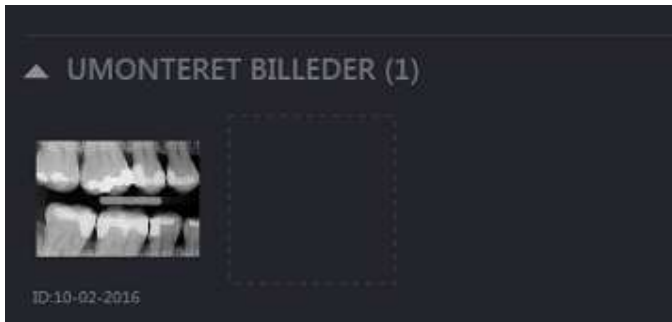

For at montere et billede tilbage, kan du klikke på billedet på listen under umonterede billeder, holde museknappen inde, samtidigt med at du flytter billedet til en tom ramme i serien. Bemærk, at dette kun er muligt den samme dag, som undersøgelsen er oprettet. Du kan afmontere og montere billeder i gamle undersøgelser gennem værktøjet Onepix Admin eller ved at låse undersøgelsen op via Onepix Admin.

KOMMENTAR

Under hver undersøgelse er der et kommentarfelt, hvor du kan skrive/læse kommentarer til undersøgelsen. Klik på pilen til venstre for Kommentar, og klik derefter på linjen nedenunder for at læse/skrive en kommentar. Tryk på Enter for at tilføje en ny række.

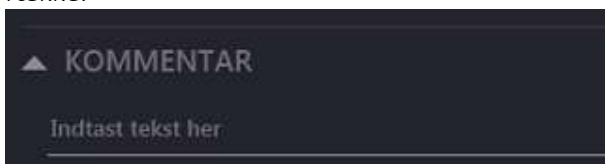

Undersøgelseskomentarer giver mulighed for at tilføje generelle bemærkninger til en undersøgelse (kaldes også "studie"). Brugere, der anvender undersøgelseskomentarer, plejer at tilføje og ændre i dem ved undersøgelsens afslutning, som en nem måde at tilføje generelle observationer. Undersøgelseskomentarerne kan kun tilføjes samme dag, som undersøgelsen er oprettet. Du kan dog redigere i dem efterfølgende via Onepix Admin, hvis det er nødvendigt.

GENVEJE I UNDERSØGELSE VIEW

Herunder vises de genveje, der er tilgængelige i Undersøgelse View.

KOMMANDONAVN

Ny Undersøgelse

Søg Patient

Luk

Kopier billede

Markér alle

Print Billeder

Gennemse sammenligningsfunktionen ved
overlapning

Esc

GENVEJSTAST

Ctrl + N

Ctrl + O

Ctrl + W

Ctrl + C

Ctrl + A

Ctrl + P

Pil Op/Page Ned

Luk sammelige vindue

ZOOM VINDUE

Dette afsnit indeholder blandt andet:

- Værktøjer til at se/håndtere/justere billeder
- STL Viewer



Når du dobbeltklikker på et billede i Undersøgelse View, åbnes billedet i det såkaldte Zoom Vindue. Se afsnittet STL Viewer nedenfor for, hvordan du arbejder med STL-filer. Til venstre for billedet finder du billedværktøjet og til højre information og billedtilpasningsmuligheder. Alle de ændringer, der foretages i Zoom Vindue, gemmes automatisk, hvis billedet er taget samme dag, som ændringerne foretages. Du kan stadig foretage ændringer og justeringer på billeder, der er ældre end en dag, til undersøgelser m.m., men disse ændringer bliver ikke gemt på billedet. For at gå tilbage til Undersøgelse View skal du klikke på TILBAGE øverst til venstre. I dette afsnit beskrives de forskellige muligheder i Zoom Vindue med tilhørende funktioner.

VÆRKTØJ

Til venstre for billedet i Zoom Vindue finder du værktøj, som kan være godt at kende. Herunder følger en beskrivelse af værktøjet, samt hvordan det skal anvendes.

LYSSTYRKE OG KONTRAST



Lysstyrke og kontrast er blandt det mest almindelige værktøj, der anvendes i Zoom Vindue. De er derfor også valgt på forhånd som standard, når du åbner et billede i Zoom Vindue.

1. Klik på knappen for at aktivere værktøjet, hvis det er ikke er aktiveret.
2. Klik derefter på billedet, og hold museknappen inde.

3. Flyt markøren op/ned for lysstyrke.
4. Flyt markøren til venstre/højre for kontrast.
5. For at vende tilbage til det oprindelige billede, skal du dobbeltklikke på billedet.

Forandringerne i lysstyrke og kontrast foretages også under kontrolmulighederne under Filters i højre side. Alle forandringer gemmes under Historie.

WINDOW WIDTH / CENTER



Window Width/Center er et alternativt billedjusteringsværktøj i zoomvisningen, som giver en anden billedpræsentation end traditionel lysstyrke og kontrast. Brugeren kan vælge at arbejde enten med Lysstyrke/Kontrast eller Window Width/Center – kun ét værktøj kan være aktivt ad gangen.

For at knappen Window Width/Center vises, skal funktionen være aktiveret i Onepix-indstillinger.

Sådan gør du:

1. Klik på knappen Window Width/Center for at aktivere værktøjet.
2. Klik i billedet og hold museknappen nede.
3. Flyt musemarkøren op/ned for at justere Center.
4. Flyt musemarkøren til venstre/højre for at justere Window Width.
5. For at vende tilbage til originalbilledet, dobbeltklik i billedet.

Justeringer af Window Width/Center kan også foretages via skyderne under Filter i højre side, i stedet for at justere direkte i billedet. Alle ændringer gemmes og vises under Historik.

FORSTØR



Forstørrelsesværktøjet bruges til at forstørre/formindske billedet på følgende måde:

1. Klik på knappen for at aktivere værktøjet.
2. For at forstørre et område hurtigt kan du dobbeltklikke på billedet.
3. Du kan også bruge musehjulet til at zoome ind eller ud.
4. Klik på billedet, og hold venstre museknap inde.
5. Før markøren op eller ned for at zoome ind eller ud.
6. For at vende tilbage til det oprindelige billede, skal du dobbeltklikke på billedet.

Forstørrelsesfunktionen forbliver aktiv, indtil du vælger et andet værktøj eller lukker Zoom Vindue.

PAN




Giver navigeringsmuligheder i et billede. Panoreringsværktøjet bruges sammen med forstør, og gør det muligt at studere tilstødende områder i et forstørret billede ved samme forstørrelse.

Sådan panorerer du et billede:

1. Klik på ikonet for panorering.
2. Brug musehjulet til at zoome i billedet, eller dobbeltklik på den del, du er interesseret i.
3. Hold museknappen nede, og panorer ved at flytte markøren enten opad/nedad eller til højre/venstre.
4. For at vende tilbage til den oprindelige tilstand kan du blot dobbeltklikke på billedet, uanset hvilken tilstand du befinder dig i.


Panoreringsfunktionen forbliver aktiv, indtil du vælger et andet værktøj.

FLASHLIGHT TOOL

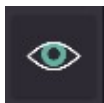

Forbedrer eller oplyser et bestemt område på et billede.

Hvis du klikker på knappen **Flashlight Tool**, aktiveres funktionen med Maksimal kontrast som standardindstilling. Før markøren over i billedet for at se resultatet. Hvis du højreklikker på billedet, vises en menu, hvor du kan vælge andre feltstørrelser og forbedringsfunktioner.

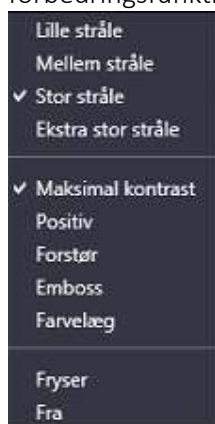

Til Flashlight Tool er der følgende indstillinger:

- Vælg fra Lille til Ekstra stor stråle

- Maksimer kontrast – oplyser feltet
- Positiv – inverterer billedet i feltet
- Forstør – forstørrelser billedet i feltet
- Relief – bruger en relieffeffekt, som giver et tredimensionelt udseende
- Farvelæg – farvelægger feltet
- Fryser – gør, at feltet forbliver på samme sted. Klik på fryser igen for at slippe.
- Fra – Lukker for Flashlight Tool

Flashlight Tool forbliver aktiv, indtil du vælger et andet værktøj eller højreklikker og vælger Fra.

AI – SECOND OPINION



Giver dig støtte ved at gøre dig opmærksom på forhold, der kan opstå på din patients billeder, så du hurtigere kan stille den korrekte diagnose.

Første gang du klikker på AI-knappen, vil du være i stand til at registrere din konto. Udfyld oplysningerne i formen, læs igennem og accepter vilkårene, og du kan bruge AI ved at klikke på knappen Aktiver AI.

Når du klikker på AI-knappen, indlæses informationen på billederne. Resultaterne er vist på billederne ved, at områderne på billederne er markeret.



Når du svæver over et valgt område med musemarkøren, får du lidt mere information.



Caries er vist med et mærke omkring det område, hvor cariesen er til stede.




Når AI-knappen er aktiveret, vises Second Opinion i sidemenuen i højre side. Her kan du vælge, i hvilket omfang værktøjet skal virke. Som standard er værktøjet baseret på medium, men kan justeres til lav eller høj konfidens. Uden justering kan du endda


vælge, hvilken information der skal vises på billederne såsom caries, fyldninger osv. Disse indstillinger gemmes på computeren i indstillingsfilen OnepixSettings.xml



Under Onepix-indstillinger kan du vælge, om du ønsker, at AI skal aktiveres automatisk, hver gang du åbner et billede i gennemsynstilstand, og om du ønsker, at ikke-patologi skal vises eller ej.

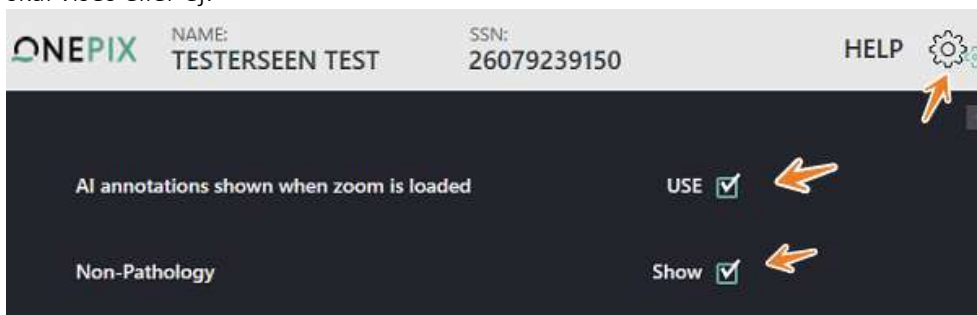

Når du har registreret en konto, vil Onepix downloade second opinion-oplysningerne direkte efter billedopsamling. Denne funktion kan slås fra i Onepix-indstillingerne ved at markere Deaktiver Pearl AI Processing-indstillingen.

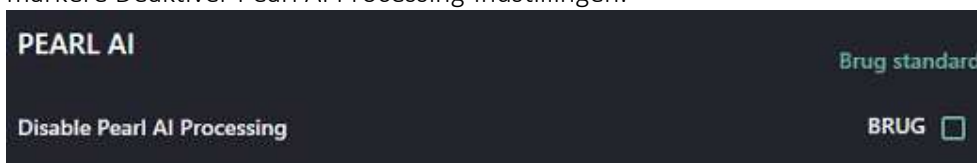

MÅLING



Når du klikker på måleværktøjet, har du tre valgmuligheder: LINEAL, MÅLE VINKEL og KALIBRERE. Nedenfor er der vist, hvad du kan gøre med de forskellige værktøjer.



NOTE!

Måleresultatet er meget afhængig af anvendelsen af kalibreringsobjektet og sensorens position. Målefejl på grund af forvrængning samt den begrænsning, et to dimensionelt billede har kan føre til fejldiagnosticering eller fejlbehandling. Brugeren af målefunktionen skal have gode evner for projektions teknologi for at opnå et godt resultat.




NOTE!

Diagnosticering eller behandling, kan ikke udelukkende baseres på resultaterne på grund af risikoen for målefejl.

LINEAL

Afstanden måles mellem to punkter. Resultatet af målingen vises på målelinjen og i statusfeltet.

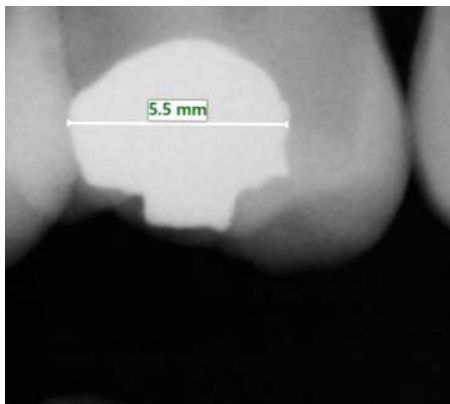

Sådan måler du en afstand med en lige linje:


1. Angiv et udgangspunkt ved at trykke på og holde venstre museknap nede.
2. Hold knappen nede, indtil du har angivet den afstand, du vil måle.
3. Når du slipper knappen, vises længden på linjen mellem de to punkter på billedet.
4. Når du påbegynder en ny måling, forsvinder den første linje.

Måleresultatet vises i millimeter, hvis billedet er kalibreret, ellers vil der stå Px for antal pixels. Denne funktion kan bruges til hurtigt at vurdere den lige afstand. Du kan printe et billede med måleresultatet ved at trykke på Ctrl+P eller klikke på printtasten.

MÅLE VINKEL

Måler afstanden mellem flere linjer og vinklen mellem to lige linjer. Flere linjer og vinkler er to forskellige funktioner, men de beskrives samlet i dette afsnit.

1. Angiv et udgangspunkt på billedet ved at klikke en enkelt gang på venstre museknap og derefter slippe.
2. Træk markøren, og tegn næste linje ved at flytte markøren, og venstreklik igen i slutningen af linjen.
3. Fortsæt på linjen, eller afslut målingen ved at højreklikke.

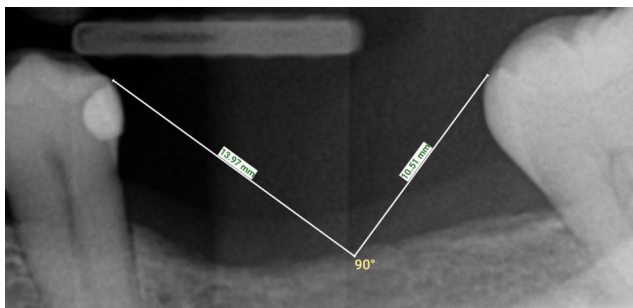

KALIBRERE

Indstiller afstandsoplysninger for et billede. Med kalibreringsfunktionen kan du tilrette forvrængningsproblemer, som forårsages af fejlagtig sensorplacering, forkert retning på strålingen eller andre faktorer. Du kan tilrette problemet ved at anbringe en lige genstand med en kendt længde (f.eks. en fil) i det område, der skal røntgenfotoграфeres. Genstanden fungerer som referencepunkt for målingen, når du har taget billedet. Tag et røntgenbillede. *(I dette eksempel udgør filen genstanden med kendt længde).*

1. Klik på venstre museknap for at angive et udgangspunkt, der er parallelt med filen, og hold knappen nede, indtil du når til filens anden ende.
2. Når du slipper knappen, vises dialogboksen Afstand kalibrering.


AVSTÅNSKALIBRERING

OK

AVBRYT

HJÄLP


3. Angiv filens faktiske længde, målt i mm, i tekstboksen, og klik på OK.
4. Kalibreringen er færdig; når du måler i billedet, vil du se, at dette er en kalibreret måling, ved at der står (cal) efter målingen.

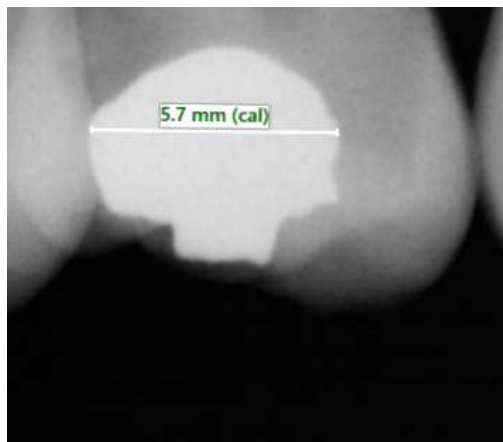

Når du gemmer billedet, gemmes den nye kalibrerede værdi, så billedet ikke behøver at blive kalibreret igen. Når du åbner billedet igen, bruges den gemte værdi som udgangspunkt for alle målinger. Ordet **(cal)** er synligt efter måleværdien.

PIXEL VALUE

Viser pixelværdien for gråskalaen i billedet. Vælg Pixel Value i værktøjet Måling, og gå efterfølgende til et område på billedet. Pixelværdien i det aktuelle område vises ved siden af markøren.

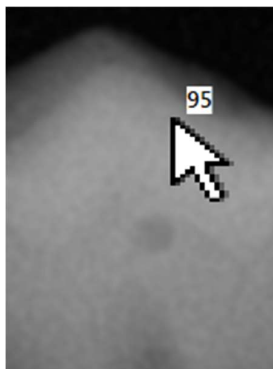

Pixelværdien er en måling af densitet, så hvis densiteten i det røntgenfotograferede område er relativt højt (f.eks. et knogle), så er pixelværdien på gråskalaen inden for området lav til middel. Når røntgenstrålerne passerer gennem et område med lav densitet (f.eks. luft), bliver pixelværdien meget højere.

Det kan være en god hjælp at kende pixelværdierne til bedømmelse af, om eksponeringen er tilstrækkelig mørk til at kunne vurderes. De mørkeste pixels skal være mellem 92 og 99 %. Hvis de falder under grænseværdien, kan du tage et nyt billede med en noget højere eksponering for at opnå en bedre billedkvalitet og gøre det lettere at skelne mellem de kontrasterende områder.


DENSITETSPROFIL



Viser gråskalaværdien for hver pixel langs en lodret, vandret eller brugerdefineret linje. Densitetsprofiler bruges til at finde områder med pixels, der har lignende gråskalaprocent. Det kan bruges til at afgøre spredningen i områder med patologi og for at finde andre områder i billedet med lignende egenskaber. Præcis som de øvrige målingsværktøjer i Onepix kan du printe billedet med den aktuelle densitetsprofil via genvejen Ctrl+P eller ved at klikke på printtasten i værktøjsmenuen i Zoom Vindue.

LINE PROFIL

For linjeprofiler klikker du en gang på billedet for at markere udgangspunktet for linjen, holder knappen nede og trækker linjen så lang, du vil have den. Når du slipper knappen vises profilen.

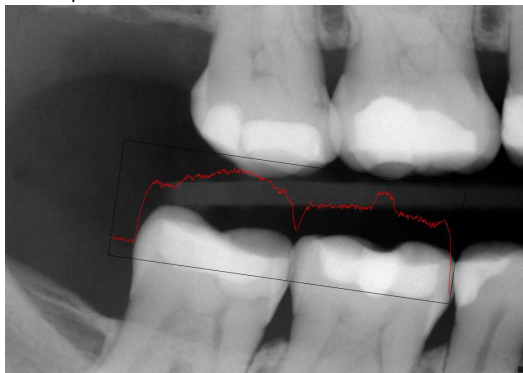


VERTIKAL PROFIL

For vertikal profil klikker du på en hvilken som helst pixel i billedet. Så oprettes der en densitetsprofil i billedet, der måler alle pixels på linjen.



VANDRET PROFIL

For vandret profil klikker du på en hvilken som helst pixel i billedet. Så oprettes der en densitetsprofil i billedet, der måler alle pixels på linjen.

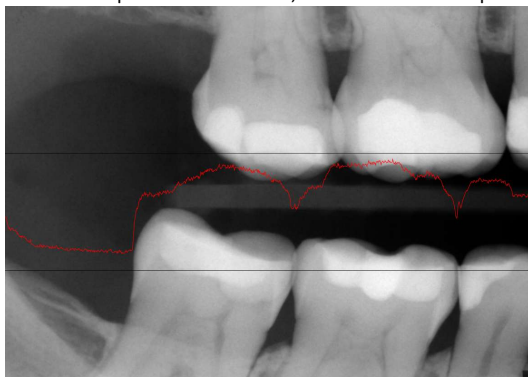

KOMMENTAR



Tilføjer kommentarer med flag til et billede. Kommentarer med flag kan tilføjes et billede, når som helst det er åbnet i Zoom Vindue. Markøren ændres til en pil. Hvis du klikker på billedet, vises dialogboksen jf. billedet herunder.


INSERT NEW NOTE

OK


AFBRYD

HJÆLP

I dialogboksen Edit Note kan du skrive dine bemærkninger. Her får du forslag til de mest almindelige kommentarer, mens du skriver. Brug pil ned og tryk Enter, eller klik på nogle af forslagene, hvis du ønsker at bruge dem. Ellers kan du blot fortsætte med at skrive det, som du gerne vil skrive.

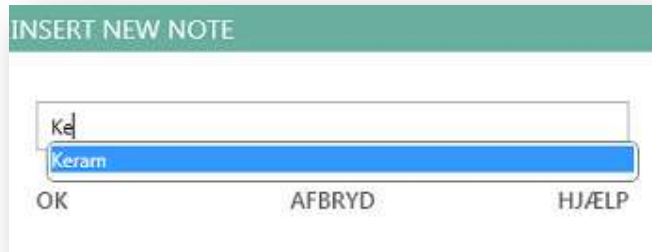


Når du er færdig, klikker du på OK. Så lukker dialogboksen, bemærkningen får tildelt et nummer og teksten gemmes. Du kan se, at der er en kommentar til et billede; det vises ved en lille pil og et kommentarikon. Kommentarteksten vises, når du fører markøren over den.

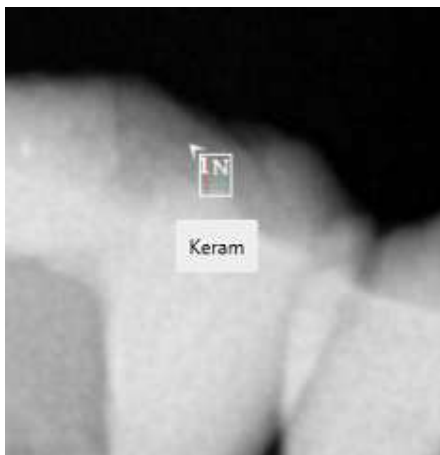

Sådan sletter eller redigerer du en kommentar:

1. Sørg for, at du har klikket på og aktiveret kommentarværktøjet.
2. Klik derefter på kommentaren i billedet. Denne dialogboks vises.

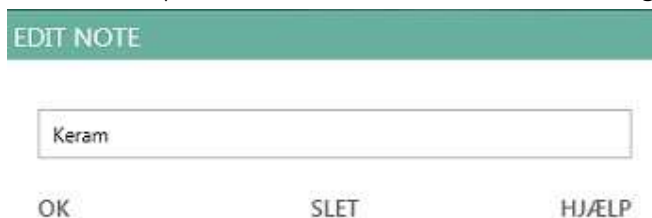


3. Ret i teksten, og klik på OK for at redigere.
4. Klik på SLET for at slette kommentaren.

Husk, at du kun kan oprette, ændre eller slette kommentarer til billeder, der er taget samme dag. Billeder, der er ældre end en dag, er låst for redigering og kan kun låses op via Onepix Admin.

SHOW / HIDE

Med denne funktion kan du se/skjule kommentarer i billedet, hvis du ønsker det. Kommentarerne skjules kun, mens du er i billedet. Hvis du lukker billedet og åbner det igen i Zoom Vindue, så vil du igen kunne se kommentarerne.

TEGNE

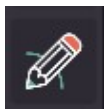

Tegneværktøj er et værktøj til frihåndstegning på eksempelvis røntgenbilleder.



Når tegneværktøjet er forvalgt, kan du højreklikke i billedet for at få de valgmuligheder frem, der findes for værktøjet.



1. Valgmuligheden Slet sletter alt, der er tegnet på billedet.
2. Med valgmuligheden Størrelse kan du vælge bredde på tegneværktøjet; som standard er Mellem valgt på forhånd.
3. Valgmuligheden Farve betyder, at du kan ændre den farve, som tegneværktøjet skal bruge. Du kan tegne med alle farver i Windows-farvepaletten; farven anvendes på samtlige noteringer på billedet.

FULDSKÆRM



Hvis du vil skjule alle oplysninger i Zoom Vindue foruden billedet, skal du klikke på knappen Fuldskærm. Denne tilstand maksimerer billedet ved at forstørre det, så det fylder hele skærmen. For at vende tilbage til Zoom Vindue skal du klikke på knappen Luk øverst til venstre eller trykke på Esc-tasten.

ROTERE



Med dette værktøj kan du ændre billedorienteringen. I nogle tilfælde kan funktionen anvendes til billeder, som hentes til en forkert visningsramme. Normalt roteres billeder automatisk i Onepix til den rette orientering ud fra visningen, hvilket oftest er tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan der være behov for yderligere omorientering. Alle ændringer vises som gemte under HISTORIE til højre for billedet.

Der er fire måder at ændre orienteringen på et billede på:


- **ROTÉR HØJRE**
Roterer billedet 90 grader med uret.
- **ROTÉR VENSTRE**
Roterer billedet 90 grader mod uret.
- **SPEJL OPP/NED**
Vender billedet, så det spejlvendes lodret.
- **SPEJL VENSTRE/HØJRE**
Vender billedet, så det spejlvendes vandret.



NOTE!

At hvis funktionerne "Spejl Opp/Ned" "Spejl Venstre/Højre" anvendes, vises billedet spejlvendt. Hvis billedet skal hentes ned til statuskortet, skal funktionerne "Roter højre" eller "Roter venstre" benyttes.

CROP

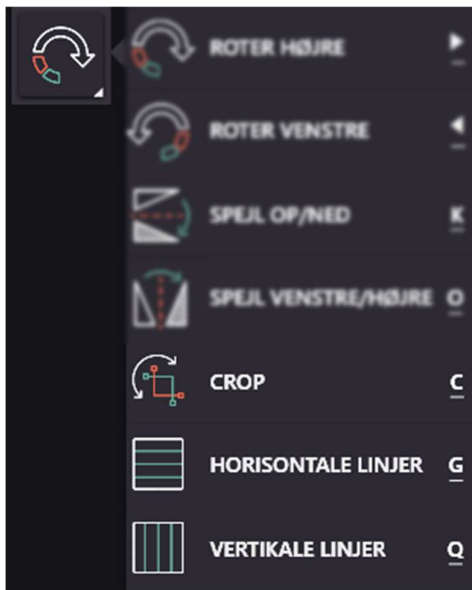


Crop-funktionen bruges til gradvist at rotere og beskære billeder. Ændringerne gemmes under Historie som Roter / Beskær, du kan altid vende tilbage til det originale billede ved at klikke på Slette.



For at begynde at beskære billedet skal du klikke på knappen Beskær eller trykke på Ctrl + C-tasterne.

Det aktuelle billede vises derefter med vandrette og lodrette linjer.

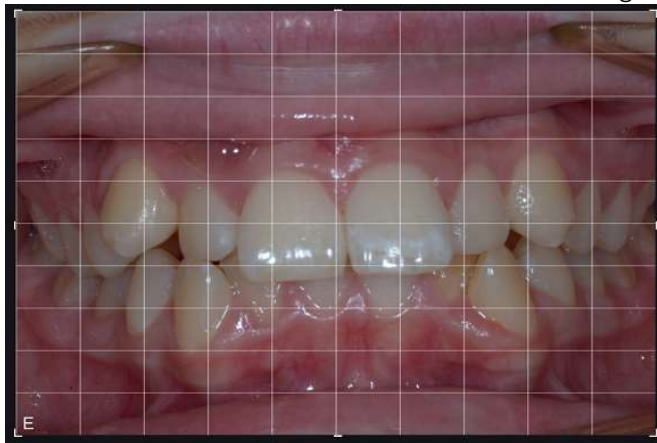


For at beskære billedet skal du klikke og trække i et af hjørnerne.




Roter et billede:


Klik på billedet, og hold venstre museknap nede, mens du bevæger musen til venstre eller højre. Drej billedet gradvist efter ønske, slip venstre museknap, når den ønskede rotation er opnået.

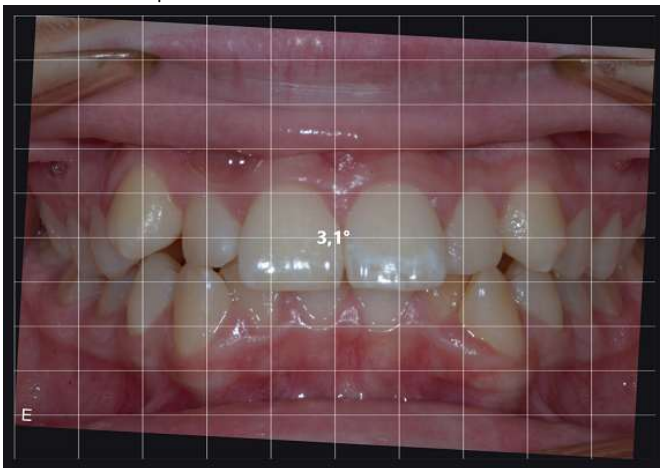

Når du føler, at billedet er klar til at blive gemt, skal du klikke på knappen Accept. Hvis du ikke er tilfreds, skal du klikke på Afbryd og gentage proceduren.

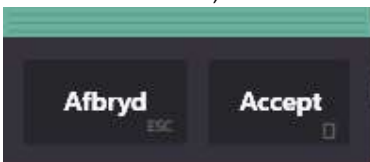

HORISONTALE OG VERTIKALE LINIER

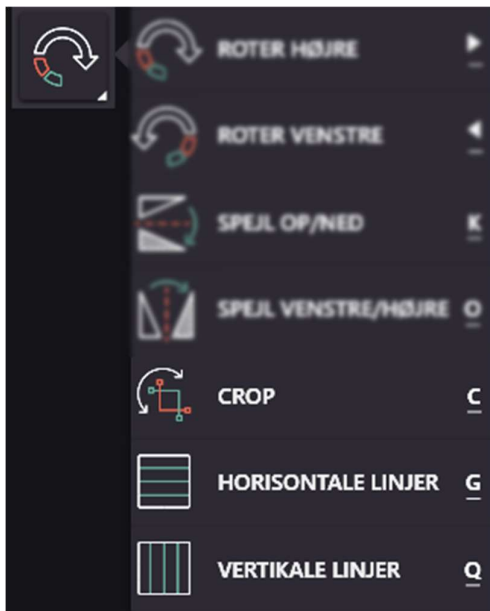

For at vise eller skjule vandrette og / eller lodrette linjer i billedet skal du klikke på den respektive knap eller bruge tastaturkombinationerne Ctrl + G eller Ctrl + Q



PRINT BILLEDER




Printer det aktuelle billede i Zoom Vindue. Det printede billede omfatter de forbedringer og alternativer, som er anvendt (kontrast, farvelægning osv.). Ændringerne vises på billedet i den printede rapport, selvom selve ændringerne ikke er gemt endnu. Du kan også vælge at inkludere oplysninger om patient, tandlæge, undersøgelse og billede i udskriften.

INFO



INFO TEKST

Klik her for at se eller skjule tekst i billedet, som viser overordnet information om billedet.

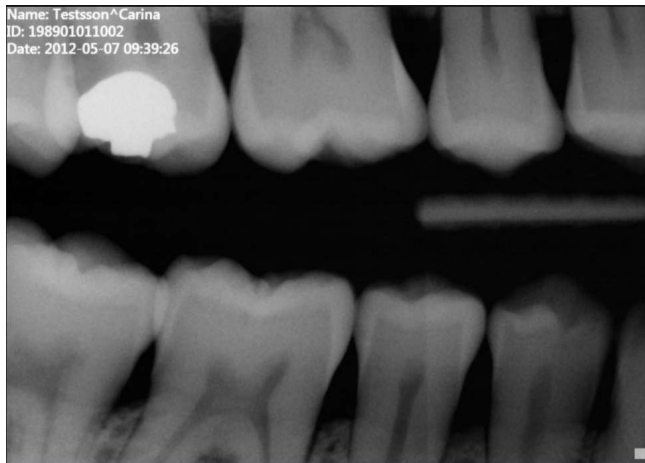

BILLEDE INFORMATION

Med denne funktion kan du få vist alle DICOM-tags, der findes for billedet. Hvis der er brug for det, kan du her kopiere alle tags til Windows Udklipsholder. Endvidere kan du gemme eller sende disse oplysninger ved at bruge Ctrl+V til at indsætte oplysninger i en tekstfil eller lignende.

INFORMATION				
Tag	Attribute	Value	VR	Length
(0008,0008)	Image Type	ORIGINAL\PRIMARY\XRAY	Code String	22
(0008,0016)	SOP Class UID	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3	Unique Identifier	28
(0008,0018)	SOP Instance UID	1.2.840.114244.400.5.2718081015.862632139.26730	Unique Identifier	48
(0008,0020)	Study Date	20150512	Date	8
(0008,0021)	Series Date	20150917	Date	8
(0008,0022)	Acquisition Date	20150917	Date	8
(0008,0023)	Content Date	20150917	Date	8
(0008,0030)	Study Time	152450	Time	6
(0008,0031)	Series Time	152039	Time	6
(0008,0032)	Acquisition Time	152133	Time	6
(0008,0033)	Content Time	152133	Time	6
(0008,0050)	Accession Number		Short String	0
(0008,0060)	Modality	IO	Code String	2
(0008,0068)	Presentation Intent Type	FOR PRESENTATION	Code String	16
(0008,0070)	Manufacturer	Schick Technologies, Inc.	Long String	26
(0008,0080)	Institution Name		Long String	0
(0008,0081)	Institution Address		Short Text	0
(0008,0090)	Referring Physician's Name		Person Name	0
(0008,1010)	Station Name	UTV7X86SYSTEM2	Short String	14
(0008,1030)	Study Description	A. LIGGANDE BITEWING	Long String	20
(0008,103E)	Series Description		Long String	0
(0008,1040)	Institutional Department Name		Long String	0
(0008,1050)	Performing Physician's Name		Person Name	0
(0008,1070)	Operators' Name		Person Name	0
(0008,1000)	Manufacturer's Model Name	CDR DICOM for Windows	Long String	22

CANCEL COPY TO CLIPBOARD

SIDEPANEL

Til højre for billedet er der et panel, hvor du kan foretage justeringer, se information om og status på billedet. I dette afsnit beskriver vi tanken med disse.

EKSPONERINGS KVALITET


Eksponeringskvaliteten skal give en vurdering af billederne på en visuel måde ved at markere et område, hvor billedeksponeringen vurderes at være optimal. Eksponeringskvalitetsmåleren er tilgængelig for røntgenbilleder med 12-bit bitdybde eller højere. Hvis du vil lukke for eksponeringskvaliteten, så oplysningerne altid er skjulte, skal du gå til Onepix indstillinger. Markér afkrydsningsfeltet for eksponeringskvalitet under overskriften Zoom Vindue.



- Det grønne område i midten af måleren betyder, at billedet eksponeres optimalt ud fra de teknikfaktorer, der anvendes.
- Det lysegrå område til venstre betyder, at billedet blev undereksponeret, og at en ændring af teknikfaktorerne vil forbedre billedkvaliteten.
- Det mørke område til højre betyder modsat, at billedet blev overeksponeret, og at en ændring af teknikfaktorerne vil mindske patientdosen uden at forringe billedkvaliteten.

FILTRE

Hvis billederne er taget med en sensor, der understøtter filteret, så vil disse være tilgængelige i rullemenuen som i billedeksemplet nedenfor, hvor General Dentistry er det forvalgte filter til Schick 33-/Fona-sensorer fra Sirona. Du kan læse om, hvordan du vælger, hvilket filter der skal vises som standard, i brugervejledningen til den respektive sensor.

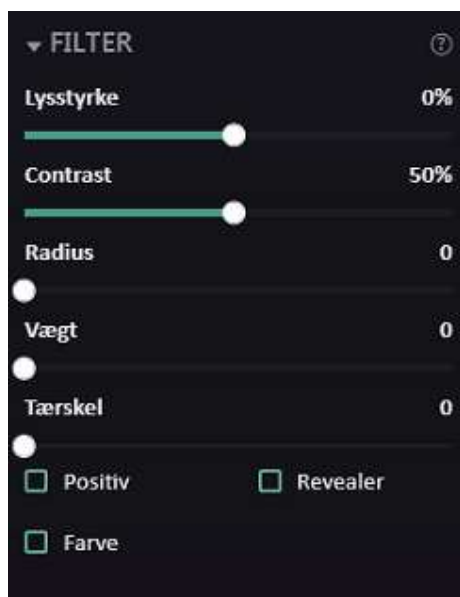


NOTE!

Forkerte indstillinger i Auto Filter kan resulterere i et billede som ikke kan diagnostiseres. Vend tilbage til det originale billede, hvis du har mistanke om at billedet er forvrænget af et filter.

SHARPNESS

Sharpness er et billedforbedringsfilter, der er udviklet specifikt til Schick 33- og Fona-systemets billeder. Under sharpness kombineres flere forskellige billedoptimeringsfunktioner, som gør, at kontrasten øges og gør detaljerne tydeligere. Sharpness bruges automatisk på alle billeder, som tages af Schick 33- eller Fona-sensoren. Du kan læse om, hvilket skarphedsniveau der skal vises som standard, i brugervejledningen til den respektive sensor. Bemærk, at hvis du justerer billedskarpheden med Sharpness skyder, så gemmes ændringerne ikke på billedet.

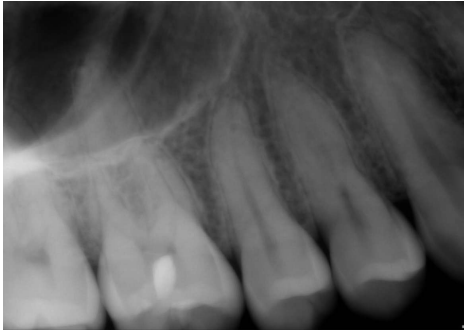

Før sharpness



Efter sharpness på 35 %

BRIGHTNESS/KONTRAST

Du kan enten bruges Brightness/Kontrast-værktøjet til venstre for billedet eller kontrolmulighederne i højre side, som er separat for Brightness/Kontrast, hvis du ønsker at finjustere. Uanset hvilket værktøj du bruger, så vises oplysningerne i dette felt.

SKARPHED


Som standard vises skarphedsfunktionen med en skyder kaldet "Skarphed". Når denne skyder skifter fra standardværdien 0, ændres billedets skarphed.



Skarphedsfilteret ændrer konturkontrasten. Dette betyder, at jo højere værdien af skarphed er, jo mørkere eller lysere bliver konturens sider. For at få vist avancerede skarphedskontroller er der en indstilling under "Indstillinger" kaldet "Se avancerede maskekontroller." Når den er aktiveret, vises tre glidere kaldet Skarphed, Radius, og Tærskel.

- Skarphed styrer, hvor meget konturkontrasten skal øges. Det betyder, at jo højere mængdeværdien er, desto mørkere respektive lysere bliver konturens sider.

- Radius bestemmer, hvor stort et område omkring konturerne, der skal påvirkes. En øgning i værdien betyder, at nedtoningen og oplysningen spredter sig længere væk fra konturen.
- Tærskel afgør, hvor stor toneforskellen må være for at programmet skal betragte noget som en kontur. Jo højere tærskel, desto mere distinkte skal konturerne være for at blive skarpe.
- Alle justeringer gemmes under Historie med navnet Uskarp maske.

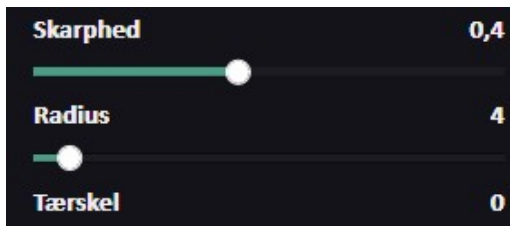

Nedenfor vises et eksempel på, hvordan et billede kan se ud efter justering af disse kontrolmuligheder.



Før Skarphed



Efter Skarphed

REVALER

Viser røntgenbilleder med større detaljeringsgrad end med lys/kontrast og bevarer tydeligheden med en meget lille forekomst af forstyrrelser og artefakter. Til forskel fra andet billedkontrastværktøj, som ikke bevarer mellemværdien i et billede, anvender Optimer hele røntgenbilledets datavolumen og forstørre hver enkelt pixel. Ved at bearbejde hver pixel for sig giver Optimer adgang til mere visuelle oplysninger og viser dem på en måde, som får de mindste forskelle i billedet til at fremstå tydeligere.

Ændringen sker, når du afkrydser feltet Optimer. Fjern markeringen af feltet Optimer, når du er færdig med gennemgangen, hvis du ikke ønsker, at ændringerne skal gemmes på billedet.



Før Optimer



Efter Optimer


FARVELÆG

Påfører et farvelæg ved at kortlægge pixelværdien fra en 8-bit gråskala til en 24-bit farveskala.

Farvelægning er endnu et hjælpemiddel til at identificere eventuelle problemområder ved en undersøgelse, eftersom visse forskelle er lettere at skelne, når der anvendes farver. Afkryds feltet Farvelæg. Juster farven ved hjælp af kontrolmulighederne for kontrast og lysstyrke. Fjern markeringen af feltet Farvelæg, når du er færdig med gennemgangen, hvis du ikke ønsker at det skal gemmes på billedet.



Før farvelægning

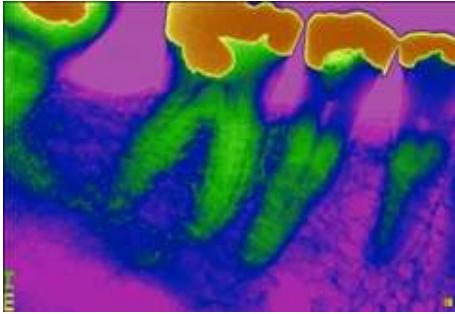

Efter farvelægning

POSITIV

Inverterer billedets gråskala, så negativbilleder vises som positivbilleder og omvendt. Afkryds feltet Positiv for at anvende funktionen. Fjern markeringen af feltet Positiv, når du er færdig med gennemgangen, hvis du ikke ønsker, at ændringerne skal gemmes på billedet.




Negativ



Positiv


HISTORIE

Historie holder styr på alle ændringer i et billede og kan anvendes til at slette disse ved at dobbeltklikke på Slet. Ændringerne vises en ad gangen, og hver forbedring, som er foretaget for et billede, kan slettes, såfremt det sker den samme dag, billedet er blevet taget eller indlæst. Billeder, der er ældre end en dag, er låst for forandringer og kan kun låses op via Onepix Admin, hvis det er nødvendigt.

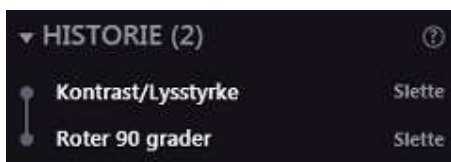

POSITIONS

Positions viser, hvilke tænder det aktuelle billede, som vises i Zoom Vindue, præsenterer. Hvis billedet er taget i den rette ramme i serien, vil disse oplysninger være udfyldt automatisk. Du kan klikke på den respektive tand for at tilføje eller slette de tænder, der ikke vises på billedet. Ændringerne gemmes kun på billedet, hvis de foretages samme dag, som billedet er taget. Alle billeder, der er ældre end en dag, er låst, og forandringer i Zoom Vindue gemmes ikke.

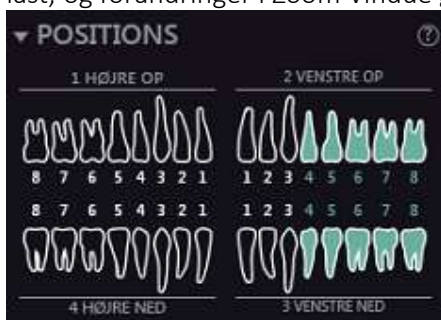

NOTE!

Udvalgte tænder i tandstatus er baseret på oplysninger fra indlæsning af billedet. Dette kan afvige fra virkeligheden, hvis billedet er placeret i den forkerte position på kortet eller på den krævede manuelle korrektion af tandstatus ikke foretaget efter eksponering.



NAVIGATION

Under Navigation vises undersøgelsesserien i miniformat. Tanken er, at du nemt skal kunne se, hvilket billede i serien du har i Zoom Vindue, og at du nemt kan vælge et andet billede i serien, uden at du behøver gå tilbage til Undersøgelse View.



STL VIEWER

Når du dobbeltklikker på et miniaturebillede i en STL-undersøgelse, åbnes STL-filen i zoomvisning i STL-tilstand, hvor du kan se 3D-modellen. Værktøjerne til venstre kan bruges til at flytte, rotere og zoome ind og ud i 3D-modellen.

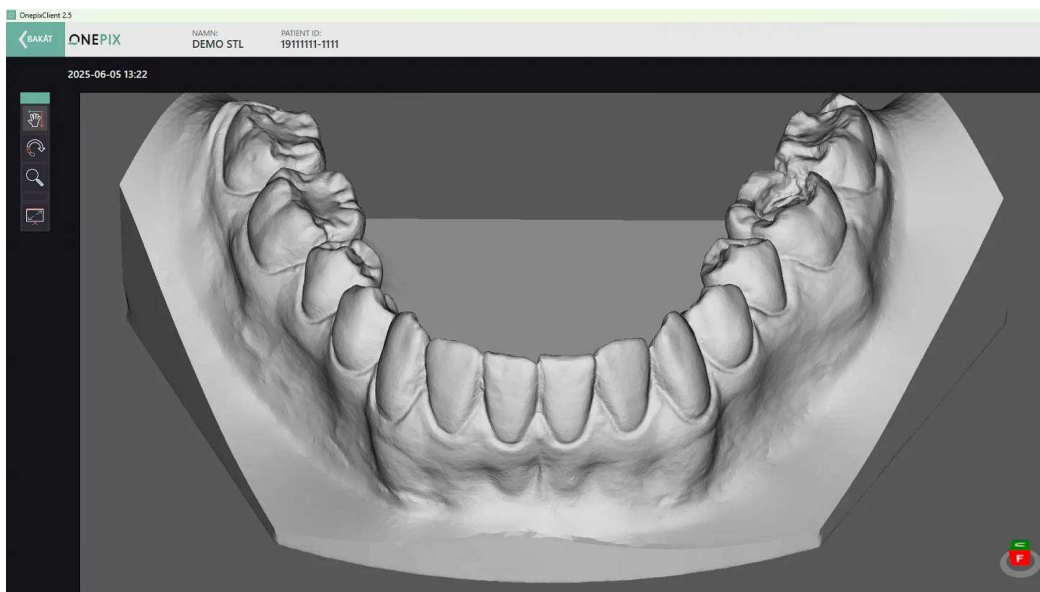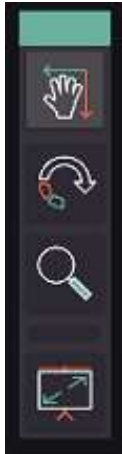

GENVEJE I ZOOM VINDUE

Kommandonavn

Esc
Værktøjet Lys/Kontrast
Window Width/Center
Værktøjet Forstør
Værktøjet Pan
Flashlight Tool
Værktøjet Lineal

Genvejstast

Vende tilbage til oversigten
Ctrl + B
Ctrl + U
Ctrl + Z
Ctrl + M
Ctrl + L
Ctrl + R

Værktøjet Måle Vinkel	Ctrl + A
Værktøjet Kalibrere	Ctrl + W
Værktøjet Line profil	Ctrl + J
Værktøjet Vertikal profil	Ctrl + V
Værktøjet Vandret profil	Ctrl + H
Værktøjet Kommentar	Ctrl + N
Show / Hide kommentar	Ctrl + E
Værktøjet Tegne	Ctrl + D
Roter højre	Ctrl + > (pil til højre)
Roter venstre	Ctrl + < (pil til venstre)
Spejl Opp/Ned	Ctrl + K
Spejl Venster/Højre	Ctrl + O
Crop	Ctrl + C
Horisontale Linjer	Ctrl + G
Vertikale Linjer	Ctrl + Q
Fuldskærm	Ctrl + F
Print Billeder	Ctrl + P
Info tekst	Ctrl + Y
Information billede	Ctrl + I
Spring mellem positioner i serie	Piletasterne


ONEPIX INDSTILLINGER

I dette afsnit får du oplysninger om, hvilke indstillinger du kan foretage i Onepix-klienten. For at komme til indstillinger skal du klikke på symbolet, der ligner et tandhjul, øverst til højre i programmet.



DEAKTIVER LICENS ONEPIX LOKAL

Øverst oppe under indstillinger finder du licensen og aktiveringsoplysninger.

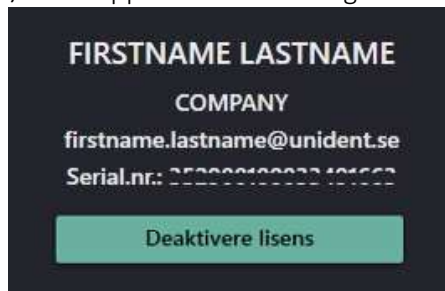

Hvis du vil skifte computer, kan du deaktivere licensen på den gamle computer og aktivere med samme licens på den nye, efter Onepix er blevet installeret. Der er to måder at deaktivere licensen på, afhængigt af om computeren er opkoblet til internet eller ej.


ONLINE DEAKTIVERING ONEPIX LOKAL

Hvis din computer er opkoblet til internet, dvs. er online, og du klikker på knappen Deaktiver licens, vil du få følgende dialogboks som på billedet nedenfor. Klik på knappen for at deaktivere licensen på denne computer.



OFFLINE DEAKTIVERING ONEPIX LOKAL


Hvis din computer derimod ikke er opkoblet til internet, dvs. er offline, så vil du få følgende dialogboks. Fortsæt deaktiveringen ved at klikke på teksten Offline Deaktivering.

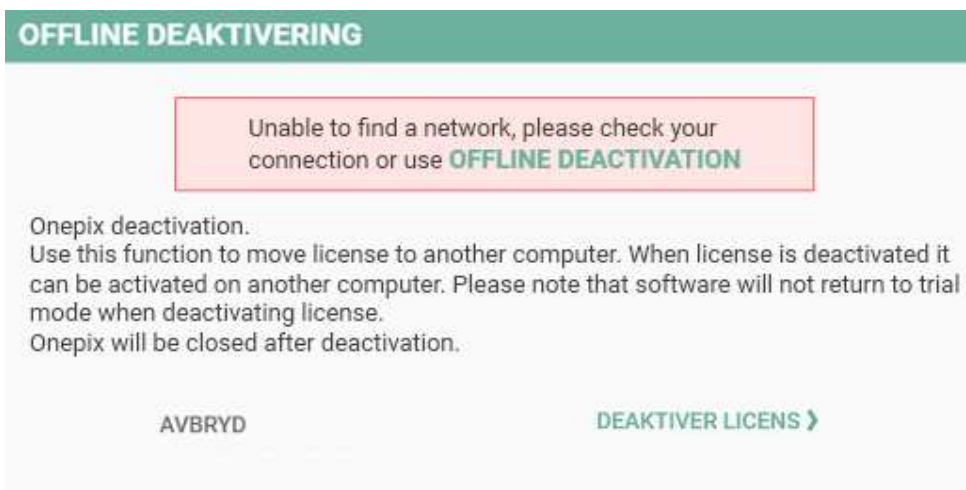

Hvis du er helt sikker på, at licensen skal deaktiveres, skal du klikke på Deaktiver licens i følgende vindue. Ellers klik Afbryd.



Kopier nøglen i følgende vindue, og gå til onepix.se/activate på en computer med internet, og følg instruktionerne på siden. Klik ikke på Afbryd i vinduet herunder, før du har fuldført instruktionerne.

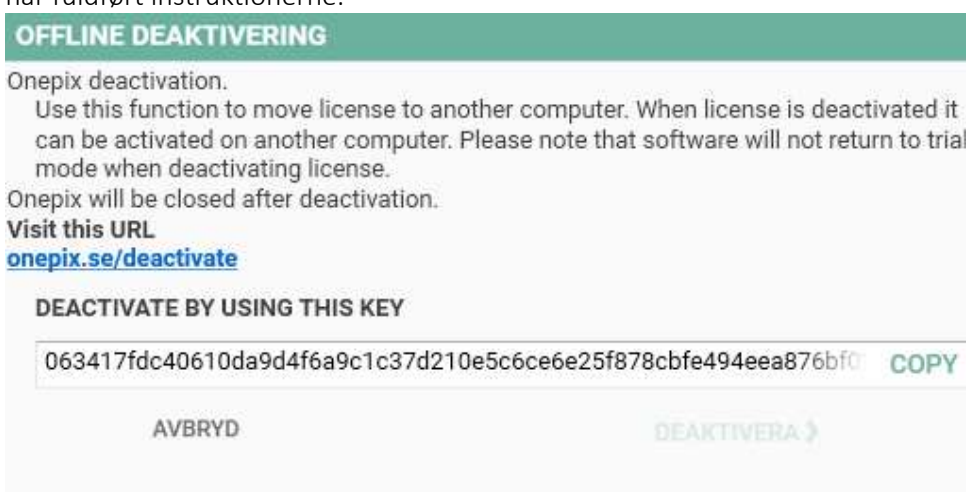

OBS! Det er vigtigt, at du fuldfører instruktionerne for at deaktivere licensen. Du kan ikke aktivere licensen på en anden computer, hvis du ikke har fuldført instruktionerne. Kontakt teknisk support, hvis du har spørgsmål.

PROGRAMINDSTILLINGER

SPROG


Her kan du vælge,

- hvilket sprog Onepix-klienten skal vises med.

KONTROLLÉR OPDATERINGER

I Onepix er der mulighed for at hente opdateringer automatisk. Programmet giver brugeren besked, når der er en opdatering tilgængelig. Her kan du indstille:

- Om Onepix skal søge efter opdateringer automatisk.
- Du kan også vælge, om du vil have opdateringer lidt tidligere end normalt, dvs. så snart de er blevet lanceret. Det gør du ved at vælge Select på listen.

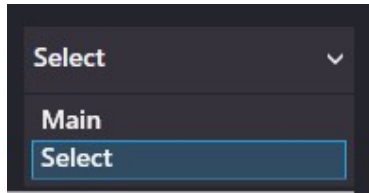

UNDERSØGELSE VIEW

Her kan du bl.a. vælge:

- Hvis undersøgelserne skal låses i slutningen af dagen.
- Hvilken størrelse billederne skal have i Undersøgelse View (størrelsen angives i pixel).
- Størrelsen på Hurtigzoom-vinduet kan også indstilles her (størrelsen angives i pixel).
- Om miniaturebilleder skal bruges i Undersøgelse View eller ej samt kvaliteten på disse i procent.

KORT SKABELONER

Her finder du indstillinger for kort såsom:

- Størrelse på kort, bredde og højde (størrelsen angives i pixel).
- Sti til kortfiler
- Kvalitet på miniaturebillede m.m.

ZOOM VINDUE

I Zoom Vindue er der en del oplysninger om billedet i højre side. Du vælger selv, hvilke oplysninger der skal vises. De oplysninger, du ønsker skal vises, skal være afkrydset, og de oplysninger, du ikke ønsker skal vises, skal ikke være markeret. Nogle af de valgmuligheder, der findes her, er:

- Se eksponeringsmåler
- Se navigation
- Se historie m.fl.

INDLÆSNING

Her finder du indstillinger for autotake, autofilter m.m.

- Autotake er den funktion, der aktiveres, når du skal indlæse nye billeder i en serie. Her kan du indstille, hvilken farve autotake skal have for start og stop, samt hvor længe det indlæste billede skal vises på skærmen, inden det vender tilbage til serien/undersøgelsen for at tage et nyt billede.
- Autofilter giver mulighed for at foretage billedjusteringer automatisk på billeder, der er blevet indlæst med et af Onepix' indlæsningsmoduler. De billedjusteringer, der kan foretages, er Histogramjustering, Median Filter og Uskarp maske. De ændringer, der foretages på billederne, gemmes under HISTORIE i Zoom Vindue.

For at indlæse et eksempelbillede, der forhåndsviser det indstillede filter, markerer du et billede i Undersøgelse View og går dernæst til Onepix Indstillinger og klikker på knappen Rediger Autofilter.



Opret et filter ved at klikke på Tilføj. Giv filteret et navn, TestFilter i eksemplet, og tryk dernæst på OK.



1. Markér det filter, du vil anvende eller indstille.
2. Histogrammet kan justeres automatisk ved hjælp af funktionen Auto niveau. Klik i afkrydsningsfeltet og dernæst på pilen ved Histogram. Markér dernæst afkrydsningsfeltet ved Auto niveau. For at automatikken skal fungere, kræves det nogle gange, at du indstiller Lav tærskel eller Høj tærskel. Et sådant eksempel er, hvis en sensor har afskårne hjørner. I så fald skal Lav tærskel indstilles til eksempelvis 0,001 for at udelade disse sorte hjørner fra beregningen. For manuelt at justere Histogram skal du klikke på pilen ved Histogram og markere afkrydsningsfeltet for at aktivere filtret. Juster området ved at trække i pilene til venstre og højre under histogrammet. For at justere Gamma skal du bruge pilen i midten.
3. For at tilføje et Median Filter skal du klikke på pilen ved Median Filter og markere afkrydsningsfeltet. Vælg Radius ved at trække kontrolmuligheden til den ønskede indstilling.
4. For at tilføje en Uskarp maske skal du klikke på pilen ved Uskarp maske og markere afkrydsningsfeltet. Vælg Radius, Vægt og Tærskel ved at trække kontrolmuligheden til den ønskede indstilling.
5. Det filter, der nu er oprettet, kan kobles til et valgt indlæsningsmodul i Brugt til.

Funktionen Autofilter kan slås fra og til under Onepix Indstillinger>Indlæsning. For at anvende Autofilter på et allerede indlæst billede, som mangler disse filtre, skal du klikke på knappen "Påfør på nuværende billede" i Autofilter-vinduet.



NOTE!

Forkerte indstillinger i Auto Filter kan resulterere i et billede som ikke kan diagnosticeres. Vend tilbage til det originale billede, hvis du har mistanke om at billedet er forvrænget af et filter.

FILTERS

Her kan du indstille, under hvilken sti filterindstillingerne skal gemmes. Denne sti gælder for både Autofilter og Søgefilterindstillingerne, som findes i Undersøgelse View.

INDSTILLINGER FOR HARDWARE

Oplysninger om installeret hardware, f.eks. intraoral sensor, kamera, panorama. Indstillingerne finder du ved at klikke på den grønne knap for den respektive indstilling. Hvis du eksempelvis bruger intraoral sensor fra to forskellige producenter, kan det ses her. Du kan da vælge, hvilken sensor der skal bruges som standard ved at klikke på stjernen som i billedeksemplet herunder.



Du kan læse om, hvilke indstillinger du kan/skal foretage i brugervejledningen til den respektive hardware.


ONEPIX CLOUD ADMIN

INTRO

Dette afsnit indeholder:

- Adgang til Onepix Admin
- Administrer patienter og undersøgelser
- Administrer brugere, tilladelser og roller
- Importer DICOM-undersøgelser og billeder

Du får adgang til Onepix Admin via browseren via adressen klinik.onepixcloud.com, hvor klinik er det navn, din klinik er tildelt. På den første side kan du vælge sprog ved at klikke på glob-knappen øverst til højre. Du kan til enhver tid ændre sproget på siden.

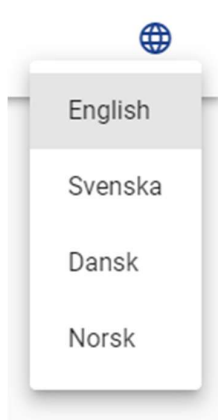


For at se oplysninger om Onepix Admin skal du klikke på spørgsmålstegnet.




LOG IND

Du logger ind på Onepix Admin via en af loginindstillingerne og indtaster dine loginoplysninger. Loginoplysninger leveres af din klinikadministrator.

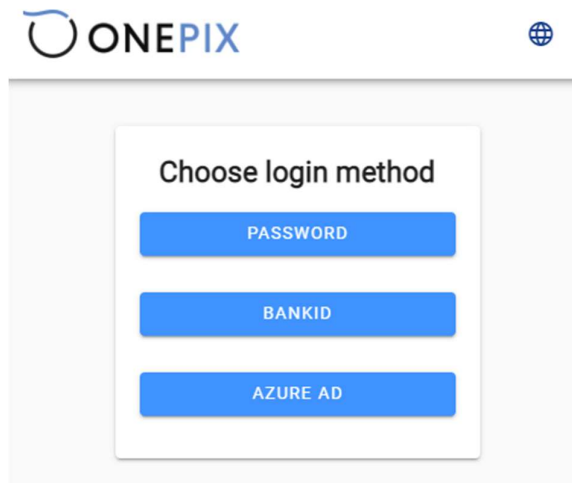

LOG UD


Klik på dit brugerikon i øverste højre hjørne. For at logge ud skal du klikke på knappen nederst. Her kan du også se dine brugeroplysninger.

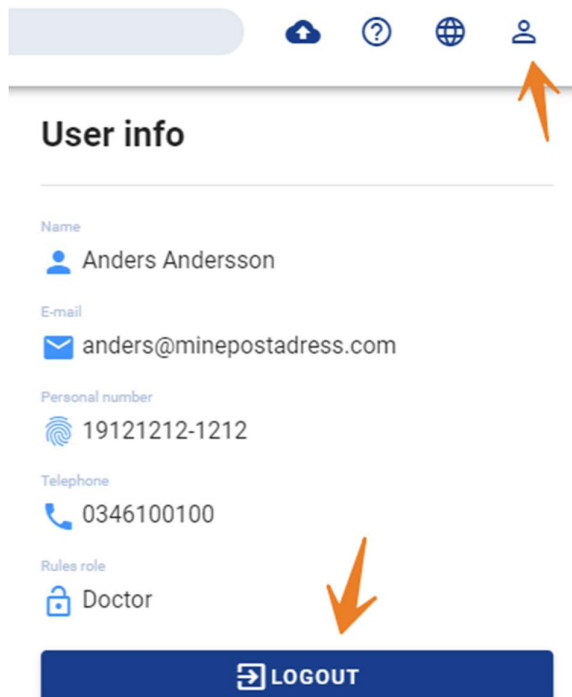

HÅNDTER PATIENTER OG UNDERSØGELSER


Når du logger ind, vises en visning baseret på dine rettigheder. Læs mere om dette i afsnittet Administration af brugere, tilladelser og roller.

Som klinikbruger ser du kun patientlisten. Her kan du søge efter patient eller undersøgelse og se billeder.

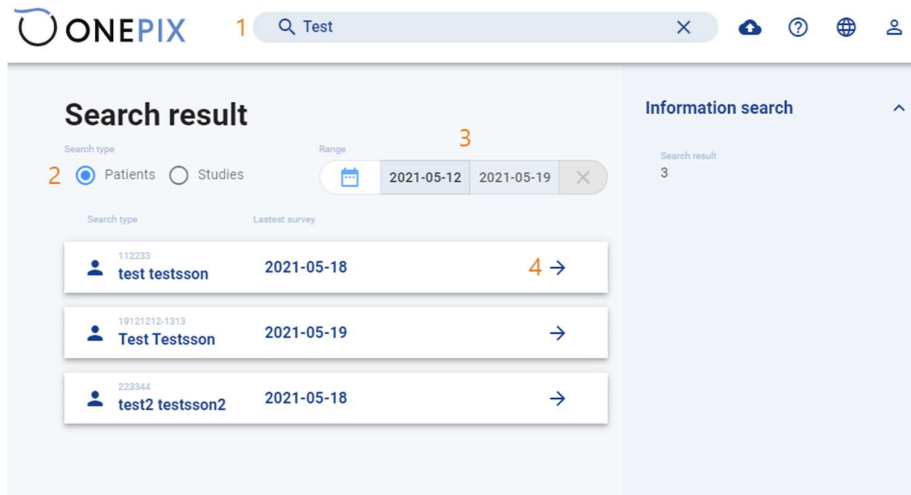

1. Søg efter patient via søgefeltet, søgningen starter automatisk, når du indtaster 3 bogstaver.
2. Vælg for at søge efter patienter eller undersøgelser
3. Hvis du vælger at søge efter undersøgelser, søger du ved at vælge datoer fra og til. Sidste uges undersøgelser vises automatisk.
4. Efter søgning efter patienten eller undersøgelsen skal du klikke på pilen for at se flere oplysninger.

Sådan ser det ud, når du er i patientvisningen.

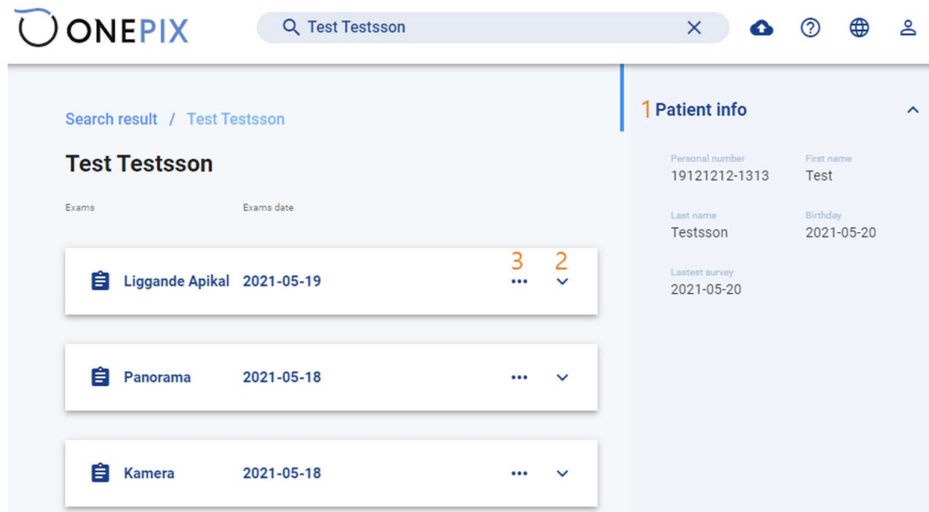

1. Patientoplysninger vises her
2. Klik på pilen for at se indholdet af serien og billederne
3. Klik på prikkerne for at ændre eller slette undersøgelsen.

OPDATER PATIENTOPLYSNINGER

For at kunne opdatere patientoplysninger skal du logge på som klinikadministrator.

The screenshot shows the ONEPIX interface. At the top, there's a search bar with the text 'test' and a magnifying glass icon. Below the search bar, the 'Search result' section is visible. It includes filters for 'Search type' (Patients selected, Studies unselected) and 'Range' (2021-05-12 to 2021-05-19). A table lists three patients:

Search type	Lastest survey
112233 test testsson	2021-05-18
19121212-1313 Test Testsson	2021-05-19
223344 test2 testsson2	2021-05-18

An 'Edit' dropdown menu is open over the first patient, showing options: 'Edit' (with a pencil icon) and 'Remove patient' (with a trash icon). The number '3' is next to the 'Edit' option.

Sådan opdateres patientoplysninger:


1. Søg efter en patient via søgefeltet.
2. Klik på punkterne
3. Vælg Rediger
4. Opdater patientoplysningerne, og klik på Send.

The 'Edit patient' form is shown. It has a title 'Edit patient' and a subtitle 'Here you can change the information about a patient.' The patient's name 'test testsson' is displayed. Below the name, there are input fields for 'First name' (test) and 'Last name' (testsson). There is also a 'Patient Id' field with the value '112233'. A red error message states: 'The Patient Id field must be at least 8 characters'. At the bottom, there are three buttons: 'REMOVE PATIENT' (red), 'CANCEL' (grey), and 'SEND' (blue).


5. Kontroller i patientlisten, at oplysningerne er opdateret.

SYSTEMADMINISTRATOR

Som systemadministrator kan du ud over alt, hvad en almindelig bruger og klinikadministrator kan gøre, også se alle firmaer / klinikker og administrere listen Systemadministrator. Klik på et firma for at komme ind og se eller administrere oplysningerne.

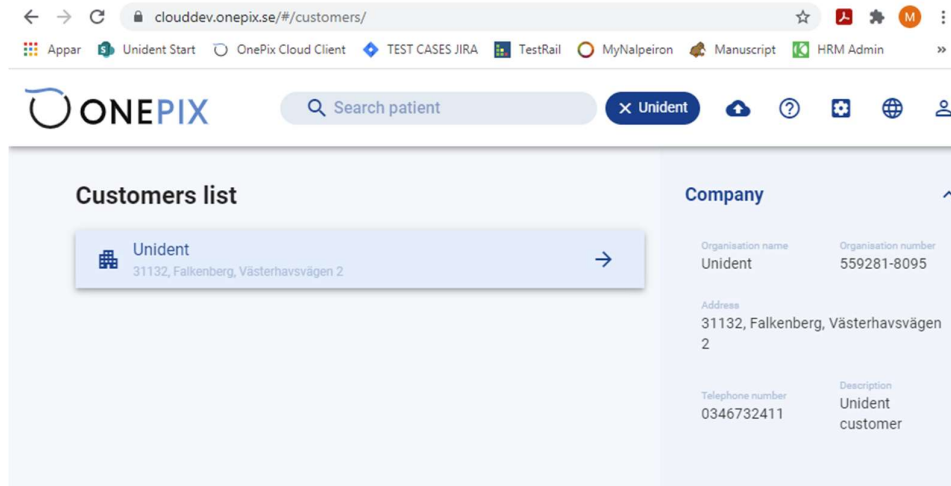


For at administrere systemadministratorlisten skal du klikke på tandhjulsikonet.

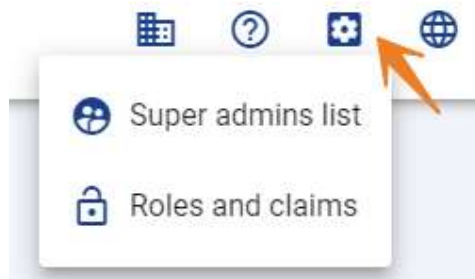

HÅNDTER BRUGERER, TILLADELSER OG ROLLE

KLINIKADMINISTRATOR

Som klinikadministrator kan du opdatere og administrere patientoplysninger og brugere på klinikken. Du kan også se og opdatere dine kliniske oplysninger.

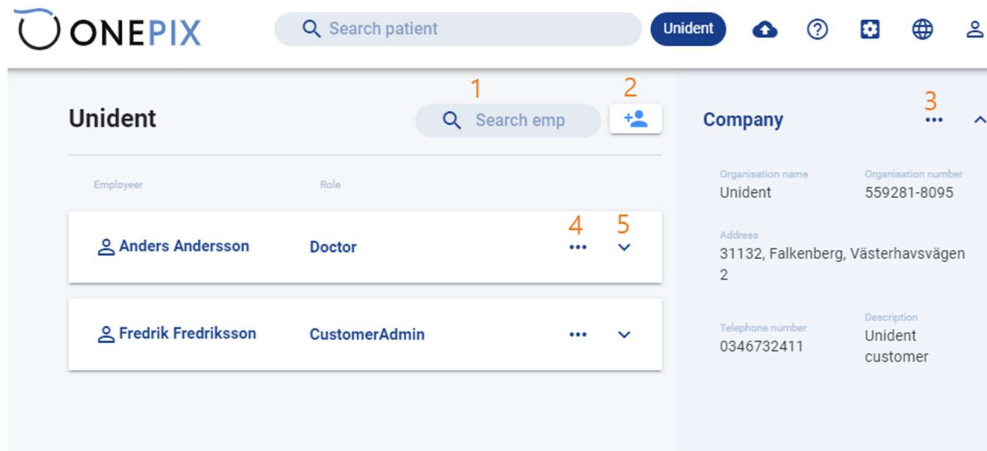

1. Hvis der er mange brugere i klinikken, kan du bruge søgefeltet til at søge efter en bruger.
2. Klik på knappen for at tilføje en ny bruger. Her udfylder du oplysninger som navn, personnummer, e-mail, hvilken rolle brugeren har osv. Klik på knappen Send for at gemme den nye bruger.

The screenshot shows the 'Add employee' form. The title is 'Add employee' and the subtitle is 'Here you can add new employee to this customer'. The form has several input fields: 'First name', 'Last name', 'Azure account name', 'Telephone', and 'E-mail'. There is also a 'Profile image' section with an 'Upload picture' button. A 'Personal number' field is present. A 'Rules role' dropdown menu is shown with a downward arrow. A 'Hired since' date picker is set to '2021-05-19'. A 'Status' toggle switch is set to 'Active'. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'SEND' buttons.

3. Klik her, hvis du har brug for at opdatere kliniske oplysninger.

Edit business information
Here you can change the information about the company.

Organisation name
Unident

Organisation number
559281-8095

Telephone number
0346732411

Address
Västerhavsvägen 2

ZIP code
31132

City
Falkenberg

Description
Unident customer

[CANCEL](#) [SAVE](#)

4. Klik her for at: Opdatere brugeroplysninger, Nulstil adgangskode, Deaktiver konto, Slet konto og indstil en ny adgangskode.

 Edit

 Reset password

 Deactivate account


 Delete account

 Set password


5. Klik på pilen for at se brugeroplysninger.

ROLLE OG RETTIGHEDER

Som klinikadministrator og systemadministrator har du adgang til funktionerne roller og rettigheder.

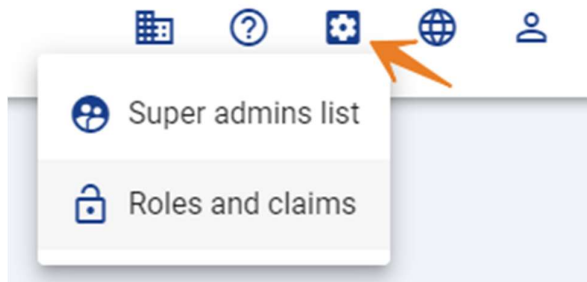

Når du klikker på knappen Rettigheder, åbner du en ny side, hvor du kan oprette roller og indstille rettigheder til rollerne. Som standard er der en brugerrolle og en klinikadministrator.

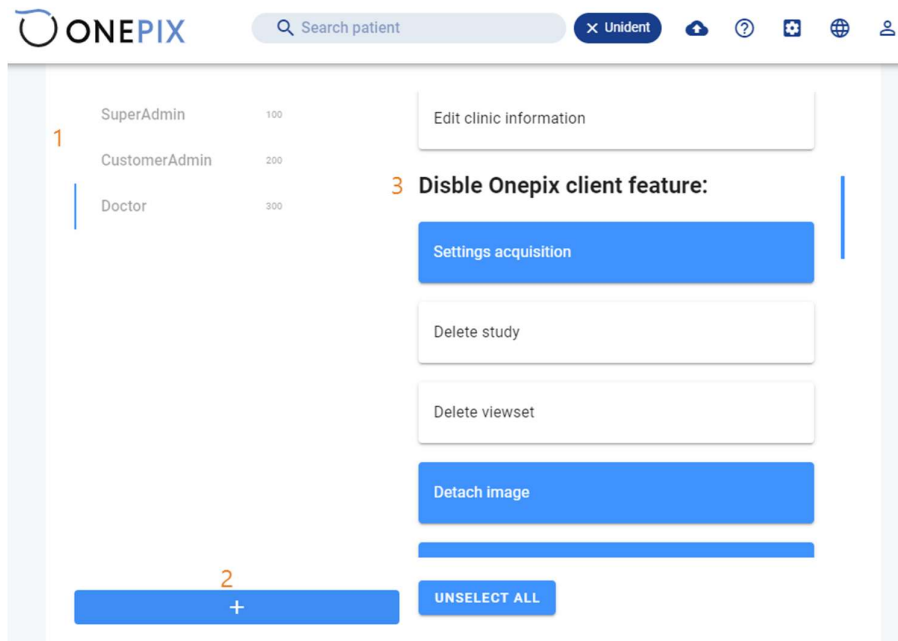

1. Når du logger ind som klinikadministrator, ser du kun brugerens rolle og kan foretage indstillinger for den rolle.
2. Du kan oprette nye roller, hvor du tildeler forskellige rettigheder.
3. Rettigheder, der kan tildeles, vedrører blandt andet brugere / rettigheder i klinikker, men også hvilke tilladelser / funktioner du vil blokere i Onepix-klientprogrammet.

IMPORT DICOM UNDERSØGELSER OG BILLEDER

DICOM IMPORT

Sådan importeres Dicom-billeder fra et DICOMDIR-bibliotek:


1. Klik på knappen Importer




2. Klik derefter på knappen Importer DICOM som en mappe



3. Vælg en mappe på din computer, der indeholder en DICOMDIR-fil, og klik på Åbn og upload. Filerne uploades.

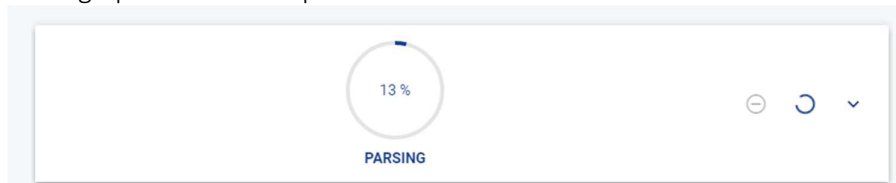

4. Når billederne uploades, kan du se patientoplysninger og vælge, om du vil se billederne, slette eller gemme denne undersøgelse via knapperne i højre side.

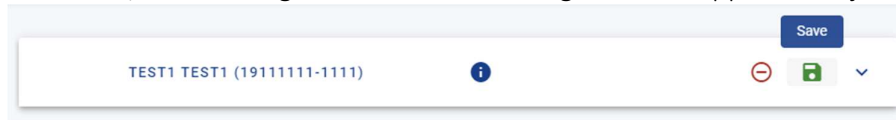


5. Klik på Gem for at gemme billederne af patienterne.

ONEPIX LOKAL ADMIN

Dette afsnit indeholder:

- Importere DICOM-studier og billeder
- Eksportere patienter, DICOM-studier og billeder
- Separere, slette og rydde billeder
- Tilføje og genoptage billeder
- Databasesøgning, redigering og validering

Når du starter databehandlingsværktøjet i Onepix Admin, enten via skrivebordsgenvejen eller via Onepix i startmenuen, vises værktøjets tredelte skærm indledningsvist uden indhold. Hvis du vil vise alle patient-, studie- og billedoplysninger, der findes i Onepix-billeddatabasen, skal du klikke på Værktøj> Søg og dernæst OK. Standardsøgningen foretages per patient, men hvis du i første omgang søger efter billeder eller studier, kan du vælge nogle af mulighederne i menuen. Hvis du søger på en specifik patient, kan du også klikke på værktøjet "kikkerten".

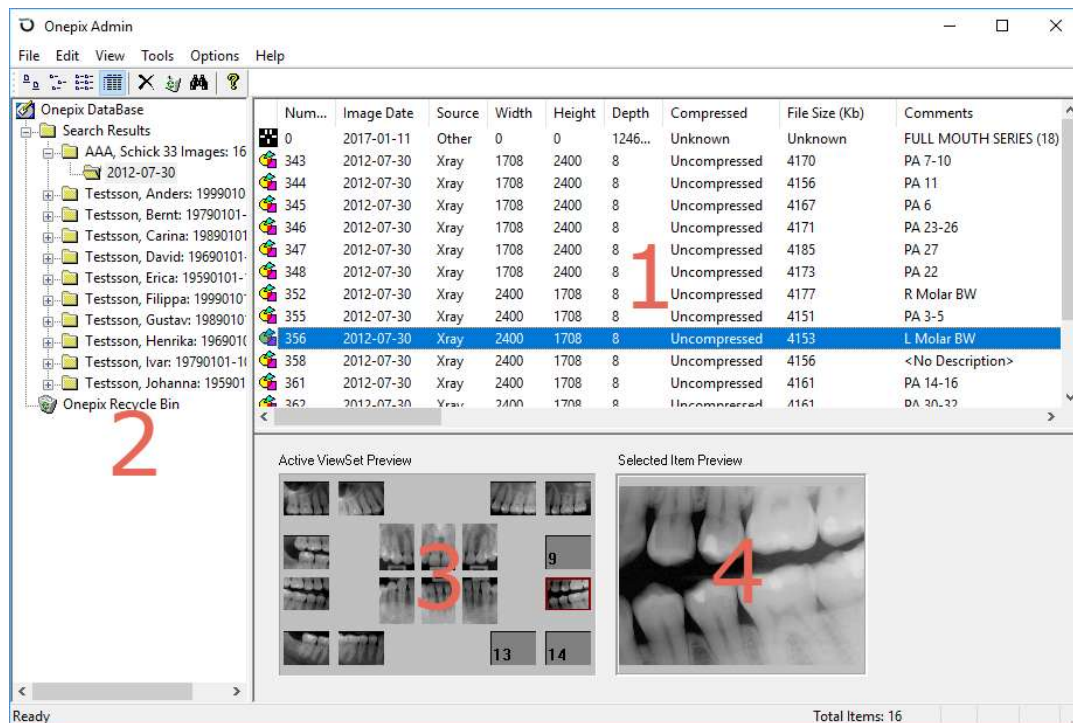


1. Område over patient/studie/billede
2. Søgeresultater og liste med patient/studie
3. Område over serieoversigt
4. Område over billedoversigt

MENUEN ARKIV




DICOM IMPORT

Importerer DICOM-studier og billeder til den aktuelle database fra en anden enhed. Importkilden kan være en gyldig DICOM-fil eller et arkiv, som findes i en tilgængelig sti eller på en fysisk enhed. Onepix indlæser alle poster i en "DICOMDIR"-filopsætning i den aktuelle database.

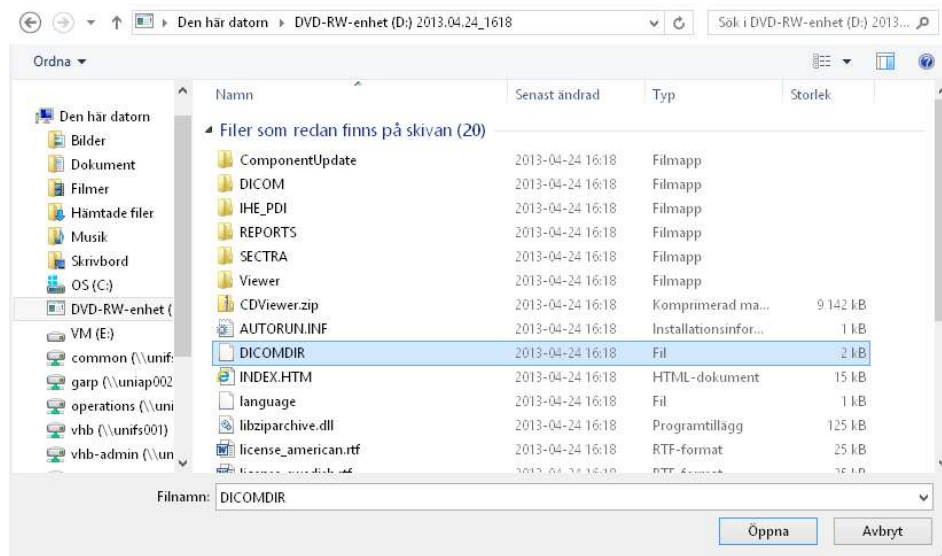


Hver post indeholder patient-/studie-/serie-/billedoplysninger, og tabellerne i den tilkoblede database udfyldes på samme måde.

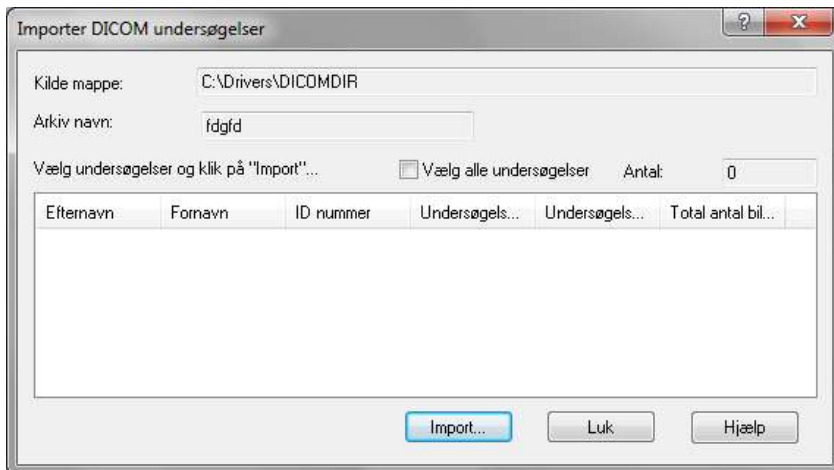

DICOM EXPORT


Eksporterer patientoplysninger, DICOM-studier og billeder til en anden enhed. Du har mulighed for at oprette et nyt lagringsarkiv for objekterne på deres målplads eller anvende en mappe på en plads, der allerede eksisterer. Du kan markere enkelte objekter, objektgrupper (ved at markere flere samtidigt med at du holder <SHIFT>-tasten nede) eller alle studier og billeder for en bestemt patient (ved at vælge Rediger> Marker alle eller med genvejen <CTRL><A>.

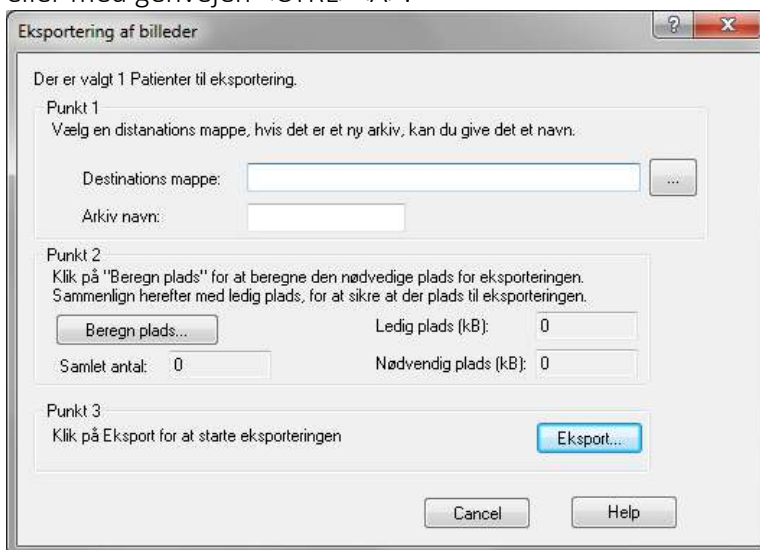

CD-ROM-INDSTILLINGER


Hvis du vil indlæse Onepix-undersøgelser fra en CD-rom, skal du gennemse billedmappen på CD'en og klikke på knappen Installer. Husk, at du kun kan indlæse undersøgelser, der allerede er blevet konverteret til DICOM med denne handling.

Når Onepix-undersøgelser registreres i den aktuelle database, opdateres den med volumeninformation, således at Onepix-systemet ved, hvor undersøgelserne ligger.

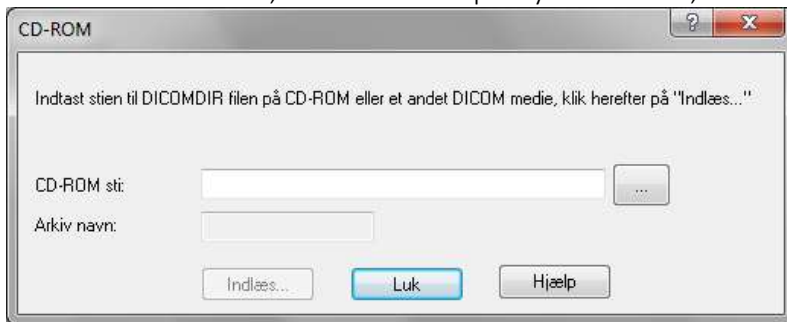

DICOM-KOMPRIMERING

Mindsker lagringspladsen til røntgenbilleder, med eller uden tab ved komprimering. Der er mange fordele ved at komprimere røntgenbilleder, bl.a. kan nævnes: øget effektivitet af lagringsplads til billeder samt bedre mulighed for at lagre på flytbare medier.

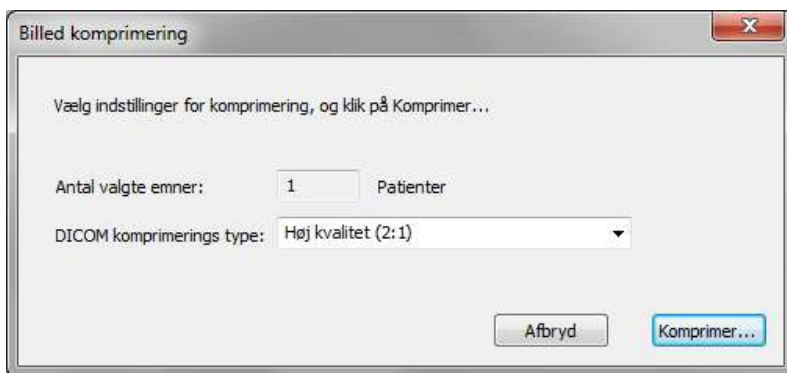

Følgende komprimeringsformater understøttes:

- Lav komprimeringsgrad (høj kvalitet) med JPEG2000, som gemmer filer med en reduktion af filstørrelsen med 2:1.
- Middelhøj komprimeringsgrad (middelhøj kvalitet) med JPEG2000, som gemmer billeder med en reduktion af filstørrelsen med 5:1. Komprimeringsgraden svarer til Lead PQ1 i tidligere versioner af Onepix.
- Høj komprimeringsgrad (lav kvalitet) med JPEG, som gemmer billeder med en reduktion af filstørrelsen med 20:1.

PRINT ALLE PATIENTER

Printer en patientliste.

Inden du printer en patientliste, skal du foretage en søgning. Åbn søgeboksen ved at klikke på Værktøj> Søg. Fordi patientlisten er baseret på søgeresultaterne, vil du måske filtrere resultaterne ved hjælp af alternativerne i søgeboksen. Når du er færdig, klikker du på OK.

Når patientlisten vises, klikker du på Arkiv> Print alle patienter.

SEND TIL FJERNSERVER

Viser en dialogboks, hvor du kan gemme patientoplysninger på en fjernplacering. Denne funktion er frem for alt nyttig i klinikker med flere modtagelser, hvor sikkerhedskopiering af patientjournaler sker til en central server, eller hvor journaler deles mellem flere forskellige placeringer.

Send til fjernserver

Du har valgt 1 Patienter som fjernlager.

Punkt 1
Vælg en fjernserver fra listen, eller udfyld felterne manuelt:

Fjernserver AE:

Lokal AE:

IP Address:

Port:

Punkt 2
Klik på "Bekræft" for at bekræfte forbindelsen til fjernserveren.

Punkt 3
Klik på "Send" for at sende filer.

I klinikker med flere modtagelser kan der anvendes mere end én server til journaler: en lokal server som arbejdscomputerne er tilsluttet, og en fjernserver til arkivering og lagring. Du kan vælge at sende alle studier for en bestemt patient, eller blot de studier og billeder du ønsker.

Sådan sender du alle studier for en bestemt patient:

1. Åbn mappen Alle patienter i databehandlingsværktøjet (Onepix Admin).
2. Vælg den patient (patienter), hvis filer du vil sende.
3. Klik på Arkiv> Send til fjernserver. Vælg en registreret fjernserver i rullemenuen i dialogboksen, eller udfyld tekstfelterne, hvis du vil tilføje en ny server.
4. Klik på Godkend for at bekræfte tilslutning til fjernserveren.

5. Når fjernserveren er færdig, klikker du på Send.

Sådan sender du billederne for et bestemt studie:

1. Åbn mappen Alle patienter, dobbeltklik på patientens navn i feltet øverst til højre, og dobbeltklik dernæst på det studie, som indeholder de billeder, du vil sende.
2. Klik på Arkiv> Send til fjernserver. Vælg en registreret fjernserver i rullemenuen i dialogboksen, eller udfyld tekstfelterne, hvis du vil tilføje en ny server.
3. Klik på Godkend for at bekræfte tilslutning til fjernserveren.
4. Hvis fjernserveren er færdig, klikker du på Send.


MENUEN REDIGER



FJERN BILLEDE

Separerer (afmonterer) billeder fra deres oprindelige visningsopsætning (eller serie). Hvis du vælger at separere et billede, bevares det som en del af patientstudiet, men det vises ikke i serien. Separeringen giver større fleksibilitet i håndteringen af visningsopsætninger og gør det muligt at bevare aktive og inaktive visningsopsætninger samt koblede og separerede billeder.

Billeder, som du ikke ønsker at få vist, men som du gerne vil beholde, kan separeres fra den aktuelle visningsopsætning. Et billede, der er blevet separeret, kan slettes eller genkobles til sin oprindelige eller en ny visningsopsætning. I eksemplet er billedet i visningsramme nr. 5 blevet separeret fra visningsopsætningen. Det kan du også se ved at billedobjektet har et sort kryds over billedikonet.

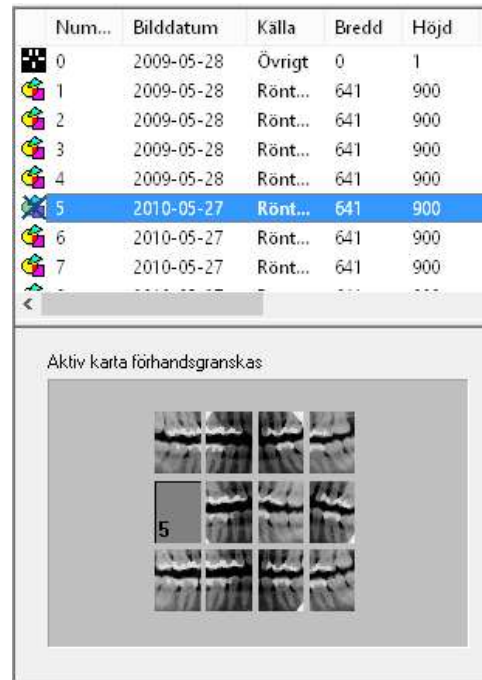

Ved at separere og sammenkoble billeder kan du finjustere undersøgelserne, så de indeholder relevante billeder i en egnet serie. Det er normalt, at relevante billeder ligger spredt ud over flere undersøgelser, hvilket til tider gør det vanskeligt at kunne lave sammenligninger. Med Onepix Admin kan du kontrollere, at den mest relevante visningsopsætning er aktiv og dernæst trække og slippe billeder (fra feltet øverst til højre) til visningsopsætningen (i feltet nederst til højre).


SLET

Sletter patient, studier eller billeder fra en bestemt enhed og flytter dem til papirkurven. Sletning af patientstudier og billeder i Onepix foregår i flere trin med databehandlingsværktøjet Onepix Admin for at sikre, at dine data ikke slettes ved en fejl.

Når en patient slettes, slettes alle studier, visningsopsætninger og billeder for denne patient (de flyttes til papirkurven i Onepix).

Når et studie slettes, slettes alle visningsopsætninger og billeder for dette studie (flyttes til papirkurven i Onepix).

Hvis en aktiv visningsopsætning slettes, fjernes alle billeder fra registeret. Billederne kan registreres i en anden visningsopsætning eller slettes (flyttes til papirkurven i Onepix). Når et billede slettes, fjernes det fra registeret og kan enten registreres i en anden visningsopsætning eller slettes (flyttes til papirkurven i Onepix).

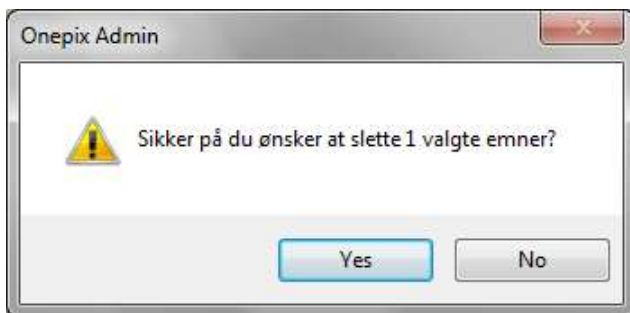

Trinnene for at slette patienter, studier og billeder ligner hinanden og beskrives nedenfor:

Start databehandlingsværktøjet i Onepix (Onepix Admin).

Udfør følgende trin i patientlisten:

1. Vælg en patientmappe (i feltet til venstre), således af listen med studier vises (i feltet øverst til højre), eller vælg en studiemappe (i feltet til venstre), således at listen med visningsopsætninger og undersøgelser vises (i feltet øverst til højre).
2. Markér den patient, det studie, den serie eller det billede, du ønsker at slette (patienter kan kun slettes i feltet øverst til højre, når mappen Alle patienter er åben). Hvis du vælger at slette en patient, vil alle studier, serier og billeder, der er koblet til patienten, også blive slettet. Det samme gælder for studier; de visningsopsætninger og billeder, der er koblet til studiet, vil også blive slettet.
3. Klik på Rediger> Slet. Så flyttes alle aktuelle objekter til papirkurven i Onepix (under mappen med patientlisten i feltet til venstre).
4. Hvis du vil slette objekterne permanent, skal du tømme papirkurven i Onepix Admin (det anbefales ikke at tømme papirkurven, hvis du ikke er helt sikker på, at det er det rigtige objekt, der er blevet slettet).

FORTRYD

Genopretter slettede studier og billeder. Med databehandlingsværktøjet er det muligt at genoprette slettede studier og billeder. Objekter, som slettes med databehandlingsværktøjet, flyttes først til papirkurven i Onepix (papirkurven i Onepix finder du i feltet til venstre efter listen med patientmapper).


Hvis du vil genoprette studier og billeder fra papirkurven i Onepix, åbner du papirkurven og markerer de objekter, du vil genoprette, eller klikker på Rediger> Markér alle, hvis du ønsker at genoprette alle. Klik dernæst på Fortryd i menuen Rediger.

Hvis en patient genoprettes, genskabes også alle studier, visningsopsætninger og billeder for patienten (genoprettes fra papirkurven i Onepix). Hvis et studie genoprettes, genskabes også alle visningsopsætninger og billeder for studiet (genoprettes fra papirkurven i Onepix). Hvis en aktiv visningsopsætning genoprettes (genoprettes fra papirkurven i Onepix), genskabes også alle billeder til visningsopsætningen. Hvis et billede genoprettes (genoprettes fra papirkurven i Onepix), genregistreres det i den aktuelt aktive visningsopsætning.

Hvis objekterne er blevet tømt fra papirkurven i Onepix kan de stadig genoprettes fra papirkurven i Windows, forudsat at det foregår på den computer, hvor billederne er gemt lokalt. Der kræves nogle yderligere trin for at genoprette objekter fra dette sted. Under overskriften "Ryd" finder du en trin-for-trin-beskrivelse af, hvordan du genopretter tømte objekter.

RENS

Flytter slettede patienter, studier/billeder fra papirkurven i Onepix til papirkurven i Windows. Når studier og billeder tømmes, slettes også databaseoplysningerne. Det er med til at sikre, at billedfiler og databaseposter stemmer overens.

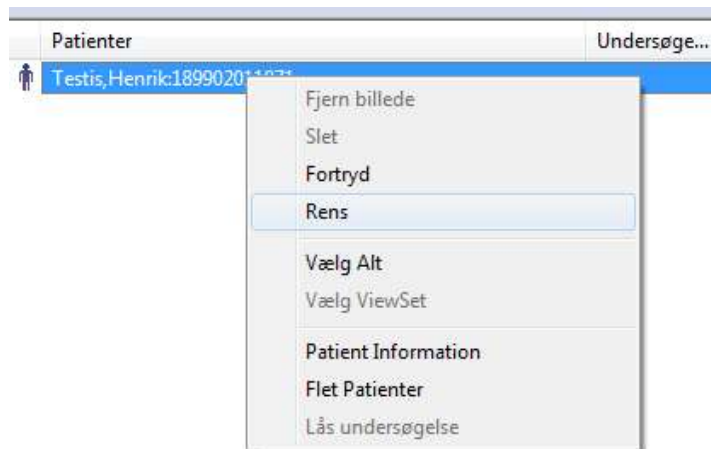

Sådan genopretter du slettede billeder fra papirkurven i Windows:

1. Åbn papirkurven i Windows (findes normalt på Windows-skrivebordet).

2. Markér de objekter, du vil genoprette. I papirkurven i Windows er det ikke sikkert, at studier og billedobjekter ligger grupperet sammen, så du skal markere alle de objekter, du vil genoprette.
3. Klik på Genopret de valgte objekter.
4. Åbn databehandlingsværktøjet i Onepix, og klik på Databasevalideringsguiden i menuen Værktøj. Når du godkender, oprettes der databaseposter for de slettede objekter.
5. Følg instruktionerne i vejviseren for at opretholde databaseintegritet (Databasevalideringsguide). I en af boksene i vejviseren vises der billeder, som mangler tilsvarende databaseposter. Her finder du de billeder, du vil genoprette.
6. Klik på Tilføj poster, og fortsæt gennem vejviseren. Klik på Fuldfør på den sidste side.

INDSTIL AKTIVT KORT


Ændrer en kortskabelon fra inaktiv til aktiv for studier med flere kort. Det kort, som er aktivt lige nu, har et mørkt ikon. Det andet kort har et gråt ikon. Når du veksler mellem kort, skal du tage hensyn til antallet af visningsrammer i de forskellige kort, som fremgår af følgende eksempel.

Studiet nedenfor har to kort. Det aktive kort har 15 billeder i 26 visningsrammer; det andet (for tilfældet inaktive) kort har 12 visningsrammer. Hvis du vælger at skifte status for de to kort og gøre den inaktive aktiv, vil der ikke være nok visningsrammer i kortet med 12 rammer.


Det vil betyde, at tre af billederne bliver separeret, hvilket bevirker, at de ville blive gemt i studiet, men ikke vist i det aktuelle kort. For at undgå problemet, når du arbejder med flere kort, skal du kontrollere, at det andet kort (det, du vil gøre aktivt) har tilstrækkeligt mange visningsrammer til antallet af billeder i det aktuelle kort (det, som skal gøres inaktivt).

Num...	Bilddatum	Källa	Bredd	Höjd	Djup	Komprimerad	Filstorlek (kb)
0	2015-09-11	Övrigt	0	1	1246...	Okänd	Okänd
0	2015-09-11	Övrigt	0	0	1246...	Okänd	Okänd
1	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
3	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
4	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
6	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
5	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
7	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
8	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
10	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
20	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
21	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
23	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
22	2015-09-11	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	567
24	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
25	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566
26	2016-09-12	Rönt...	641	900	8	Okomprimerad	566

Aktiv karta förhandsgranskas

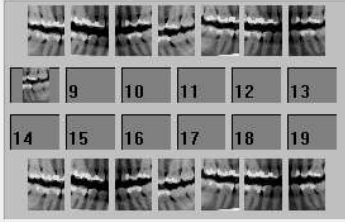

Valt objekt förhandsgranskas

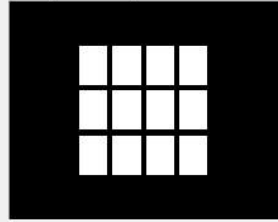


PATIENT-/STUDIEOPLYSNINGER

Gør det muligt at ændre patient- og studieoplysninger. Patient- og studieoplysninger udgør vigtig information i Onepix. Det kan dog være nødvendigt nogle gange at tjekke dem for at sikre, at databaseposterne stemmer overens med patient- og studieoplysningerne. Ved at redigere patientoplysninger i databehandlingsvinduet er det nemt at opdatere og/eller klargøre patientoplysninger i databasen.

Søg efter patienten i Onepix-databasen via værktøjet "kikkerten". Markér patienten i listen over søgeresultater> vælg patientoplysninger under menuen Rediger.

Ændringer i patientoplysningerne spredes automatisk til alle studier og billeder for den aktuelle patient. Ændringer i studieoplysningerne spredes på samme måde, og alle billeder i det ændrede studie opdateres.

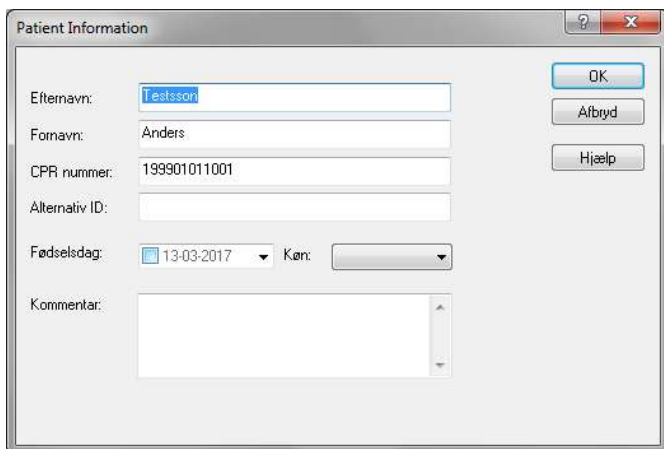

Patient Information

Efternavn:

Fornavn:

CPR nummer:

Alternativ ID:


Fødselsdag: Køn:

Kommentar:

OK
Afbryd
Hjælp

FLYTTE OBJEKTER

Kombinerer studierne i to forskellige patientjournaler. En nem måde at holde databasen opdateret på er ved at kombinere studier. En patient, som er blevet gift og har skiftet efternavn, er et eksempel, hvor det kan være nyttigt at bruge funktionen for at slå studier sammen, således at de gamle studier kombineres med de nye. Du kan vælge at slå alle studier sammen for en bestemt patient, eller blot de studier du er interesseret i. Udover sammenlægning af patienter kan du også flytte individuelle undersøgelser, serier og lige billeder fra en patient til en anden ved hjælp af samme procedure.

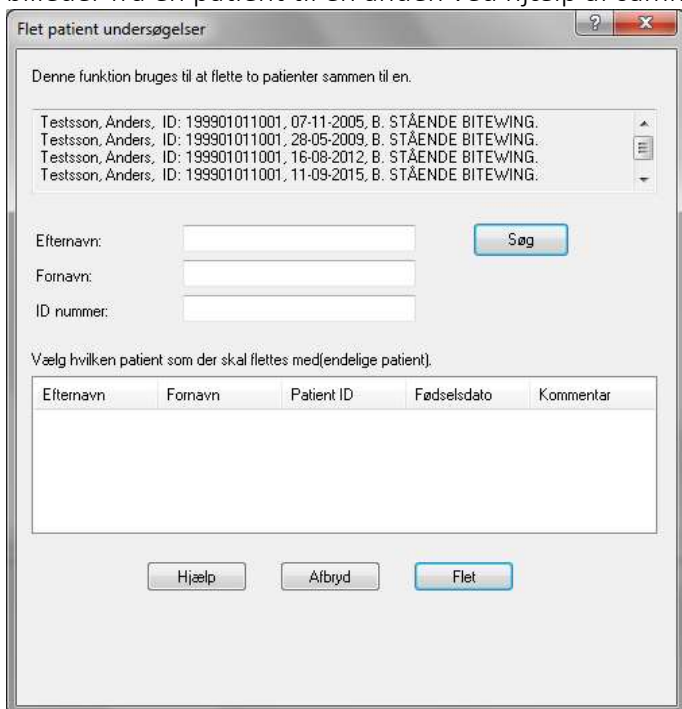

Flet patient undersøgelser

Denne funktion bruges til at flette to patienter sammen til en.

Testsson, Anders, ID: 199901011001, 07-11-2005, B. STÅENDE BITEWING.
 Testsson, Anders, ID: 199901011001, 28-05-2009, B. STÅENDE BITEWING.
 Testsson, Anders, ID: 199901011001, 16-08-2012, B. STÅENDE BITEWING.
 Testsson, Anders, ID: 199901011001, 11-09-2015, B. STÅENDE BITEWING.

Efternavn: Søg

Fornavn:

ID nummer:

Vælg hvilken patient som der skal flettes med(endelige patient).

Efternavn	Fornavn	Patient ID	Fødselsdato	Kommentar

Hjælp Afbryd Flet

Sådan slår du alle studier sammen for en patient:

1. Åbn mappen Alle patienter i databehandlingsværktøjet (Onepix Admin).
Eller: Vælg værktøjet "Kikkerten", og find patienten, hvor studierne skal flyttes fra.
2. Markér patientens navn i feltet øverst til højre (ved at markere patienten angiver du, hvilken plads du ønsker, studierne skal flyttes fra).
3. Klik på Rediger> Flytte objekter. Vælg målpatienten i dialogboksen (den plads, hvor du vil flytte studierne til).
4. Klik på Flytte, hvis du vil flytte studierne til målpladsen.


Sådan slår du nogle studier sammen for en bestemt patient:

1. Åbn mappen Alle patienter i databehandlingsværktøjet (Onepix Admin). Eller: Vælg værktøjet "Kikkerten", og find patienten, *hvor studierne skal flyttes fra*.
2. Dobbeltklik på patientens navn i feltet oppe til højre (når du viser studierne for den valgte patient, kan du efterfølgende vælge, hvilke studier du vil flytte derfra).
3. Klik på Rediger> Flytte objekter. Vælg målpatienten i dialogboksen (den plads, hvor du vil flytte studierne til).
4. Klik på Flytte, hvis du vil flytte studierne til målpladsen.

LÅS UNDERSØGELSE OP

En undersøgelse/serie, der er ældre end en dag, vil være låst for al redigering. Hvis du af en eller anden grund får brug for at låse en undersøgelse op, skal du markere den pågældende undersøgelse og vælge Lås undersøgelse op. Undersøgelsen vil automatisk vende tilbage til låst dagen efter.

MENUEN VÆRKTØJ

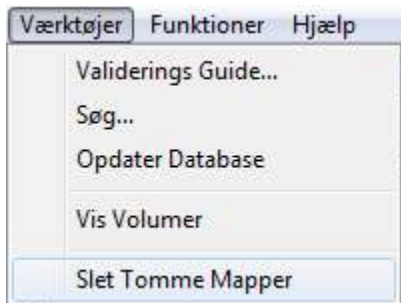

DATABASEVALIDERINGSGUIDE

Kontrollerer dataintegriteten for de patient- og billedoplysninger, der lagres i databasen. Guiden for databaseintegritet (Valideringsguide) går gennem følgende kontroltrin:

- Identificerer pladsen for lagrede billeder
- Identificerer billedfiler uden tilsvarende databaseposter
- Identificerer databaseposter uden tilsvarende billedfiler
- Tilføjer databaseposter til billedfiler, der mangler.

Der kan være mere end én sti eller plads til billedlagring i systemet, men det er kun muligt at kontrollere én sti ad gangen. Når den aktuelle sti godkendes i vejviseren, kan de billeder, der ikke er koblet til nogen tilsvarende post i databasen, identificeres. I det tilfælde kan du vælge enten at slette billederne eller tilføje poster til billederne automatisk.

Vejviseren opdager også, om der mangler databaseposter. Disse kan tilføjes i databasen eller slettes.



SØG

Udfør tilpassede søgninger på patient- og studieniveau. Dialogboksen Søg giver dig tre forskellige måder at indhente oplysninger på i databasen: via patient, studie eller billede, ved hjælp af de tilpassede felter i dialogboksen.

Vælg enten Patienter, Undersøgelse eller Billeder i rullelisten, og angiv de oplysninger i felterne, du har brug for for at filtrere resultaterne. Når du klikker på OK, hentes de oplysninger, der svarer til de søgeparametre, du angav.

Søge indstillinger

Søg efter: Patienter

☒ Tilføj wildcard i søgefelterne

Patient Information

Efternavn:

Fornavn:

CPR:

☐ Start dato: 13-03-2017

☐ Slut dato: 13-03-2017

Kommentar:

UID:

Undersøgelses Information

Indlæsningsnummer:

ID Nummer:

☐ Start dato: 13-03-2017

☐ Slut dato: 13-03-2017

Kommentar:

Beskrivelse:

UID:

Billede Information

☐ Optagelse start dato: 13-03-2017

☐ Optagelse slut dato: 13-03-2017

Kommentar:

UID:

Volume: Alle volumes

OK Afbryd Hjælp

OPDATER DATABASEN


Sender en anmodning til den aktuelle database om at hente de seneste patient- og billedoplysninger. I Onepix fungerer klienter og servere som forskellige programmer. Onepix-servere modtager anmodningen om billedlagring og svarer på spørgsmål og anmodninger om hentning fra en eller flere Onepix-klienter. Selvom Onepix-klienter og servere samarbejder ved udveksling af patient-, studie- og billedoplysninger, vises opdateringer af en Onepix-klient på andre klienter ikke altid, på trods af at de er tilsluttet den samme server.

Hvis du klikker på Værktøj> Opdater database, henter klienten de seneste oplysninger fra serverens database. Patientstudier opdateres på serveren i slutningen af Onepix-sessionen. Det er vigtigt at huske, om de oplysninger, du forsøger at hente, er blevet tilføjet af en anden Onepix-klient. For at sikre at oplysningerne, der tilføjes en bestemt klient, gemmes i serverdatabasen, skal du lukke Onepix-sessionen på den aktuelle computer.

SE VOLUMENER

Volumeninformation gemmes i Onepix-databasen for at identificere stier, hvor billeder bliver lagret i systemet. Hvis du har brug for at ændre volumeninformationen, f.eks.


tilføje, ændre eller slette et billedarkiv, kan du gøre det ved hjælp af volumenredigeringsværktøjet.

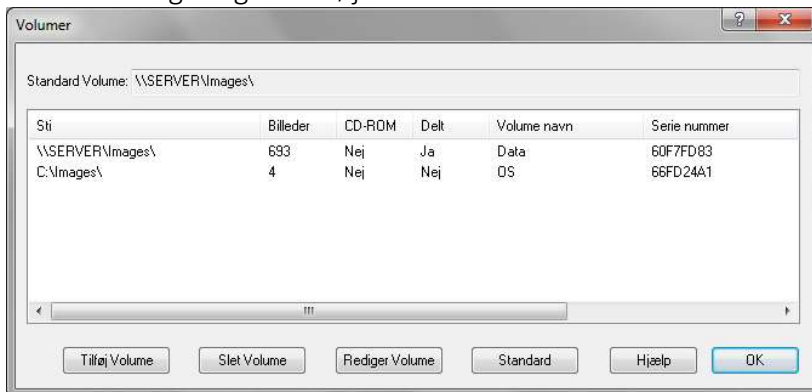

Husk på, at forandringer i stierne for volumen kan påvirke lokalisering og hentning af billeder i Onepix. Vi anbefaler, at du ikke foretager nogen ændringer i volumen uden hjælp eller instruktioner fra kvalificeret supportpersonale.

SLET TOM MAPPE


Sletter automatisk tomme mapper fra billedvolumen. Du skal blot markere den volumen, der skal behandles, og klikke på Slet tom mappe.

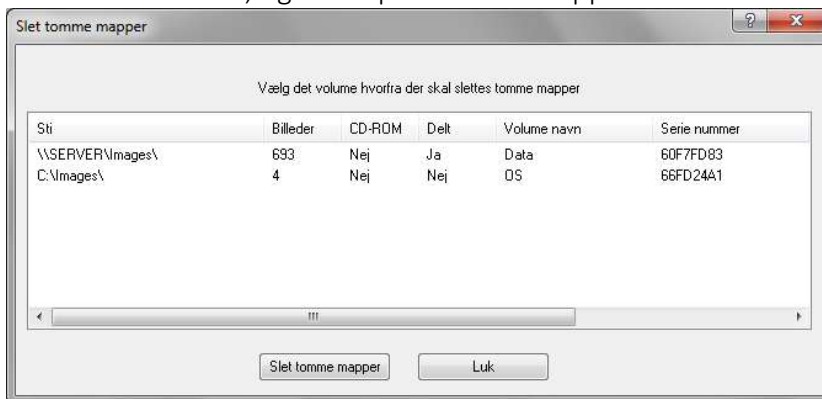

MENUEN FUNKTIONER


EGENSKABER

Hvis du vælger dette alternativ, tilføjes der en kolonne i patient-/studie-/billedområdet med det samlede antal studier for hvert studie eller det samlede antal billeder for hver visningsopsætning.

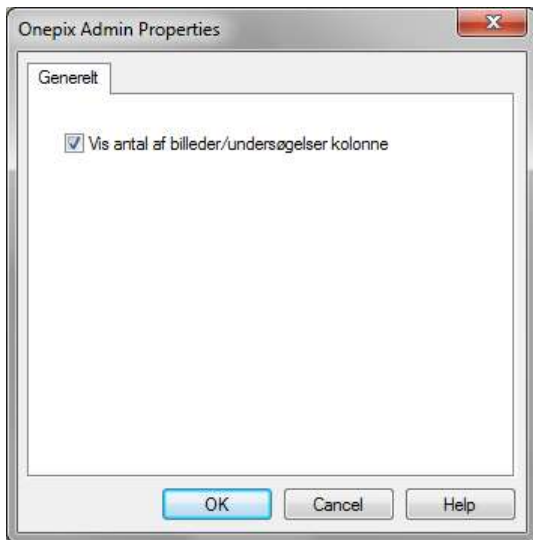

DATABASE

Denne dialogboks kan bruges til at teste forbindelsen til patientdatabasen, til at vise aktuel sti til billedmappe, hvor røntgenbillederne gemmes, og til at konfigurere databasen.

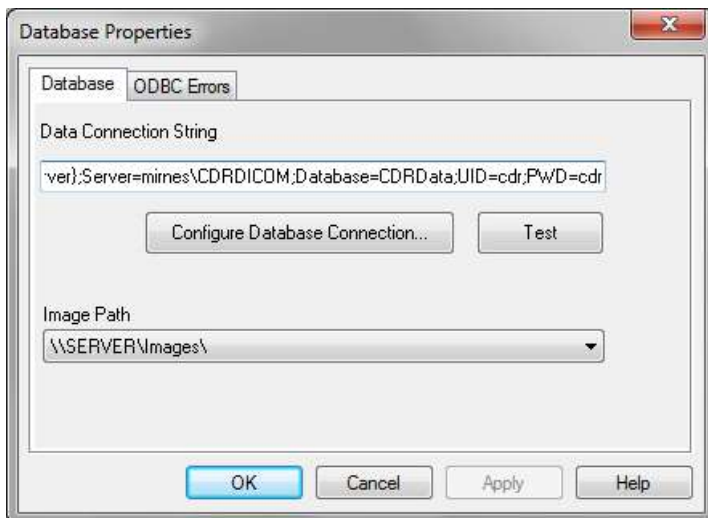

Konfiguration af databaseforbindelse foretages via knappen Konfigurer Databaseforbindelse.

Configure Database Connection

Enter the name of the Server:
(Click dropdown to search for servers.) SERVER

☐ Connect with my Windows login credentials

Username: opxj

Password: ●●●

☐ Show Advanced Options

Test Connection

OK Cancel



INSTALLATIONSVEJLEDNING

DANSK

INSTALLATION AF ONEPIX

TILMELD ONEPIX

Hver Onepix-installation skal registreres for at opfylde de sporbarhedskrav, der findes for medicinsk udstyr. Udfyld registreringsformularen på hjemmesiden, onepix.dk om du har lavet en installation af Onepix på en eller flere computere.

SYSTEMKRAV

Herunder finder du systemkravene til Onepix. Onepix-programmet installeres med en af følgende konfigurationer: Enkelt arbejdsstation med Onepix til enkeltbrugere (fritstående) eller Netværk med flere arbejdsstationer med Onepix til flere brugere (Onepix-klient/-server). For Onepix lokal anbefales det at bruge dedikerede servere til lagring og download af billeder.

SIKKERHED

For at sikre, at systemets sikkerhed er høj, er følgende indstillet på den computer, hvor Onepix skal installeres:

- Windows skal opdateres med den seneste service pack og Windowsopdateringer
- Opdateret og fungerende antivirussoftware skal være tilgængelig
- Der skal være en firewall, der beskytter computeren mod angreb fra internettet

KLIENT

- Windows 11, Windows 10 x64, Windows 10 x86
- CPU 64bit: Intel or AMD Processor
- 8 GB RAM
- DirectX 9 or later with WDDM 1.0 or later driver
- Intel USB chipset

COMPUTERSKÆRM


- En medicinsk monitor (DICOM Monitor) passer bedst til visning af røntgenstråler. Alternativt kan en højkvalitets skærm anvendes.
- Skærmen skal helst kalibreres, hvis dette er muligt.
- Mindste resolution er 1280x1024
- Anbefaler resolution 1920x1080
- 24 bit farvedybde
- Vinkler, grader, 178

SERVER


OBS! Hvis der allerede eksisterer en ældre SQL-instans ved navn CDRDICOM, er det kun databasen, der skal opdateres. Den eksisterende SQL-instans kan således forblive som den er, så du dermed undgår nyinstallation. Ved nyinstallation er der følgende krav til computeren:

- Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows 11, Windows 10 x64
- CPU 64bit: Intel or AMD Processor
- 8 GB RAM-minne
- 500 GB hard drive

ONEPIX CLOUD SYSTEMSKITSE

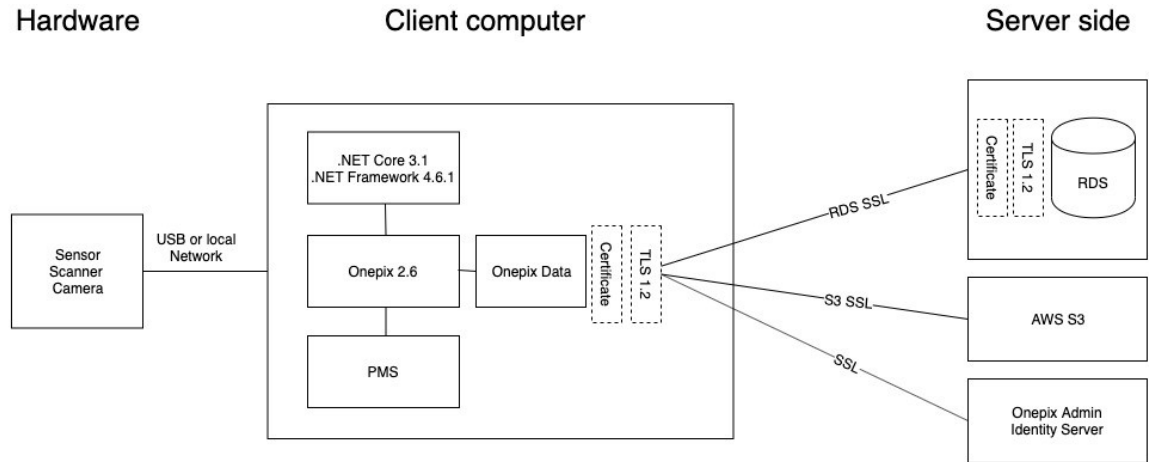

ONEPIX SYSTEMSKITSE I KLIENT/SERVER MILJØET

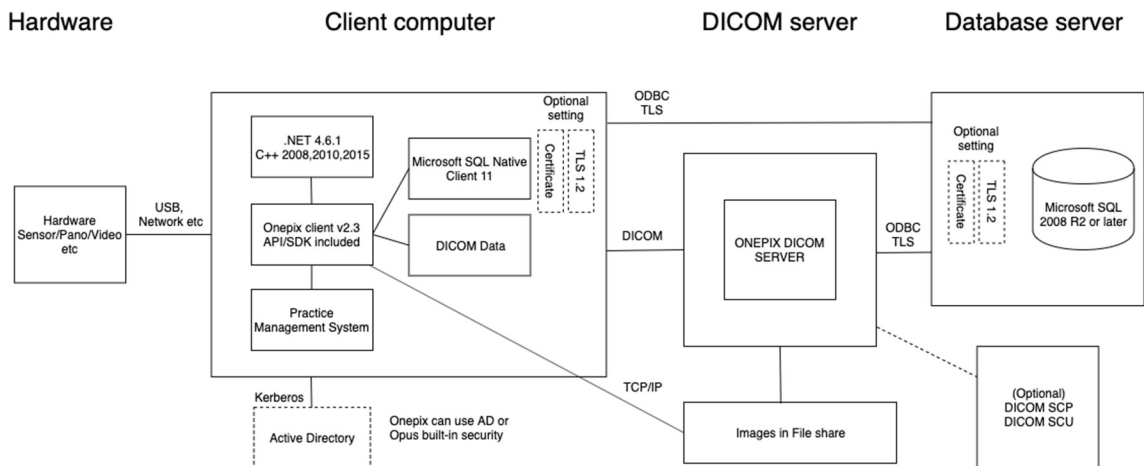

KOMPATIBEL HARDWARE

Denne tabel viser kompatibel hardware, der fungerer med Onepix Local, Onepix Cloud og i Citrix / Terminal Server-miljø. Bemærk, at Onepix også understøtter Twain-, UVC- og WIA/WPD-opsamlingsgrænseflader. Kontakt producenten for drivere og detaljerede oplysninger om, hvilke modeller der er kompatible med hvilket operativsystem.

INTRAORAL SENSOR

Manufacturer	Model	Connection	Onepix Local	Onepix Cloud	Citrix / TS
Carestream	RVG 5100 / 5200 / 6100 / 6200 / 6500	Integrated	✓	✓	✓
Dürr VistaEasy	VistaRay sensor	Integrated	✓	✓	✓
Dürr Vistasoft Connect	VistaRay sensor	Integrated	✓	✓	✓**
Gendex GXPicture	GXS-700	Integrated	✓	✓	
Imagelevel	MDX-3	Integrated	✓	✓	✓
KaVo / Dexis	SNAPSHOT / DIGORA Toto	Integrated	✓	✓	✓
Myray (iCapture)	Zen-X / Zen-X E / Zen-X DCiS	TWAIN	✓**	✓**	✓**
Schick by Sirona	Schick AE / Schick 33 / Schick Elite / XIOS XG Select / XIOS XG Supreme / CDR Remote HS	Integrated	✓	✓	✓
Schick by Sirona	CDR Wireless SDX / CDR 2000	Integrated	✓*	✓*	✓*
Vatech	EZ Sensor HD	Integrated	✓	✓	✓**
Hamamatsu	Hamamatsu USB sensor	Integrated	✓	✓	
Planmeca	ProSensor	Integrated	✓	✓	✓
Other...	Sensors that support Twain acquisition	TWAIN	✓**	✓**	✓**

INTRAORAL CAMERA

Manufacturer	Model	Connection	Onepix Local	Onepix Cloud	Citrix / TS
Acteon	Sopro USB cameras	Integrated	✓	✓	✓
Carestream	CS 1500	Integrated	✓***	✓***	✓***
Dürr VistaEasy	VistaCam cameras	Integrated	✓	✓	✓
Dürr Vistasoft Connect	VistaCam iX	Integrated	✓	✓	✓**
IC-Lercher	L-Cam USB – Empia Chipset	Integrated	✓	✓	✓

Myray (iCapture)	CU2	Twain	√**	√**	√**
Schick by Sirona	USB Cam2, USB Cam4	Integrated	√	√	√
Schick by Sirona	USB Cam	Integrated	√*	√*	√*
Vatech	Vatech EZCam	Integrated	√***	√***	√***
Other...	Cameras that support UVC	Integrated	√***	√***	√***

EXTRAORAL CAMERA

Manufacturer	Model	Connection	Onepix Local	Onepix Cloud	Citrix / TS
Fuji	Fuji FinepiX S5	Integrated	√	√	√
Nikon	D7500 / D7200 / D7100 / D7000 / D700 / D610 / D5100 / D300s / D300 / D200 / D90 / D80	Integrated	√	√	√
Other...	Cameras that support WIA & WPD	Integrated	√****	√****	√****

INTRAORAL IMAGEPLATE SCANNER

Manufacturer	Model	Connection	Onepix Local	Onepix Cloud	Citrix / TS
Acteon	PSPIX / PSPIX2	Twain	√**	√**	√**
Carestream / Kodak	CS 7200 / CS 7400 / CS 7600	Integrated	√	√	√
Dürr VistaEasy	VistaEasy Vistascan / Vistascan Mini	Integrated	√	√	√
Dürr Vistasoft Connect	VistaScan Mini View / VistaScan Mini View 2.0 / VistaScan Mini Easy 2.0 / VistaScan Ultra View	Integrated	√	√	√**
Kavo / Dexis	DIGORA Optime (all models) / EXPRESS / EXPRESS Origo / KaVo Scan eXam / KaVo Scan eXam Plus	Integrated	√	√	√
Innixim	Spark	Integrated	√		
Vatech	Vatech VSP	Integrated	√	√**	√**
Other...	Scanners that support Twain acquisition	Twain	√**	√**	√**

PANORAMA / CBCT

Manufacturer	Model	Connection	Onepix Local	Onepix Cloud	Citrix / TS
Acteon	X-mind Prime (2D)	Twain	√**	√**	√**
Ajat	ART Plus (2D)	Twain	√**	√**	√**
Carestream	CS 8100 / CS 9000 / CS 9300 (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Dürr Vistasoft Connect	VistaPano	Integrated	✓	✓	√**
Myray	Hyperion X5 / X9 (2D)	Twain	√**	√**	√**
Kavo / Dexis	CRANEXTM Novus / CRANEXTM Novuse / KaVo Pan eXam TM / KaVo Pan eXam Plus / OP30 / OP200 D / OC200 D / OP300 / OP300 MaXio (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Kavo / Dexis	CRANEX 3D / CRANEX 3DX / SCANORA 3D / SCANORA 3DX	Integrated	✓		
Morita	IC-5 / Veraview Epocs (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Planmeca	DIDAPI & 2D Image Capture / ProOne / Promax (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Schick by Sirona	CDR iPAN (2D) / CDR PanElite (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Sirona	XG3 / XG5 (2D)	Twain	√**	√**	√**
Vatech	PaXPrimo (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Vatech	PaXDuo3D	Integrated	✓		
Vatech	VcaptureSW 2D - PaX-I / GreenX / PaX-I Plus (2D)	Integrated	✓	✓	✓
Vatech	VcaptureSW 3D - GreenX / PaX-I Plus	Integrated	✓	✓	
Other...	Panorama that support Twain acquisition (2D)	Twain	√**	√**	√**

* Virker kun på 32bit operativsystemer

** Billedoptagelsen behandles med Twain-interface leveret af producenten.

*** Kameraer, der fuldt ud understøtter UVC (USB Video Class), er funktionelle med Onepix.

**** Kameraer, der understøtter WIA (Windows Image Acquisition) WPD (Windows Portable Devices).

JOURNALSYSTEM KOMPATIBELT MED ONEPIX

Følgende journalsystemer har lavet integrationer til Onepix.

System	Manufacturer
Al Dente	Al Dente Software AS
Alma	AlmaSoft AB
Anita	Anita Systems AS
Carestream T4	Carestream
Carita	Swedish Care
DentalSuite	Plandent A/S
Frenda	Frenda AB
Muntra	Muntra AB
Nextsys	Unident AB
Opus	Opus Systemer AS
Orthodontis	Orthodontis AS
TD Journal	A-Data A/S
Zilke	Go On Software


SERVERINSTALLATION

Onepix Server-pakken installerer følgende:

- En SQL-server 2022 Express med instansnavn ONEPIX
- En tom database oprettes med navnet OnepixDB
- Onepix Admin-software

Download Onepix Server, og følg instruktionerne nedenfor. Åbn mappen, hvor Onepix er blevet gemt efter download, og kørs Onepix Server Setup.exe.

Klik på NEXT

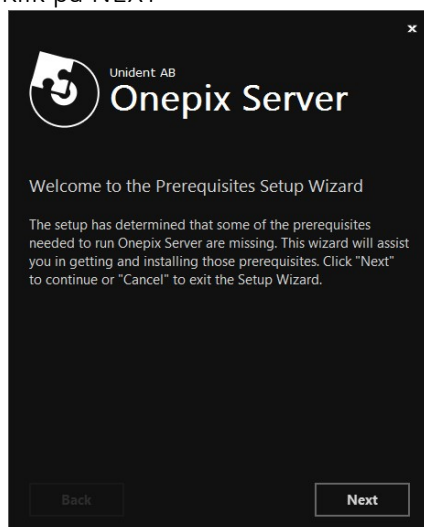

Programmet finder automatisk de komponenter, der skal installeres. Du skal blot afkrydse eller fjerne markeringen af de ting, som du med sikkerhed ved, du skal/ikke skal installere. Klik på NEXT.




Læs licensvilkårene, afkryds feltet og klik på NEXT.



Hvis der allerede eksisterer en database og en SQL-instans fra tidligere, f.eks. CDRDICOM, så skal installationspakken ikke installere en ny instans. Du vil i stedet få en dialogboks, hvor du skal udfylde oplysningerne, teste SQL-kommunikationen og klikke Install for at opdatere den eksisterende database.




Vent, til programmet er færdig med installationen, og klik på Finish.

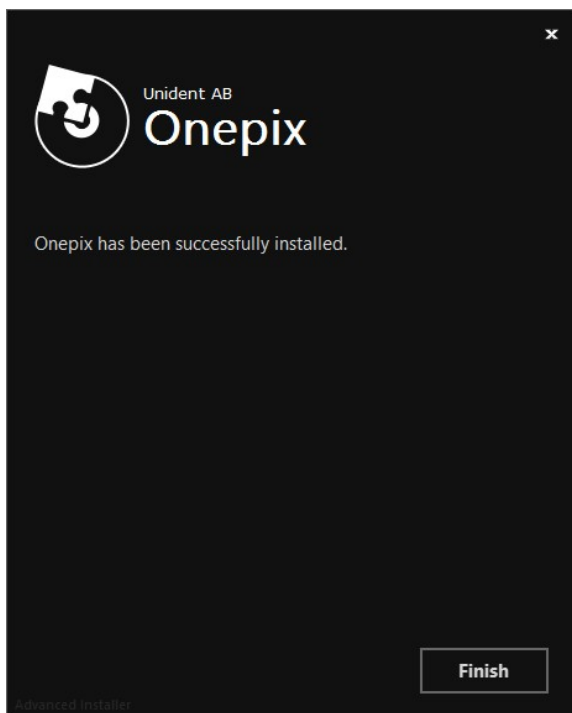

BACKUP-RUTINE

Onepix-database består af en SQL-database, der hedder OnepixDB (Hvis du har Onepix Server installeret), samt billedvolumen / -volumener, der indeholder alle billedfiler. SQL-databasen er et indeks, der blandt andet viser hvilket billede der findes i et billedvolumen. SQL-databasen kan altid genopbygges baseret på data i filerne, gennem database validering. Det kan imidlertid tage lang tid, afhængigt af hvor mange filer der er i volumen. Med andre ord indeholder billedfilerne al information, fordi de er gemt i en såkaldt DICOM-format.

Vores anbefaling er at altid sikkerhedskopiere alle billedvolumener og SQL-database til at genoprette hurtigt i tilfælde af problemer. Hvilke billedvolumener der bruges kan ses ved at starte Onepix Admin-applikationen og gå til menuen Værktøjer> Vis volumener.

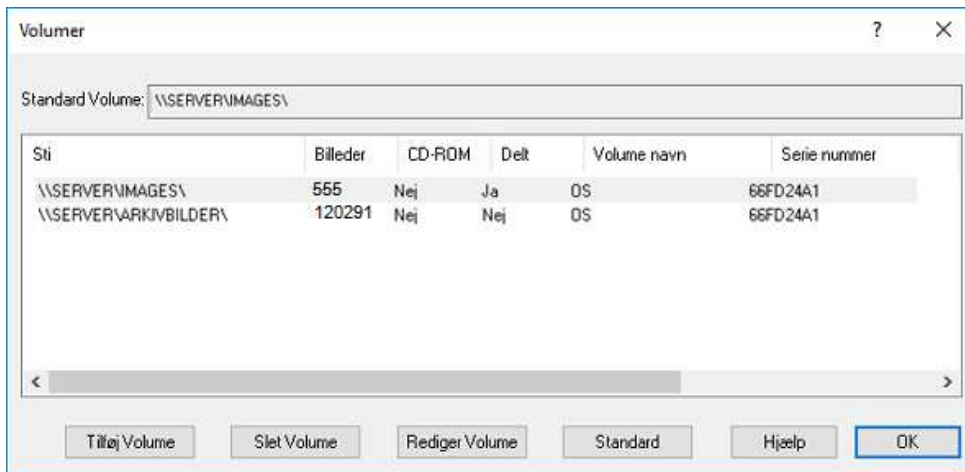

Bemærk, at det er vigtigt at sikkerhedskopiere alle volumener, selvom de arkiveres, da der også kan forekomme ændringer i gamle billeder.

KLIENTINSTALLATION

VIGTIGE OPLYSNINGER

Installationspakken vil automatisk afinstallere tidligere CDRDicom- og Onepix-software. Onepix Client-pakken installerer følgende:

- Onepix-klientsoftware
- Onepix Admin-software (valgfrit)
- Valgfrie plugins såsom TWAIN
- Valgfrie indlæsningsmoduler såsom Schick sensor, Vatech panorama.

Download Onepix Client, og følg instruktionerne nedenfor. Åbn mappen, hvor Onepix er blevet gemt efter download, og kørs Onepix Client Setup.exe.


Læs licensaftalen, afkryds feltet for licensgodkendelse og klik på INSTALL.



Afkryds de ting, der skal installeres, og klik på Install.



Vent, til programmet er færdig med installationen, og klik på Finish.

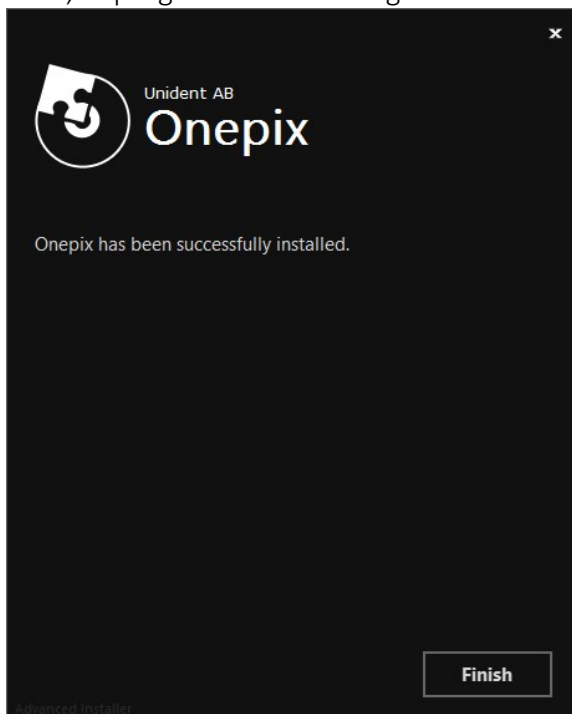

INSTALLATION AV ONEPIX KLIENT MED KOMMAND

For at installere programmet ved hjælp af kommandoen kan du bruge følgende eksempel:

OnepixClient2.3Setup.exe

ADDLOCAL=MainFeature,admin,schicksensor,video,digitalcamera,twain /quiet

Nedenfor er en liste over kommandoer og hvad de gør.

* obligatorisk

Namn	Kommand	Beskrivelse
Onepix Client	ADDLOCAL=MainFeature	Installere Onepix Client*
Onepix Admin	admin	Installere Onepix Admin program
Access control	Security	Installere Access control værktøjer
Acq Moduler Standard		
Carestream intra-oral	carestreamio	Modul for Carestream intraoral scanner och sensor
Carestream panorama	carestreampx	Modul for Carestream panorama
Digital kamera	digitalcamera	Modul for extraorala kameror (WIA)
Dürr VistaEasy intra-oral	vistaeasy	Modul for Dürr VistaEasy intraoral scanner och sensor
Dürr VistaEasy Kamera	vistaeasyxc	Modul for Dürr VistaEasy intraoral kamera
Dürr Vistasoft Connect	vistasoft	Modul for Dürr Vistasoft Connect
E2V	e2v	Modul for E2V intraoral sensor
Fuji S5	diticalcamera_old	Modul for Fuji S5 extraoral kamera (gamla fotomodulen)
Gendex sensor	gendexio	Modul for Gendex intraoral sensor
Hamamatsu	hamamatsu	Modul for Hamamatsu intraoral sensor
Intra-oral kamera	video	Modul for Intraorala kameror
Kavo intra-oral	kavo	Modul for Kavo intraoral scanner och sensor
Kavo panorama	kavopx	Modul for Kavo panorama
MDX-3 sensor	mdx3	Modul for MDX-3 intraoral röntgensensor
Morita panorama	morita	Modul for Morita panorama
Planmeca intra-oral	planmecaio	Modul for Planmeca intraoral sensor
Planmeca panorama	planmecapx	Modul for Planmeca panorama
Schick sensor	schicksensor	Modul for Schick och Fona sensor
Schick panorama	schickpano	Modul for Schick panorama

Spark scanner	spark	Modul for Spark intraoral scanner
Twain	twain	Modul for TWAIN
Vatech VSP	vatechvsp	Modul for Vatech VSP intraoral scanner support
Vatech sensor	vatechio	Modul for Vatech intraoral sensor
Vatech panorama	vatech	Modul for Vatech panorama
Moduler Citrix / Terminal Server		
Carestream intra-oral	citrixcarestreamio	Modul for Carestream intraoral scanner och sensor
Carestream panorama	citrixcarestreampx	Modul for Carestream panorama
Digital kamera	citrixdigitalcamera	Modul for extraorala kameror
Dürr intra-oral	citrixvistaeasy	Modul for Dürr intraoral scanner och sensor
Dürr Kamera	citrixvistaeasyxc	Modul for Dürr intraoral kamera
Fuji S5	citrixphoto	Modul for Fuji S5 extraoral kamera (gamla fotomodulen)
Hamamatsu	citrixhamamatsu	Modul for Hamamatsu intraoral sensor
Intra-oral kamera	citrixvideonew	Modul for Intraorala kameror
Kavo intra-oral	citrixkavo	Modul for Kavo intraoral scanner och sensor
Kavo panorama	citrixkavopx	Modul for för Kavo panorama
MDX-3 sensor	citrixmdx3	Modul for MDX-3 intraoral röntgensensor
Morita panorama	citrixmorita	Modul for Morita panorama
Planmeca intra-oral	citrixplanmecaio	Modul for Planmeca intraoral sensor
Planmeca panorama	citrixplanmecapx	Modul for Planmeca panorama
Schick sensor	citrixschicksensor	Modul for Schick och Fona sensor
Schick panorama	citrixschickpano	Modul for Schick panorama
Twain	citrixtwain	Modul for TWAIN
Vatech sensor	citrixvatechio	Modul for Vatech intraoral sensor
Vatech panorama	citrixvatechpano	Modul for Vatech panorama
Plugin		
CBCT Plugin	cbct	Plugin for CBCT (3D viewer)
Facad Plugin	facadplugin	Plugin for eksport av bilder fra Onepix til Facad
Logviewer	logviewer	Programvare for å lese Onepix-logging
Pacs Export Plugin	pacsexportplugin	Plugin for eksport av bilder fra Onepix til Pacs
STL Import Plugin	stlimport	Installera plugin for STL import

3 Shape Unite Plugin	_3shapeunite	Installera plugin for 3 Shape Unite
Plugin - Citrix		
Importplugin	citriximportplugin	Import plugin Citrix / Terminal server
Extra		
	/quiet	Stille installation uden grafisk grænseflade

LICENSAKTIVERING

Første gang du starter Onepix, vil du blive bedt om at aktivere Onepix. Udfyld alle oplysninger, og klik på Aktiver licens. Du kan også aktivere en 30-dages prøveperiode, hvis du ikke har en licenskode. Når prøveperioden er slut, kan du ikke længere starte Onepix, men skal registrere med en licenskode.



NOTE!

Du må ikke tage dental billeder i demo-tilstand, medmindre du har sikret dig, at du har en software, der kan vise DICOM billeder, når funktionen er ophørt!

ONLINE AKTIVERING ONEPIX LOKAL

Udfyld alle oplysninger, og klik på Aktiver licens.

Online Aktivering

LICENSØGLE

FORNAVN

EFTERNAVN

FIRMA

EMAIL

AVBRYD

AKTIVER LICENS >

ØNSKER DU AT STARTE EN PRØVEPERIODE MED ONEPIX?

AKTIVER 30-DAGES PRØVEVERSION

OFFLINE AKTIVERING ONEPIX LOKAL

Hvis din computer af en eller anden grund ikke er opkoblet til internet og derfor er offline. Du modtager da følgende information i dialogboksen til aktivering. Klik på Offline Aktivering for at aktivere licensen alligevel. Bemærk, at du for at kunne aktivere licensen offline skal have adgang til internet på en anden computer.

Unable to find a network, please check your connection or use **OFFLINE ACTIVATION**

Udfyld alle oplysninger, og klik på Aktiver licens.

Offline Aktivering

LICENSNØGLE

FORNAVN

EFTERNAVN

FIRMA

EMAIL

AVBRYD

AKTIVER LICENS >

ØNSKER DU AT STARTE EN PRØVEPERIODE MED ONEPIX?

AKTIVER 30-DAGES PRØVEVERSION

Du modtager denne information, når du klikker på Aktiver licens. Følg instruktionerne nedenfor for at aktivere din licens. Du skal have adgang til en computer med internetopkobling for at kunne gøre dette.

VISIT THIS URL
onepix.se/activate

ACTIVATE BY USING THIS KEY

e1891f4ae51ecc2fc16bc005b6fb25712fe508 **COPY**

ENTER THE RETURNED VALUE

LICENSAKTIVERING MED KOMMANDOER

Hvis du skal aktivere / deaktivere Onepix med kommando, kan du gøre det med opxlicense.exe-softwaren, der findes i C: \ Program Files (x86) \ Unident AB \ Onepix-mappen.

- Aktiveringskommando: **opxlicense.exe /a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /f Navn /l Efternavn /c Firma /e test@unident.dk**
- Kommando for deaktivering: **opxlicense.exe /d XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

LICENSAKTIVERING VIA PROXY

Hvis proxy anvendes, kan proxyindstillinger indstilles i følgende format.

- Aktiveringskommando: **opxlicense.exe /a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /f Navn /l Efternavn /c Firma /e test@unident.dk /pi 127.0.0.1 /pn 1080 /pu adminuser /pp password**
- Kommando for deaktivering: **opxlicense.exe /d XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /pi 127.0.0.1 /pn 1080 /pu adminuser /pp password**

BESKRIVELSE AF KOMMANDOER

Navn	Kommando
/a	Aktivera licenskod
/d	Deaktivera licenskod
/f	Fornavn *
/l	Efternavn *
/c	Firma *
/e	E-mail
/pi	Proxy IP
/pn	Proxy portnummer
/pu	Proxy brugere
/pp	Proxy adgangskode


* Brug "Citat", hvis der er mellemrum i indtastningsværdien, f.eks. "Unident AB"

DATABASETILSLUTNING ONEPIX LOKAL

For at opkoble Onepix Client til en eksisterende database på computeren eller netværket skal du gøre følgende. Hvis SQL-instansen/-databasen er oprettet manuelt, dvs. ikke er installeret via Onepix Server, kan du oprette forbindelse til den ved at afkrydse "Vis avancerede alternativer" i stedet for og udfylde de påkrævede oplysninger.

ALTERNATIV 1 – LOGIN VIA WINDOWS

- Umiddelbart efter installationen skal du starte Onepix-klienten ved at dobbeltklikke på genvejen på skrivebordet. Klik på SØG PATIENT; dialogboksen Konfigurer databasetilslutning vises. Hvis der ikke dukker en dialogboks op, kan du altid gå ind i Onepix Admin og gå via menuen Alternativer>Database.
- Hvis du skal oprette forbindelse til en ekstern server (f.eks. hvis dine billeder er gemt på en anden computer end den, du sidder ved), klikker du på pil ned og vælger den rigtige server på listen.
- Afkryds boksen, hvor der står "Opret forbindelse med mine Windows-loginoplysninger".
- Klik på knappen *Test forbindelse*.
- Hvis forbindelsen fungerer, klikker du på *OK*. Installationen er nu fuldført.
- Hvis forbindelsen ikke fungerer, skal du fortsætte med alternativ 2.

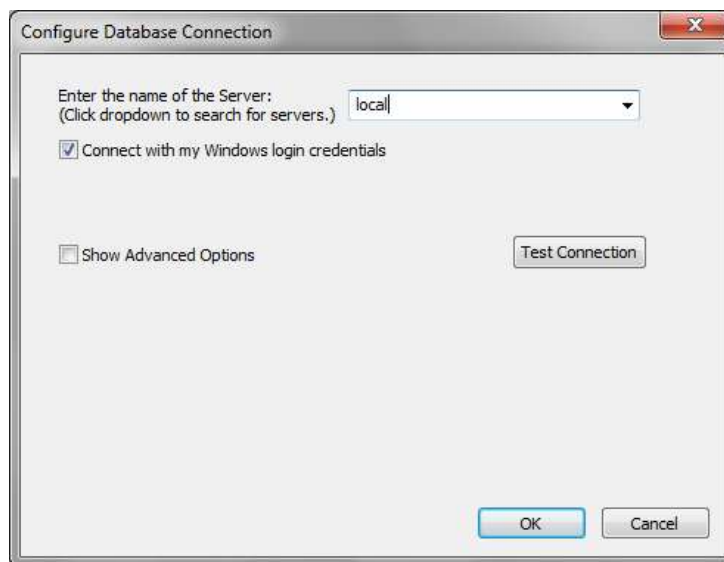

ALTERNATIV 2 – LOGIN VIA SQL

- Afkryds boksen, hvor der står "Opret forbindelse med mine Windows-loginoplysninger".
- Skriv "opx" (med små bogstaver og uden citationstegn) som brugernavn og adgangskode.
- Klik på knappen *Test forbindelse*. Klik på *OK*, når forbindelsen fungerer.

Configure Database Connection

Enter the name of the Server:
(Click dropdown to search for servers.)

SERVER

☒ Connect with my Windows login credentials

Username: opx

Password: ●●●

☐ Show Advanced Options

Test Connection

OK Cancel

FORBINDELSE FRA JOURNALSYSTEM - ONEPIX AUTOMATION

De fleste journalsystemer har en direkte integration med Onepix. For de journalsystemer, der ikke har en direkte integration, men som stadig kan starte eksterne programmer og sende parametre, kan man bruge OnepixAutomation.exe. OnepixAutomation.exe installeres automatisk og er i samme mappe som OnepixClient.exe, og startes som ved følgende eksempel:

Eksempel: OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname"

Dette er kun et eksempel, så PatientID, Lastname og Firstname vil blive ændret til tilsvarende parametre fra de respektive journalsystemer. Citattegn skal anvendes for at sikre, at al patientinformation overføres, f.eks. hvis patienten er registreret med mere end et fornavn eller efternavn i journalen.

LÅSTE FUNKTIONER

Onepix Automation giver dig mulighed for at låse Onepix-funktioner, for eksempel hvis du ikke vil have almindelige brugere at søge efter eller oprette nye patienter direkte i Onepix, eller for at låse brugerindstillinger. De funktioner i Onepix der kan låses ses herunder, med en tilknyttet værdi:

- SØG PATIENT - (DisableOpen) = 1
- NY SKABELON - (DisableNewTemplate) = 2
- INDSTILLINGER - (DisableSettings) = 4
- NY UNDERSØGELSE - (DisableNewStudy) = 8
- NY SERIE - (DisableNewSeries) = 16
- NY PATIENT - (DisableNewPatient) = 32

For at kombinere blokering af to eller flere funktioner, tilføjes værdierne fra de enkelte indstillinger og summen indtastes i slutningen af kaldet. Nedenfor er 3 eksempler på hvordan det virker:

1. Kør OnepixAutomation med kommandoen nedenfor for at låse SØG PATIENT:
OnepixAutomation.exe "PatientID" "Efternavn" "Fornavn" 1
2. Kør OnepixAutomation med kommandoen nedenfor for at låse SØG PATIENT + NY SKABELON + INDSTILLINGER + NY PATIENT:
OnepixAutomation.exe "PatientID" "Efternavn" "Fornavn" 39

EKSTRA PARAMETRE

Hvis du vil sende tandlægerens information og / eller kliniknavn, skal du tilføje disse som vist nedenfor:

OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 39 "Dentist" "Clinic"

AUTOMATISK OPPDATERING AV PATIENTDATA

Hvis det er muligt at sende parametre med et unikt ID fra journalsystemet, kan disse bruges til at opdatere patientdata automatisk, når patienten åbnes fra journalen. Den unikke ID-parameter vil blive sendt til slutningen, her er eksempler:

- **OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 39 "Dentist" "Clinic" "UniqueID"**

Hvis du vil springe over nogle parametre som Dentist og Clinic, skriver du dette:

- **OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 39 "" "" "UniqueID"**

Bemærk at "" citatet betyder at du kan springe over denne parameter.

Det er vigtigt at huske på, at det unikke ID skal være så unikt som muligt. Da billeder kan sendes til andre klinikker, vil du undgå unikt IDt kolliderer i en anden database. For at undgå dette kan du for eksempel sende flere parametre fra journalen samtidig med klinikerens navn, tandlæge og patient ID lige efter hinanden så længe de er inden for "" citatet.

Eksempel:


- **OnepixAutomation.exe "PatientID" "Lastname" "Firstname" 39 "" "" "ClinicDentistUniqueID"**

ONEPIX LOG VIEWER

Fra og med Onepix version 2.3 logges alle aktiviteter i samme database som billederne. Logning foregår i databasetabellen Audit, hvor følgende aktivitet logges:

- Login
- Logout
- Open patient
- Move Study
- Move Series
- Move Image
- Delete Study
- Delete Serie
- New Study
- New Serie
- New Image
- Export Image
- Open Image
- Modify Image
- Detach Image
- Attach Image

For at få adgang til log kan du installere Onepix Log Viewer-softwaren ved at vælge Log Viewer under installationen..

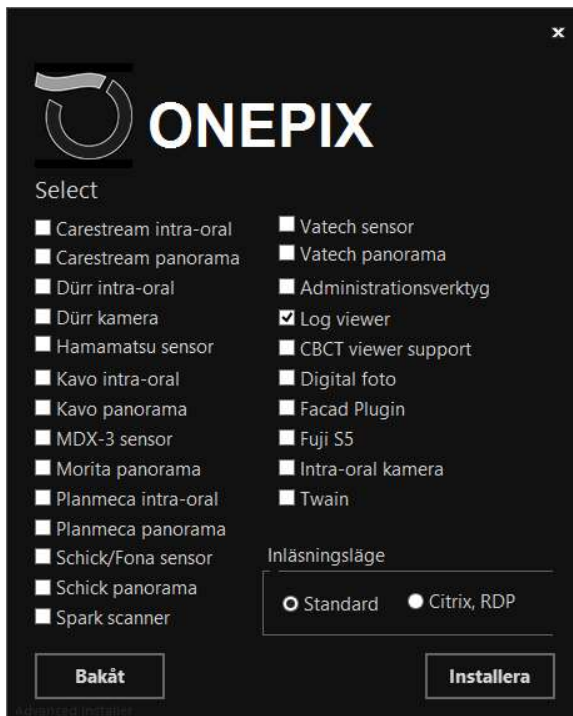

Programmet er installeret i samme mappe som OnepixClient, og der oprettes en genvej på skrivebordet.

For at se de oplysninger, der er logget i Audit tabellen, skal du starte OnePix Log Viewer-programmet. Her kan du søge om Patient (PatientID / PersonNumber), User (Windows Brugernavn) eller Computer Name.

Value: 19121212-1212

From: 2018-11-28 15:46 To: 2018-11-29 15:46

Patient
User
Computer

Search

AuditID	Event	Time	Computer	PatientID	UserName	UID
2565	Modify Image	11/28/2018 4:02:06 PM	MIRNES	19121212-1212	UNIDENT\ymmc	1.2.840.114244.400.5.5470837.1
2564	Open Image	11/28/2018 4:02:02 PM	MIRNES	19121212-1212	UNIDENT\ymmc	1.2.840.114244.400.5.5470837.1
2563	Modify Image	11/28/2018 4:02:00 PM	MIRNES	19121212-1212	UNIDENT\ymmc	1.2.840.114244.400.5.5470837.1

Resultatet kan eksporteres i CSV-format, der kan åbnes i et eksternt tekstredigeringsprogram, hvis det ønskes.

ONEPIX LOKAL ADGANGSKONTROL

Med adgangskontrol kan du kontrollere adgang til funktioner i Onepix ved at tildele Windows-brugerens adgangsniveau: Lav, Medium eller Høj.


Onepix Security Role

Low
Middle
High

Add User/Group

Name	Onepix Security Role	Windows Principal Type
utv10x64\OnepixAdmin	High	User
utv10x64\OnepixMedium	Low	User
utv10x64\OnepixUser	Low	User
Unident Falkenberg	High	User


Adgangskontrol er installeret med Onepix-klientpakken. En programgenvej er installeret på skrivebordet.

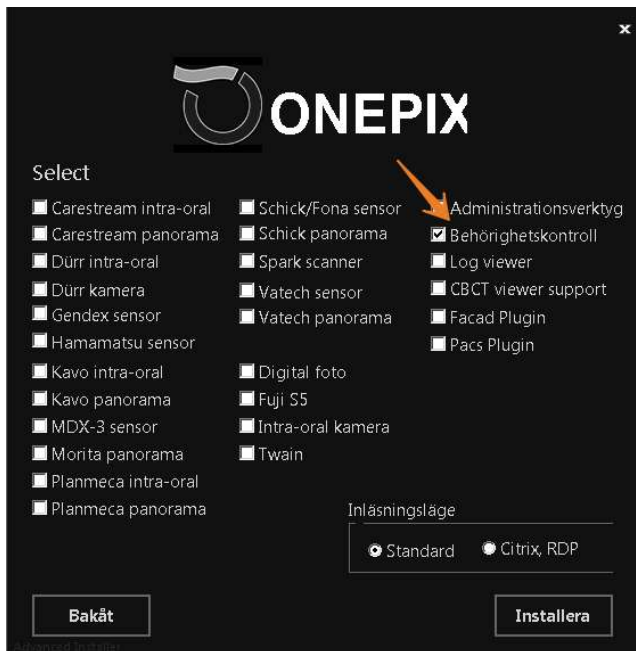


Databasen opdateres med tabellerne dbo.SecurityRole og dbo.SIDToSecurityRole, disse tabeller skal tildeles følgende rettigheder for alle brugere, der opretter forbindelse til databasen: SELECT

Administratoren skal tildeles følgende rettigheder: ALTER, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE


For at tilføje brugere skal du klikke på knappen Tilføj brugere / gruppe. Søg efter en bruger eller gruppe i domænet. Vælg posten i søgeresultaterne, vælg et adgangsniveau, og klik på knappen Tilføj.

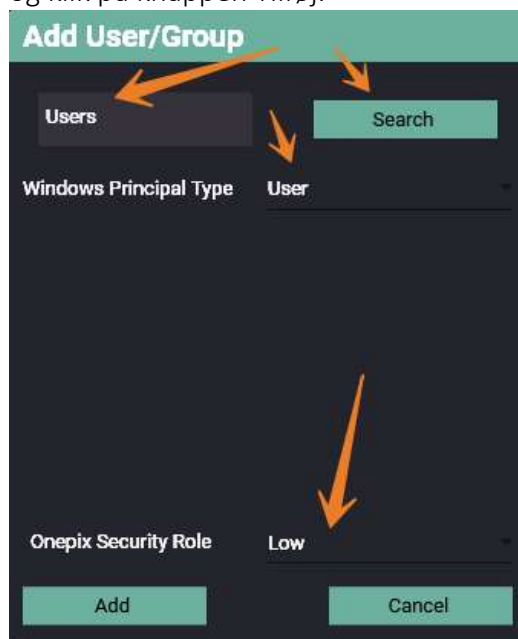

Lave, mellemstore og høje adgangsniveauer kan redigeres ved at højreklikke på hvert niveau og vælge Skift.

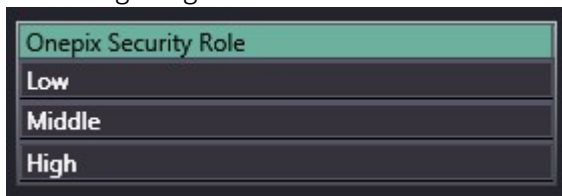


Her er eksempler på lave adgangsniveauer.

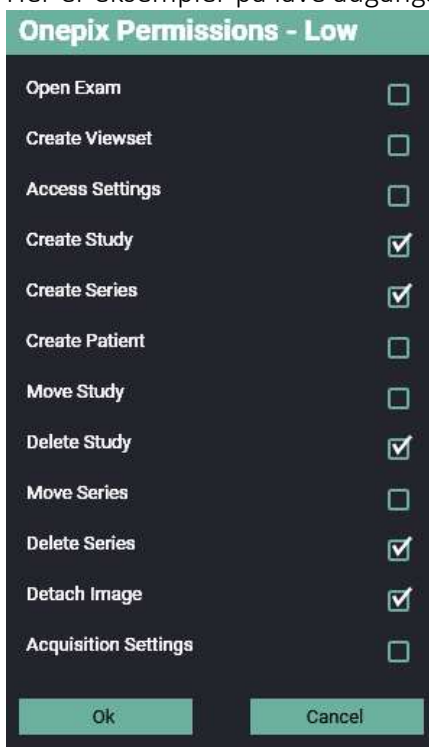

For at ændre / slette bruger- / gruppelisten skal du højreklikke på brugeren / gruppen og vælge Edit eller Delete.

Name	Onepix Security Role	Windows Principal Type	
utv10x64\OnepixAdmin	High	User	
utv10x64\OnepixMedium	Low	User	Edit
utv10x64\OnepixUser	Low	User	Delete

For at ændre skal du vælge et adgangsniveau på listen og klikke på OK

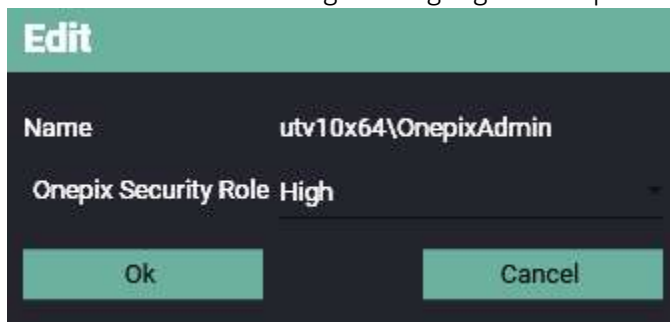


The image shows a dark-themed 'Edit' dialog box. At the top, the title 'Edit' is displayed in white on a teal background. Below the title, there are two fields: 'Name' with the value 'utv10x64\OnepixAdmin' and 'Onepix Security Role' with the value 'High'. The 'Onepix Security Role' field has a dropdown arrow on its right side. At the bottom of the dialog, there are two teal buttons: 'Ok' on the left and 'Cancel' on the right.

Edit	
Name	utv10x64\OnepixAdmin
Onepix Security Role	High
Ok	Cancel

INSTALLATION RSS KLIENT 5.4.1

LÆR ONEPIX RSS AT KENDE

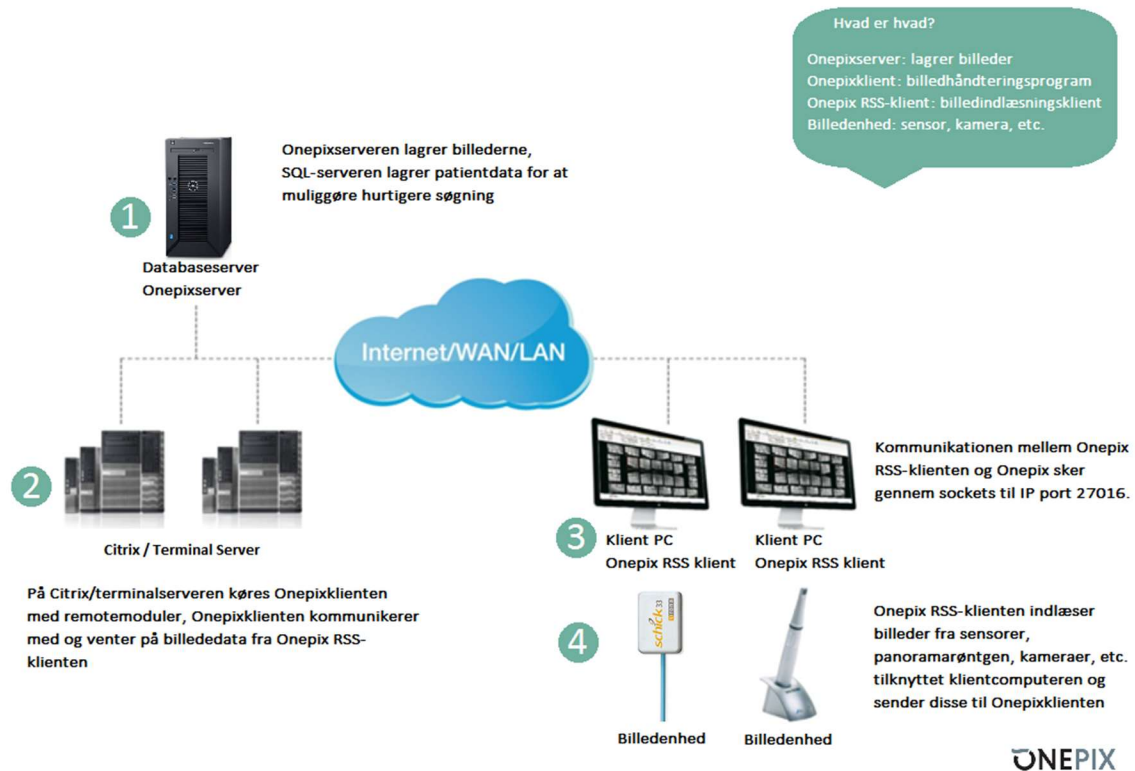


Onepix RSS-klienten kommunikerer med Onepix på port 27016 (TCP). Dette betyder, at denne port skal være åben mellem Onepixklienten og Onepix RSS-klienten for at systemet fungerer.

Selv om klientcomputeren ikke har Onepix RSS-klienten installeret, skal denne port være åben, hvis Onepix skal bruges til billedvisning fra klientcomputeren. Skulle porten ikke være åben, tager Onepix ca. 30 sekunder pr. modul for at starte. Det kan tage lang tid afhængigt af, hvor mange moduler der er installeret.

INSTALLATION

Denne installation forudsætter, at Onepix 2.1 eller nyere er installeret på Citrix-/terminalserveren. Læs mere om dette under installationsafsnittet i Onepix brugermanualen. Det forudsættes også, at Onepix-klienten har været startet mindst én gang for at teste funktionaliteten og at billedlagring samt forbindelsen til database virker.

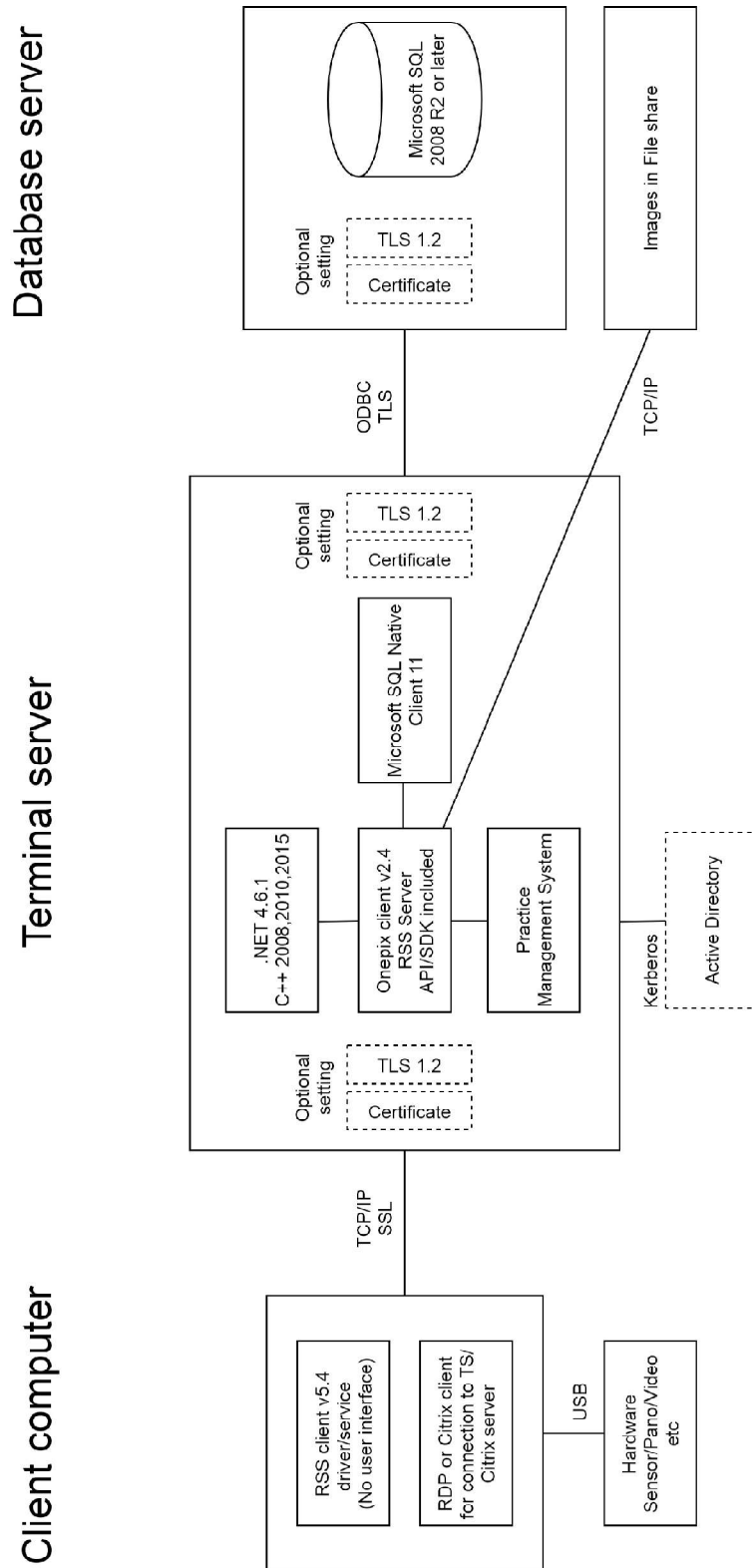

INSTALLATIONSKRAV ONEPIX RSS CLIENT

- Windows 7 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit
- RSS Klient kræver .NET Framework 4.6.1 for at fungere.

INSTALLATION AF ONEPIXKLIENTEN PÅ CITRIX-/TERMINALSERVER

Understøttelse af Citrix-/terminalserver fjernindlæsning installeres nu fra installationspakken til Onepixklienten. Kør installationspakken til Onepix 2.1 eller senere.




Vælg "Citrix, Terminal Server" og marker de indlæsningsmoduler, der skal bruges, og klik på Installer. Start Onepixklienten én gang for at opsætte databaseforbindelsen og aktivere licenskoden.

BEMÆRK: For at bruge Onepix i Citrix-/terminalservermiljøet kræves en Remote-licens. Læs mere om dette under installationsafsnittet i Onepix brugermanualen.

INSTALLATION AF ONEPIX RSS-KLIENTEN PÅ KLIENTCOMPUTER/TYND KLIENT


Kør *OnepixRSSClient5.4.1_x86.msi* eller *OnepixRSSClient5.4.1_x64.msi*

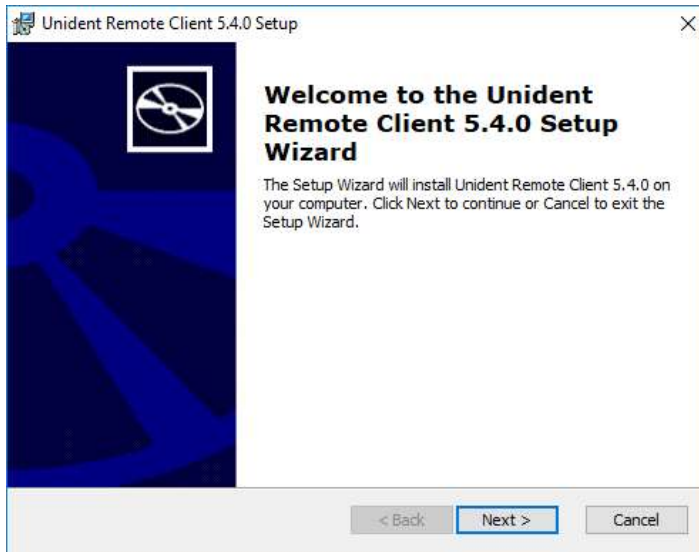


Tryk **Next** for at fortsætte installationen.




Tryk **I accept...** og tryk da på **Next**.

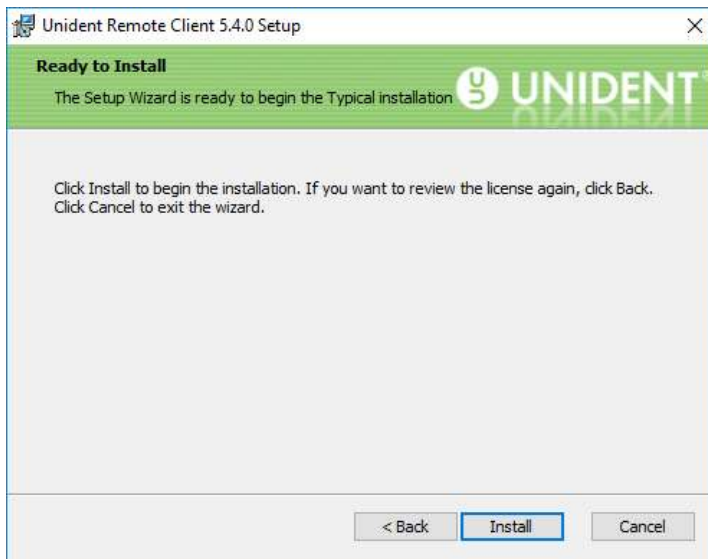

Tryk på **Install** for at starte installationen.

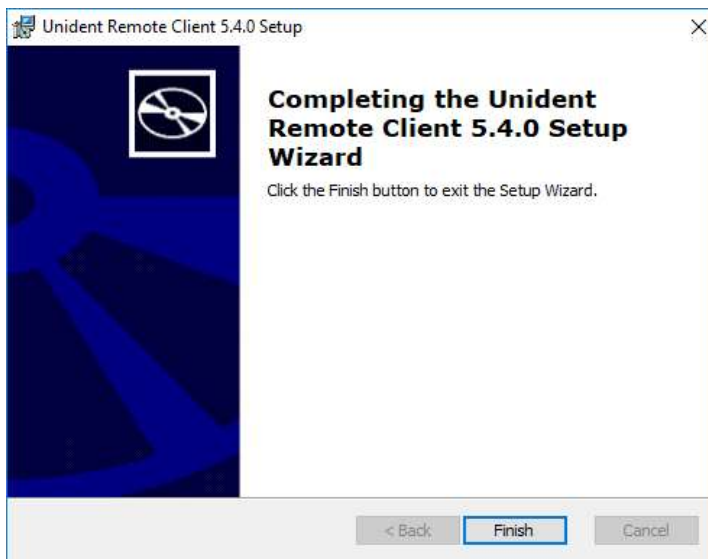

Tryk på **Finish**.

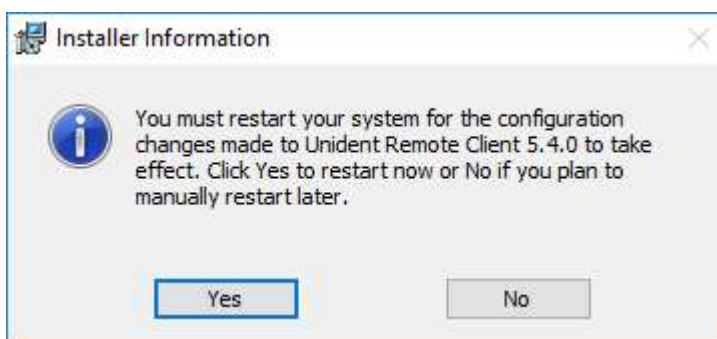

Onepix RSS-klienten kræver en genstart af computeren efter installationen. Dette skyldes at Onepix RSS-klientprocessen skal startes, og dette gøres ved opstart af Windows. Tryk på **Yes** for at genstarte computeren.

INSTALLATION AF DRIVERPAKKER

Onepix RSS Client 5.4.0-pakken indeholder følgende præinstallerede drivere for at fastholde bagudkompatibilitet. De drivere der har (x86) i til sidst, fungerer udelukkende på 32-bit OS og findes udelukkende i OnepixRSSClientx86.msi pakken..

- Schick CDR 2000 USB Remote (x86)
- Schick CDR 2000 USB Remote HS
- Schick CDR Wireless (x86)
- Schick CDR Elite
- Schick 33
- Schick USBCam (x86)
- Schick USBCam2 x(x86)
- Schick USBCam4
- Schick Pan-X (x86)
- Schick iPan (x86)

Al øvrig hardware kræver separat installation af drivere og kan findes på www.onepix.se/drivrutiner

KONFIGURATION

KONFIGURERING AF INDLÆSNINGSMODULER I ONEPIX RSS

For at konfigurere de forskellige indlæsningsmoduler, der bruges af klienten i Onepix RSS, bruges XML-filer. Disse filer styres centralt fra serveren. XML-filerne der er installeret er placeret i mappen C:\ProgramData\Schick Technologies\CDR\ModuleConfigs, men kan flyttes til et hvilket som helst sted.

Hvis du flytter disse filer og mapper til et andet sted, skal du ændre stien i Citrix-/terminalserverens registreringsdatabase, i nøglen **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unident AB\RSS\ConfigPath**.

I [ConfigPath] findes de filer der bestemmer standardkonfigurationen for alle tilsluttede klienter. Filerne der findes her er: **Importplugin.xml**, **Pano.xml**, **PanoVatech.xml**, **Photo.xml**, **SynergyUSB.xml**, **TwainPlugin**, **Video.xml**, **Xray.xml**.

Efter installationen findes der også en fil der hedder wireless.xml.example. Dette er en eksempelfil, der viser, hvordan filen for registrering af trådløse sensorer skal se ud. Denne skal placeres i den respektive klients mappe under [Configpath], omdøbt wireless.xml i de tilfælde hvor der anvendes trådløse Schicksensorer.

TILPASSET KLIENTKONFIGURATION

Når en klient skal have en konfiguration, der er forskellig fra standardkonfigurationen, skal du oprette en mappe under "ConfigPath" og omdøbe den til navnet på klientcomputeren. Derefter kopieres de XML-filer, som klienten har brug for (afhænger af hvilke funktioner klienten bruger) og der foretages de nødvendige ændringer af filerne.

For at indstille klienter der kører Onepix RSS til at indlæse indstillingerne fra serveren, skal der være en tom fil med navnet "loadmodules" i klientens mappe.

CENTRALT LAGREDE KALIBRERINGSFILER FOR SENSORER

Onepix RSS har en funktion, der går ud og henter kalibreringsfilen klienten har brug for fra en central placering og placerer den på din computer. Dette gøres for at fremskynde den billeddannende proces.

Stien til kalibreringsfiler placeres i registreringsdatabasen på terminalserveren i nøglen: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Uniden AB\RSS\CalibPath**

Dette gælder ikke CDR Elite, Schick33 og Fona sensorer, der har en kalibreringsfil indbygget i sensoren og automatisk kalibreres.

INSTILLINGER I XML-FILER

- **Importplugin.xml**
Her er indstillingerne til Kortimport, funktionen til at læse billeder ind i Onepix fra hukommelseskort eller anden placering.
- **Onepixphoto.xml**
Nye fotomoduler, der understøtter systemkameraer med WIA. Her er indstillinger for de nye fotomoduler.
- **Pano.xml**

Her er indstillingerne til panoramarøntgen fra Schick Technologies.

- **PanoVatech.xml**

Her er indstillingerne til panorarøntgen fra Vatech. De modeller man kan vælge imellem findes som kommentarer i XML filen.

- **Photo.xml**

Her er indstillingerne til direkte optagelse af billeder ind i Onepix med ekstraoralt kamera.

- **Video.xml**

Denne fil sørger for understøttelse af intraorale kameraer fra Schick Technologies. De kameraer som er kompatible er USBCam1, USBCam2 og USBCam4. Ingen indstillinger skal ændres i denne fil.

- **Xray.xml**

Her er generelle indstillinger til sensorer fra Schick Technologies. De sensorer som er kompatible er: CDR 2000, CDR Wireless, CDR Elite, Schick 33.

- **SynergyUSB.xml**

Her indstilles opløsningen af Schick 33 sensorer.

INDHOLD I IMPORTPLUGIN.XML

Dette indstiller komprimeringen, der kan vælges, når kortimport bruges. Brugeren kan ændre dette manuelt, men hver gang kortimporten startes står den på den her indstillede standardindstilling.

Standard XML fil

<!--

Compression levels:

0 = "Uncompressed"

1 = "High (2:1)"

2 = "Medium (5:1)"

3 = "Low (20:1)"

DefaultSize:

0 = "Small (1MP)"

1 = "Normal (2MP)"

2 = "Large (4MP)"

3 = "Very Large (6MP)"

-->

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<settings>

```

    <key name="DefaultCompression" type="DWORD">3</key>
    <key name="DefaultSize" type="DWORD">1</key>
</settings>

```

INDHOLD I ONEPIXPHOTO.XML

Her kan du angive den størrelse, der skal anvendes på billeder, der er indlæst via digitalkamera modulet.

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
<!--
ImageSize:
    0          "Liten (1MP)"
    1          "Normal (2MP)"
    2          "Stor (4MP)"
    3          "Mycket Stor (6MP)"

-->
<key name="imageSize" type="string">0</key>
</settings>

```

INDHOLD I PANO.XML

De mest almindelige ændringer, der foretages her, er at indstille 12 bit læsningstilstand til 1 eller 0. Dette gøres ved at indstille "ACQUIRE_12BITS" til 1 (12 bit) eller 0 (8 bit). Husk at stien til kalibreringsfiler ikke bør være central, fordi panoramakalibreringsfilen ikke altid er unik, og kan kræve kalibrering på klienten. DEVICE angiver, hvilken enhed der bruges. Skriv "CDR-320", hvis du vil bruge CDRPan-sensoren, der bruger PCI-kort. Skriv "iPAN.SYS", hvis du vil bruge iPAN-sensoren, der har en USB-grænseflade. Hvis du vil bruge PanElite Panorama / Cephalostat, skal du skrive "PanElite.SYS".

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
    <key name="Acquire_12Bits" type="boolean">0</key>
    <key name="Auto_ACCEPT" type="boolean">1</key>
    <key name="Auto_Count" type="numerical">40</key>
    <key name="Auto_Thresh" type="numerical">15</key>
    <key name="Blanks" type="numerical">3</key>
    <key name="Calibrate" type="boolean">1</key>
    <key name="Clip_Saturated" type="boolean">1</key>
    <key name="Dark_Sub" type="boolean">1</key>

```

```

<key name="Dark_Thresh" type="numerical">99</key>
<key name="Device" type="string">iPAN.SYS</key>
<key name="DeviceDll" type="string">PanoAcq.dll</key>
<key name="direction" type="numerical">0</key>
<key name="Eq_Thresh" type="numerical">9950</key>
<key name="Equalize" type="boolean">0</key>
<key name="Extra_Bad_Rows" type="boolean">0</key>
<key name="Initial_Timeout" type="numerical">60</key>
<key name="Lx" type="numerical">3200</key>
<key name="Ly" type="numerical">1603</key>
<key name="MapAutoThresh" type="boolean">0</key>
<key name="Mapping" type="numerical">1</key>
<key name="Nonlinear" type="boolean">1</key>
<key name="Spot_Remover" type="boolean">0</key>
<key name="Stop_Timeout" type="numerical">7</key>
<key name="System_Path" type="string">C:\\Program\\Schick
Technologies\\Shared Files\\</key>
<key name="Thresh" type="numerical">99</key>
</settings>

```

INDHOLD I PANOVATECH.XML

Følgende modeller fra Vatech er kompatible: *Pax-PnP*, *Pax-Primo*, *Pax-500VS* • *Pax-Uni3D*, *Picasso Trio*, *Pax-Reve3D*, *Pax-Duo3D*, *Pax-Flex3D* samt *VCaptureSW*-kompatible modeller. Under nøglen "DeviceType" defineres hvilken model som anvendes.

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
<!--
    devicetypes:
    5=PnP
    16=PAXUni3D_NP
    17=PAXUni3D_NC
    18=PAXUni3D_SP
    19=PAXUni3D_SC,
    22=Picasso Trio
    23=Picasso Pro
    24=Picasso Master
    25=PAXReve3D
    26=PAXPrimo
    30=VCaptureSW (Pax-i, Pax-i3D, Pax-i-3D Green, Pax-Insight, Pax-Flex3D)
-->

```

```

    <key name="DeviceType" type="DWORD">5</key>
    <key name="Debug" type="DWORD">0</key>
</settings>

```

INDHOLD I PHOTO.XML

Campath angiver en sti til mappen, hvor digitalkamera direkte kan optage billeder. CamType 0 = Fuji FinePix S2 / S3, CamType 1 = Nikon D90, D200, D300, D300S, D5100, D610, D700, D7000, D7100, D7200, D7500 eller Fuji FinePix S5. Cam Type 2 = Direkte digitalkamera. D1 indstillet til 1 sletter billederne i Direct Digital Camera-mappen.

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
    <key name="CamPath" type="SZ"> </key>
    <key name="CamType" type="DWORD">1</key>
    <key name="d0" type="DWORD">1</key>
    <key name="d1" type="DWORD">0</key>
    <key name="d2" type="DWORD">0</key>
<!--
ImageSize:
    0      "Liten (1MP)"
    1      "Normal (2MP)"
    2      "Stor (4MP)"
    3      "Mycket Stor (6MP)"
-->
    <key name="ImageSize" type="DWORD">0</key>
</settings>

```

INDHOLD I VIDEO.XML

Hvis en ældre version af Schick intraoral kamera anvendes, så kan dette konfigureres her. For Schick USBCamX behøves ingen ændringer.

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
    <key name="AutoWhite" type="numerical">1</key>
    <key name="CamPort" type="numerical">320</key>
    <key name="LightSource" type="numerical">1</key>
    <key name="Mode" type="numerical">0</key>
    <key name="UseCamera" type="numerical">0</key>
</settings>

```

INDHOLD I XRAY.XML

DEVICE angiver vilken sensor som anvendes.

USBCDR.SYS = CDR2000 USB Remote (sort)

CDRUSB2.DLL = CDR USB Remote HS (hvid)

SynergyUSB.DLL = CDR Elite, Schick 33

USBCDRW.SYS = Wireless 2

USBCDRSDX.SYS = Wireless SDX.

DEVICEDLL skal være **ACQ32.DLL** for alle sensorer bortset fra CDR Elite og Schick 33 hvor det skal være **SynergyACQ.dll**. For at konfigurere filter (**KUN TIL CDR ELITE**) skal **apply_postprocess** være sat til **1**. Filter indstilles derefter med **POST_PROCESS_LEVEL**:

1 = smooth

2 = edge low

3 = edge high

0 = none

För at anvende 12-bit gråskala på røntgenbillederne skal **ACQUIRE_12BITS** være sat til **1**. Her findes også mulighed for at deaktivere CDR Wireless Base Station til **CDR Wireless** når Onepix starter. **Base_Disabled** skal da sættes til værdien **1**.

SYSTEM_PATH er stien til sensorkalibreringsfilen lokalt. Dette afhænger af operativsystem:

- Windows XP – *C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Schick Technologies\CDR\Sensors*
- Windows Vista/7/8/10 – *C:\ProgramData\Schick Technologies\CDR\Sensors*

Standard XML fil

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
```

```
<settings>
```

```
  <key name="ACQUIRE_12BITS" type="numerical">1</key>
```

```
  <key name="AUTO_ACCEPT" type="numerical">1</key>
```

```
  <key name="AUTO_COUNT" type="numerical">40</key>
```

```
  <key name="AUTO_THRESH" type="numerical">15</key>
```

```
  <key name="CALIBRATE" type="numerical">1</key>
```

```
  <key name="DARK_SUB" type="numerical">1</key>
```

```
  <key name="DEVICE" type="string">SynergyUSB.DLL</key>
```

```
  <key name="DEVICEDLL" type="string">SynergyACQ.DLL</key>
```

```
  <key name="USB_AUTODETECT" type="boolean">0</key>
```

```
  <key name="apply_postprocess" type="boolean">0</key>
```

```
  <key name="POST_PROCESS_LEVEL" type="numerical">0</key>
```

```

<key name="DynamicRangeMsg" type="numerical">0</key>
<key name="EQ_MIN_COUNT" type="numerical">9999</key>
<key name="EQ_THRESH" type="numerical">9950</key>
<key name="EQ_THRESH0" type="numerical">0</key>
<key name="EQUALIZE" type="numerical">0</key>
<key name="EXP_TIME" type="numerical">15</key>
<key name="FOOTPEDAL" type="numerical">0</key>
<key name="FOOTPEDAL_ACTIVE" type="numerical">0</key>
<key name="FOOTPEDAL_COM" type="numerical">1</key>
<key name="GENERATE_PATID" type="numerical">0</key>
<key name="INTEGRATE_TIME" type="numerical">7</key>
<key name="MapAutoThresh" type="numerical">0</key>
<key name="Mapping" type="numerical">1</key>
<key name="NON_LINEAR" type="numerical">1</key>
<key name="PHOENIX_INTEGRATE_TIME" type="numerical">7</key>
<key name="PORT" type="numerical">768</key>
<key name="RAMPUP" type="numerical">8</key>
<key name="RAMPUP_IMG" type="numerical">6</key>
<key name="RESET_DURATION" type="numerical">410</key>
<key name="SERIES_FLIP" type="numerical">0</key>
<key name="SPOT_REMOVER" type="numerical">0</key>
<key name="SYSTEM_PATH" type="string">C:\\Documents and Settings\\All
Users\\Application Data\\Schick Technologies\\CDR\\Sensors\\</key>
<key name="BASE_DISABLED" type="numerical">0</key>
</settings>

```

INDHOLD I SYNERGYUSB.XML

Her indstilles opløsningen ved indlæsning fra **Schick 33** sensorer.

MAXIMUS_BINNED_MODE sat til værdien 1 giver høj opløsning. Værdi 2 giver standardopløsning.

Standard XML fil

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
  <key name="MAXIMUS_BINNED_MODE" type="numerical">1</key>
</settings>

```

FUNKTIONSKONTROL

Det følgende afsnit beskriver, hvordan man udfører en funktionskontrol af alle moduler efter installation og konfiguration af Onepix med Onepix RSS.

TEST AF KORTIMPORT

Til dette skal hukommelseskort med billeder og en hukommelseskortlæser være tilsluttet en computer med RSS-klienten installeret.

1. Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren eller tilslut et kamera med et USB-kabel og tænd for kameraet.
2. Åbn en testpatient i Onepix.
3. Opret et nyt kort ved at klikke på NY SERIE eller NY UNDERSØGELSE. Vælg derefter et kort, f.eks. KAMERAKORT.
4. Klik på knappen "Import" til højre for serien. Billederne på hukommelseskortet vises nu i ruden Preview.
5. Hvis du ikke har nogle billeder på kortet, kan du vælge "Gennemse" for at finde billederne på din computer.
6. Når billederne vises i preview trykkes der "Importer" for at begynde at importere billederne til Onepix. Billederne vises nu i Onepix efter et stykke tid.

TEST AF BILLEDINDLÆSNING

Billedoverførsel er den samme, uanset hvilken hardware du vælger, her er et eksempel på, hvordan billedscanning kan gøres med røntgensensor, foto eller intraoral kamera. For mere information om billedlæsning/billedbehandling, se Onepix brugervejledning.

Røntgensensor

Til dette skal du have adgang til et røntgenapparat, en sensor forbundet til en kontrolboks og en computer med RSS-klienten installeret.

1. Åbn en testpatient i Onepix ved at trykke på "Find patient" og søg efter patienten.
2. Opret et nyt kort ved at klikke på NY UNDERSØGELSE eller NY SERIE. Vælg derefter et røntgendiagram, f.eks. BITEWING UNDERSØGELE.
3. Gør sensoren klar til at tage billeder ved at klikke på + START symbolet i en tom kasse eller ved at trykke på Ctrl + T. Den markerede boks på skærmen skal blive grøn.
4. Nu skal sensoren eksponeres med røntgen. Placer et objekt mellem sensorens aktive sensorflade og tubus.
5. Efter et kort øjeblik vises billedet i Onepix.

Digital kamera / Intraoral kamera

Til dette skal du adgang til et kamera eller et intraoral kamera, som er inkluderet på listen over understøttede enheder, og en computer med RSS-klient installeret.

1. Åbn en test patient i Onepix ved at trykke på "Find patient" og søg efter patienten.
2. Opret et nyt kort ved at klikke på NY UNDERSØGELSE eller NY SERIE. Vælg derefter et kamerakort.
3. Gør kameraet klar til optagelse ved at klikke på + START-symbolet i en tom kasse. Den markerede boks på skærmen skal nu blive grøn. (Hvis der er en intraoralkamera åbner derefter et preview-vindue.)
4. Tag et billede med kameraet. (Med intraoral kamera, frys et billede og klik på knappen Tag billede)
5. Efter et kort øjeblik vises billedet i Onepix.

FEJLSØGNING PÅ KLIENT OG SERVER

Fejl, der opstår på serveren er logget i % appdata%\Uniden AB\Onepix\Logs\og fejl i RSS-klienten i % appdata%\Unident AB\RSS\

Hvis klienten ikke har kontakt kontrolleres først, at processen "RssClient.exe" kører på klienten. Processerne vises i task manager. Hvis processen ikke kører, skal du starte RSS ved at køre "RSSClient.exe fra følgende placering: C:\Program Files\Unident AB\RssClient\

RSSClient processen starter, når Windows starter ved at blive placeret i mappen Startup i menuen Start. Processen kræver Microsoft .NET 4.6.1 installeret for at starte.

Fungerer det stadig ikke, skal du kontrollere, at RSS er installeret, og at der er installeret den rigtige version. Sørg for, at du har fulgt instruktionerne i dette dokument til konfiguration af RSS.